

2026 정보통신보조기기 보급 활성화 사업

정보통신보조기기가
여러분의 풍요롭고 스마트한 생활을 지원합니다.



2026 정보통신보조기기 목록

○ 시각 61개, 지체/뇌병변 19개, 청각/언어 48개

(단위: 원)

유형	품목	제품명	납품업체	심층접수	제품가격	개인부담금(원)		내구연한(년)
						기초수급 차상위	일반	
시각	OCR 장치	강한손 보이고	주식회사 엠비아이	○	4,050,000	252,500	810,000	6
		노바캠리더	(주)셀바스헬스케어	○	3,600,000	230,000	720,000	6
		설리번 아이	(주)투아트	○	1,650,000	132,500	330,000	3
		설리번 플러스 프로	(주)투아트		330,000	33,000	66,000	3
		소리안썬더3(Sorian Thunder3)	(주)어니스트비전	○	4,200,000	260,000	840,000	6
		올캠 리드	(주)셀바스헬스케어	○	2,200,000	160,000	440,000	3
		올캠 마이리더 SE	(주)셀바스헬스케어	○	3,900,000	245,000	780,000	3
		소리안맥스	(주)어니스트비전	○	5,300,000	315,000	1,060,000	6
		올캠-마이아이 안경형리더	(재)파라다이스복지재단	○	4,600,000	280,000	920,000	3
	데이지플레이어	책마루3	(주)셀바스헬스케어		990,000	99,000	198,000	4
	신호장치	강한손 티티	주식회사 엠비아이		580,000	58,000	116,000	3
	영상확대 시스템	아이케인 2026	(재)파라다이스복지재단	○	5,550,000	327,500	1,110,000	3
		강한손 이지스 울트라	주식회사 엠비아이	○	4,410,000	270,500	882,000	5
		고비전 무브	(주)셀바스헬스케어	○	3,325,000	216,250	665,000	5
		다빈치 Pro	바투비전	○	4,940,000	297,000	988,000	5
		루비5 XL HD	(주)헨디인터내셔널		1,300,000	130,000	260,000	3
		리보탭 울트라	리보(주)	○	3,700,000	235,000	740,000	3
		매그니링크	(주)셀바스헬스케어	○	4,400,000	270,000	880,000	5
		머린 엘리트 Pro	바투비전	○	5,750,000	337,500	1,150,000	5
미러패드프로		(주)헨디인터내셔널	○	3,500,000	225,000	700,000	5	
미러패드플러스		(주)헨디인터내셔널	○	2,800,000	190,000	560,000	5	
베오(Veo)	(주)어니스트비전	○	4,600,000	280,000	920,000	5		
소리안탭3	(주)어니스트비전	○	4,125,000	256,250	825,000	3		
아미고 HD	바투비전	○	2,300,000	165,000	460,000	3		
아이러뷰 13 스마트 AI 에디션	(주)씨애플	○	3,800,000	240,000	760,000	3		
아이러뷰 16 프리미엄 스마트 AI 에디션	(주)씨애플	○	4,100,000	255,000	820,000	3		
아이러뷰 MAX 프리미엄 스마트 AI 에디션	(주)씨애플	○	4,300,000	265,000	860,000	3		

(단위: 원)

유형	품목	제품명	납품업체	심층 상담	제품가격	개인부담금(원)		내구 연한 (년)
						기초수급 차상위	일반	
영상확대 시스템		올캠 탭	(주)셀바스헬스케어	O	3,560,000	228,000	712,000	5
		캔디6	(주)셀바스헬스케어		990,000	99,000	198,000	3
		컴팩10HD	(주)헨디인터내셔널	O	2,000,000	150,000	400,000	3
		컴팩7 HD	(주)헨디인터내셔널	O	1,650,000	132,500	330,000	3
		클로버 노트	(주)헨디인터내셔널	O	2,100,000	155,000	420,000	3
		클로버 북프로	(주)헨디인터내셔널	O	3,300,000	215,000	660,000	3
		클로버10 HD	(주)헨디인터내셔널	O	1,750,000	137,500	350,000	3
		클로버6 HD	(주)헨디인터내셔널		1,300,000	130,000	260,000	3
		클리어뷰 C 24 HD	(주)헨디인터내셔널	O	3,700,000	235,000	740,000	5
		페블 HD	바투비전		850,000	85,000	170,000	3
		포터비전 (PortaVision)	주식회사 넥스트지		850,000	85,000	170,000	3
		플로위북	(주)오버플로우	O	4,500,000	275,000	900,000	3
		플로위웍스 광학줌	(주)오버플로우	O	4,085,000	254,250	817,000	5
시각	점자교육보조기기	디지털 점자학습기(M25-01)	모아드림주식회사	O	1,500,000	125,000	300,000	4
	점자정보단말기	뉴포트브레일	(주)어니스트비전	O	5,500,000	325,000	1,100,000	4
	점자정보 단말기	한소네6 미니	(주)셀바스헬스케어	O	5,000,000	300,000	1,000,000	4
		한소네7 32셀	(주)셀바스헬스케어	O	6,000,000	350,000	1,200,000	4
		한소네7 40셀	(주)셀바스헬스케어	O	6,700,000	385,000	1,340,000	4
	점자출력기	매직브레일(Magic Braille)	주식회사 블루위커	O	4,500,000	275,000	900,000	4
		식스닷(점자라벨메이커)	(주)오버플로우	O	1,850,000	142,500	370,000	4
	촉각디스플레이	닷패드	(재)파라다이스복지재단	O	8,750,000	487,500	1,750,000	4
		브레일 이모션	(주)셀바스헬스케어	O	4,000,000	250,000	800,000	4
	터치모니터	27인치 화면 확대 터치 모니터	(재)파라다이스복지재단		830,000	83,000	166,000	5
		강한손 확대 터치모니터 32인치	주식회사 엠비아이		880,000	88,000	176,000	5
	특수키보드	리보3S	리보(주)		980,000	98,000	196,000	4
		리보미니	리보(주)		900,000	90,000	180,000	4
화면낭독 S/W	센스리더 베이직	(주)엑스비전테크놀로지		350,000	35,000	70,000	3	
	센스리더 어센드	(주)엑스비전테크놀로지		985,000	98,500	197,000	3	
	센스원	(주)엑스비전테크놀로지	O	3,500,000	225,000	700,000	3	

유형	품목	제품명	납품업체	심층 상담	제품가격	개인부담금(원)		내구 연한 (년)
						기초수급 차상위	일반	
시각	화면확대 S/W	숲나무 (Sync View-Tree in the forest)	주식회사 넥스트지	O	2,300,000	165,000	460,000	3
		플로워리더 광학줌	(주)오버플로우	O	1,750,000	137,500	350,000	3
	확대용 돋보기	VES	(주)헨디인터내셔널	O	2,000,000	150,000	400,000	3
	기타	AI 아토 뷰어 (AIATOViever)	주식회사 넥스트지	O	3,410,000	220,500	682,000	4
		온기소리 2026	(재)파라다이스복지재단		700,000	70,000	140,000	4
지체/ 뇌병변	터치모니터	27인치 멀티터치모니터	(재)파라다이스복지재단		830,000	83,000	166,000	5
		27인치 정전식 터치모니터	(주)엘피케이에스		810,000	81,000	162,000	5
		32인치 IR 터치모니터	(주)엘피케이에스		840,000	84,000	168,000	5
		애니터치드로잉27 (ANYTouch2026-27)	주식회사 애니케이알		880,000	88,000	176,000	5
	특수마우스	EA-2 특수마우스	케어라이프코리아(주)		900,000	90,000	180,000	4
		립스틱 마우스	케어라이프코리아(주)	O	2,500,000	175,000	500,000	4
		안경마우스2-스위치 5종 택1 (바이트,손가락,발,압력,필로우)	(재)파라다이스복지재단		900,000	90,000	180,000	4
		안경마우스2-터치, 센서 스위치 택1	(재)파라다이스복지재단		950,000	95,000	190,000	4
		안경마우스2-호흡스위치	(재)파라다이스복지재단		1,050,000	105,000	210,000	4
		안구마우스 (PCEye 5)	월비	O	5,500,000	325,000	1,100,000	4
		안구마우스거치대세트 (PCEye 5 mounting set)	월비	O	7,130,000	406,500	1,426,000	4
		엔에이블러조이스틱	케어라이프코리아(주)		570,000	57,000	114,000	4
		엔에이블러트랙볼	케어라이프코리아(주)		520,000	52,000	104,000	4
		친 플러스 마우스	케어라이프코리아(주)		1,400,000	140,000	280,000	4
		퀘스터 조이스틱	케어라이프코리아(주)		680,000	68,000	136,000	4
		큐하조노X 마우스	케어라이프코리아(주)	O	3,400,000	220,000	680,000	4
	특수키보드	티피키보드	케어라이프코리아(주)	O	2,600,000	180,000	520,000	5
	기타	IOT 아코이 호출기	케어라이프코리아(주)		1,270,000	127,000	254,000	4
		온기드림 2026	(재)파라다이스복지재단		700,000	70,000	140,000	3
	청각/ 언어	다가능 의사소통 시스템	스마트비즈폰 올인원	주식회사샘물정보통신		950,000	95,000	190,000
씨토키이음070 스마트영상폰 콤보			(주)씨토키커뮤니케이션즈		1,200,000	120,000	240,000	6
대화용 장치		드림폰3(DP-03-PL-R1)	(주)씨와이디정보기술	O	1,650,000	132,500	330,000	4

(단위: 원)

유형	품목	제품명	납품업체	심층 상담	제품가격	개인부담금(원)		내구 연한 (년)
						기초수급 차상위	일반	
청각/ 언어	대화용 장치	마이토키GEO	(주)리드스피커코리아		1,480,000	148,000	296,000	3
		마이토키NOTE	(주)리드스피커코리아	O	3,120,000	206,000	624,000	3
		마이토키스마트	(주)리드스피커코리아		800,000	80,000	160,000	3
		마이토키스마트PRO	(주)리드스피커코리아		1,400,000	140,000	280,000	3
		보이스텝	(주)샤크로		770,000	77,000	154,000	3
		보이스텝 PROSE	(주)샤크로		1,480,000	148,000	296,000	3
		비주톡 WE	주식회사샘물정보통신		1,450,000	145,000	290,000	3
		스마트톡킹	주식회사 다함께하는		990,000	99,000	198,000	3
		스마트톡킹펜	주식회사 다함께하는		1,490,000	149,000	298,000	3
		위드톡	(주)핑키밍키		870,000	87,000	174,000	3
		위드톡 펜	(주)핑키밍키		1,485,000	148,500	297,000	3
		키즈보이스스마트+	유비큐판매(주)		1,430,000	143,000	286,000	3
		키즈보이스윈도우	유비큐판매(주)		880,000	88,000	176,000	3
		프록스토크(Proxtalker)	월비	O	6,010,000	350,500	1,202,000	3
		마스터 인지력 한글	주식회사 세라핌		1,290,000	129,000	258,000	4
		메시지스톤 에듀 AI	주식회사 허브티	O	3,400,000	220,000	680,000	3
		보듬 인지력 한글	주식회사 세라핌		1,320,000	132,000	264,000	4
		소리어음 AI	(주)소프트젠		1,430,000	143,000	286,000	3
		소리어음 AI 라이트	(주)소프트젠		990,000	99,000	198,000	3
		한뼘상향중심AAC	(유)함께걷는발달연구소		960,000	96,000	192,000	3
	히어링스톤 AI	주식회사 허브티		1,470,000	147,000	294,000	3	
	히어링스톤 AI 대화면	주식회사 허브티		1,480,000	148,000	296,000	3	
	소리증폭기	골전도보청기(음성증폭기)	현호ICT		297,000	29,700	59,400	3
		하하3(HAHA3)	(주)건용아이비씨		550,000	55,000	110,000	3
	신호장치	네비게이션 신호기 세트	케어라이프코리아(주)		980,000	98,000	196,000	3
		데프아코이 호출기	케어라이프코리아(주)		1,270,000	127,000	254,000	3
무선호출기 비주콜		주식회사샘물정보통신		550,000	55,000	110,000	3	

유형	품목	제품명	납품업체	심층 상담	제품가격	개인부담금(원)		내구 연한 (년)
						기초수급 차상위	일반	
언어 재활/언어 재활 언어	언어훈련 S/W	여우 언어-인지 학습 패키지+(Plus)	주식회사 여우		1,496,000	149,600	299,200	4
		모모야 모모 언어훈련 PAD	(주)에듀엔젤		860,000	86,000	172,000	4
		소리자람(for Pad)	(주)샤크로		940,000	94,000	188,000	4
		소리자람(for Windows)	(주)샤크로		1,430,000	143,000	286,000	4
		스마트언어향상프로그램	주식회사 창의와놀이		990,000	99,000	198,000	4
		스마트언어향상프로그램-플러스펜	주식회사 창의와놀이		1,430,000	143,000	286,000	4
		스피치미러(SM1.01.0029)	주식회사 하이클론		980,000	98,000	196,000	3
		스피치미러탭 (SMT1.01.0029)	주식회사 하이클론	O	1,800,000	140,000	360,000	4
		애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전	주식회사 여우		990,000	99,000	198,000	4
		언어,인지,수리력 터치	(주)핑키밍키		1,400,000	140,000	280,000	4
		언어-인지 재활프로그램 랭콕-HS(Home Special)	주식회사 여우		1,320,000	132,000	264,000	4
		에이드 프로	주식회사 허브티		1,470,000	147,000	294,000	4
		에이드 프로 대화면	주식회사 허브티		1,480,000	148,000	296,000	4
		에이드 플러스 AI	주식회사 허브티	O	3,000,000	200,000	600,000	4
		한글바르미	주식회사 다함께하는		1,360,000	136,000	272,000	4
		한글챗챗	(주)리드스피커코리아		960,000	96,000	192,000	4
		한글짱탭(SMT2.01.190)	주식회사 하이클론		1,490,000	149,000	298,000	4
기타	액자형 스마트 히어링루프	(주)건웅아이비씨	O	3,000,000	200,000	600,000	4	

※ 상담에 해당하는 경우 해당 지자체에서 방문상담을 요청 및 실시할 수 있으며 이에 반드시 응해야 함

※ 개인부담금 추가 할인(50%)은 기초생활수급자 또는 차상위계층 장애인에 해당



과학기술정보통신부, 지방자치단체, 한국지능정보사회진흥원에서는 신체적·경제적으로 정보통신에 대한 접근과 활용이 어려운 장애인을 대상으로 정보화를 통한 사회 통합을 유도하고 정보격차를 해소하기 위해 정보통신 보조기기를 저렴한 가격에 보급하고 있습니다.

※ 관계법령 : 디지털포용법 제27조 및 동법 시행령 제30조 (유망 디지털포용기술·서비스의 사업화 지원 등)

1 보급 개요

✓ 보급대상(아래 내용 중 해당하는 자)

- ‘장애인복지법’ 제32조의 규정에 의하여 등록된 장애인
- ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’ 제6조의 규정에 의하여 등록된 자 중 상이등급 판정을 받은 자

✓ 지원내용

- 보조기기 제품 가격기준 정부지원 80%(나머지 20%는 개인부담)

※ 기초생활수급자 및 차상위계층 장애인은 개인부담금의 50% 추가 할인

개인부담금 산정기준

- 일반 장애인(변경) : 제품가격의 20%
- 기초수급대상자, 차상위계층 장애인(현행 유지)
 - 제품가격 150만원 이하 : 제품가격의 20% X 50%
 - 제품가격 150만원 초과 : 10만원 + ((보급제품 가격 - 100만원) × 5%)

✓ 신청·보급절차



※ 개인부담금을 납부하지 않은 경우 보급대상자 선정에서 제외

※ 보조기기 수령 후 취소를 희망하는 경우 반드시 수령일로부터 15일 이내 요청

2

신청 안내

✓ 신청·접수

- 신청기간 : 2026년 5월 7일(목) ~ 6월 23일(화) 23:59 까지

※ 우편으로 신청한 경우 접수 마감일까지 도착분에 한함

- 신청서 등 구비서류를 우편, 방문, 홈페이지(<http://www.at4u.or.kr>)를 통해 거주지(주민등록지 기준) 관할 접수처에 제출

신청시 참고사항 (상담시 안내)

- 구비서류 접수, 본인서명 날인 등의 사유로 전화 신청·접수 불가
- 홈페이지를 통해 신청한 경우, 관련 구비서류를 반드시 첨부하거나 접수처에 확인해야 하고, 구비서류 누락 시 신청서가 접수되지 않거나, 불이익이 있을 수 있음
- 팩시밀리의 경우, 전송실패로 수신되지 않는 경우가 발생할 수 있으니 가급적 우편 등 방법으로 신청하되, 불가피한 경우 서류 전송 후 해당 접수처에 수령여부를 반드시 확인

※ 접수처 사정에 따라 신청방법에 차이가 있을 수 있으므로 접수서류 및 제출방법을 해당 접수처에 문의 후 신청

• 신청서류

① 정보통신보조기기 신청서 1부

※ 정보통신보조기기 신청서, 활용계획서, 개인정보 수집·이용 동의서, 행정정보공동이용 신청(동의)서, 정보통신 보조기기 약관 등으로 구성

첨부 서류

- ① 장애인증명서 1부 또는 국가유공자확인서 1부, 주민등록등본 1부, 국민기초생활수급자 증명서 또는 차상위 장애인 확인서 각 1부

※ 행정정보공동이용 신청 시 제외

- 장애인복지카드 또는 국가유공자증(상이처 포함) 사본으로 제출 가능

- 신청서에 기재 된 주민등록상 주소와 실제 거주지 주소가 상이한 경우, 주민등록등본 제출 필요

- ② 신청서의 「사회활동」에 표시한 사항과 관련된 증빙서류

사회활동	증빙서류 예시
가. 구직자	구직활동확인서(구직자), 취업훈련확인서 또는 시각장애인 안마 수련확인서(훈련생), 국가공인자격증(보유자) 등
나. 학생	재학증명서(재학생), 졸업증명서(3년 이내 졸업생) * 어린이집, 유치원의 경우 재원증명서 제출

※ 제출된 서류는 보급대상자 선정평가 자료로 활용하며, 해당 서류를 제출하지 않을 경우 불이익을 받을 수 있음을 안내

- ③ 법정대리인동의서 1부(만 19세 미만인 경우), 위임장 1부(대리인이 신청 시)

※ 법정대리인 동의서는 주민등록등본 또는 가족관계증명서나 후견인 증명서류를 첨부

- 행정정보공동이용 신청(동의) 관련 안내

- 행정정보공동이용 신청(동의)서를 제출하는 경우, 아래에 해당하는 서류를 제출하지 않아도 됨
 - 장애인증명서, 국가유공자 확인원, 기초생활수급자 증명서

- 신청서 서식 내려받기(다운로드)

- 신청서 서식은 17개 광역시·도 홈페이지 및 접수처에서 제공

- ✓ 신청서 접수 및 문의처

- 상담전화 : 1588-2670 (정보화상담실)

- 접수처 : p. 34 ~ p. 39의 목록 참고

- 전국 광역시·도

지역	연락처	지역	연락처
서울	02-3470-1551	강원	033-249-3013
부산	051-888-2357	충북	043-220-2655
대구	053-803-3616	충남	041-635-2151
인천	032-440-2317	전북	063-280-2598
광주	062-613-2615	전남	061-286-2725
대전	042-270-3214	경북	054-880-2977
울산	052-229-2345	경남	055-211-2616
세종	044-300-2413	제주	064-710-2345
경기	031-8008-3896		

※ 청각 및 언어장애인을 위한 통신중계서비스(손말이음센터) : 전국 107

- 홈페이지 : <http://www.at4u.or.kr> (정보통신보조기기)

- ✓ 신청시 유의사항

- 신청서 및 활용계획서 작성시 “정보통신보조기기 자가진단표”를 반드시 확인 요구

- 자가진단 결과 “부적합”인 경우 보급대상이 되지 않으며, 신청서 및 활용계획서에 자가진단 결과를 기재하지 않은 경우에도 보급대상에서 제외될 수 있음 공지

- 아래의 보급제외자는 지원대상이 되지 않으므로, 신청 접수처를 통해 반드시 확인 후 신청토록 유도



정보통신보조기기 보급제외자

1. 본인의 등록 장애유형과 관계없는 장애유형의 보조기기를 신청한 자
2. 내구연한 이내에 동일품목의 보조기기를 사업지원기관 혹은 타 부처, 지자체에서 지원 받은 자
3. 정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 결과가 부적합한 자
4. 정보통신기기 등 다른 보조도구와 이용을 수반하는 보조기기의 경우 구동할 수 있는 요구사항의 정보통신기기 또는 다른 보조도구를 보유하지 않은 자

5. 현재의 장애여건을 고려하여 향후 1년 이상 지속적으로 해당 보조기기의 사용이 어려운 자
6. 보급사업에 1인 2개 이상 신청자(단, 최초 신청한 1개 제품은 인정)
7. 동일 품목의 보조기기를 중복 신청한 동일가구 내 가구원
8. 신청서의 내용을 허위로 작성하여 제출한 자
9. 타인의 명의를 도용하여 신청한 자
10. 신청에 필요한 필수 제출서류를 제출하지 않은 자
11. 심층상담 대상자가 특별한 사유없이 심층상담에 불응한 자
12. 보급대상자 중 정해진 납부기간 내 개인부담금을 납부하지 않은 자
13. 보급대상자 중 이용약관에 동의하지 않은 자
14. 점자평가 대상자의 경우 점자평가 결과가 60점 미만인 자
15. 기타 보조기기 사용을 위하여 필요한 요건이 갖추어져 있지 않은 자

• **등록된 장애유형과 다른 장애유형의 정보통신보조기기 신청 안내**

- 언어장애가 있는 뇌병변장애인은 청각·언어 장애유형의 ①대화용 장치, ②언어훈련S/W 제품 신청 가능
- 지적·자폐성 장애인은 지체·뇌병변 장애유형의 ①기타(호출기) 제품이나 청각·언어 장애유형의 ②대화용 장치, ③언어훈련S/W, ④신호장치 신청 가능
- 신청자 본인의 등록 장애유형과 관계없는 타 장애유형 보조기기 신청을 희망하는 경우에는 전문가 소견서 제출 시 신청 가능

※ 전문가는 특수학교 교사, 작업치료사, 재활의사, 관련분야 교수 및 이와 동등·유사한 전문가로 광역시·도에서 인정하는 자

• **제품사양, 구성품, 기능 및 사용법, 개인부담금 등 제품 관련사항과 장애유형과의 적합여부는 반드시 본인이 확인 후 신청해야 함**

- 제품사양, 제품사용 적격여부 등과 관련 된 자세한 사항은 해당 제품을 납품·판매하는 업체에 문의 또는 상담

• **신청서 작성이 어려운 경우에는 본인의 동의를 얻어 가족·친척, 사회복지 담당공무원, 장애인단체 관계자 등이 대신(대필)하여 작성 가능**

※ 단, '신청자란'의 서명은 반드시 본인이 직접 해야 함

• **지역별, 기기별 보급 수량은 신청수요, 보조기기 가격, 장애유형별 형평성 등을 종합적으로 고려함에 따라, 고가 정보통신 보조기기의 경우 신청자가 많아 보급이 제한될 수 있음**


- 정보통신보조기기 체험 또는 상담 안내

기관명	연락처	비고
정보통신보조기기 상담전화	1588-2670	보조기기 신청·접수 안내
정보통신보조기기 사이트 (at4u) 문의	053-230-1857	보조기기 사이트(at4u) 문의
국립재활원 (중앙보조기기센터)	1670-5529 (내선1번)	정보통신보조기기 체험관(상설)
경주장애인종합복지관 (ICT생활 체험관)	054-776-7522	정보통신보조기기 체험관(상설)

3

정보통신보조기기 지역순회 체험전시회

- ✓ 전시일자 : 2026년 5월 14일(목) ~ 6월 16일(화)
- ✓ 운영시간 : 10시 ~ 17시(각 지역 전시 마지막 날은 16시)
 - ※ 일부 지역은 사정에 의해 단축 조정 될 수 있음
- ✓ 전시지역 : 전국 6개 지역
- ✓ 내 용 : 2026년 정보통신보조기기 보급제품 전시·체험 및 상담
 - ※ 행사전시업체 사정에 따라 전시 품목은 변경될 수 있음
- ✓ 지역별 체험전시회 현황

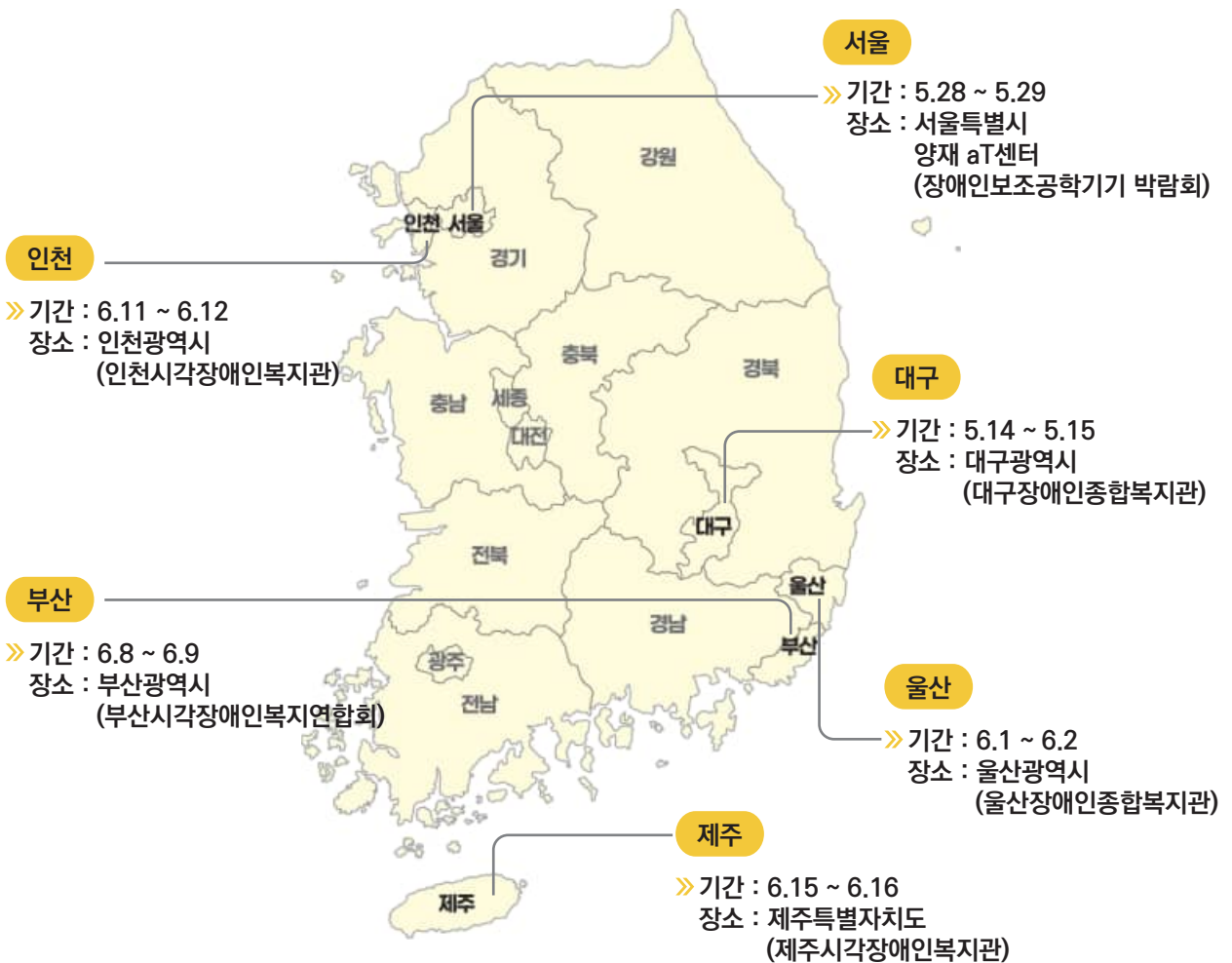


2026년 정보통신보조기기 지역순회 체험전시회 개최 일정

	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
5월						1일	2일
						노동절	
	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일
			어린이날		신청 시작		
	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일
					대구광역시 (대구장애인종합복지관)		
	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일
24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	
부처님 오신날	대체 휴일				서울특별시 (양재 aT센터(장애인보조공학기기 박람회))		
6월	31일	1일	2일	3일	4일	5일	6일
		울산광역시 (울산장애인종합복지관)		2026 지방선거			현충일
	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일
		부산광역시 (부산시각장애인복지연합회)			인천광역시 (인천시시각장애인복지관)		
	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
		제주특별자치도 (제주시각장애인복지관)					
	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일
		신청 마감					

4

선정방법 및 기준

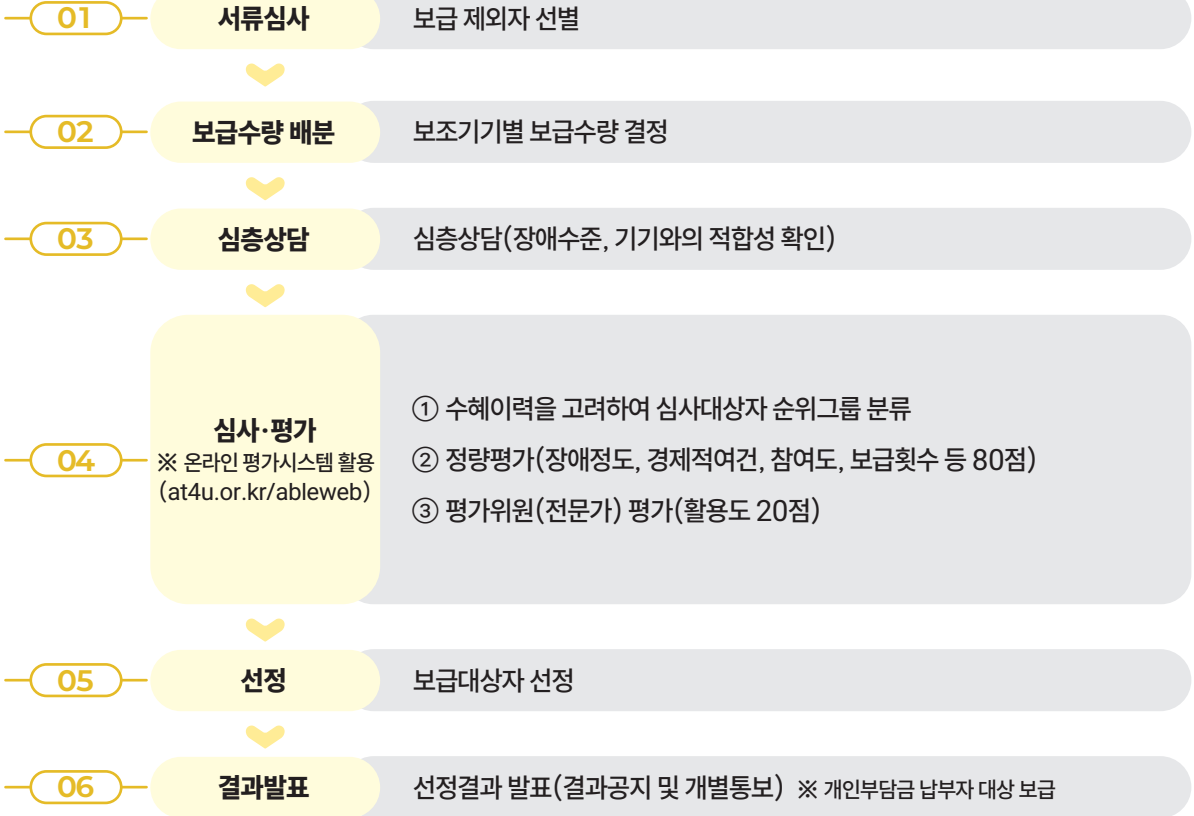

✔ 서류평가

- 제출서류 및 수혜이력 자료를 참고하여 보급제외자를 선별하고 평가대상에서 제외

✔ 심층상담(방문면접)

- 신청서 접수 이후 보조기기 사용의 적합성 등을 확인하기 위해 해당 광역시·도에서 심층상담(방문면접) 필요시 실시
- 심층상담 대상 보조기기(2026년 보급제품 선정목록 참조)
 - ※ 제품가격 기준 1백50만원 이상의 고가(高價) 보조기기 중, 제품특성 및 신청자의 활용도를 감안하여 상담 대상 선정
 - ※ 심층상담 대상 제품은 제품 목록(2~6p)의 ‘심층상담’ 항목 ‘해당’ 여부 확인
- 보급품목이 점자정보단말기, 점자출력기, 점자라벨기 신청자의 경우, 심층상담 시 점자평가를 실시하여 보급제외자 선별
 - 점자평가 결과 60점 미만은 부적격으로 심사평가대상에서 제외

☑️ 평가·선정

- 수혜이력 등에 따라 우선순위 대상자를 보조기기별로 1순위, 2순위로 분류하고 동일 순위 내에서는 보급받은 이력(수혜횟수)이 적은 자, 평가결과 고득점인자 등 순으로 보급대상자 순위 결정
- 그룹 분류기준
 - 1 순위 : 신규자(수혜이력이 없는 자), 내구연한 경과자
 - 2 순위 : 내구연한 미경과자이면서 신청품목과 수혜품목이 다른 경우
 - 보급제외 : 내구연한 미경과자이면서 신청품목과 수혜품목이 같은 경우
 - ※ 보급제외 : 재보급기간 미경과자이면서 신청품목과 수혜품목이 같은 경우
 - ※ 제품별로 1순위 우선 선정 후 여건을 고려하여 2순위 내에서 추가 선정
- • • 보급대상자 순위그룹 분류기준 및 예시

구 분	대상자 예시 (※ 예시는 내구연한 4년인 점자정보단말기의 경우임)
1순위	- 정보통신보조기기를 지원받은 사실이 없는 신규 신청자 (예) 2022년에 점자정보단말기를 지원받은 자가 4년(내구연한)이 경과 된 2026년 보급사업에 점자정보단말기를 신청한 사례는 1순위로 분류
2순위	- 내구연한 미경과자이면서 기존 수혜품목과 다른 품목 신청자 (예) 2023년에 점자정보단말기를 지원받은 자가 2026년 보급사업에 영상확대 시스템 등 타 품목의 보조기기를 신청한 사례는 2순위로 분류
보급제외	- 내구연한 미경과자이면서 기존 수혜품목과 같은 품목 신청자 (예) 2023년에 점자정보단말기를 지원받은 자가 2026년 보급사업에 유사기능의 다른 점자정보단말기를 신청한 사례는 보급 제외

☑️ 순위분류시 고려사항

- 수령한 보조기기의 내구연한 산정은 보조기기를 수령한 해(년도)를 포함하여 연차별로 기산하고, 해당 보조기기의 내구연한을 기준으로 경과여부 판정
- 기존 수혜 횟수가 2회 이상인 경우, 기 수령한 보조기기 모두를 비교하여 아래의 우선 적용순서에 따라 순위그룹 구분
 - ※ 우선적용 순서 : 보급 제외 > 2순위 > 1순위
- 동일품목이라 함은 화면낭독S/W, 점자정보단말기, 특수키보드 등의 동일 또는 유사기능별 제품 구분을 의미함
 - ※ 제품 목록의 '품목' 항목 참고
- 선정·보급 후 취소, 반품 등이 발생 할 경우, 후순위자를 대상자로 추가 선정할 수 있으며, 지역별 여건에 따라 추가신청 접수 등의 절차를 통해 보급할 수도 있음

5

결과발표 및 개인부담금 납부

✓ 보급대상자 선정결과 발표

- 발표일 : 2026년 7월 16일(목) 예정
※ 주소지 관할 17개 광역시·도에서 홈페이지 공지 또는 개별 통보
- 홈페이지를 통해 결과 확인이 어렵거나 보급 관련 상담이 필요한 경우에는 상담전화 또는 해당업체에 문의

✓ 개인부담금 납부

- 납부기간 : 2026년 7월 20일(월) ~ 7월 31일(금)
- 납부계좌

예금주(업체명)	계좌번호	연락처
(재)파라다이스복지재단	우체국 010231-05-000650	070-8630-9678
리보(주)	국민은행 928301-00-066044	010-2247-5402
(주)엘피케이에스	우체국 110-0047-04589	02-3477-3006
모아드림주식회사	우체국 100-0003-68653	010-9116-3608
바투버전	우체국 010934-02-162004	010-2760-4669
월비	우체국 013102-01-009626	010-8258-7807
(유)함께걷는발달연구소	우체국 110-0144-42645	055-289-6694
유비큐판매(주)	우체국 104638-01-002398	010-9590-6003
(주)건용아이비씨	우체국 014530-02-021579	02 563 5260
(주)리드스피커코리아	우체국 011973-02-235479	02-3016-8520
주식회사 샘물정보통신	우체국 103713-01-005379	031-753-0293
(주)야크로	우체국 012245-01-015655	070-7410-6594
(주)셀바스헬스케어	우체국 013227-01-008127	042-879-3056
(주)소프트젠	우체국 100-0003-65817	02-6462-0420
주식회사 넥스트지	국민은행 578601-01-281203	02-734-1641
주식회사 다함께하는	우리은행 1005-804-691838	02-334-3303
주식회사 블루워커	우체국 100-0003-63365	010-2514-2732
주식회사 세라핌	국민은행 218301-04-397386	010-8200-6077
주식회사 애니케이알	우체국 100-0003-64471	053-653-8835
주식회사 엠브이아이	우체국 313080-01-001137	042-826-4358
주식회사 여우	우체국 703710-01-003186	053-721-7858
주식회사 창의와놀이	우체국 110-0145-03214	070-4481-4872
주식회사 하이클론	우체국 100-0002-47309	02-702-7567
주식회사 허브티	하나은행 661-910013-19104	1660-1676

예금주(업체명)	계좌번호(우체국)	연락처
(주)씨애플피	우체국 601724-02-036650	010-3907-2206
(주)씨와이디정보기술	국민은행 782701-04-136028	070-8880-6681
(주)씨토크커뮤니케이션즈	우체국 013276-02-463584	070-7945-1010
(주)에니스트비전	우체국 103556-01-011371	032-875-2295
(주)에듀엔젤	국민은행 807701-00-013941	010-6494-7044
(주)엑스비전테크놀로지	우체국 013664-01-001695	02-888-1623
(주)오버플로우	우체국 101907-01-004594	02-465-3450
(주)투아트	우체국 100-0003-69594	053-254-1895
(주)핑키밍키	우체국 014530-02-026091	070-4481-4877
(주)헨디인터내셔널	우체국 011783-02-248505	02-725-2190
케어라이프코리아(주)	우체국 011817-01-013688	02-455-0858
현호ICT	우체국 014266-02-119355	010-5381-9910

☑️ 보급대상자 유의사항

- 보급대상자 선정결과 발표 후 정해진 기간 이내에 개인부담금을 납부하지 않은 경우에는 보급 의사가 없는 것으로 간주하여 보급대상에서 제외함
- 제품 배송·설치는 개인부담금 납부 이후 실시(2026년 8월~9월)
- 보조기기 수령 후 반품 및 취소를 요청할 경우 제품 수령일로부터 15일 이내에 가능
 - 단, 보급 대상자의 귀책사유로 제품이 멸실·훼손된 경우 또는 제품 사용에 따른 상품 가치가 감소한 경우에는 반품 불가
 - 소프트웨어(S/W)의 경우 제품 포장을 개봉한 경우 반품 불가
- 무상A/S기간은 당해연도 보급일로부터 익년 12월 31일까지이며 기타 품질보증 및 사용방법에 관한 전반적인 사항은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 또는 납품사(제조사) 규정을 따름
- 보급받은 제품은 **반드시 본인이 사용해야 하고 타인에게 양도 및 대여는 절대 불가함**(발견시 이용약관에 따라 보급제품 회수 조치 및 향후 보급대상에서 제외)
- 개인부담금 납부 또는 배송·설치에 필요한 연락처를 기재하지 않은 경우 또는 연락이 어려운 경우에는 보급이 취소 될 수 있음
- 제품을 수령한 경우 제품사양, 구성품목, 작동상태 등을 확인 후 수령확인증(방문설치 제품)을 반드시 제출해야 함
 - ※ 수령확인증 제출방법은 선정결과 발표시 안내
- 제품 보급 후 수령확인을 위한 검사, 이용여부 및 관리상태 확인을 위한 실태조사 등 관계기관의 협조 요청에 성실히 응해야 함
- 장애인보조기기 교부사업(복지부), 보조공학기기 지원사업(고용부) 등 유사사업으로부터 복수 선정된 경우, 중복해서 보급 받을 수 없으며 발견 시 보급제품 즉시 회수 조치 및 향후 보급사업 참여 제한

정보통신보조기기 신청서

※ 고가및패키지제품 신청자등을대상으로 관계기관이 방문상담을 요청할 경우, 반드시 응해야 합니다
 ※ 정보통신보조기기 신청서 및 활용계획서 작성요령을 반드시 숙지하신 후 작성하시기 바랍니다

① 신청자 (는 해당란에 표시)

성 명		주민등록번호	-
주민등록주소	(-)		
기기배송주소	(-)		
연락처	전 화	휴대폰	팩 스 (선택)
경제적여건	<input type="checkbox"/> 기초생활수급자 <input type="checkbox"/> 차상위계층 <input type="checkbox"/> 해당없음		

② 장애 관련사항(아래 가, 나 중 해당하는 유형에 작성)

가. 등록장애인	주장애및장애정도	부장애및장애정도	종합장애정도
나. 국가유공자	()장애[※상이부위에 해당하는 유형 선택], 상이등급 ()급, 보존번호 ()		

③ 신청 보조기기 ※ 심층상담제품의 경우, 해당 지자체 보급기준에 의하여 상담이 제한될 수 있음

제 품 명	개인부담금	원
-------	-------	---

④ 사회활동(아래의 중 해당하는 경우 표시) ※평가우선기준 : 가>나>다

가. 구직자	<input type="checkbox"/> 취업훈련생 <input type="checkbox"/> 구직자 <input type="checkbox"/> 자격증보유자		
나. 학 생	<input type="checkbox"/> 유치원 <input type="checkbox"/> 초등학교 <input type="checkbox"/> 중학교 <input type="checkbox"/> 고등학교 <input type="checkbox"/> 대학, 대학교 등		
다. 일 반	<input type="checkbox"/> 가, 나에 해당하지 않는 경우		

⑤ 정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단(자가진단표는 신청안내문 참조)

자가진단 결과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합(부적합자는 신청하실 수 없습니다.)
---------	--

⑥ 정보통신보조기기 보유내역 ※개인구매 또는 정부·민간 등 지원받은 경우 기재

구분	보유형태	제품명	수량(구매)일
1	<input type="checkbox"/> 기관지원(기관명:) <input type="checkbox"/> 개인구매		년 월 일
2	<input type="checkbox"/> 기관지원(기관명:) <input type="checkbox"/> 개인구매		년 월 일

⑦ 신청기기에 대한 특징, 사양 확인(는 해당란에 모두 표시)
 본인은 ③항의 정보통신보조기기와 관련하여 제품사양, 기능, 성능, 특징, 사용법, 보급일정과 관련한 정보를 (홈페이지 홍보물 상담 교육 전시회 기타)를 통해 확인하였습니다.

⑧ 법정대리인 ※만 19세 미만자의 경우 반드시 법정대리인이 동의하여야 합니다.

성 명	주민번호
법적관계	연 락 처

⑨ 대필자(대리작성자) ※반드시 신청인의 동의를 받아 작성하여야 합니다.

성 명	관 계	※상세히 작성
전 화	휴대폰	

⑩ 이용약관 ※보조기기 신청을 위해 반드시 이용약관에 동의하여야 합니다.

이용약관 동의	<input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음
---------	---

상기와 같이 정보통신보조기기를 신청하며, 보급대상자로 선정될 경우 개인부담금을 지정된 납품업체 계좌로 납부하고 이용약관을 준수하겠습니다
 주민등록번호의 경우 장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용 촉진에 관한 법률 시행령 제7조제1호에 의거하여 불가피하게 수집하고 있습니다.

- 붙임 1. 활용계획서 1부
 2. 개인정보 수집이용 동의서 1부
 3. 행정정보 공동이용 신청(동의)서 1부
 4. 정보통신보조기기 이용약관 1부

년 월 일

신 청 인 성명 : (서명 또는 인)
 법정대리인 성명 : (서명 또는 인)

○○○○ 시장·도지사 귀하

첨부서류	1. 장애인증명서 또는 국가유공자확인원 1부(필수, 단 행정정보 공동이용 동의시 제외) 2. 주민등록등본 1부(필수, 단 행정정보 공동이용 동의시 제외) 3. 국민기초생활수급자 증명서 또는 차상위계층 확인서 1부(해당자 필수, 단 행정정보 공동이용 동의시 제외) 4. 사회활동 관련 증명서류 (자세한 내용은 <신청서 작성안내> 참고) 5. 위임장 1부(해당자(대리인 신청시) 필수) 6. 법정대리인 동의서 1부(해당자(신청자가 미성년자인 경우) 필수)
------	---

활용계획서

※ 대필(대리)하여 신청서를 작성하는 경우에는 신청자의 활용여건, 신청서 및 활용계획서 작성요령을 참고하여 작성요망(타인의 활용계획서와 동일한 경우 불이익을 받을 수 있음)

① 신청사유	※ 보조기기 필요성을 자세히 기재												
② 장애정도	※ 장애정도를 파악할 수 있도록 장애부위 및 신체 불편사항을 신청 보조기기의 적합성을 고려하여 자세히 기재												
③ 정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 결과	<p>※ 정보통신보조기기 정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 항목 모두 작성 후 결과 체크</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 항목 (진단코드 기재)</th> <th style="text-align: center;">결 과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합</td> </tr> </tbody> </table>	정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 항목 (진단코드 기재)	결 과	1.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	2.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	3.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	4.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합	5.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 항목 (진단코드 기재)	결 과												
1.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합												
2.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합												
3.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합												
4.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합												
5.	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합												
④ 사용용도	<input type="checkbox"/> 취업활동(근로, 구직) <input type="checkbox"/> 학습활동 <input type="checkbox"/> 의사소통 <input type="checkbox"/> 여가활동												
⑤ 직업유형 ※ 해당사항에 체크 (중복선택 가능)	<input type="checkbox"/> 전문직(교수, 교사, 의료인, 문학가, 예술가, 방송인, 정치인, 기타[]) <input type="checkbox"/> 안마사 <input type="checkbox"/> 사무관리직 <input type="checkbox"/> 생산/기술직(단순노무) <input type="checkbox"/> 전업주부 <input type="checkbox"/> 판매/서비스직 <input type="checkbox"/> 사회복지시설 관련 종사자 <input type="checkbox"/> 학생 <input type="checkbox"/> 자원봉사자(개월) <input type="checkbox"/> 무직 <input type="checkbox"/> 기타() ※ 기타는 공무원·교사 임용시험 준비생, 사법시험 등												
⑥ 보조기기 대체수단	※ 신청 보조기기를 사용하지 않을 경우 대체할 수 있는 수단 또는 현재 사용하고 있는 보조기기를 자세하게 기재												
⑦ 사용기간	<input type="checkbox"/> 1년 미만 <input type="checkbox"/> 1년 <input type="checkbox"/> 2년 <input type="checkbox"/> 3년 <input type="checkbox"/> 4년 <input type="checkbox"/> 5년이상												
⑧ 활용계획	<p>가. 사용시간 : 일주일에 총 ()회, 총 ()시간 사용</p> <p>나. 주요 사용계획 < ※ 신청서 작성요령의 '작성예시' 참고 ></p>												

개인정보 수집·이용 동의서

① 개인정보 수집·이용에 대한 동의

1. 수집하는 개인정보 항목 및 수집방법	<p>주소지 관할 광역시·도, 시군구 및 한국지능정보사회진흥원은 장애인 정보통신보조기기 보급사업 신청, 보급대상자 선정 관리 등을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집하고 있습니다. (관계법령 : 장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용 촉진에 관한 법률 시행령 제7조제1호 / 개인정보보호법 제15조)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 수집항목 - 필수정보 <ul style="list-style-type: none"> · 성명, 비밀번호, 전화번호, 주민등록지 주소, 경제적 여건, 사회활동내용, 신청제품명, 보조기기 활용계획 - 선택정보 <ul style="list-style-type: none"> · 배송지주소, 팩스번호, 보유내역, 휴대전화번호, 법정대리인 정보(성명, 주민등록번호, 법적관계, 연락처, 대리작성자(성명, 관계, 전화, 휴대전화), 심층상담내용) ◦ 수집방법 : 개인정보는 온라인, 오프라인으로 정보통신보조기기 신청서 접수 절차를 통해 수집됩니다.
2. 개인정보의 수집 및 이용목적	<p>주소지 관할 광역시·도, 시군구 및 한국지능정보사회진흥원은 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정보통신보조기기 보급대상자 선정심사, 중복보급 방지, 기기 배송 및 설치를 위한 배송업체 제공, 기기보급 사후관리
3. 개인정보의 보유 및 이용기간	<p>주소지 관할 광역시·도, 시군구 및 한국지능정보사회진흥원은 정보통신보조기기 보급사업 신청일로부터 보급이력 해지시까지 신청 및 보급이력 등에 관한 개인정보를 보유 및 이용하게 되며, 수집된 개인정보는 원칙적으로 개인정보 보유·이용목적이 달성되거나 보유·이용기간이 종료한 경우 지체없이 파기합니다.</p>
4. 복지정보 연계 활용	<p>업무담당자가 대상자 선정 및 보급의 적정성 확인을 위한 목적으로 법령 등에 의한 복지사업의 수혜이력정보를 정부 관계기관으로부터 제공받거나 정보통신망을 통해 확인할 수 있음에 동의합니다. (관계법령 : 사회보장기본법 제37조)</p>
5. 개인정보의 제공	<p>상기 목적에 의해 수집된 개인정보는 관련법령에 따라 정보통신보조기기 업무를 처리하는 국가 기관, 한국지능정보사회진흥원 위탁 정보통신보조기기 심층 상담원에 제공되며, 정보통신보조기기 보급을 위해 납품업체 및 배송업체에 위탁처리 할 수 있습니다.</p>
6. 동의를 거부할 권리 및 동의의 거부에 따른 불이익	<p>정보주체는 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의하지 않는 경우 정보통신보조기기 신청이 제한될 수 있습니다.</p>

개인정보 수집·이용에 동의하십니까? 동의함 동의하지 않음

② 개인정보 제3자 제공에 관한 동의

1. 개인정보의 제공	<p>주소지 관할 광역시·도, 시군구 및 한국지능정보사회진흥원은 정보통신보조기기 보급사업의 원활한 추진을 위하여 아래와 같이 개인정보를 제공하고 있으며, 해당 목적이외의 용도로는 제공하지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 제공정보의 이용목적 : 중복보급 방지, 정보통신보조기기 보급 및 법령 등에 의한 복지사업의 적정한 대상자 선정 및 관리 - 제공대상 : 1)법령등에의한복지사업수행하는국가기관2)정보통신보조기기납품업체3)정보통신보조기기 심층상담원, 4)정보통신보조기기 보급대상자 평가위원 ※ 납품업체 현황 및 연락처는 매년 웹사이트(www.at4u.or.kr)를 통해 고지하고 심층상담원 및 평가위원은 해당 광역시·도에서 명단 관리함 - 제공 개인정보 항목/보유·이용기간 · 1) 법령 등에 의한 복지사업을 수행하는 국가기관 : 성명, 주소, 신청(보급)제품명, 주민등록번호, 장애유형 및 장애정도, 보급일 또는 수령일/문서(5년), DB서버(준영구) · 2) 정보통신보조기기 납품업체 : 성명, 제품명, 개인부담금액, 주소, 전화번호, 대리인 성명 및 연락처(해당시)/보급완료 시까지 · 3) 정보통신보조기기 심층상담원 : 성명, 제품명, 전화번호, 주소, 장애유형 및 장애정도/상담완료 시까지 · 4) 정보통신보조기기 보급대상자 평가위원 : 제품명, 사회활동내용, 장애유형, 장애정도, 장애정도, 활용계획, 점자평가 등 별도로 정하여 안내한 사항(평가완료 시까지)
2. 동의를 거부할 권리 및 동의의 거부에 따른 불이익	<p>정보주체는 개인정보의 제3자 제공에 관한 동의를 거부할 수 있으며, 동의하지 않는 경우 정보통신보조기기 신청이 제한될 수 있습니다.</p>

개인정보의 제공에 동의하십니까? 동의함 동의하지 않음

③ 고유식별정보 처리의 동의	
1. 수집하는 고유식별정보 항목	주민등록번호
2. 개인정보 수집 및 이용목적	주소지 관할 광역시·도, 시군구 및 한국지능정보사회진흥원은 장애인 정보통신보조기기 보급사업 신청, 보급대상자 선정 관리 등을 위해 고유식별정보를 수집·이용합니다. 수집된 고유식별정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다.
3. 개인정보의 보유 및 이용기간	온라인(DB서버) : 준 영구(보급이력 해지시까지, 중복수혜방지를 위한 준영구 보존) 오프라인(문서) : 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성시까지(5년)
4. 개인정보의 제공	상기 목적에 의해 수집된 개인정보는 관련법령에 따라 정보통신보조기기 업무를 처리하는 국가기관에 제공합니다.
5. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 불이익	정보주체는 고유식별정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의하지 않는 경우 정보통신보조기기 신청이 제한될 수 있습니다.

고유식별정보를 수집·이용하는 것을 확인하였습니다. 확인함

④ 민감정보 처리의 동의	
1. 수집하는 민감정보 항목	장애유형, 장애정도(상이등급), 장애정도(상이처)
2. 개인정보 수집 및 이용목적	주소지 관할 광역시·도, 시군구 및 한국지능정보사회진흥원은 장애인 정보통신보조기기 보급사업 신청, 보급대상자 선정 관리 등을 위해 민감정보를 수집·이용합니다. 수집된 민감정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다.
3. 개인정보의 보유 및 이용기간	온라인(DB서버) : 준 영구(보급이력 해지시까지, 중복수혜방지를 위한 준영구 보존) 오프라인(문서) : 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성시까지(5년)
4. 개인정보의 제공	상기 목적에 의해 수집된 개인정보는 관련법령에 따라 정보통신보조기기 업무를 처리하는 국가기관, 상담업무를 처리하는 정보통신보조기기 심층상담원, 보급대상자 선정을 위한 평가위원에게 제공합니다.
5. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 불이익	정보주체는 민감정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 동의하지 않는 경우 정보통신보조기기 신청이 제한될 수 있습니다.

민감정보 수집·이용에 동의하십니까? 동의함 동의하지 않음

※ 미성년자의 경우 반드시 법정대리인의 동의가 필요합니다.

※ 타인명의 도용과 같은 부정한 방법에 의하여 개인정보를 침해 또는 누설하는 경우 관련법에 의해 처벌을 받을 수 있습니다.

[개인정보 수집기관별 개인정보보호 담당자]

주소지 관할 광역시·도, 시군구			
개인정보보호 분야별 책임관(과장)		개인정보 취급자	
담당부서		담당부서	
성명		성명	
전화		전화	
이메일		이메일	
한국지능정보사회진흥원			
개인정보보호 분야별 책임관(팀장)		개인정보 취급자	
담당부서	디지털접근성팀	담당부서	디지털접근성팀
성명	이영선	성명	이정현
전화	053-230-1361	전화	053-230-1367
이메일	lys@nia.or.kr	이메일	bestlady@nia.or.kr

본인은 위의 동의서 내용을 충분히 숙지했으며 주소지 관할 광역시·도, 한국지능정보사회진흥원이 보다 나은 서비스 제공과 정책 수립을 위하여 개인정보를 수집, 이용하는 것에 동의합니다.

20 년 월 일

성명 : (서명)

(해당하는 경우) 법정대리인 성명 : (서명)

행정정보 공동이용 신청(동의)서

<이용안내 및 유의사항>

- 정보통신보조기기 신청서의 처리를 위하여 민원처리에관한법률 제8조2 및 전자정부법 제36조에 따라 행정정보공동 이용시스템을 이용하는 경우 본 「행정정보 공동이용 신청(동의)서」를 작성·제출하여야 하며, 이 때 해당하는 신청서류는 별도로 제출하실 필요가 없습니다.
- 행정정보공동이용시스템을 이용하기 위하여서는 00시·도 담당공무원이 행정정보공동이용시스템을 통해 보급대상자 임을 확인할 수 있도록 아래의 **행정정보 공동이용 “신청(동의)여부”란에 서명(또는 인)을 하시면 됩니다.**
- 행정정보 공동이용 신청(동의)서에 동의하는 경우 서명 또는 도장 날인 후 신청서 등록시스템에 파일업로드하거나 접수처에 신청서와 함께 우편, 방문 등의 방법으로 제출하여야 합니다.
- 아래에 기재된 구비서류 정보는 해당 사무 이외의 용도로 사용될 수 없으며, 만약 전자적 확인에 대하여 본인이 동의하지 아니하는 경우는 본인의 선택에 따라 서류로 대신 제출할 수 있습니다.
- 아래의 행정정보(구비서류)에 해당하지 않은 증빙서류의 경우 개인이 준비하여 홈페이지(www.at4u.or.kr) '보조기기 신청' 메뉴에 파일업로드하거나 접수처에 신청서와 제출하여야 합니다.

1. 민원(고객)사무의 명칭 : 정보통신보조기기

2. 행정정보(구비서류) 공동이용 내용

행정정보 구분	동의여부(동의 시 서명 또는 인)
장애인 증명서 (해당되는 경우)	
수급자 증명서 (해당되는 경우)	
차상위계층 확인서 (해당되는 경우)	
국가유공자 확인서 (해당되는 경우)	
주민등록등본 (공통)	

※ 동의여부는 해당되는 곳에 모두 서명

3. 이용기관의 명칭 : 00시·도청 000000실, 시군구청

- ※ 행정정보공유서비스를 통해 보급대상자임을 우선 확인한 후, 대상으로 확인되지 않는 경우 별도의 증빙서류를 요구할 수 있음
- ※ 행정정보 공동이용 신청(동의)서를 제출하지 않을 경우, 보급대상자임을 증빙하는 모든 서류를 제출해야 함

정보통신보조기기 이용약관

제1조(목적) 정보통신보조기기(이하 “보조기기”라 함)의 지원목적은 신체적·경제적으로 정보통신에 대한 접근과 활용이 어려운 장애인을 대상으로 보조기기를 보급하여 정보통신망에 대한 자유로운 접근과 정보이용을 통해 삶의 질을 향상하는데 있다.

제2조(의무사항) 관할 시·도는 보조기기를 보급하고 수혜자는 목적 달성을 위하여 보조기기를 효율적으로 관리하고 사용하는데 노력하여야 한다.

제3조(수령확인서 제출) 보조기기 수령 후 정보통신보조기기 수령확인서 2부를 작성하여 1부는 시·도에 제출하고 1부는 보관한다.

제4조(반품 요청) 지급한 보조기기의 반품을 요청할 경우 절차에 따라 수령일로부터 15일 이내 관할시·도에 신청서를 제출하여야 한다. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 반품을 요청할 수 없다.

1. 수혜자의 귀책사유로 제품 전체 또는 일부가 멸실 또는 훼손된 경우
2. 단기간의 제품 사용으로 인해 상품가치가 현저히 감소한 경우
3. S/W의 경우 제품 포장을 개봉한 경우 등

제5조(신청 및 보급 철회) 정보통신보조기기 업무를 수행함에 있어 단순한 과실, 착오 등으로 부적합한 보조기기를 보급한 대상자에 대하여 신청 및 보급 철회를 조치할 수 있으며 해당하는 경우 이에 반드시 응하여야 한다.

제6조(결정취소 및 회수조치) 관할시·도는 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우 관리지침 지원결정 취소 및 지원기기를 회수할 수 있으며 당초 보조기기 지원을 위하여 보급대상자가 부담한 개인부담금은 보상하지 아니하고 향후 동 사업의 지원을 하지 아니한다.

1. 보조기기를 허위 또는 부정한 방법으로 지원받은 경우
2. 보조기기 수령 후 타인에게 양도하는 경우
3. 보조기기를 방치하고 사용하지 않는 자

제7조(반납) 보조기기를 사용할 수 없는 사유가 발생한 경우 자진 의사에 따라 그 사유를 명시하여 관할시·도에 기증할 수 있다.

제8조(유지보수) 보조기기 수령 후 무상유지보수 기간까지 납품업체에 유지보수를 신청할 수 있다. 단 이용과정에서 사용자의 부주의로 인해 발생한 유지·보수에 대한 비용은 사용자가 부담하여야 하고 전반적인 사항은 납품업체 규정에 따른다. 기타 유지보수와 관련된 분쟁 발생시 소비자보호원 등 관련기관을 통해 해결한다.

제9조(실태 및 만족도 조사) 보조기기 지원 후 관리실태 점검을 위하여 관계기관에서 실시하는 전화 또는 방문조사에 성실히 응하여야 한다.

제10조(개인정보) 신청 시 제공한 개인정보에 대해 관할시·도 및 한국지능정보사회진흥원은 보다 나은 서비스 제공과 정책수립을 위하여 수집 및 활용한다.

정보통신보조기기 신청서 및 활용계획서 작성요령

※ 신청서 및 세부 활용계획서 작성이 어려운 경우에는 가족(법정대리인), 자치단체공무원, 사회복지사, 정보화도우미 또는 방문강사, 장애인단체 상담원 등이 신청인의 동의를 얻어 대신 작성(대필) 가능

<신청서 작성요령>

1. 정보통신보조기기를 신청하기 전에 ‘사업안내 및 제품설명서’를 통해 장애유형에 적합한 제품을 확인하고 이용약관 등 안내사항을 숙지 후 신청하시기 바랍니다.

※ 대필자의 경우 위의 내용을 반드시 신청인에게 설명 및 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 신청서 ‘①신청자’는 보급대상자 선정정보, 보조기기 보급 및 설치 등에 필요한 사항으로 빠짐없이 모두 기재 또는 표시하여 주십시오.(필수)

· 주민등록지 주소는 해당 관서에 등록된 주소를 기재하고 ‘기기배송주소’에는 실제 설치하여 사용할 주소를 명기(주민등록지 주소와 다를 경우에는 “상동”으로 표기)

※ 연락처를 기재하지 않거나 정확하지 않을 시 보급이 취소 될 수 있음

· 연락처는 직접 연락 가능한 본인의 전화번호를 기재하고 추가로 연락이 가능한 대리인의 연락처도 ⑧항에 반드시 함께 기재(청각·언어장애인은 대리인 연락처를 반드시 작성)

3. 신청서 ‘②장애 관련사항’은 본인의 장애와 관련한 사항을 기재해 주십시오.(필수)

· 등록장애인, 국가유공장애인 중 해당하는 유형에 작성

· 장애인증명서, 국가유공자증명서 등에 기재된 내용과 동일하게 주장애, 부장애, 종합장애정도를 기재(중복장애의 경우 부장애 반드시 기재)

4. 신청서 ‘③신청 보조기기’는 신청을 희망하는 정보통신보조기기에 대한 제품명 및 개인부담금을 기재해 주십시오.(필수)

· 개인부담금은 한국지능정보사회진흥원 또는 접수처에서 제공하는 ‘제품설명서’를 참고하여 작성하고 기초생활수급자, 차상위계층의 경우 해당하는 금액을 기재

5. 신청서 ‘④사회활동’은 해당하는 항목에 표시해 주십시오.(필수)

· ‘④사회활동’에서 표시한 경우 관련 증빙을 반드시 첨부하여야 함

- ‘가. 구직자’의 경우 취업훈련확인서(취업훈련생), 구직활동확인서(구직자), 국가공인자격증(자격증보유자)를 첨부

- ‘나. 학생’의 경우 재학증명서(재학생), 졸업증명서(3년 이내 졸업생)를 첨부

- ‘다. 일반’은 가, 나에 모두 해당하지 않은 경우에 체크(증빙 불필요)

6. 신청서 ‘⑤정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단’은 해당하는 항목에 표시해 주십시오.(필수)

· 사업안내문에 있는 『정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단표』를 확인 후 모두 적합한 경우 ‘적합’에 표시

· 자가진단 항목에 1개라도 부적합한 경우 부적합으로 표시하시고 동 대상자의 경우는 신청대상자가 아님

7. 신청서 ‘⑥보유중인 보조기기 내역’은 해당하는 항목에 표시 및 내용을 기재해 주십시오.(해당하는 경우 필수)

· ‘보유형태’는 정부 또는 민간에서 지원받은 경우 ‘기관지원’ 항목에 체크하고 정확한 기관명칭을 기재하며, 개인 또는 친인척에 의해 구매 또는 양도받은 경우 ‘개인구매’ 항목에 표시

· ‘수령(구매)일’ 항목은 제품을 수령 또는 구매한(양도받은) 연월일을 기재

※ 제품 보유사실을 정확하게 기재하지 않을 경우 보급 대상에서 제외될 수 있음

8. 신청서 ‘⑦신청기기에 대한 특징, 사양 확인’은 해당하는 항목에 표시해 주십시오.(필수)

· 정보통신보조기기 신청 전 반드시 제품사양, 기능, 성능, 특징, 사용법, 보급일정에 대해 확인하여야 하며 확인하지 않은 경우 신청접수가 되지 않을 수 있습니다.

9. 신청서 ‘⑧법정대리인 동의’는 신청인이 만 19세 미만의 경우 반드시 법정대리인 해당 항목에 기재후 법정대리인 동의서를 제출해 주십시오.(해당하는 경우 필수)

· 법정대리인동의서 제출시 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류를 포함하여 제출 하여주시기 바랍니다.

10. 신청서 ‘㉑대필자(대리작성자)’은 신청인이 직접 서류작성이 어려워 대필하는 경우 작성하여주시고 대필하여 작성하는 내용의 모든 책임은 신청자에게 있습니다.

- 대필자(대리작성자)는 모든 작성 내용에 대해 신청자의 동의를 확인 후 작성하시기 바랍니다.
- 대필자(대리작성자)가 작성한 내용이 신청자의 의도와 달라서 발생하는 모든 책임은 신청자에게 있습니다.

11. 신청서 ‘㉒ 이용약관 동의’는 신청서에 첨부된 ‘정보통신보조기기 이용약관’을 반드시 읽어보고 동의할 경우 동의 항목에 표시해 주십시오.(필수)

<활용계획서 작성요령>

1. 활용계획서는 신청자의 장애수준, 정보통신보조기기 활용여건 등을 고려하여 자세하게 작성하되 타인의 활용계획서와 동일하게 작성하는 경우 모두 불이익을 받을 수 있습니다.

2. 활용계획서 ‘㉓신청사유’는 정보통신보조기기가 필요한 사유를 자세히 기재해 주십시오

3. 활용계획서 ‘㉔장애정도’는 장애정도를 파악할 수 있도록 장애부위 및 신체 불편사항을 신청코자하는 정보통신보조기기와의 적합성을 고려하여 자세히 기재해 주십시오.

- 시각장애의 경우 전맹·저시력 여부, 저시력의 경우 시력 및 시야결손 정도 등을 자세히 기재
- 지체·뇌병변장애의 경우 상지·하지 여부, 상지장애의 경우 불편부위 및 동작범위 등 기재
- 청각·언어장애의 경우 청력 손실정도, 언어구사를 통한 의사전달 정도 기재

4. 활용계획서 ‘㉕자가진단 결과’는『정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단표』에서 해당하는 항목을 기재 후 결과에 표시하여 주십시오.

- 예를 들어 ‘화면낭독S/W’ 품목을 신청하는 경우 ‘정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 항목’에 아래의 내용을 모두 기재하고 ‘결과’에 표시

<정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 결과 항목 작성 예시>

정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단 항목	결과
1. S/W 구동이 가능한 최소 사양의 PC를 보유하고 사용이 가능하여야 함	<input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
2. 청력에 이상이 없어야 함	<input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
3. 업그레이드 제품의 경우에는 기존에 적합한 하위버전의 제품을 보유하여야 함	<input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합

5. 활용계획서 ‘㉖직업유형’은 해당항목에 표시하여 주십시오.(중복 가능)

- 전문직에 표시한 경우에는 해당하는 직업에 O표하고,
- 해당하는 직업유형이 없을 경우에는 ‘기타’란에 기재

6. 활용계획서 ‘㉗보조기기 대체수단’에는 신청 보조기기를 사용하지 않을 경우 대체할 수 있는 수단 또는 현재 사용하고 있는 보조기기를 자세하게 기재하여 주십시오.

7. 활용계획서 ‘㉘사용기간’은 정보통신보조기기 예상 사용기간을 작성하여 주십시오. 다만, 1년 미만 사용자의 경우 정보통신보조기기 보급이 될 수 없습니다.

8. 활용계획서 ‘㉙활용계획’의 ‘나.사용계획’은 아래의 작성예시를 참고하여 작성하여 주십시오.

<작성예시>

교사임용고시 시험을 준비하면서 집, 학원에서 새벽부터 하루 10시간씩 O개월째 공부하고 있는데 시각장애로 불편한 상황임.

또한, 주변에 학원 및 보조기기가 구비되어 있는 곳이 없어 불편한 상태에서 공부를 하고 있었으며 간혹 도서관에 있는 보조기기를 활용하여 공부하고 있음. OO과목, OO과목에 대한 교재의 내용을 확대해서 반복 학습하는데 주로 사용할 계획임.

전에 학교에 다닐 때 유사한 제품인 OOO를 약 3년간 사용해서 기본사용법은 숙지하고 있음. 학습용도 이외에 일상생활에서는 그 동안 볼 수 없었던 신문을 보고 사회, 경제를 살펴보고 동료와 의견을 나누고 각종 고지서 내용을 확인하여 혼자서 금융업무도 할 계획임

정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단표

[※ 자가진단시 유의사항]

- 아래의 자가진단 내용 확인 후 신청서의 「⑤ 정보통신보조기기 사용을 위한 자가진단」 항목 및 활용계획서의 「③ 자가진단 결과」에 진단내용을 체크하여 주시기 바랍니다.
- 아래의 진단내용 중 '최소사양'은 홈페이지(www.at4u.or.kr)의 제품 설명서를 참조하시기 바랍니다.
- 결과는 '예', '아니오' 중에서 선택하시기 바랍니다. 단, 진단내용 중 1개라도 '아니오'를 선택한 경우에는 보급대상이 되지 않을 수 있으니, '아니오'가 있는 경우에는 다른 적합한 제품을 선택하시기 바랍니다.

품목	해당제품	진단내용	진단코드	결과
시각장애 유형				
화면낭독S/W	1. 센스리더 어센드 2. 센스리더 베이직 3. 센스원	· 음성 정보를 듣기 위한 청력에 이상이 없습니까? · 설치, 구동 가능한 최소 사양의 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능합니까? · 출력되는 음성을 듣기위한 사운드 장치를 구비하고 있습니까?	AA-01 AA-02 AA-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
영상확대 시스템 / 화면확대S/W	1. 아이케인 2026 2. 루비5 XL HD 3. 컴팩10HD 4. 컴팩7HD 5. 클로버6 HD 6. 클로버10HD 7. 클로버 노트 8. 클로버 북프로 9. 클리어뷰 C 24 HD 10. 다빈치 Pro 11. 머린 엘리트 Pro 12. 아미고 HD 13. 페블 HD 14. 베오(Veo) 15. 소리안탭3 16. 강한손 이지스 울트라 17. 캔디6 18. 고비전 무브 19. 올캠 탭 20. 매그니링크 21. 포터비전 22. 아이러뷰 13 스마트 AI 에디션 23. 아이러뷰 16 프리미엄 스마트 AI 에디션 24. 아이러뷰 MAX 프리미엄 스마트 AI 에디션 25. 리보탭 울트라 26. 미러패드프로 27. 미러패드플러스 28. 플로워북 29. 플로워리더 광학줌 30. 숲나무	· 중(경)증의 시각장애인으로 해당기기의 배율/대비/명암을 조정하여 대상물의 인지가 가능합니까? · 메뉴 조작 또는 기기사용을 위해 팔을 어깨 높이까지 들어 올릴 수 있고 팔, 손가락 근력 및 신체적 조절능력이 있습니까? · 1년 이상 제품을 사용할 수 있습니까?(진행성 시각장애의 경우 진행고려)	BA-01 BA-02 BA-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

품목	해당제품	진단내용	진단코드	결과
점자교육용 보조기기 / 점자정보 단말기 / 촉각디스플레이	1. 디지털 점자학습기 2. 뉴포트브레일 3. 한소네6 미니 4. 한소네7 32셀 5. 한소네7 40셀 6. 브레일 이모션 7. 닷패드	· 단말기를 사용할 수 있을 정도의 팔, 손가락 근력 및 신체조절기능이 있습니까? · 점자를 숙지하고 읽을 수 있습니까?(디지털 점자학습기, 닷패드 제외) ※ 점자평가에 응하여야 하고, 점자평가 결과가 60점 이상이어야 함 (디지털 점자학습기, 닷패드는 점자를 인지하지 않아도 활용 가능하므로 점자평가 미실시)	CA-01 CA-02	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
점자출력기	1. 식스닷 2. 매직브레일	· 단말기를 사용할 수 있을 정도의 팔, 손가락 근력 및 신체조절기능이 있습니까? · 점자를 숙지하고 읽을 수 있습니까?(매직브레일 제외) ※ 점자평가에 응하여야 하고, 점자평가 결과가 60점 이상이어야 함 (매직브레일은 점자교육 활용 성격으로 점자평가 미실시)	DA-01 DA-02	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
데이지 플레이어	1. 책마루3	· 음성 정보를 듣기 위한 청력에 이상이 없습니까? · 단말기를 사용할 수 있을 정도의 팔, 손가락 근력 및 신체조절기능이 있습니까? · 데이지(DAISY) 플레이어 주요 콘텐츠를 보유하고거나 사용할 수 있습니까? ※ 주요 콘텐츠 : 데이지(DAISY) 포맷을 지원하는 컴퓨터 파일	EA-01 EA-02 EA-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
OCR장치 / 특수키보드 / 신호장치 / 확대용 돋보기 / 기타	1. 강한손 보이고 2. 노바캠리더 3. 설리번 아이 4. 설리번 플러스 프로 5. 소리안썬더3 6. 올캠 마이리더 SE 7. 올캠 리더 8. 소리안맥스 9. 올캠-마이아이안경형리더 10. 강한손티티 11. 온기소리 2026 12. VES 13. 시 아토 뷰어 14. 리보3S 15. 리보미니	· 음성 정보를 듣기 위한 청력에 이상이 없습니까? · 단말기를 사용할 수 있을 정도의 팔, 손가락 근력 및 신체조절기능이 있습니까?	FA-01 FA-02	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
터치모니터 -정전식-	1. 강한손 확대 터치모니터 32인치 2. 27인치 화면확대 터치모니터	· 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능합니까? · 한쪽 팔을 모니터 높이(예:어깨높이)까지 들어 화면을 신체 일부분 또는 정전식 모니터전용 터치펜으로 터치할 수 있습니까?	JA-01 JA-02	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

품목	해당제품	진단내용	진단코드	결과
지체/ 뇌병변장애 유형				
특수키보드	1. 티피키보드	<ul style="list-style-type: none"> · 팔의 떨림, 근력약화로 일반 키보드의 사용에 어려움이 있습니까? · 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능합니까? · 키보드의 좌우 너비, 상하 높이에 따라 팔을 이동시킬 수 있습니까? 	HA-01 HA-02 HA-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
특수마우스	1. 안경마우스2 스위치 5종 택1 2. 안경마우스2 터치, 센서 택1 3. 안경마우스2 호흡스위치 4. 큐하조노X 마우스 5. EA-2 특수마우스 6. 친플러스 마우스 7. 립스틱 마우스 8. 안구마우스 9. 안구마우스 거치대 세트 10. 엔에이블러 트랙볼	<ul style="list-style-type: none"> · 일반 마우스의 사용에 어려움이 있습니까? · 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능합니까? · 입 또는 얼굴 등의 신체부위의 움직임을 의지에 따라 조절할 수 있습니까? 	IB-01 IB-02 IB-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
특수마우스 -조이스틱형 마우스-	1. 엔에이블러조이스틱 2. 퀘스터 조이스틱	<ul style="list-style-type: none"> · 일반 마우스의 사용에 어려움이 있습니까? · 해당기기를 연결, 구동할 수 있는 PC를 보유하고 사용이 가능합니까? · 조이스틱 및 버튼을 손이나 신체 특정부위로 쥐고 움직여 사용하는데 불편함이 없습니까? 	IC-01 IC-02 IC-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
기타	1. IOT 아코이 호출기 2. 온기드림 2026	<ul style="list-style-type: none"> · 지체장애를 가지고 있습니까? · 소리신호나 진동을 감지할 수 있습니까? 	IF-01 IF-02	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
터치모니터 -정전식-	1. 27인치 멀티터치모니터 2. 27인치 정전식터치모니터 3. 32인치 IR 터치모니터 4. 애니터치드로잉27	<ul style="list-style-type: none"> · 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능합니까? · 한쪽 팔을 모니터 높이(예: 어깨높이)까지 들어 화면을 신체 일부 또는 정전식 모니터전용 터치펜으로 터치할 수 있습니까? · 지체·뇌병변 장애인의 경우 한쪽 팔에 장애가 있어 일반마우스의 사용이 불편하거나 지적·자폐성 장애인의 경우 특수교육 활용계획이 명확합니까? ※ 일반 마우스 사용이 가능한 장애인(하지장애 등)의 경우 보급대상이 아님 ※ 일반 타이핑 보조도구 사용 불가능 (정전식 전용펜만 사용 가능) 	JA-01 JA-02 JA-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
청각/언어장애 유형				
다기능의사 소통시스템	1. 스마트비쥬폰 올인원 2. 씨토키움070스마트 영상폰 콤보	<ul style="list-style-type: none"> · 의사소통이 어려운 청각장애인으로 수화를 사용할 수 있습니까? · 인터넷연결이 가능하고 인터넷전화 등 통신비용을 지불할 수 있습니까? 	MA-01 MA-02	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
대화용 장치	1. 한뼘상황중심AAC 2. 히어링스톤 AI 3. 히어링스톤 AI 대화면 4. 메시지스톤 에듀 AI 5. 보이스텝 6. 보이스텝 PRO SE 7. 비쥬톡 WE 8. 드림폰3 9. 키즈보이스원도우	<ul style="list-style-type: none"> · 언어장애를 가지고 있습니까? · 상징과 상징이 내포하고 있는 의미에 대해 이해할 수 있습니까? · 터치스크린 또는 스위치를 통해 조작할 수 있습니까? · 보조기기의 주된 사용목적이 의사소통입니까? 	NB-01 NB-02 NB-03 NB-04	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

품목	해당제품	진단내용	진단코드	결과
대화용 장치	10. 키즈보이스스마트+ 11. 마이토키 스마트 12. 마이토키스마트 PRO 13. 마이토키 GEO 14. 마이토키 NOTE 15. 프록스토키 16. 스마트톡킹 17. 스마트톡킹펜 18. 위드톡 19. 위드톡펜 20. 소리아음 AI 21. 소리아음 AI 라이트	· 언어장애를 가지고 있습니까? · 상징과 상징이 내포하고 있는 의미에 대해 이해할 수 있습니까? · 터치스크린 또는 스위치를 통해 조작할 수 있습니까? · 보조기기의 주된 사용목적이 의사소통입니까?	NB-01 NB-02 NB-03 NB-04	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
언어훈련 S/W	1. 스피치미러	· 언어장애를 가지고 있습니까? · 설치, 구동 가능한 최소 사양의 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능합니까? · 출력되는 음성을 듣기위한 사운드 장치를 보유하고 있습니까?	OA-01 OA-02 OA-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
	1. 언어,인지 재활프로그램 랭콕 HS 2. 여우언어인지훈련패키지+ 3. 에이드 프로 4. 에이드 프로 대화면 5. 에이드 플러스 AI 6. 보듬 인지력 한글 7. 마스터 인지력 한글 8. 소리자람 Pad 9. 소리자람 Windows 10. 스피치미러탭 11. 한글짱탭 12. 모모야 모모 언어훈련 PAD 13. 한글짱탭 14. 한글바르미 15. 언어,인지,수리력 터치 16. 스마트언어향상프로그램 17. 스마트언어향상프로그램-플러스펜 18. 애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전	· 언어장애를 가지고 있습니까? · 스피커를 통해 출력된 음성을 인지할 수 있습니까? · 단말기를 사용할 수 있을 정도의 팔, 손가락 근력 및 신체조절기능이 있습니까?	OC-01 OC-02 OC-03	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
신호장치	1. 무선표출기 비주콜 2. 데프야코이 호출기 3. 네비게이션 신호기 세트	· 청각장애를 가지고 있습니까? · 소리신호를 변환하여 전달해주는 빛과 진동을 감지할 수 있습니까?	PA-01 PA-02	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
소리증폭기 / 기타	1. 골전도보청기 2. 하하3 3. 액자형 스마트 히어링루프	· 청신경이 이상이 없는 자로 전음성 난청증상이 있습니까? · 일상생활의 소리 및 PC, 휴대폰 등을 통해 전달되는 소리 또는 공공 이용 장소에서의 안내 멘트를 청취하고자 합니까? · 인공와우, 일반 보청기와의 T-Mode기능을 이용해서 청취를 원합니까?(골전도보청기 제외) · 음원과 거리기 멀 때에(교실,교회, TV시청 등) 명료도 높은 청취를 원합니까? ※ 동 제품은 청신경이 손상된 전농의 장애인이 사용할 수 없으며 장애수준에 따라 사용가능 여부가 달라질 수 있음	QB-01 QB-02 QB-03 QB-04	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

정보통신보조기기 수령 확인서	관리번호
------------------------	------

※ 이 부분은 정보통신보조기기 납품업체에서 작성하시기 바랍니다.

배송·보급처(수령대상자) 현황

성명 (수령대상자)	배송·보급처(수령자 주소)	연락처	배송 예정일 안내	
			안내한 날짜 (월/일/시)	안내받은 자 (성명/수령대상자와의 관계)

배송·보급내역

납품업체명	제품명/모델명	세부사양 및 구성품목(상세히 작성)

※ 정보통신보조기기를 지원받은 수혜자(본인, 대리인)가 작성하시기 바랍니다.

위의 배송내역에 기재된 제품을 이상없이 수령하신 경우 아래 설문내용에 응답해 주시면 감사하겠습니다.

정보통신보조기기 배송 관련 질의/응답(답변란에 표시)

문항	설문내용	답변	
1	제품 배송 예정일자를 미리 전화연락 받으셨습니까?	<input type="checkbox"/> 그렇다	<input type="checkbox"/> 아니다
2	장애유형에 적합한 “사용설명서”를 받으셨습니까?	<input type="checkbox"/> 그렇다	<input type="checkbox"/> 아니다
3	제품 전원 및 주요 기능이 정상적으로 작동 합니까?	<input type="checkbox"/> 그렇다	<input type="checkbox"/> 아니다
4	제품사양 및 구성품목을 확인하였으며 모두 이상이 없습니까?	<input type="checkbox"/> 그렇다	<input type="checkbox"/> 아니다
5	정부지원 안내 및 A/S관련 안내 스티커 등이 부착되어 있습니까?	<input type="checkbox"/> 그렇다	<input type="checkbox"/> 아니다
6	제품 배송과 관련된 서비스(배송 예정일자 준수, 배송 직원의 친절도 등)에 만족하십니까?	<input type="checkbox"/> 그렇다	<input type="checkbox"/> 아니다

위와 같이 정보통신보조기기를 수령하였음을 확인합니다.

제품을 받은(수령한) 날짜: 년 월 일
 제품을 받은(수령한) 사람: (서명)

※ '제품을 받은(수령한) 사람' 란에는 보급대상자 성명을 기재

6

정보통신보조기기 보급사업 자주찾는 질문



Q01 정보통신보조기기는 누가 받을 수 있나요?

A: 정보통신보조기기는

- 장애인복지법 제32조의 규정에 의하여 장애인으로 등록하여 장애인 등록증을 교부 받은 자와
- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제 6조의 규정에 의하여 등록된 자 중 1급 내지 7급의 상이등급 판정을 받은 자가 받을 수 있습니다.

Q02 지원내역은 어떻게 되나요?

A: 보조기기 제품 가격의 80%가 지원됩니다(본인부담금 20%)

- ※ 기초생활수급자, 차상위계층(장애인수당 급여자) 등 경제적 여건으로 기기 구입이 어려운 저소득 장애인의 경우 본인부담금의 50%가 추가 지원됩니다.


Q03 보급품목은 어떻게 되나요?

A: 보급품목은 시각, 청각/언어, 지체/뇌병변 등 장애유형에 적합한 정보통신보조기기 및 특수 S/W 품목입니다.

- ※ 보급제품은 매년 보급품목선정위원회에서 선정하며, 정보통신보조기기 카다로그 및 홈페이지(www.at4u.or.kr)을 통해 안내하고 있습니다.

Q04 어떻게 지원받을 수 있나요?

A: 신청인의 거주지(주민등록지 기준) 관할 지자체에 신청서와 활용계획서를 작성하여 아래와 같은 과정으로 진행됩니다.

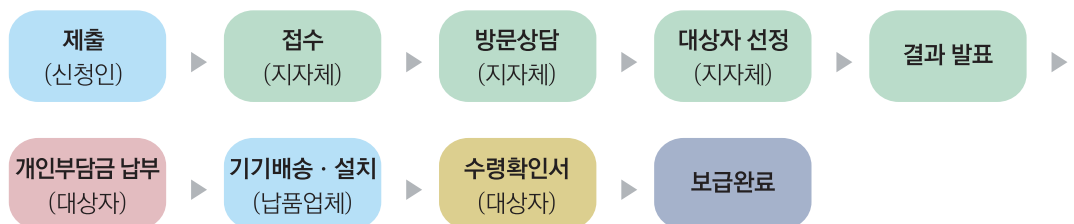

Q05 신청은 방문신청만 가능한가요?

- A:** 신청서 등 구비서류는 우편, 방문, 홈페이지(www.at4u.or.kr)를 통해 거주지(주민등록지 기준) 관할 접수처에 제출할 수 있습니다.
- 신청서 및 활용계획서 작성 시 “정보통신보조기기 자가진단표”를 반드시 확인하여야 하며,
 - 자가진단 결과 “부적합”인 경우 보급대상이 되지 않으며, 신청서 및 활용계획서에 자가진단 결과를 기재하지 않은 경우에도 보급대상에서 제외될 수 있습니다.

Q06 보급제품 체험은 어디서 하나요?

- A:** 해당년도 보급제품인 경우 보급사업 신청기간 동안 6개 시·도에서 개최되는 지역 순회 전시회를 통해 자신의 장애유형에 적합한 제품인지 아닌지 판단할 수 있도록 제품을 사용해보고 체험하실 수 있습니다.
- A:** 또한 서울에 설치된 상설 체험활용관을 활용하거나 지역별 설치되어 있는 기관을 방문하여 확인할 수 있습니다. (2026년도 보급제품 일부는 전시되어 있지 않을 수도 있음)

기관명	연락처	비고
정보통신보조기기 상담전화	1588-2670	보조기기 신청·접수 안내
국립재활원	1670-5529 (내선 1번)	정보통신보조기기 상설 체험관 정보통신보조기기 가상 체험관 www.knat.go.kr ▶ 전시장VR체험
경주시장애인종합복지관	054-776-7522	정보통신보조기기 상설 체험관

Q07 보급대상자 선정은 어떻게 하나요?

- A:** 보급대상자는 관할 지자체에서 신청서, 활용계획서, 심층상담기록지(해당하는 경우), 평가기준 등을 종합적으로 고려하여 선정합니다.
- 보급대상자는 장애수준, 경제적여건, 활용도 등을 종합적으로 고려하여 선정하고, 세부적인 선정방법 및 기준은 보급사업 공지시 안내해 드리고 있습니다.
 - 보급대상자 선정결과는 주소지 관할 17개 광역시·도에서 홈페이지 공지 또는 개별 통보를 통해 알려드립니다.
- ※ 홈페이지를 통해 결과 확인이 어렵거나 보급 관련 상담이 필요한 경우에는 상담전화(1588-2670) 또는 해당 업체에 문의

Q08 개인부담금은 언제 납부하나요?

A: 보급대상자로 선정되신 분은 발표일로부터 15일 이내에 지정된 계좌로 개인부담금(보조기기 가격의 10~20%)을 납부하여야 합니다.

- 해당기간 이내에 개인부담금을 납부하지 않을 경우 보급 의사가 없는 것으로 간주하여 보급대상에서 제외됩니다.

※ 개인부담금 납부 계좌 및 연락처는 추후 공지사항 및 안내문 발송을 통해 안내해 드립니다.

Q09 제품을 받은 후 제출해야 하는 서류가 있나요?

A: 제품의 배송 및 설치는 개인부담금 납부 이후 실시되며, 제품을 수령한 경우 제품사양, 구성품목, 작동 상태 등을 확인한 뒤 수령확인증 (방문설치 제품) 제출

2026 정보통신보조기기 접수처(전국190곳)

지역	접수처	주소	담당부서	연락처
서울	강남구청	(06090) 서울 강남구 학동로 426 (삼성동, 강남구청)	스마트정보과 정보통신팀	02-3423-5345
	강동구청	(05397) 서울 강동구 성내로 25 (성내동, 강동구청)	장애인복지과 장애인자립지원팀	02-3425-5693
	강북구청	(01073) 서울 강북구 도봉로323 용심빌딩 5층 (수유동, 강북구청 임시청사)	디지털정보과 정보통신보안팀	02-901-7216
	강서구청	(07658) 서울 강서구 화곡로 302 화곡동, 강서구청	스마트정보과 전산운영팀	02-2600-6705
	관악구청	(08832) 서울 관악구 관악로 145 (봉천동, 관악구청)	스마트정보과 전산운영팀	02-879-5283
	광진구청	(05050) 서울 광진구 아차산로 400 자양동, 광진구청	스마트정보과 스마트정보기획팀	02-450-7216
	구로구청	(08284) 서울 구로구 가마산로 245 구로동, 구로구청	스마트도시과 스마트전산팀	02-860-2929
	금천구청	(08611) 서울 금천구 시흥대로73길 70 시흥동, 금천구청종합청사	소통담당관 시빅데이터팀	02-2627-1118
	노원구청	(01689) 서울 노원구 노해로 437 상계동, 노원구청	안전도시과 전산운영팀	02-2116-3435
	도봉구청	(01331) 서울 도봉구 마들로 656 방학동, 도봉구청	스마트혁신과 전산운영팀	02-2091-2482
	동대문구청	(02565) 서울 동대문구 천호대로 145 용두동, 동대문구청	스마트도시과 스마트도시기획팀	02-2127-4059
	동작구청	(06963) 서울 동작구 장승배기로10길 42 상도동, 동작문화복지센터 2층	스마트행정과 전산운영팀	02-820-9863
	마포구청	(03937) 서울 마포구 월드컵로 212 성산동, 마포구청	스마트정책과 정보통신팀	02-3153-8427
	서대문구청	(03718) 서울 서대문구 연희로 248 연희동, 서대문구청	스마트정보과 정보기획팀	02-330-8879
	서초구청	(06750) 서울 서초구 남부순환로 2584 서초동, 서초구청	스마트도시과 정보통신팀	02-2155-6426
	성동구청	(04750) 서울 성동구 고산자로 270 행당동, 성동구청	정보통신과 통신보안팀	02-2286-5176
	성북구청	(02848) 서울 성북구 보문로 168 (삼선동5가, 성북구청)	홍보전산과 정보화운영팀	02-2241-4539
	송파구청	(05552) 서울 송파구 올림픽로 326 (신천동, 송파구청)	첨단도시과 첨단도시팀	02-2147-2435
	양천구청	(08095) 서울 양천구 목동동로 105 (신정동, 양천구청)	스마트정보과 디지털운영팀	02-2620-3246
	영등포구청	(07260) 서울 영등포구 당산로 123 당산동3가, 영등포구청)	도시안전과 정보통신팀	02-2670-4273
용산구청	(04390) 서울 용산구 녹사평대로 150 (이태원동, 용산구종합행정타운)	스마트정보과 전산운영팀	02-2199-6643	
은평구청	(03384) 서울 은평구 은평로 195 (녹번동, 은평구청)	스마트정보과 스마트기획팀	02-351-6353	
종로구청	(03158) 서울 종로구 삼봉로 94 (공평동, 94빌딩)	디지털행정과 정보운영팀	02-2148-1765	
중구청	(04558) 서울 중구 창경궁로 17 예관동, 중구청 디지털정책과	디지털정책과 전산운영팀	02-3396-4704	
중랑구청	(02043) 서울 중랑구 봉화산로 179 신내동, 중랑구청	행정지원과 정보화운영팀	02-2094-0379	
부산	강서구청	(46702) 부산 강서구 낙동북로 477 대저1동, 강서구청 민원지원과	민원지원과	051-970-4301
	금정구청	(46274) 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청)	재무과	051-519-4301
	기장군청	(46077) 부산 기장군 기장읍 기장대로 560 신천리, 기장군청 민원여권과	민원여권과	051-709-4306
	남구청	(48452) 부산 남구 못골로 19 대연동, 남구청 홍보담당관	홍보담당관	051-607-4301
	동구청	(48781) 부산 동구 구청로 1 수정동, 동구청 민원여권과	민원여권과	051-440-4301
	동래구청	(47808) 부산 동래구 총렬대로237번길 93 복천동, 동래구청 체육홍보과	체육홍보과	051-550-4301
	부산진구청	(47193) 부산 부산진구 시민공원로 30 (부암동, 부산진구청)	재무과	051-605-4301

지역	접수처	주소	담당부서	연락처
부산	북구청	(46504) 부산 북구 낙동대로1570번길 33 구포동, 북구청 재무과	재무과	051-309-4301
	사상구청	(46985) 부산 사상구 학감대로 242 감전동, 사상구청 자치행정과	자치행정과	051-310-4301
	사하구청	(49328) 부산 사하구 낙동대로398번길 12 당리동, 사하구청 미디어홍보과	미디어홍보과	051-220-4301
	서구청	(49247) 부산 서구 구덕로 120 토성동4가, 서구청 교육진흥과	교육진흥과	051-240-4301
	수영구청	(48305) 부산 수영구 남천동로 100 남천동, 수영구청 행정지원과	행정지원과	051-610-4301
	연제구청	(47605) 부산 연제구 연제로 2 연산동, 연제구청 소통미디어과	소통미디어과	051-665-4301
	영도구청	(49011) 부산 영도구 태종로 423 청학동, 영도구청 민원데이터과	민원데이터과	051-419-4301
	중구청	(48926) 부산 중구 중구로 120 대청동1가, 중구청 재무과	재무과	051-600-4301
	해운대구청	(48095) 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청)	총무과	051-749-4306
대구	중구청	(700-701) 대구 중구 국채보상로139길 1	혁신사업홍보과	053-661-2487
	동구청	(701-701) 대구 동구 아양로 207	홍보전산과	053-662-2462
	서구청	(703-701) 대구 서구 국채보상로 257	문화홍보과	053-663-2467
	남구청	(705-702) 대구 남구 이천로 51 2층	홍보미디어과	053-664-2468
	북구청	(702-705) 대구 북구 옥산로 65	정보통신과	053-665-2454
	수성구청	(706-701) 대구 수성구 달구벌대로 2450	정보통신과	053-666-2452
	달서구청	(704-702) 대구 달서구 학산로 45	디지털정보과	053-667-2454
	달성군청	(711-790) 대구 달성군 논공읍 달성군청로 33	정보통신과	053-668-2463
	군위군청	(43113) 대구 군위군 군위읍 군청로 200(동부리, 군위군청)	총무과	054-380-6073
시청	(41542) 대구 북구 연암로 40 110동 3층(산격동, 대구청별관)	지능정보화담당관	053-803-3616	
인천	중구청	(22315) 인천 중구 신포로27번길 80 관동1가, 중구청 홍보체육실	홍보체육실	032-760-7095
	동구청	(22556) 인천 동구 금곡로 67 송림동, 동구청 홍보체육과	홍보체육과	032-770-6255
	미추홀구청	(22169) 인천 미추홀구 독성리로 95 (송의동, 미추홀구청)	미디어홍보실	032-880-4087
	연수구청	(21967) 인천 연수구 원인재로 115 동춘동, 연수구청 스마트정보과	스마트정보과	032-749-6823
	남동구청	(21589) 인천 남동구 소래로 633 만수동, 남동구청 정보통신과	정보통신과	032-453-2125
	부평구청	(21354) 인천 부평구 부평대로 168 (부평동, 부평구청)	홍보담당관	032-509-8676
	계양구청	(21067) 인천 계양구 계산새로 88 (계산동, 계양구청)	홍보미디어실	032-450-5084
	서구청	(22726) 인천 서구 서곶로 307 심곡동, 서구청 정보통신과	정보통신과	032-560-4085
	강화군청	(23031) 인천 강화군 강화읍 강화대로 394 (관창리, 강화군청)	자치교육과	032-930-3461
	옹진군청	(22193) 인천 미추홀구 매소홀로 120 용현동, 옹진군청 재난안전과	재난안전과	032-899-2083
광주	광주광역시청	(61945) 광주광역시 서구 내방로 111 광주광역시청 데이터정보화담당관실	데이터정보화담당관실	062-613-2615
대전	대전광역시청	(35242) 대전 서구 둔산로 100	정보화정책과	042-270-3214
울산	울산광역시청	(44675) 울산 남구 중앙로 201	정보화담당관	052-229-2345
세종	세종특별자치시청	(30151) 세종특별자치시 한누리대로 2130	인공지능디지털담당관	044-300-2413

지역	접수처	주소	담당부서	연락처
경기	가평군청	(12417) 경기 가평군 가평읍 석봉로 181 가평군청 4층	자치행정과	031-580-4660
	고양시청	(10460) 경기 고양시 덕양구 고양시청로 10 본관4층	정보통신담당관	031-8075-2553
	과천시청	(13806) 경기 과천시 관문로 69, 별관2, 2층	사회복지과	02-3677-2211
	광명시청	(14234) 경기 광명시 시청로 20, 본관3층	정보통신과	02-2680-6302
	광주시청	(12738) 경기 광주시 행정타운로 50, 5층	디지털정보담당관	031-760-2758
	구리시청	(11954) 경기 구리시 아차산로 439, 본관6층	정보통신과	031-550-2300
	군포시청	(15829) 경기 군포시 청백리길 6, 2층	스마트정보과	031-390-0761
	김포시청	(10109) 경기 김포시 사우중로 1, 정보관2층	정보통신과	031-980-2384
	남양주시청	(12232) 경기 남양주시 경춘로 1037, 본관4층	정보통신과	031-590-2088
	동두천시청	(11317) 경기 동두천시 방죽로 23, 본관3층	정보통신과	031-860-2085
	부천시청	(14547) 경기 부천시 길주로 210, 4층	정보통신과	032-625-2403
	성남시청	(13437) 경기 성남시 중원구 성남대로 997, 동관8층	정보통신과	031-729-2415
	수원시청	(16490) 경기 수원시 팔달구 효원로 241, 별관8층	디지털정책과	031-228-2671
	시흥시청	(14998) 경기 시흥시 시청로 20, 4층	정보통신과	031-310-3713
	안산시청	(15335) 경기 안산시 단원구 화랑로 387, 4층	정보통신과	031-481-3010
	안성시청	(17586) 경기 안성시 시청길 25, 본관3층	정보통신과	031-678-2282
	안양시청	(14053) 경기 안양시 동안구 시민대로 235, 8층	정보통신과	031-8045-5133
	양주시청	(11498) 경기 양주시 부흥로 1533, 4층	정보통신과	031-8082-5364
	양평군청	(12554) 경기 양평군 양평읍 군청앞길 2, 본관5층	데이터정보과	031-770-2973
	여주시청	(12619) 경기 여주시 세종로 1, 4층	정보통신과	031-887-2085
	연천군청	(11017) 경기 연천군 연천읍 연천로 220, 본관3층	미디어콘텐츠과	031-839-2083
	오산시청	(18132) 경기 오산시 성호대로 141, 4층	정보통신과	031-8036-7372
	용인시청	(17019) 경기 용인시 처인구 중부대로 1199, 6층	정보통신과	031-6193-2906
	의왕시청	(16075) 경기 의왕시 시청로 11, 행정동3층	정보통신과	031-345-2153
	의정부시청	(11622) 경기 의정부시 시민로 1, 본관3층	디지털정보과	031-828-2604
	이천시청	(17379) 경기 이천시 부악로 40, 6층	정보통신담당관	031-644-2087
	파주시청	(10932) 경기 파주시 시청로 50, 신관3층	정보통신과	031-940-5334
	평택시청	(17901) 경기 평택시 경기대로 245, 본관3층	정보통신과	031-8024-2412
	포천시청	(11149) 경기 포천시 중앙로61번길 9-6, 별관 제4별관 2층	정보통신과	031-538-2087
	하남시청	(12951) 경기 하남시 대청로 10, 별관4층	정보통신과	031-790-5363
	화성시청	(18274) 경기 화성시 남양읍 시청로 159, 본관3층	정보통신과	031-5189-6507
	강원	강원특별자치도청	(24266) 강원특별자치도 춘천시 중앙로 1 신관 1층 지능정보정책과	지능정보정책과
충북	괴산군청	(28026) 충북 괴산군 괴산읍 임격정로 90	행정과	043-830-3774
	단양군청	(27010) 충북 단양군 단양읍 중앙1로 10	자치행정과	043-420-2534

지역	접수처	주소	담당부서	연락처	
충북	보은군청	(28937) 충북 보은군 보은읍 군청길 38	행정운영과	043-540-3124	
	영동군청	(29140) 충북 영동군 영동읍 동정로 1	행정과	043-740-3185	
	옥천군청	(29032) 충북 옥천군 옥천읍 중앙로 99	행정과	043-730-3105	
	음성군청	(27690) 충북 음성군 음성읍 중앙로 173	홍보실	043-871-3205	
	제천시청	(27188) 충북 제천시 내토로 295	스마트정보과	043-641-5762	
	증평군청	(27927) 충북 증평군 증평읍 광장로 88	디지털홍보담당관	043-835-4964	
	진천군청	(27832) 충북 진천군 진천읍 상산로 13	홍보미디어실	043-539-3188	
	청주시청	(28501) 충북 청주시 청원구 상당로 314, 문화제조창 2층 (내덕동)	정보통신과	043-201-1315	
	충주시청	(27339) 충북 충주시 으뜸로 21	정보통신과	043-850-5315	
충남	천안시청	(31162) 충남 천안시 서북구 번영로 156 (불당동, 천안시청)	스마트정보과	041-521-5192	
	공주시청	(32552) 충남 공주시 봉황로 1 (봉황동, 공주시청)	스마트정보과	041-840-8944	
	보령시청	(33483) 충남 보령시 성주산로 77 (명천동, 보령시청)	홍보미디어실	041-930-3184	
	아산시청	(31512) 충남 아산시 시민로 456 (온천동, 아산시청)	정보통신과	041-540-2691	
	서산시청	(31974) 충남 서산시 관아문길 1 (읍내동, 서산시청)	스마트정보과	041-660-2635	
	논산시청	(32987) 충남 논산시 시민로210번길 9 (내동, 논산시청)	디지털정보과	041-746-5255	
	계룡시청	(32823) 충남 계룡시 장안로 46 (금암동, 계룡시청)	자치행정과	042-840-2143	
	당진시청	(31773) 충남 당진시 시청로 1 (수청동, 당진시청)	민원정보과	041-350-3303	
	금산군청	(32733) 충남 금산군 금산읍 군청길 13 (상리, 금산군청)	기획예산과	041-750-4043	
	부여군청	(33168) 충남 부여군 부여읍 사비로 33 (동남리, 부여군청)	기획감사담당관	041-830-2038	
	서천군청	(33638) 충남 서천군 서천읍 군청로 57 (군사리)	시설정보과	041-950-4053	
	청양군청	(33323) 충남 청양군 청양읍 문화예술로 222 (송방리, 청양군청)	행정지원과	041-940-2693	
	홍성군청	(32228) 충남 홍성군 홍성읍 아문길 27 (오관리, 홍성군청)	홍보전산담당관	041-630-1634	
	예산군청	(32435) 충남 예산군 예산읍 군청로 22 (예산리, 예산군청)	자치행정과	041-339-7249	
	태안군청	(32144) 충남 태안군 태안읍 군청로 1 (남문리, 태안군청)	행정지원과	041-670-2186	
	천안시 동남구청	(31131) 충남 천안시 동남구 옛시청길 39 (문화동)	자치행정과	041-521-4063	
	천안시 서북구청	(31049) 충남 천안시 서북구 성거읍 봉주로 75 (신월리, 서북구청)	자치행정과	041-521-6062	
	전북	전북특별 자치도청	(54968) 전북 전주시 완산구 효자로 225	정보화총괄과	063-280-2598
	전남	목포시청	(58613) 전남 목포시 양율로 203 스마트정보과	스마트정보과	061-270-8550
		여수시청	(59675) 전남 여수시 시청로 1 학동, 여수시청 본청사	스마트정보과	061-659-5506
순천시청		(57956) 전남 순천시 장명로 30 장천동, 순천시청	디지털정책과	061-749-5714	
나주시청		(58263) 전남 나주시 시청길 22 송월동, 나주시청	총무과	061-339-8455	
광양시청		(57785) 전남 광양시 시청로 33 디지털정보과	디지털정보과	061-797-2464	
담양군청		(57339) 전남 담양군 담양읍 추성로 1371 객사리, 담양군청	행정과	061-380-3191	
곡성군청		(57536) 전남 곡성군 곡성읍 군청로 50 읍내리, 곡성군청	행정과	061-360-2733	

지역	접수처	주소	담당부서	연락처
전남	구례군청	(57656) 전남 구례군 구례읍 봉성로 1 봉남리, 구례군청	총무과	061-780-2399
	고흥군청	(59542) 전남 고흥군 고흥읍 고흥군청로 1 재무과	재무과	061-830-5030
	보성군청	(59455) 전남 보성군 보성읍 송재로 165 총무과	총무과	061-850-5141
	화순군청	(58112) 전남 화순군 화순읍 동현길 23 (훈리, 화순군청)	자치행정과	061-379-3342
	장흥군청	(59328) 전남 장흥군 장흥읍 장흥로 21 총무과	총무과	061-860-5612
	강진군청	(59228) 전남 강진군 강진읍 탐진로 111 총무과	총무과	061-430-3602
	해남군청	(59028) 전남 해남군 해남읍 군청길 4 총무과	총무과	061-530-5699
	영암군청	(58415) 전남 영암군 영암읍 군청로 1 홍보전략실	홍보담당관	061-470-2300
	무안군청	(58532) 전남 무안군 무안읍 무안로 530 성동리, 무안군청	자치행정과	061-450-5324
	함평군청	(57149) 전남 함평군 함평읍 중앙길 200 총무과	총무과	061-320-1544
	영광군청	(57036) 전남 영광군 영광읍 중앙로 203 총무과	총무과	061-350-5292
	장성군청	(57219) 전남 장성군 장성읍 영천로 200 총무과	총무과	061-390-7299
	완도군청	(59124) 전남 완도군 완도읍 청해진남로 51 군내리, 완도군청	행정지원과	061-550-5202
	진도군청	(58915) 전남 진도군 진도읍 철마길 25 (성내리, 진도군청)	총무과	061-540-3255
신안군청	(58827) 전남 신안군 압해읍 천사로 1004 행정지원과	행정지원과	061-240-8253	
경북	경산시청	(38617) 경북 경산시 남매로 159(중방동 701-17	디지털정책과	053-810-5173
	경주시청	(38102) 경북 경주시 양정로 260동천동 800 디지털정책과	디지털정책과	054-779-6189
	고령군청	(40138) 경북 고령군 고령읍 왕릉로 55 지역경제실	지역경제실	054-950-6304
	구미시청	(39281) 경북 구미시 송정대로 55 송정동, 구미시청, 정보통신과	정보통신과	054-480-6652
	김천시청	(39532) 경북 김천시 시청1길 1 (산음동, 김천시청)	시데이터과	054-420-6478
	문경시청	(36982) 경북 문경시 당교로 225 홍보전산과	홍보전산과	054-550-6054
	봉화군청	(36239) 경북 봉화군 봉화읍 봉화로 1111 총무과	총무과	054-679-6602
	상주시청	(37211) 경북 상주시 상산로 223 남성동, 상주시청	기획예산실	054-537-7021
	성주군청	(40022) 경북 성주군 성주읍 성주로 3200 경제교통과	경제교통과	054-930-6304
	안동시청	(36691) 경북 안동시 퇴계로 115명륜동 스마트정보과	스마트정보과	054-840-6077
	영덕군청	(36429) 경북 영덕군 영덕읍 군청길 116 홍보소통과	홍보소통과	054-730-6074
	영양군청	(36537) 경북 영양군 영양읍 군청길 37 자치행정과	자치행정과	054-680-6943
	영주시청	(36132) 경북 영주시 시청로 1후천2동 470 홍보전산실	홍보전산실	054-639-6444
	영천시청	(38856) 경북 영천시 시청로 16 (문외동 27)	홍보전산실	054-330-6776
	예천군청	(36822) 경북 예천군 예천읍 충효로 111 홍보소통과	홍보소통과	054-650-6073
	울릉군청	(40222) 경북 울릉군 울릉읍 도동2길 66 기획감사실	기획감사실	054-790-6301
	울진군청	(36323) 경북 울진군 울진읍 울진중앙로 121 읍내리, 울진군청	총무과	054-789-6352
	의성군청	(37337) 경북 의성군 의성읍 군청길 31 후죽리	홍보과	054-830-6074
	청도군청	(38330) 경북 청도군 화양읍 청화로 70 범곡리, 청도군청	총무과	054-370-6072

지역	접수처	주소	담당부서	연락처
경북	청송군청	(37427) 경북 청송군 청송읍 군청로 51 소통홍보과	소통홍보과	054-870-6074
	칠곡군청	(39888) 경북 칠곡군 왜관읍 군청1길 80왜관리 177-1 정보통신실	정보통신실	054-979-6352
	포항시청	(37683) 경북 포항시 남구 시청로1 대잠동 1001 정보통신과	정보통신과	054-270-2284
경남	경남도청	(51154) 경남 창원시 의창구 중앙대로 300	정보통신담당관	055-211-2616
	거제시청	(53257) 경남 거제시 계룡로 125	정보통신과	055-639-4015
	거창군청	(50132) 경남 거창군 거창읍 중앙로 103	행정과	055-940-3204
	고성군청	(52943) 경남 고성군 고성읍 성내로 130	행정과	055-670-2134
	김해시청	(50924) 경남 김해시 김해대로 2401	정보통신과	055-330-3274
	남해군청	(52425) 경남 남해군 남해읍 망운로9번길 12	행정과	055-860-3134
	밀양시청	(50420) 경남 밀양시 밀양대로 2047	정보통신과	055-359-5622
	사천시청	(52539) 경남 사천시 용현면 시청로 77	정보통신과	055-831-2313
	산청군청	(52221) 경남 산청군 산청읍 산엔청로 1	행정과	055-970-6153
	양산시청	(50624) 경남 양산시 중앙로 39	정보통신과	055-392-2345
	의령군청	(52140) 경남 의령군 의령읍 충익로 63	행정과	055-570-2155
	진주시청	(52789) 경남 진주시 동진로 155	정보통신과	055-749-8404
	창녕군청	(50317) 경남 창녕군 창녕읍 군청길 1	행정과	055-530-1246
	창원시청	(51435) 경남 창원시 성산구 중앙대로 151	디지털정책담당관	055-225-2426
	통영시청	(650-800) 경남 통영시 해미당1길 33(무전동)	정보통신과	055-650-2754
	하동군청	(52333) 경남 하동군 하동읍 군청로 23	행정과	055-880-2176
	함안군청	(52043) 경남 함안군 가야읍 말산로 1	행정과	055-580-2123
	함양군청	(50036) 경남 함양군 함양읍 고운로 35	행정과	055-960-4244
	합천군청	(50231) 경남 합천군 합천읍 동서로 119	행정과	055-930-3089
	제주	제주특별자치도청	(63122) 제주특별자치도 제주시 문연로 6	디지털혁신과

“
잘 보이지 않지만
스마트한 디지털 세상에선
볼 수 있어요!
”



OCR 장치

- 강한손 보이고 42
- 노바캠리더 43
- 설리번 아이 44
- 설리번 플러스 프로 45
- 소리안썬더3 (Sorlan Thunder3) 46
- 올캠 리드 47
- 올캠 마이리더 SE 48
- 소리안맥스 49
- 올캠-마이아이 안경형 리더 50

데이지플레이어

- 책마루3 51

신호장치

- 강한손 티티 52

영상확대시스템

- 아이케인 2026 53
- 강한손 이지스 울트라 54
- 고비전 무브 55
- 다빈치 Pro 56
- 루비5 XL HD 57
- 리보탭 울트라 58
- 매그니링크 59
- 머린 엘리트 Pro 60
- 미러패드프로 61
- 미러패드플러스 62
- 베오(Veo) 63
- 소리안탭3 64
- 아미고 HD 65
- 아이러뷰 13 스마트 AI 에디션 66

영상확대시스템

- 아이러뷰 16프리미엄스마트 67
- 시에디션 67
- 아이러뷰 MAX 프리미엄 68
- 스마트 AI 에디션 68
- 올캠 탭 69
- 캔디6 70
- 컴팩10HD 71
- 컴팩7 HD 72
- 클로버 노트 73
- 클로버 북프로 74
- 클로버10 HD 75
- 클로버6 HD 76
- 클리어뷰 C 24 HD 77
- 페블 HD 78
- 포터비전 (PortaVision) 79
- 플로워북 80
- 플로워웍스 광학줌 81

점자교육용보조기기

- 디지털 점자학습기 (M25-01) 82

점자정보단말기

- 뉴포트브레일 83
- 한소네6 미니 84
- 한소네7 32셀 85
- 한소네7 40셀 86

점자출력기

- 매직브레일(Magic Braille) 87
- 식스닷(점자라벨메이커) 88

촉각디스플레이

- 닷패드 89
- 브레일 이모션 90

터치모니터

- 27인치화면확대터치모니터 91
- 강한손 확대 터치모니터 32인치 92

특수키보드

- 리보3S 93
- 리보미니 94

화면낭독S/W

- 센스리더 베이직 95
- 센스리더 어센드 96
- 센스원 97

화면확대S/W

- 숲나무 (Sync View-Tree in the forest) 98
- 플로워리더 광학줌 99

확대용 돋보기

- VES 100

기타

- 시아토뷰어(AIATOViever) 101
- 온기소리 2026 102

강한손 보이고 [시각장애유형 | OCR 장치]



제품개요 NVDA 기반의 M-vision 전용 스크린리더가 탑재된 단말기로 카메라와 연결하여 문자 인쇄물의 간편한 문자인식과 화면 확대 기능을 지원하고 PC화면을 읽어주는 보조기기

개인부담금 일반 810,000원 / 기초수급대상·차상위계층 252,500원

제 조 원 (주)엠브이아이 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)엠브이아이 / 담당자 : 원대호
대전광역시 유성구 테크노2로 199 405호 (용산동, 주식회사 엠브이아이)
Tel : 042-826-4358 / FAX : 042-826-4359 / www.mvi.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 313080-01-001137 예금주명 : (주)엠브이아이

✓ 제품사양

- [화면확대 H/W 본체]
카메라 : 800만 화소 접이식
크기 : 358x16.8x228mm
무게 : 980g
- [화면확대 S/W]
배율 : 시기본 독서/화면 확대, 음성 출력, OCR
대비 : 고대비 색상모드 지원
- [전용 단말기]
정품인증 : 인터넷 기반 디지털 인증서
CPU : Intel i5 이상
RAM : 8GB 이상
SSD : 256GB
OS : Windows 11
- [스크린 리더]
M-vision 스크린리더
(NVDA 기반 제품)

✓ 구성품목

- 본체(카메라) 1대
- 전용 단말기 1대
- 점자 및 문자 매뉴얼 1부

✓ 주요기능

- 고성능 문자인식을 기반으로 95% 이상의 문서 인식을 제공
- NVDA 기반으로 자체 개발한 M-vision 스크린리더 탑재
- 한국형 웹접근성 지침을 준수한 인터넷 기능 개발
- 안정적 구조의 접이식 카메라로 다양한 환경에서 사용 가능
- 별도 충전 장비나 복잡한 설치 프로그램 없이 간편하게 설치 및 작동
- 단축키 인터페이스를 제공하여 쉽고 직관적으로 사용 가능
- 인식된 문서를 텍스트로 전환하여 문서 편집 가능
- 종종 저시력도 사용가능한 화면 확대 기능 제공

✓ 제품특징

- 광학문자판독(M-vision)
- 인쇄물을 촬영, 이미지 인식 후 문자를 음성 출력
- 안정적 구조의 접이식 본체
- 시각장애인이 안정적으로 문서 확인 가능
- M-vision 스크린리더(NVDA 기반 개발) 탑재

✓ 활용방안(기대효과)

- 공문서, 결재서류, 업무 매뉴얼, 학습 등 인쇄물 판독이 필요한 모든 곳에 적용 가능
- 시각장애인의 재할 및 정보 접근 가능한 OCR 기능 제공(문자를 음성으로 전환)
- 각종 문자 인쇄물에 대한 수시 저장 및 출력 가능
- 어떠한 환경에서도 즉시 사용이 가능하도록 휴대가 용이함

✓ 사용가능대상

- PC 활용이 가능한 시각장애(중증~경증)

✓ 사용방법

- 전용 단말기의 전원을 켜 후, 바탕화면에 있는 전용 프로그램 실행
- 접혀서 제공되는 제품 본체를 펼 후 USB 케이블을 이용하여 본체와 전용 단말기를 연결
- 카메라 밑에 내용을 확인하고자 하는 인쇄물 위치
- 단축키를 이용하여 광학문자판독 기능 실행

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ **최초출시일** : 2021년 11월 30일

✓ **최근 업그레이드** : 2025년 7월 4일

노바캠리더 [시각장애유형 | OCR 장치]



제품개요 시각장애인에게 휴대용 정보기기 및 광학문자 판독기능으로 학교, 직장 생활에서 정보접근을 향상하게 하는 OCR 장치

개인부담금 일반 720,000원 / 기초수급대상·차상위계층 230,000원

제 조 원 (주)셀바스헬스케어 / 한국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 방문설치

납 품 기 간 21일

납 품 자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지

대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)

Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기 : 358 x 16.8 x 228 mm (USB카메라: 82 x 340 x 82 mm)
- 무게 : 1.35kg (USB카메라: 0.6kg)
- CPU/HDD/RAM : 인텔 코어 울트라 7 / SSD 512GB / RAM 16GB
- 노바캠 카메라 : 800만 화소(접이식 카메라)
- 운영체제 : Window 11 Pro
- 스크린리더 : 센스리더 더 넥스트
- TTS : Selvy TTS, Voiceware TTS 한국어(남성/여성), 영어(남성/여성)
- OCR : 한국어, 영어 지원

✓ 구성품목

- 본체 1대(노트북)
- 전원어댑터 1개
- 센스리더 더 넥스트 설치
- 이어폰 1개

✓ 주요기능

- OCR(문자인식)기능 : 최대 A3 사이즈의 인쇄물을 쉽고 빠르게 판독하여 음성으로 읽어 줌
- 노바캠리더 Luncher 설치를 통해 효과적인 정보습득 가능
- 단순 문자/문서 인식 후 음성 출력만이 아닌, 학습 및 직장 생활에서 필수적인 SW 사용을 할 수 있도록 지원
- 인터넷 자료 검색 및 전자 메일, 다양한 멀티미디어 재생 가능

✓ 제품특징

- 상황과 장소에 구애받지 않고, 언제 어디서나 휴대하여 손쉽게 사용가능한 시각장애인용 문자/문서 인식 및 음성 변환 출력
- 스크린리더(센스리더 더 넥스트)의 기본 탑재로 시각장애인의 독립적인 PC 사용 가능
- OCR(문자인식)기능으로 인쇄물의 문자를 빠르고 정확하게 판독하여 음성으로 읽어 줌
- 한국어, 영어 TTS 탑재로 문서, 화면의 언어에 맞게 음성 출력
- 제품이 가볍고 휴대하기 간편

✓ 활용방안(기대효과)

- 직장, 학교 등에서 시각장애인에게 원활한 정보접근을 가능하게 함.

✓ 사용가능대상

- 전체 시각장애인(시각장애 1~6급)

✓ 사용방법

- 노트북과 카메라 연결
- 노트북 전원을 켜
- 센스리더 더 넥스트 자동 실행
- 보고자하는 문서/책/인쇄물 등을 올려놓고 카메라를 통해 인식 후, 음성 듣기
- 문서/파일 편집, 인터넷 검색 다양한 응용 프로그램을 선택 및 실행하여 활용 및 음성 듣기
- 데스크탑형으로 설치할 수 있는 일정 공간이 필요함

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2016년 3월 31일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 3월

설리번 아이 [시각장애유형 | OCR 장치]



제품개요 설리번아이는 시각장애인들의 생활 속에 가장 필요한 기능들을 하나의 제품 안에 담은 최신시 기반의 웨어러블 시각보조 기기입니다. 심플하고 세련된 디자인, 양손이 자유롭게 하는 편의성, 시를 이용한 문자인식 및 현재 상황 분석 그리고 상황에 대한 질의 응답까지 모든 것이 웨어러블 기기 하나로 이루어집니다.

개인부담금 일반 330,000원 / 기초수급대상·차상위계층 132,500원

제조원 (주)투아트 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배 배송

납품기간 14일

납품자 (주)투아트 / 담당자 : 성준우
(41585) 대구광역시 북구 호암로51, 대구창조경제혁신센터 2층 투아트
Tel : 053-254-1895 / Mobile : 010-4510-2181

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0003-69594 예금주명 : 주식회사 투아트

✓ 제품사양

- 재질 : 플라스틱
- 크기/무게 : 95 x 18 x 13 mm / 28g
- 전원 : 450mAh (고속충전지원, 평균사용 1일)
- 기타 : 500만화소카메라, 내장마이크 및 스피커, USB-C충전, 음성인식, 블루투스, WiFi

✓ 구성품목

- 설리번 아이 본체 (웨어러블 시 카메라)
- 거치 전용 안경
- 충전 케이블 (USB-C 타입)
- 사용 설명서 및 보증서

✓ 주요기능

- AI 기능 : 대화형AI와 카메라를 통해 뉴스, 웹검색 뿐만 아니라 직무교육과 활용, 상황분석 및 제안, 제품 분석이 가능한 새롭고 혁신적인 기능
- 인식 기능 : 현금인식, 색상감지, 빛감지, 장면설명, QR코드스캔 등 실생활용 세부 기능
- 읽기 기능 : 세분화된 OCR 음성변환 기능으로 간판,메뉴,제품 이름에서부터 책이나 복잡한 서류까지도 스캔 후 한번에 읽기가 가능
- 찾기 기능 : 특정 대상을 찾아서 알려주는 기능

✓ 제품특징

- 안경에 거치하는 웨어러블 형태 초경량 디자인
- 블루투스와 와이파이를 이용하여 외부연결선 없이 사용가능
- 최신시와 연동하여 정보검색 및 문서, 장면 설명
- 글,색상,사람,사물,외부상황 등 다양한 인식기능
- 음성명령 또는 버튼을 이용한 간단한 사용법

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각장애인들의 업무나 생활에 시각보조도우미의 역할을 하는 제품으로 외부의 도움이 없는 상황에서도 쉽게 상황을 판단하고 실행할 수 있게 하여 독립적인 생활이 가능하게 해 줍니다. 또한 시각장애인들이 간편하게 전문지식 교육을 가능하게 하고, 외부 이동시, 물품구입 등 여러 활동 시에도 자립하도록 도움을 주어 삶의 질을 향상시키며 사회참여도를 높여드립니다.

✓ 사용가능대상

- 경증 및 중증 시각장애인

✓ 사용방법

1. 기기부팅 (기기 하단의 전원 버튼을 2초간 누르면 기기 부팅됨)
2. (버튼촬영) 기기 상단의 촬영버튼을 가볍게 누르면 연속 촬영 모드 시작
3. (음성모드) 기기 상단의 촬영버튼을 1초간 누르면 음성인식 모드로 전환되고 음성으로 질의 응답가능
4. 기기종료시 전원버튼을 2초간 누르면 기기전원이 꺼짐

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

1. 직사광선이나 고온의 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
2. 기기를 떨어뜨리거나 밟지 않도록 주의하십시오.
3. 글래스를 사용하지 않을 때는 충격이 가지 않도록 보관하십시오.
4. 비누나 스프레이류의 세척제 사용을 피하십시오.

✓ 최초출시일 : 2026년 1월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 25일

설리번 플러스 프로 [시각장애유형 | OCR 장치]

자동 이미지 묘사

주변 환경을 자동으로 촬영하고 음성으로 안내해드립니다



문자 인식

촬영된 사진의 문자를 음성으로 읽어줍니다



제품개요 설리번 플러스 프로는 시각장애인의 눈이 되어주는 AI 기반 시각보조 음성안내 앱입니다. 스마트폰 카메라 하나로 주변 환경 묘사, 문자 인식, 물건 찾기까지 일상에서 마주하는 다양한 시각 정보를 음성으로 즉시 전달합니다. 촬영 버튼 한 번으로 연속 인식이 가능해 스마트폰 조작성 불편한 분도 쉽게 활용할 수 있으며, 실내외 어디서든 제한 없이 주변을 탐색하고 정보를 습득하여 보다 자립적인 삶을 지원합니다.

개인부담금 일반 66,000원 / 기초수급대상·차상위계층 33,000원

제 조 원 (주)투아트 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 앱 설치

납 품 기 간 5일

납 품 자 (주)투아트 / 담당자 : 성준우
(41585) 대구광역시 북구 호암로51, 대구창조경제혁신센터 2층 투아트
Tel : 053-254-1895 / Mobile : 010-4510-2181

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0003-69594 예금주명 : 주식회사 투아트

✓ 제품사양

- 안드로이드&iOS 앱 소프트웨어
- (안드로이드7.0 이상, iOS 17.6 이상 지원)

✓ 구성품목

- 안드로이드&iOS 앱 소프트웨어 이용권

✓ 주요기능

- 자동 이미지 묘사: 촬영 버튼을 한 번만 누르면 추가 조작 없이 주변 환경을 연속 탐색하여 정보를 음성으로 제공
- 문자 인식: 인쇄물, 고지서, 안내문 등 다양한 문서 내용을 촬영 즉시 음성으로 확인
- 물건 찾기: 온디바이스 AI 기술로 데이터 소모 없이 실시간으로 원하는 물건의 위치·방향 안내
- AI 모드: 주변 환경, 문자, 얼굴 인식 내용을 AI가 핵심 정보 중심으로 추출하여 음성 제공
- 부가 기능: 화면 확대, 색상 반전, 얼굴 인식, 색상 인식 등

✓ 제품특징

- 시각장애인이 일상생활 및 직업활동 시기를 활용하여 독립적으로 주변환경을 확인하고 탐색하도록 지원하는 AI 기반 시각보조 음성안내 솔루션
- 스마트폰 조작성 불편한 시각장애인을 위해 촬영 버튼 한 번으로 자동 연속 인식 구현
- 사용자가 활동하는 시간 동안 충분히 정보를 제공받을 수 있도록 넉넉한 사용 쿼터 설계
- 안드로이드&iOS 양 플랫폼 지원으로 기기 제약 없이 사용 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각장애인들의 업무나 생활에 시각 보조 도우미의 역할을 하는 앱으로, AI가 스마트폰 카메라를 통해 주변 환경을 실시간 분석하고 음성으로 즉시 전달함으로써 외부 도움 없이도 스스로 상황을 판단하고 독립적으로 행동할 수 있게 해줍니다.
- 인쇄물·고지서·생활용품 식별부터 물건 찾기, 외부 이동 시 안내판 확인, 물품 구입 등 다양한 일상 활동에서 자립을 돕고 삶의 질 향상 및 사회 참여도를 높여 드립니다.

✓ 사용가능대상

- 경증 및 중증 시각장애인

✓ 사용방법

1. 앱 마켓(Google Play 또는 App Store)에서 '설리번 플러스' 검색
2. 설리번 플러스 설치 후 실행
3. 음성 및 화면 터치로 통해 원하는 기능 실행(자동 이미지 묘사, 문자 인식, 물건 찾기 등)

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

1. 안정적인 인터넷(Wi-Fi 또는 모바일 데이터) 연결이 필요합니다.
2. 물건 찾기 기능은 온디바이스 방식으로 데이터 소모 없이 이용 가능합니다.

✓ **최초출시일** : 2018년 4월 1일

✓ **최근 업그레이드** : 2026년 3월 25일

소리안썬더3(Sorian Thunder3) [시각장애유형 | OCR 장치]



제품개요 AI기능을 통해 시각장애인 누구나 쉽게 사용할 수 있는 PC 기능을 가지며, 일반 목자를 TXT로 변환하고 음성으로 출력해주는 OCR 정보단말기

개인부담금 일반 840,000원 / 기초수급대상·차상위계층 260,000원

제조원 (주)어니스트비전 / 대한민국 **품질보증기간** 24개월

납품방법 방문 설치 **납품기간** 30일

납품자 (주)어니스트비전 / 담당자 : 권다솜
(21582) 인천광역시 남동구 선수촌공원로1 구월테크노밸리D동 805호
Tel : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / http://www.fsteck.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 103556-01-011371 **예금주명** : (주)어니스트비전

✓ 제품사양

- CPU : Ultra 7
- 메모리 : RAM 16GB DDR4
- 디스플레이 : 15.6인치 FHD AMOLED Display
- 저장장치 : 512GB SSD
- 네트워크 : Bluetooth / WiFi
- 포트 : HDMI, USB(A-type 1개, C-type 2개)
- 운영체제 : Window10 Home/Window11 Home
- OCR S/W : 소리안
- 스크린리더 S/W : 소리안리더
- OCR 카메라 사양
 - 화소 : 1300만화소
 - 센서 : CMOS
 - 크기 : 0.43인치

- 배터리가 탑재된 문서인식(OCR) 스크린리더 단말기
- 자체 개발 스크린리더(소리안리더) 탑재
- 일체형 문자인식 음성출력기로 입력방식으로 스캐너방식과 카메라 방식을 모두 사용(기존 제품은 두 방식 중 하나만 사용 가능)
- 인식된 문서를 편집할 수 있음(외산의 경우 읽기만 가능)
- 멀티미디어 기능 강화(MP3, MP4)

✓ 구성품목

- 소리안썬더3 1대 / OCR카메라 1개
- 어댑터 1개 / 목자매뉴얼 1부
- 점자매뉴얼 1부 / 가방 1개

✓ 활용방안(기대효과)

- AI기능을 통해 다양한 정보를 쉽게 접근
- 시각장애인들의 사회참여 확대 및 일상 생활의 불편함 해소
- 컴퓨터에 익숙하지 않은 시각장애인을 위해 AI기능을 적용해, 간편한 키보드 및 음성사용으로 자판과 IT에 익숙하지 않은 시각 장애인들도 쉽게 정보 접근이 가능

✓ 주요기능

- AI 기능이 탑재되어 카메라 기반 물건 인식 및 상황 맥락 분석을 통해 사물의 용도·특징을 음성으로 설명하는 지능형 객체 인식 기능 제공
- AI기능에 의해 일상적인 질문과 답변가능
- 배터리가 탑재된 문서인식(OCR) 단말기
- 인터넷 검색 기능 및 스크린리더 사용 가능
- 녹음 기능 및 모든 타입(MP3 & MP4)의 멀티미디어 파일 재생 가능
- 한글, 영문, 한자 (기본 4888자) 인식
- 캡처 후 빠른 시간 내 음성 변환 가능
- 1300만화소 카메라로 목자 및 외부 파일 변환 가능

✓ 사용가능대상

- 전맹 또는 모든 저시력 장애등급 (1급-6급까지 사용이 가능함)

✓ 사용방법

- ① 전원 스위치를 누르면 소리안썬더 시작 안내 메시지가 출력됨
- ② 소리안썬더 O/S 작동
- ③ 키패드를 이용해서 원하는 프로그램을 선택(파일 편집, 인터넷 URL 변경)
- ④ 소리안 프로그램 실행 후 소리안 카메라 실행한 후 OCR 작동시키면 TEXT 파일로 변환이 됨(단축키로 실행 가능)
- ⑤ 음성 및 단축키 및 사물인식 및 질의/응답

✓ 제품특징

- AI 기능 탑재하여 기존의 스크린리더 습득의 부담감을 현저히 감소
- 또한 스크린리더 사용시, 인터넷 검색 및 확인에 많은 시간이 필요하나 AI기능으로(음성명령) 간단히 검색이 가능
- 자체개발한 고성능 카메라 탑재

✓ 최소PC요구사항

- 별도 PC 필요 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2025년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

올캠 리드 [시각장애유형 | OCR 장치]



제 품 개 요 가벼운 무게로 항상 휴대하고 다닐 수 있는 실시간 OCR 장치

개 인 부 담 금 일반 440,000원 / 기초수급대상·차상위계층 160,000원

제 조 원 Orcam Technologies Ltd / 이스라엘 **품질보증기간** 24개월

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 21일

납 품 자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기: 12.2 x 2.5 x 1.3(cm)
- 배터리: 4시간(충전식)
- 무게: 44.5g
- 카메라: 13MP
- 음성출력
 - 내장 스피커
 - 인터페이스: 블루투스
 - 전력: 3.8V DC, 320mAh

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 보관 케이스 1개
- 충전어댑터 1개
- 목걸이 끈 1개
- 사용설명서 1개

✓ 주요기능

- 시각장애인을 위해 두꺼운 점자로 별도 인쇄하거나 읽어줄 필요 없이 시각장애인 스스로 묵자 인쇄물에 대한 정보접근 및 습득에 도움을 줌
- 시각장애인 근로자에게 가장 정보접근성이 떨어지는 인쇄된 문서의 내용을 한 번의 클릭으로 음성 안내함으로써 시각장애인과 비장애인의 문서 공유를 가능하게 함
- 빠르고 정확하게 인쇄물의 글씨를 음성으로 판독하여 쉽고 빠른 사무 활동 제공
- 인공지능 시각분석 알고리즘 탑재 : 피사체의 거리, 조도, 레이아웃을 자동계산하며 손가락으로 대상을 지시하여 인식 가능
- 휴대가 가능한 초경량 웨어러블 기기 : 44.5g의 가벼운 무게로 한 손에 들기 쉽고 어디서나 사용가능함

✓ 제품특징

- 44.5g의 휴대용이한 무게로 언제 어디서나 사용 가능
- OCR: 인쇄물의 문자를 판독하는 OCR 기능 탑재
- 레이저 가이드: 읽고 싶은 범위를 선택할 수 있는 레이저 형태 가이드 제공

✓ 활용방안(기대효과)

- 실시간 문자 판독으로 묵자 콘텐츠에 대한 시각장애인 접근증가

✓ 사용가능대상

- 전체 시각장애인(시각장애 1~6급)

✓ 사용방법

- 킷 매뉴얼 제공

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2021년 5월 31일

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 3월 21일

올캠 마이리더 SE [시각장애유형 | OCR 장치]



제 품 개 요 언제 어디서나 실시간으로 문자 판독, 지폐, 얼굴인식을 가능하게 하는 인공지능 보조기기

개 인 부 담 금 일반 780,000원 / 기초수급대상·차상위계층 245,000원

제 조 원 Orcam Technologies Ltd / 이스라엘 **품질보증기간** 24개월

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 21일

납 품 자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기: 7.6 x 2.1 x 1.49(cm)
- 배터리: 3시간(충전식)
- 무게: 22.5g
- 카메라: 13MP
- 음성출력
 - 내장 스피커
 - 인터페이스: 터치센서, 블루투스
 - 전력: 3.7V DC

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 보관케이스 1개
- 충전어댑터 1개
- 목걸이 끈 1개
- 사용설명서 1개
- USB케이블 1개
- 안경테 1개

✓ 주요기능

- 시각장애인을 위해 두꺼운 점자로 별도 인쇄하거나 읽어줄 필요 없이 시각장애인 스스로 묵자 인쇄물에 대한 정보접근 및 습득에 도움을 줌
- 시각장애인 근로자에게 가장 정보접근성이 떨어지는 인쇄된 문서의 내용을 한 번의 터치로 음성 안내함으로써 시각장애인과 비장애인의 문서 공유를 가능하게 함
- 빠르고 정확하게 인쇄물의 글씨를 음성으로 판독하여 쉽고 빠른 사무 활동 제공
- 인공지능 시각분석 알고리즘 탑재: 피사체의 거리, 조도, 레이아웃을 자동계산하며 손가락으로 대상을 지시하여 인식 가능
- 휴대가 가능한 초경량 웨어러블 기기: 안경테에 자석으로 부착가능하며 외부기기 도움 없이 독립적으로 동작함

✓ 제품특징

- 22.5g의 가벼운 무게로 언제 어디서나 사용 가능
- OCR: 인쇄물의 문자를 판독하는 OCR 기능 탑재
- 얼굴 인식: 사람의 얼굴을 촬영하여 음성 메모 가능(1번에 여러 명의 얼굴 인식 가능)

✓ 활용방안(기대효과)

- 실시간 문자 판독으로 묵자 콘텐츠에 대한 시각장애인 접근증가
- 문자판독 외 지폐, 얼굴인식 등으로 사용자 편의성 증가

✓ 사용가능대상

- 전체 시각장애인(시각장애 1~6급)

✓ 사용방법

- 킷 매뉴얼 제공

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2020년 6월 15일

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 3월 21일

소리안맥스 [시각장애유형 | OCR 장치]



제품개요 AI기능을 통해 시각장애인 누구나 쉽게 사용할 수 있는 PC 기능을 가지며, 일반 목자를 TXT로 변환하고 음성으로 출력해주는 OCR 정보단말기

개인부담금 일반 1,060,000원 / 기초수급대상·차상위계층 315,000원

제조원 (주)어니스트비전 / 대한민국 **품질보증기간** 24개월

납품방법 방문 설치 **납품기간** 30일

납품자 (주)어니스트비전 / 담당자 : 권다솜
(21582) 인천광역시 남동구 선수촌공원로1 구월테크노밸리D동 805호
Tel : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / http://www.fsteck.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 103556-01-011371 **예금주명** : (주)어니스트비전

✓ 제품사양

- CPU : Ultra 7
- 메모리 : RAM 16GB DDR4
- 디스플레이 : 17인치 FHD AMOLED Display
- 저장장치 : 512GB SSD
- 네트워크 : Bluetooth / WiFi
- 포트 : HDMI, USB(A-type 1개, C-type 2개)
- 운영체제 : Window10 Home/Window11 Home
- OCR S/W : 소리안
- 스크린리더 S/W : 소리안리더
- OCR 카메라 사양
 - 화소 : 1300만화소
 - 센서 : CMOS
 - 크기 : 0.43인치

- 탁상용 확대기 기능과 스크린리더 기능을 결합한 AI 스마트 시각보조 노트북

✓ 활용방안(기대효과)

- AI기능을 통해 다양한 정보를 쉽게 접근
- 시각장애인들의 사회참여 확대 및 일상 생활의 불편함 해소
- 컴퓨터에 익숙하지 않은 시각장애인을 위해 AI기능을 적용해, 간편한 키패드 및 음성사용으로 자판과 IT에 익숙하지 않은 시각장애인들도 쉽게 정보 접근이 가능

✓ 사용가능대상

- 전맹 또는 모든 저시력 장애등급 (1급~6급까지 사용이 가능함)

✓ 사용방법

- 소리안리더 프로그램 사용
 - ① 소리안맥스 전원 스위치를 누르면 시스템이 구동되며 맞춤형 시작 안내 메시지 출력
 - ② 스크린리더 프로그램이 자동 실행되며 스크린리더 기능 진행
 - ③ 키패드를 이용해 원하는 프로그램(파일 편집, 인터넷 URL 변경 등)을 선택하고 AI 음성 지원 및 상황 인식 안내를 통해 작업 진행
- 소리안 MG 프로그램 사용
 - ① 소리안 확대 프로그램 실행 시 AI 기반 화면 최적화 모드 자동 적용
 - ② 읽고자 하는 일반문서를 카메라 아래에 위치시키면 자동 초점 및 기울기보정 기능 작동
 - ③ 확대/축소 버튼을 이용하여 확대
 - ④ 고대비 설정 및 명암을 조절함
 - ⑤ AI 기능을 통해 음성 명령, 단축키, 사물 인식 기능을 지원하며 AI 기반 질의응답 기능을 추가하여 질문 응답까지 가능함
- 소리안 프로그램 사용
 - ① 소리안(OCR) 프로그램 실행
 - ② 읽고자 하는 일반 목자를 캡처하거나 PDF, BMP, JPG 파일을 다운로드하면 시가 문서 구조를 자동 분석

✓ 구성품목

- 소리안맥스 1대 / OCR카메라 1개 / 어댑터 1개
- 목자매뉴얼 1부 / 접자매뉴얼 1부 / 가방 1개

✓ 주요기능

- AI 기능이 탑재되어 카메라 기반 물건 인식 및 상황 맥락 분석을 통해 사물의 용도 특징을 음성으로 설명하는 지능형 객체 인식 기능 제공
- AI기능에 의해 일상적인 질문과 답변가능
- 배터리가 탑재된 문서인식(OCR) 단말기
- 스크린리더 단말기이면서 동시에 일반 탁상용 확대기와 동일한 성능을 제공 하는 AI 통합 스마트 저시력 보조 단말기
- 소리안맥스는 저시력 맞춤형 멀티기능 단말기로, AI 기반 기능을 사용하는 동시에 화면 최적화(대비·밝기·색상·확대) 기능을 제공함
- 한글, 영문, 한자(기본 4888자) 인식
- 캡처 후 빠른 시간 내 음성 변환 가능
- 1300만화소 카메라로 목자 및 외부 파일 변환 가능

✓ 제품특징

- AI 기능을 탑재하여 기존의 스크린리더 습득의 부담감을 현저히 감소
- 또한 스크린리더 사용시, 인터넷 검색 및 확인에 많은 시간이 필요하나 AI기능으로(음성명령) 간단히 검색이 가능
- 한 화면에서 확대 기능과 스크린리더 기능을 동시에 사용 가능하며, AI 기반 화면 분석 기술을 통해 사용자의 시야 특성에 맞는 자동 화면 최적화 지원
- 저시력인들이 보고 읽을 수 있도록 17인치 모니터가 장착된 모델
- 일체형 문서인식 음성출력기로 입력방식으로 스캐너방식과 카메라 방식을 모두 사용(기존 제품은 두 방식 중 하나만 사용 가능)
- 문서를 확대하면서 동시에 컴퓨터 기능을 스크린리더로 활용 가능하며, OCR을 통한 실시간 문서 인식까지 가능한 AI 통합 ALL-IN-ONE 제품

✓ 최소PC요구사항

- 별도 PC 필요 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2026년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 1월

올캠-마이아이 안경형리더 [시각장애유형 | OCR 장치]



제 품 개 요 인공지능 시각분석 알고리즘이 탑재된 보조기기로 시각 장애인이 간단한 제스처나 클릭을 통해 텍스트 리딩, 시간확인, 화폐인식, 상품인식, 얼굴인식, 색깔인식이 가능한 올캠 풀옵션 버전

개 인 부 담 금 일반 920,000원 / 기초수급대상·차상위계층 280,000원

제 조 원 orcarn / 이스라엘

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 직접납품

납 품 기 간 14일

납 품 자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
(04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- 크기 : 76 x 21 x 14.9 mm / 3 x 0.83 x 0.59 in
- 무게 : Device: 22.5 gr/0.79 oz Device+Box: 553 gr/19.5 oz
- 배터리 : 3.7V DC, nominal 320mAh
- 카메라 : 13 megapixels
- 언어 : 한국어

✓ 구성품목

- 기기 본체, 충전기, 충전케이블, 마운트KIT, 기기 케이스, 안경, 기기 연결 목걸이 줄

✓ 주요기능

- 텍스트 낭독 : 인쇄물 및 디지털 텍스트를 즉각적으로 인식할 수 있다. (책, 문서 외 영수증, 이미지화 된 텍스트, 문자메세지, 메뉴, 간판 등)
- 얼굴 및 상품인식 : 약 100개 가능
- 시간, 날짜 확인 : 제스처 인식
- 지폐구분 : 오만원, 만원, 오천원, 천원
- 색깔구분

✓ 제품특징

- Bluetooth가 사용가능해 이어폰을 통해 본인만 청취가 가능하다.
- Wifi로 쉽게 업데이트가 가능하다.
- 사용법이 간단해 누구나 사용이 가능하다
- 다양한 환경 속에서 쉽게 정보접근성을 향상 시킬 수 있다.
- 무게가 가볍고(22g) 휴대가 간편하다.

✓ 활용방안(기대효과)

- OCR 장치를 통한 정보접근의 활용성을 향상시켜 교육, 취업, 일상생활에서 정보화 역량을 유지·증진·향상시킬 수 있다.

✓ 사용가능대상

- 시각 장애인으로 문자 읽기가 불편한 장애인

✓ 사용방법

- ① 전원 켜기
- ② 안경에 부착(자석의 성질을 이용해서 쉽게 부착 가능)
- ③ 다양한 방법(촬영)으로 텍스트 및 사물, 색깔, 지폐인식
- ④ 결과물 음성 확인

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2021년 1월 13일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 5월 2일

책마루3 [시각장애유형 | 데이지플레이어]



제품개요 기존 책마루 기능에 스마트커넥트 기능을 더해 시각장애인에게 최적화된 올인원 멀티 플레이어 / 키패드를 이용한 파일, 폴더 관리, 데이지플레이어로써 시각장애인에게 최적화된 독서환경 제공은 물론 책마루로 스마트폰 제어, 조작, 문자발송까지 가능한 스마트 데이지플레이어

개인부담금 일반 198,000원 / 기초수급대상·차상위계층 99,000원

제조원 (주)셀바스헬스케어 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배 배송

납품기간 14일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지

대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)

Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기: 가로 6.4 × 세로 13 × 높이 1.45 (cm)
- 무게: 150g
- 배터리: 9시간(충전식, 분리형)
- 내장 메모리: 64GB
- Wi-Fi: 웹 라디오, 팟캐스트
- 음성출력: 내장 스피커, 헤드폰 잭
- 인터페이스: USB C Type, Micro SD Card, 블루투스
- FM라디오 내장
- 카메라: 13MP카메라 내장

✓ 구성품목

- 책마루3 본체 1대
- 배터리, 충전어댑터 각 1개
- USB 케이블, 이어폰 1개
- 사용설명서 1개

✓ 주요기능

- 스마트 커넥트 : 스마트폰, 태블릿PC 와 블루투스로 연결하여 조작하기 쉬운 책마루의 버튼으로 문자 등 입력을 지원.
- 음성 녹음 : 내장 마이크, 외장 마이크 잭
- 지원 데이지 포맷 : DAISY2.0 이상, XML DAISY, 국립장애인 도서관/LG상남도서관 Digital DAISY contents
- 문자입력기능 : 한글, 영어 문자 입력으로 파일/폴더/단어 검색, 이름 변경
- 파일관리기능 : 새 폴더 생성 및 파일/폴더 복사, 잘라내기, 붙여넣기
- 메모 기능 : 메모 작성, 보기, 수정, 삭제, 정렬, 검색
- 녹음 형식 : MP3, WAV, DAISY
- OCR 문자 판독 및 저장 기능 : 인쇄물 문자 판독 및 음성 출력, 판독된 인쇄물 텍스트파일, 이미지 파일 저장

✓ 제품특징

- 빠르고 정확한 문자인식
- 문자 판독뿐만 아니라 Daisy, Media, Text 파일 재생이 가능하며 일상생활에 필요한 다양한 기능을 지원하는 Multi-Player
- 파일관리 최적화 : 문자입력, 파일/폴더 복사, 잘라내기, 붙여넣기 등
- 3시간 충전으로 8시간 사용가능한 대용량 배터리 제공

✓ 활용방안(기대효과)

- 국립장애인도서관, LG상남도서관의 Daisy 콘텐츠 재생으로 시각장애인의 독서에 활용
- 다양한 문서 형식 읽기 지원으로 업무 및 학습에 다양하게 활용
- 시각장애인의 일상생활에 필요한 녹음, 음성시계, 계산기, 알람, FM라디오, 블루투스 지원
- 인쇄도서나 인쇄물의 문자를 판독해서 읽어주는 광학문자판독 기능으로 인쇄물 정보 접근 실현

✓ 사용가능대상

- 출력되는 음성 판독을 위해 청력에 문제가 없는 장애인

✓ 사용방법

- 전원 버튼을 2초 이상 길게 눌러 전원을 켜
- 아래 방향키를 눌러 음악, 라디오, 북리더, 녹음, OCR 등 원하는 기능으로 이동하고 방향키 가운데 선택 버튼을 눌러 기능 실행

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2023년 1월

강한손 티티 [시각장애유형 | 신호장치]



제품개요 시각장애인 사용자 친화적인 음성과 진동 인터페이스로 일상생활에 필수적인 시계, 타이머, 찾기 기능을 제공하는 보조공학기기

개인부담금 일반 116,000원 / 기초수급대상·차상위계층 58,000원

제 조 원 (주)엠브이아이 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)엠브이아이 / 담당자 : 원대호

대전광역시 유성구 테크노2로 199 405호 (용산동, 주식회사 엠브이아이)

Tel : 042-826-4358 / FAX : 042-826-4359 / www.mvi.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 313080-01-001137 예금주명 : (주)엠브이아이

✓ 제품사양

- 본체부
기능: 시간, 타이머, 찾기 기능(송신)
크기: 73mm x 58mm x 23mm
무게: 64g
- 트래커(3개)
기능: 물건 찾기(수신)
크기: 46mm x 46mm x 46mm
무게: 33g

✓ 구성품목

- 강한손 티티 본체부 1대
- 강한손 티티 트래커 3대
- 충전 케이블(USB-Ctype) 1개
- 어댑터 1개
- 카라비너 각1개
- 전용파우치 1개
- 주요키 사용설명서 (점자, 목자) 1부

✓ 주요기능

- 타이머: 1분, 5분, 10분, 30분 단위로 증가하여 최대 6시간까지 설정, 사용자 선택에 따라 음성 혹은 진동 (5진법)으로 잔여 시간 확인, 음성 혹은 진동으로 타이머 완료 알람
- 시계: 사용자 선택에 따라 음성 혹은 진동 (5진법)으로 현재 시간 확인, 버튼 기반으로 손쉬운 시간 설정 제공
- 물건찾기: RF 송신 모듈을 이용하여 근거리, 원거리의 소지품을 음성으로 탐색하여 위치 찾기 지원
- 본체부 볼륨크기, 음성 변경 (남, 녀) 지원, 트래커부 알림음 변경 지원
- USB C타입 케이블을 통한 충전 및 배터리 충전 상태 알람 지원

✓ 제품특징

- 음성/진동 선택 가능한 시계와 타이머 기능
- 카운트 다운 방식의 타이머 제공(종료 5분전 예비 알람기능 지원)
- 소리 기반의 음성트래커로 근무환경 및 일상 생활에서 소지품 및 비품을 쉽게 찾는 기능
- 청각에 예민한 분들을 위한 합성음 대신 성우 음성 제공(시각 장애인 아나운서 이창훈님 목소리)

✓ 활용방안(기대효과)

- 타이머 기능을 통한 시각장애인 근로자의 근로 시간 관리
- 타이머 기능을 통한 시각장애인 학생의 학습 시간관리(수업시간, 문제풀이 시간 등)
- 일상 생활에서 트래커 기능을 활용한 손쉬운 물건 찾기 가능

✓ 사용가능대상

- 시각장애(중증 ~ 경증)

✓ 사용방법

- ① 본체부 우측면에 스위치를 이용하여 1. 타이머 2. 찾기모드 선택
- ② 타이머 기능: 제품 정면의 첫 번째 줄의 반원 버튼이 2개 있으며 각각, 우 버튼은 1분, 5분(길게 누를 시 5분) 좌 버튼은 10분, 30분(길게 누를 시 10분) 버튼을 눌러 원하는 시간을 조합 후 두 번째 줄 좌측의 확인 버튼을 눌러 타이머 실행
- ③ 시계 기능: 제품 정면의 두 번째 줄 좌측의 확인 버튼을 눌러 현재 시간을 음성 혹은 진동(5진법)으로 확인
- ④ 찾기 기능: 트래커부를 찾고자 하는 물건에 둔 후, 본체의 확인 버튼을 누르면 트래커부에서 소리가 출력됨

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2020년 3월 30일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 11월 3일

아이케인 2026 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 녹내장, 황반변성, 망막색소변성증, 반맹, 야맹증, 당뇨망막병증 등 다양한 원인으로 시력이 저하된 저시력 사용자를 위한 스마트 AR글래스입니다. 고화질 카메라로 촬영한 실시간 영상을 처리하여 밝기, 색상, 확대 등의 시각 보조 설정을 통해 남아 있는 시야를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 돕습니다. 사용자의 시각 특성에 맞게 설정을 조정할 수 있으며, 인공지능 기반의 텍스트 읽기 기능과 전방 사물 인식 기능을 통해 독서, 정보 접근, 실내의 이동 등 일상생활의 편의성을 향상시키는 첨단 시각 보조기기입니다.

개인부담금 일반 1,110,000원 / 기초수급대상·차상위계층 327,500원

제조원 (주)셀리코 / 대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납품방법 택배, 우편 배송 / 방문 설치 **납품기간** 14일

납품자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김민철
(04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ **제품사항**

- 모델 번호:GB80
- 디스플레이 해상도:1920x1080 per-eye / 디스플레이 영역:42.5°
- 내장 카메라:13M Pixel, AutoFocus
- 치수:155x46x175/45[mm] / 무게:74.3g(액세서리 제외)
- 기기 재질:마그네슘, PC-ABS / 근시 교정 범위:0D ~ -5D / 부가 기능:장달착 인식 센서

✓ **구성품목**

- Eyecane AR 글래스 1대 / 전용 리모컨 1대 / USB Type-C 케이블 1개 / 빛 가리개 1개
- 코 받침 2개 / 렌즈 후드 1쌍 / 사용설명서, 보증서 1부 / 전용 파우치 1개

✓ **주요기능**

- 1) 디지털 확대 기능**
최대 20배까지 확대가능한 디지털 확대경 기능으로 작은 글씨나 사물을 또렷하게 볼 수 있음.
- 2) 시각 환경 최적화 설정**
이미지 왜곡 감소, 화면 색상 설정, 밝기 및 대비 감도 조절, 색상 반전등의 기능을 통해 사용자 맞춤형 시각 환경을 제공.
- 3) 화면 이동 기능**
확대된 화면을 상하좌우로 자유롭게 이동할 수 있어, 전체 이미지를 쉽게 탐색할 수 있음.
- 4) 시야 자기 테스트 기능**
사용자의 암점(Blind Spot)이나 잔존 시야를 테스트할 수 있는 기능을 탑재하여, 시력 상태 확인이 가능.
- 5) 인공지능 기반 인식 기능**
인공지능을 활용한 텍스트 리딩(OCR)전방 사물 인식 안내 기능을 통해 독서와 이동을 도움.
- 6) 멀티미디어 연동**
스마트폰 및 태블릿과 연결하여 영상 콘텐츠 시청 시 음성 동시 청취가 가능함.(단, DP Alt Mode를 지원하는 장치에서만 사용 가능/ 지급되는 전용리모컨과 사용을 권장)

✓ **제품특징**

- 1) 국내 유일**
시각장애인을 위한 스마트 AR 글래스로, 국내에서 유일하게 개발된 전문 보조기기임.
- 2) 향상된 성능과 경량 디자인**
해외 유사 제품 대비 가볍고 착용감이 우수하며, 빠른 반응 속도와 정확도 높은 인공지능 기능을 제공함.
- 3) 시 기반 시각 보조 기능**
인공지능을 활용한 텍스트 리딩(OCR)사물 인식 안내 기능으로 실생활에서의 정보 접근성과 편의성을 높임.
- 4) 국제 인증 및 전파 안전성 확보**
CE(유럽), FCC(미국), KC(한국) 인증을 모두 취득한 Class-B Level의 전파 인증 제품으로, 사용 시 전파파로부터 안전함.
- 5) 의료기기 인허가 취득**
식품의약품안전처(MFDS)로부터 2등급 의료기기로 정식 허가를 받은 믿을 수 있는 제품임.
- 6) 대한민국 기술력**
전 공정 국내 생산(Made in Korea)으로 품질과 기술력을 자랑함.

✓ **활용방안(기대효과)**

- 1) 시야결손 보조**
녹내장, 망막색소변성증, 당뇨망막병증, 황반변성, 반맹, 야맹증 등으로 인해 시야가 제한된 사용자에게 남아 있는 시야를 효과적으로 활용할 수 있도록 도와주며, 일상생활의 독립성과 삶의 질 향상에 기여함.
- 2) 맞춤형 컬러 필터 조정**
AR 글래스 내부 디스플레이에 다양한 색 필터를 적용해, 대비를 높이고 눈부심을 줄이는 등 사용자에게 적합한 시각 환경을 제공함.
- 3) 자기 시야 확인 기능**
전용 리모컨과 연동하여, 사용자가 스스로 암점(Blind Spot) 위치나 잔존 시야를 확인할 수 있어 자신의 시각 상태를 주기적으로 점검할 수 있음..
- 4) 텍스트 인식 및 확대 기능**
인공지능 기반의 문자 인식(OCR) 기능과 디지털 줌 확대 기능을 통해 신문, 문서, 메뉴판 등의 글자를 보다 쉽게 읽을 수 있어 일상적인 문서 읽기나 작업을 도모함.
- 5) 전방 사물 인식 안내 기능**
카메라와 인공지능 기술을 이용하여 전방에 있는 사람, 물건, 글씨 등을 감지하고 사용자에게 안내해줌으로써 생활 편의성을 높임.

✓ **사용가능대상**

- 1) 시야결손이 있는 저시력 환자**
녹내장, 망막색소변성증, 반맹, 황반변성 말기, 야맹증등 잔존 시야를 활용하여 전방 사물을 인식하거나, 필드와 확대 기능을 통해 시야를 보조
- 2) 문서나 글자 인식이 필요한 중증도 저시력 사용자**
당뇨망막병증, 중심 시야 흐림, 난시 등의 사용자 인공지능 기반 텍스트 리딩(OCR) 및 디지털 줌 기능으로 문서, 책, 음식 메뉴, 약 봉투등을 읽는데 도움
- 3) 보행중 시각 정보가 필요한 활동적 사용자**
혼자 외출하는 시각장애인, 학교/직장 생활을 하는 저시력인 사물인식 안내 기능, 색 필터 조정 등으로 이동 및 공간 인지에 실질적인 도움
- 4) 시력 저하 초기-중기 단계 사용자**
교정시력 기준 약 0.1~0.3 이하, 잔존 시야가 10도 이상 남아 있는 경우
안전 설명 전 단계에서 남은 시야를 활용한 보조 장치로 효과적

✓ **사용방법**

- 1) 기기 연결하기 (초기 셋업 시 보호자 도움 권장)**
AR 글래스와 스마트폰을 연결합니다.
제공된 USB Type-C 케이블을 이용해, 스마트폰과 글래스의 단자를 연결해 주세요. (처음 사용할 때는 보호자나 주변 사람의 도움을 받아 연결과 초기 설정을 진행하는 것을 권장합니다.)
- 2) 글래스 착용 후 화면 확인**
AR 글래스를 착용하면, 스마트폰 화면이 글래스 안에 그대로 나타납니다.
근시(0D ~ -5D)가 있는 사용자는 글래스 상단의 좌우 조리가 다이얼을 돌려, 각 눈에 맞는 초점을 조절할 수 있습니다.
- 3) 앱 실행 및 증상 선택**
전용 리모컨에 설치된 Eyecane 앱을 실행한 뒤, 본인의 시력 상태에: 중심 시야 소실, 시야 협착, 시야 흐림 등을 선택합니다.
- 4) 시야 보조 화면 설정**
선택한 증상에 따라, 카메라 영상이 자동으로 변환되어 시야 보조 이미지가 생성됩니다.
밝기, 색상, 확대 등의 설정은 사용자가 직접 조절 가능하며, 보다 자세한 설정 방법은 동봉된 사용 설명서를 참고하세요.
- 5) 인공지능 기능 활용하기**
AR 글래스는 인공지능 기반 텍스트 읽기(OCR)기능과 음성 인식 안내 기능이 탑재되어 있어, 글자를 읽거나 주변 사물을 인식하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

✓ **최소PC요구사항**

- 해당 없음

✓ **사용 시 유의사항**

- 1) 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요.**
카메라, 디스플레이 등 정밀 부품이 손상될 수 있습니다.
- 2) 40°C 이상의 고온 환경이나 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.**
제품 내부 회로의 오작동 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 3) 직사광선 아래에서 장시간 방치하지 마세요.**
배터리 성능 저하 및 외관 변형이 발생할 수 있습니다.
- 4) 지퍼등이 없는 충전기, 케이블, 소모품 등은 별매품을 사용하지 마세요.**
전원 이상이나 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 5) 기기를 임의로 분해, 개조 또는 수리하지 마세요.**
제품 보증이 무효화되며, 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 6) 물이나 액체에 닿지 않도록 주의하세요.**
비나 세척 시 물기가 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 7) 장시간 착용 시 눈의 피로를 느낄 수 있으므로, 중간중간 휴식을 취하세요.**
특히 처음 사용하는 경우, 짧은 시간부터 점차 사용 시간을 늘리는 것이 좋습니다.
- 8) 운전 중이나 계단 이용 시 착용을 피하세요.**
시야 왜곡으로 인해 사고의 위험이 있을 수 있습니다.

✓ **최초출시일** : 2025년 3월 10일

✓ **최근 업그레이드** : 2025년 12월 15일

강한손 이지스 울트라 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 전용 모니터암을 제공하여 사용자의 접근성 환경을 개선하며 듀얼모니터를 사용할 수 있는 전전후 독서확대기. 27인치 터치모니터를 포함하여 편리한 사용자 인터페이스 환경을 구축한 보조기기

개인부담금 일반 882,000원 / 기초수급대상·차상위계층 270,500원

제 조 원 (주)엠브이아이 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)엠브이아이 / 담당자 : 원대호

대전광역시 유성구 테크노2로 199 405호 (용산동, 주식회사 엠브이아이)
Tel : 042-826-4358 / FAX : 042-826-4359 / www.mvi.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 313080-01-001137 예금주명 : (주)엠브이아이

✓ 제품사양

- [화면확대 H/W 본체]
카메라 : 800만 화소 접이식
크기 : 358x16.8x228mm
무게 : 980g
- [화면확대 S/W]
배율 : 시가반 독서/화면 확대, 음성 출력, OCR
대비 : 고대비 색상모드 지원
음성 : NVDA
- [전용 단말기]
정품인증 : 인터넷 기반 디지털 인증서
CPU : Intel i5 이상
RAM : 8GB 이상
SSD : 256GB
OS : Windows 11
- [모니터]
해상도 : 1920x1080 FHD
비율 : 16:9
기능 : 플리커프리, 색보정 모드, 블루라이트감소

- 인쇄물 낭독에 최적화된 부드러운 억양과 정확한 발음의 국문/영문, 남/녀음성 TTS
- 저시력 시각장애인을 위한 터치모니터를 제공하여 사용자 편의성 제공
- 저시력 시각장애인을 위한 영상처리방법(특허출원) 기술 적용

✓ 활용방안(기대효과)

- 공문서, 결재서류, 업무 매뉴얼, 학습 등 인쇄물 판독이 필요한 모든 곳에 적용 가능
- 시각장애인의 재활 및 정보 접근 가능(문자를 음성으로 전환)
- 각종 목자 인쇄물에 대한 수치 저장 및 출력 가능
- 어떠한 환경에서도 즉시 사용이 가능하도록 휴대가 용이함
- 저시력장애인의 요구사항인 HD급 디스플레이의 확대 기능 및 OCR 제공

✓ 사용가능대상

- PC 활용이 가능한 시각장애(중증 ~ 경증)

✓ 사용방법

- 전용 단말기의 전원을 켜 후, 바탕화면에 있는 전용 프로그램 M-vision 소프트웨어 실행
- 접혀서 제공되는 제품 본체를 펼 후 USB 케이블을 이용하여 본체와 전용 단말기를 연결
- 카메라 밑에 내용을 확인하고자 하는 인쇄물 위치
- 전용 프로그램 대쉬보드의 메뉴 또는 단축키를 이용하여 기능 실행
- 터치모니터를 활용하여 기능 사용

✓ 구성품목

- 본체(카메라) 1대 / 전용 단말기 1대 / 모니터암 1대
- 27인치 확대터치모니터 1대 / 점자 및 목자 매뉴얼 1부

✓ 주요기능

- M-vision : 문서 캡처, 자체 확대 색상 대비 변경
- 하이라이트 : 읽고 있는 문서의 위치를 쉽게 찾을 수 있는 하이라이트 표시
- 마커 : 가로/세로/원도우 마커를 통한 문서의 위치 쉽게 찾을 수 있음
- 음성출력 : 화면의 텍스트를 음성으로 출력
- 사용자 중심의 인터페이스 제공 : 키패드, 마우스, 단축키
- 27인치 확대터치모니터를 제공하여 저시력 장애인의 사용성 제고

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 제품특징

- 안정적 구조의 접이식 고성능 카메라와 문자인식기를 탑재하여 정확한 광학문자판독 기능 제공

✓ **최초출시일** : 2021년 11월 30일

✓ **최근 업그레이드** : 2025년 7월 4일

고비전 무브 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 FHD 고화질 카메라가 탑재된 접이식 독서확대기로 휴대가 용이하며 혁신적인 펜트래킹 기능을 통해 시각장애인의 독서 및 학습에 최적화된 최신형 독서확대기

개인부담금 일반 665,000원 / 기초수급대상·차상위계층 216,250원

제조원 (주)셀바스헬스케어 / 한국

품질보증기간 24개월

납품방법 방문 설치

납품기간 21일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지

대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)

Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기 : (열었을 때) 37.8 × 51.7 × 48.8cm
(접었을 때) 37.8 × 45 × 8.2cm
- 무게 : 5.7kg
- 확대배율 : 최소 1.1배 ~ 최대 72배
- 모니터 : 15.6" LCD(16.9배율)
- 색상/밝기 : 16가지 색상
- 인터페이스 HDMI, SD카드
- 배터리 : 6,800mAh

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 케이스 1개
- 충전어댑터 1개
- 퀵 가이드사용설명서 1개

✓ 주요기능

- 확대 배율: 1.1배 ~ 72배
- 카메라: FHD 고화질 카메라 탑재, 3가지 보기 모드 (근거리, 원거리, 셀프 카메라)
- 충전식 배터리사용: 3.5시간 충전 및 6시간 사용 가능
- 이미지 저장, 포맷 기능: 카메라와 SD카드를 이용한 사진 촬영 및 저장, 포맷 기능
- 화면 밝기 조절: LED 밝기 조절 및 자동 조절 기능 탑재
- 읽기 편의 기능: 자동초점, 라인, 마커, 색상모드
- 펜 트래킹으로 확대와 필기를 동시에 지원하여 교육, 업무 현장에서 유용하게 활용가능

✓ 제품특징

- 케이스와 확대기 일체형으로 손쉽게 제품 이동 및 사용이 가능
- 충전형 배터리 사용으로 외부 전력 연결 없이 어디서든 사용가능
- 다양한 카메라 모드 : 근거리, 원거리, 셀프 카메라
- 화면 정지 및 이미지 저장 기능
- 직관적인 인터페이스와 조작버튼으로 편리하게 사용

✓ 활용방안(기대효과)

- 휴대가 간편하고 인쇄물에 대한 판독이 용이하여 저시력 시각장애인의 교육, 취업, 일상생활에서 인쇄물 정보접근에 매우 용이함

✓ 사용가능대상

- 잔존시력이 있는 저시력 시각장애인(시각장애 1~6급)

✓ 사용방법

- 접힌 본체를 책상 같은 안정된 표면에 올려놓는다.
- 바닥 받침대를 한손으로 누르고, 반대 손으로 상판의 모서리를 잡고 들어올린다.
- LCD화면의 양쪽 모서리를 잡고 당겨 원하는 각도로 배치
- 카메라 덮개를 제거 후 전원버튼을 눌러 사용
- 원거리 확대 시 카메라를 멀리 있는 물체의 방향을 향하게 하고, 미러 모드의 경우 LCD화면을 내리고 카메라를 사용자에게 향하게 한다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2025년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

다빈치 Pro [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 저시력 시각장애인들이 책이나 신문 등을 확대, 원거리 확대, 거울 기능 등 3가지의 멀티기능과 한국어, 중국어 및 영어를 포함한 5개국 언어 음성지원(OCR)으로 사용자의 편의성을 높여주고 다양한 물건들의 확대 등으로 정보접근성을 높여, 보다 나은 삶의 질을 개선할 수 있는 복합적으로 사용할 수 있는 시각장애이용 다목적 독서확대기

개 인 부 담 금 일반 988,000원 / 기초수급대상·차상위계층 297,000원

제 조 원 Enhanced Vision / U.S.A

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문설치

납 품 기 간 25일

납 품 자 바투비전 / 담당자 : 정성오

(04798)서울시 성동구 아차산로15길 10 성원상떼뷰오피스텔 809호

Tel : 010-2760-4669 / FAX : 0504-848-4669 / www.batuvision.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 010934-02-162004 예금주명 : 정성오(바투비전)

✓ 제품사양

- SONY 1080p Full HD 카메라 장착
- 24" 고해상도 반사방지 Full HD LCD 모니터
- 2X ~ 77X 의 광범위한 확대배율
- 32색상 모드(컬러, 흑백, 고대비, 역상, 특수색상 28색)
- 13M 픽셀 OCR 전용카메라 장착
- A4 Full 페이지 읽기지원
- 남, 여 프리미엄 음성 읽기 제공
- 확대기와 컴퓨터연결 화면전환(HDMI 단자)
- USB 문서 한국어 등 음성 출력, USB 이미지 파일 확대 보기 기능
- 문서음성출력(OCR) : 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 대만어
- 크기(H x W x D): 65.1 X 57.8 X 19.8cm / 무게 : 9.7 Kg

- 카메라의 위치가 자유롭게 이동사용이 가능, 사용자가 다양한 방법으로 확대기의 사용 가능
- 모니터 부착 컨트롤러와 리모컨으로 카메라 위치와 관계없이 작동되어 사용자의 편리성 높음

✓ 활용방안(기대효과)

- 기존의 독서 확대기가 다양한 기능을 하지 못해 사용자의 다양한 요구에 부합하지 못하였지만 다빈치 Pro는 근거리 확대, 원거리 확대, 거울 기능 등 다양한 기능, 고화질의 Full HD 화질과 문서를 OCR로 인식하여 음성(한국어 지원)으로 읽어주는 기능을 탑재하여 실생활에서 확대기의 많은 활용이 예상됨으로 시각장애인들이 독서, 신문 구독, 방문자 확인, 다양한 물건들의 확대 등으로 정보 접근성을 높여, 보다 나은 삶의 질을 개선 할 수 있을 것입니다.

✓ 구성품목

- 다빈치 Pro 본체(카메라 일체형) 1대
- 다빈치 Pro 핸드컨트롤러 1개
- 다빈치 HD 독서판 1개
- 사용설명서 1부

✓ 사용가능대상

- 시각장애인증 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 주요기능

- 다빈치 Pro는 근거리, 원거리, 거울기능 3가지 기능으로 실생활에서 많은 활용이 가능함
- OCR 기능으로 문서를 분석하여 음성출력(한국어, 영어 등 5개국 언어지원) 기능으로, 저시력 시각장애인의 다양한 활용이 가능함
- 기존 독서확대기에 비해 카메라의 위치 및 방향이 이동사용이 가능, 사용자가 다양한 방법으로 독서확대기의 사용이 가능함
- USB 문서 음성(한국어 외)읽기 및 사진 확대보기 기능 활용성 증대
- 소니 Full-HD 카메라와 모니터를 장착, 맑고 선명한 영상으로 사용자의 눈의 피로를 최소화
- 모든 기능이 모니터 부착 컨트롤러와 유선 리모컨으로 동시 작동 사용자의 편리성이 높음

✓ 사용방법

- 독서확대기 전면에 있는 전원스위치를 눌러 전원을 켜다.
- 사용하고자 하는 모드를 카메라를 조절하여 선택해 준다.
- 조작 패널이나 리모컨을 이용하여 보기모드, 확대배율 등을 선택한다.
- 독서판을 움직이거나 대상물을 비추어 내용을 읽어준다.

✓ 최소PC요구사항

- PC와 연계기능은 모니터로서의 기능으로만 사용되므로 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 다빈치 HD에 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려가 있음
- 제품을 안정된 위치에 두고 물과 같은 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.

✓ 제품특징

- 1개의 카메라로 근거리, 원거리 및 거울기능을 사용할 수 있는 24"의 Full HD 다목적 확대기
- OCR 기능: 문서를 음성으로 읽어주어(한국어, 영어 등 5개국 언어) 다양한 활용이 가능

✓ 최초출시일 : 2017년도

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 10월 15일(렌즈, 카메라 구경확대, 음성엔진 업그레이드)

루비5 XL HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 HD 고화질 5인치 독서확대기
번짐이 없이(No blur) 빠른 속도로 읽을 수 있고, 스텐드와 접이식 손잡이가 장착되어 있어 사용이 편리함.

개 인 부 담 금 일반 260,000원 / 기초수급대상·차상위계층 130,000원

제 조 원 Freedom Scientific / 미국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 15일

납 품 자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자: 곽노현

(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층

Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명: (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 5인치 LCD 모니터
- 배율: 2배~14배
- 탁월한 해상도(HD Camera장착)
- 다양한 기능: 스텐드, 접이식손잡이, 20가지 색상 모드
- 표준사용시간: 3시간 (최초 충전시간 3시간)
- 라인 및 영역지정
- 무게: 289g
- 규격: 14X8.8X1.8cm

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 충전아답터 1대
- 한글사용설명서 1개
- 휴대가방 1개

✓ 주요기능

- 5인치 휴대용 중 가장 안정된 성능으로 손잡이와 스텐드가 같이 장착이 되어 있어 사용이 편리함.

✓ 제품특징

- 스텐드 및 접이식 손잡이로 활용도 높은 제품
- HD카메라로 선명하고 깨끗한 화면 제공
- 자동초점
- 흔들림 없는 안정적인 성능
- HDMI지원
- 80개 화면 저장 및 컴퓨터로 출력가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 손잡이가 있어 휴대하는데 더욱 편리함을 준다. 또한 스텐드도 본체에 장착되어 있어 책을 읽을때 편안하게 볼 수 있다.
- 원하는 경치나 상대의 얼굴을 스텐드로 찍어 확대하여 볼 수 있으며, 2배에서 14배까지의 확대는 사용자로 하여금 편안하고 즐거운 독서를 할 수 있게 도와준다.
- HD 카메라로 인해 선명하고 깨끗한 화면으로 인해 그전의 답답함을 해소 시켜주며 화려한 디자인은 많은 호평을 받고 있다

✓ 사용가능대상

- 시각장애인증 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 전원(녹색/노란색)버튼을 눌러 전원을 켜다.
- ② 다음중에 한가지를 실행한다.
 - 손잡이를 펼쳐서 본체를 손으로 잡는다.우편물,약병같은 물체를 볼 때는 유용하다.
 - 평평한 인쇄물(신문, 잡지, 영수증, 편지 등)위에 본체를 올려놓고 독서스텐드를 연다.
- ③ 노란색(+) -)버튼을 이용하여 글자크기를 조절한다.
- ④ 화살표(↑ ↓)로 사용자에게 적합한 칼라모드 색상(글자색과 바탕색)을 선택한다.
- ⑤ 화면정지버튼을 눌러서 이미지를 찍어서 자세히 볼 수 있다
- ⑥ 이미지를 저장하거나 라이브뷰모드로 돌아간다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.

✓ 최초출시일 : 2014년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

리보탭 울트라 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 안드로이드 태블릿으로 화면확대, 광학문자인식, 음성합성, 인공지능 등의 기능을 다양한 앱과 함께 사용하며 보다 효과적인 확대시스템 환경을 구축하는데 도움을 주는 제품

개인부담금 일반 740,000원 / 기초수급대상·차상위계층 235,000원

제조원 리보㈜ / 대한민국

품질보증기간 24개월

납품방법 방문설치

납품기간 30일

납품자 리보㈜ / 담당자 : 정유라
(22004) 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 1-502 (송도동, 인천스타트업파크)
Tel : 010-2247-5402 / FAX : 050-5403-5403 / www.rivo.kr

개인부담금계좌번호 (국민은행) 928301-00-066044 예금주명 : 리보 주식회사

✓ 제품사양

- 태블릿: 빛반사방지 14.6인치 화면, 주사율 120Hz, 다이내믹 아몰레드 2X, 운영체제 Android 14, 카메라 후면 13MP AF 전면 12MP, 메모리 12GB, 스토리지 256GB, 무게 692g, 두께 5.1mm, 배터리 11,600mAh, 방수방진 IP68등급, 와이파이, 블루투스, 쿼드스피커, 돌비 입체 사운드
- 리모컨: 화면/카메라/톡백 제어, 앱/맞춤형명령 단축실행, 버튼 27개
- 소프트웨어: 리모컨 연동, 화면 제어, 카메라 제어, 앱 실행, 맞춤형명령 실행

✓ 구성품목

- 14.6인치 안드로이드 태블릿 (비전크래프트 소프트웨어 탑재)
- 전용 리모컨, 거치대, 가방, 접지형멀티초고속충전기, USB-C 충전케이블, 스타일러스펜

✓ 주요기능

- 편리하고 빠른 화면 확대/축소/스크롤, 8방향 수동/자동 스크롤, 빠른 점프부
- 편리한 텍스트 읽기를 위한 자동 스크롤, 줄 바꿈 및 화면 색상 인버트 토글
- 다양한 안드로이드 앱을 확대 기능과 함께 사용
- 화면 캡처와 카메라 사진 저장 및 OCR, TTS, 번역
- 앱 단축 실행 및 사용자 맞춤형 매크로 명령 단축 실행

✓ 제품특징

- 편리하고 빠른 화면 확대/축소/스크롤 리모컨 조작 인터페이스
- 8방향 빠른 수동 스크롤 및 부드러운 자동 스크롤
- 확대 화면에서 페이지 단위별 빠른 점프부
- 확대 화면에서 빠른 현재 위치 파악 및 전체화면 보기 토글
- 화면 캡처, 카메라 사진 저장
- 저장된 이미지에서 OCR 글자 인식, TTS 읽기 및 번역
- 카메라 줌 제어와 카메라 화면에서 추가 확대/축소/스크롤
- 사용자 지정 앱을 빠르게 단축으로 실행
- 사용자 맞춤형 매크로 명령을 빠르게 간편하게 단축으로 실행
- 문서/웹/이메일/뉴스/사진/메시지/유튜브 등 모든 앱 확대 사용
- 편리한 텍스트 읽기를 위한 자동 스크롤 및 줄 바꿈 기능

- 화면 색상 인버트 토글
- 화면을 확대해서 스타일러스펜으로 편하게 서명, 메모, 그림그리기
- 언제 어디서나 사용할 수 있도록 휴대가 간편한 태블릿과 거치대
- 소프트웨어 업데이트를 통한 기능 추가 및 업그레이드

✓ 활용방안(기대효과)

- 온라인과 오프라인에서 화면 확대, 문자 인식 및 읽기 기능을 더욱 능동적으로 활용하게 됨으로써 일상생활과 업무수행 능력 향상

✓ 사용가능대상

- 중증, 경증 시각장애인
- 휴대가 용이한 독서확대기를 사용하고자 하는 시각장애인
- 큰 휴대용 화면에서 스마트기기로 이용할 수 있는 다양한 서비스를 이용하고자 하는 시각장애인
- 광학문자인식, 음성합성, 인공지능 이미지 분석 기능 등을 사용하고자 하는 시각장애인

✓ 사용방법

- 리모컨 버튼을 눌러 다음과 같은 조작을 수행한다.
 1. 태블릿 화면 확대/축소, 8방향 자동/수동 스크롤, 점프부
 2. 텍스트 읽기 자동스크롤 및 줄바꿈
 3. 다양한 안드로이드 앱을 확대 화면에서 사용
 4. 화면 인버트 토글
 5. 앱 단축 실행 및 사용자 맞춤형 매크로 명령 단축 실행
 6. 화면 캡처, 카메라 사진 저장, OCR, TTS, 번역
 7. 매뉴얼: rivo.kr/rivotab/manual

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 수리나 개조 금지, 충격 및 낙하 주의

✓ 최초출시일 : 2024년 2월 28일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 31일

매그니링크 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 기존 PC, 스마트폰을 이용하는 시각장애인에게 점자입력, 제어, 판독 등 원활한 사용을 제공하는 점자디스플레이

개 인 부 담 금 일반 880,000원 / 기초수급대상·차상위계층 270,000원

제 조 원 LVI / 스웨덴

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 방문설치

납 품 기 간 21일

납 품 자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기 : 가로 33 x 세로 45 x 높이 51(cm)
- 무게 : 3.7kg
- 모니터 : 13.3" LCD
- 카메라모드 : 근, 원거리 모드, 셀프뷰
- 전환가능색상 : 6가지 색상
- 추가기능 : 자동초점, 고대비, 라인/윈도우마커, 조명, 슬립모드, 밝기조절 가능
- 카메라 : FHD카메라 내장

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 사용설명서 1개
- 충전어댑터 1개
- 가방 1개

✓ 주요기능

- FHD 급의 선명한 화질
- 확대배율 : 1.1배 ~ 35배
- 자유롭게 모니터 높이와 각도조절이 가능한 인체공학적인 설계제품
- 컬러와 흑백모드를 포함한 6가지 색상전환 기능
- 라인 및 윈도우 마커 기능
- 자동 초점 기능
- 모니터 화면 밝기 조절, LED ON/OFF 기능
- 직관적으로 사용하기 편리한 컨트롤러 제공
- 설치과정 없이 전원만 연결하면 바로 사용이 가능한 편한 접근성

✓ 제품특징

- 이동성을 고려한 설계로 기존 독서확대기보다 작고 가벼움
- 선명한 고해상도 Full HD 화질 제공
- 근거리/원거리 카메라모드 지원
- 접이식 방식으로 보관 및 이동이 간편

✓ 활용방안(기대효과)

- 고도근시의 저시력 시각장애인의 경우 인쇄물 판독 시 가능한 낮은 배율을 제공하면서 선명하고 대비가 뚜렷한 FHD급 화질 제공
- 직관적인 사용방법과 후대가 용이하여 저시력 시각장애인의 교육, 취업, 일상생활에서 인쇄물 정보접근에 매우 용이

✓ 사용가능대상

- 잔존시력이 있는 저시력 시각장애인(시각장애1~6급)

✓ 사용방법

- 본체와 전원 어댑터를 연결 후 모니터 하단 컨트롤러의 좌측 전원버튼을 눌러 전원을 켜
- 전원 버튼: 제품의 전원을 On / Off
- 배율 버튼: 다이얼 방식으로 돌려서 배율을 조절
- 화색조 버튼: 자연색/화색으로 색상 모드 전환
- 고대비 버튼: 다양한 고대비 색상 변경
- 기능 버튼: 다이얼 방식으로 밝기 조절 및 다양한 부가기능을 선택 가능

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2020년 1월 22일

머린 엘리트 Pro [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 머린 엘리트 Pro는 Full HD Sony 1080P 카메라를 장착으로 고화질 확대기능과 OCR 전용 카메라를 장착, A4 전체 페이지 문서 음성 출력(OCR : 한국어, 영어, 중국어, 일본어 등)이 가능한 고화질 다기능의 Full HD 24" 탁상용 독서확대기

개 인 부 담 금 일반 1,150,000원 / 기초수급대상·차상위계층 337,500원

제 조 원 Enhanced Vision / U.S.A

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문설치

납 품 기 간 25일

납 품 자 바투비전 / 담당자 : 정성오

(04798)서울시 성동구 아차산로15길 10 성원상떼뷰오피스텔 809호

Tel : 010-2760-4669 / FAX : 0504-848-4669 / www.batuvision.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 010934-02-162004 예금주명 : 정성오(바투비전)

✓ 제품사양

- SONY 1080p Full HD 카메라 장착
- 24" 고해상도 반사방지 Full HD LCD 모니터
- 2.4 ~ 73X 의 광범위한 확대배율
- 32색상 모드(컬러, 흑백, 고대비, 역상, 특수색상 28색)
- 13M 픽셀 OCR 전용카메라 장착
- A4 Full 페이지 읽기지원
- 남, 여 프리미엄 음성 읽기 제공
- 확대기와 컴퓨터연결 화면전환(HDMI 단자)
- 사용자의 편의성을 높여주는 간단하고 심플한 대형크기 X-Y 테이블 장착
- USB 문서 한국어 등 음성 출력, USB 이미지 파일 확대 보기 기능
- 문서음성출력(OCR) : 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 대만어
- 크기(H x W x D): 70.5 X 57.8 X 50.8cm / 무게 : 18.2 Kg

✓ 구성품목

- 머린 엘리트 Pro 본체 1대 / 머린 엘리트 Pro 전원어댑터 1대
- 머린 엘리트 Pro 핸드콘트롤러 1개 / 사용설명서 1개

✓ 주요기능

- 머린 엘리트 Pro는 문서, 책을 보기에 최적화되어 실생활에서 독서확대기의 많은 활용이 가능
- OCR 기능으로 문서 음성출력(한국어, 영어 등)이 가능, 시각 장애인의 다양한 활용이 가능함
- 상하좌우 이동가능한 안정적인 독서판 장착으로, 책, 문서를 안정적이고 편리하게 볼 수 있음
- 소니 Full-HD 카메라와 모니터를 장착, 맑고 선명한 영상으로 사용자의 눈의 피로를 최소화
- USB 문서 음성(한국어 외)읽기 및 사진 확대보기 기능 활용성 증대
- 모니터 부착 컨트롤러와 리모컨 동시사용으로 사용자의 편리성 제고

✓ 제품특징

- 상하좌우 이동 가능한 24" 반사방지 모니터를 장착한 일체형 확대 독서기
- 모니터 부착 조절버튼으로 모니터의 이동에 관계없이 배율 색상 변경등 조작편의성 제공
- 2.4~73의 확대 배율, 32색상의 색상 보기 지원(화면 밝기 조절 가능)

• HDMI, D-sub 입력단자 장착, 컴퓨터 모니터로 활용 가능

• LED광원으로 선명한 이미지, 저 전력을 동시에 실현

• OCR 기능 : 한국어,영어,중국어,일본어 음성출력 기능(USB 문서 읽기 및 사진 확대 보기 기능)

✓ 활용방안(기대효과)

- 기존의 독서 확대기가 다양한 기능을 하지 못해 사용자의 다양한 요구에 부합하지 못하였지만 머린 엘리트 Pro는 고화질의 Full HD 화질과 문서를 OCR로 인식하여 음성(한국어 지원)으로 읽어주는 기능을 탑재하여 실생활에서 확대기의 많은 활용이 예상됨으로 시각장애인들이 문서, 독서, 신문 보기의 확대기능과 문서나 책을 OCR음성 출력기능을 동시에 활용이 가능하여 실생활에서 많은 활용으로 보다 나은 삶의 질을 개선 할 수 있을 것 입니다

✓ 사용가능대상

- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- 머린 엘리트 Pro의 전원을 연결후 전원 스위치를 눌러줍니다.
- 보고자 하는 문서, 책 또는 신문 등을 독서판위에 올려 줍니다.
- 시력에 적합한 배율을 배율조절 스위치를 돌려 선택합니다.
- 보기에 편안한 색상모드를 보기모드 스위치를 돌려 선택합니다.
- 독서판을 상하좌우로 움직여 문서, 책 또는 신문 등을 읽습니다.

✓ 최소PC요구사항

- PC와 연계기능은 모니터로서의 기능으로만 사용되므로 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 머린 엘리트 Pro에 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려가 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 물과 같은 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.

✓ 최초출시일 : 2019년도

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 10월 15일(렌즈, 카메라 구경확대, 음성엔진 업그레이드)

미러패드프로 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 17.3인치, 3-in-1 원거리/근거리/셀카 카메라 화면전환, OCR 가능한 영상확대시스템입니다.
안드로이드폰, 태블릿 미러링 기능으로 SNS, 동영상 재생 등이 가능합니다.

개인부담금 일반 700,000원 / 기초수급대상·차상위계층 225,000원

제조원 SighCare / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현

(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층

Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 모니터 : 17.3인치 IPS Ultra HD 4K 매트 터치스크린
- 배울 : 근거리:1.5배 ~ 85배 / 원거리 : 30배
- 카메라 : 울트라HD 4K
- 건전지 : 분리형 충전식 Ni 건전지 팩(연속 시간:5.5시간)
- 크기 : 46.8*40*11.1cm
- 무게 : 3600g (배터리 포함)

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 사용설명서 1부
- 전원어댑터 1개
- 보호커버 1개
- 제품 고정틀 1개
- 전용 c 타입케이블 2개

✓ 주요기능

- 17인치 대화면을 편리하게 터치스크린으로 이용
- 원거리/근거리 화면 분할 기능
- 정확한 OCR 기능
- 조이스틱으로 스크롤 편리성
- 스마트폰 미러링 기능으로 인터넷 검색 및 동영상 재생
- 세로 또는 가로 화면 자유전환
- 서류부터 두꺼운 책까지 한 화면에서 확대 가능

✓ 제품특징

- 3-in-1 원거리/근거리/셀카(필기)카메라 화면분할기능
- 스마트폰 미러링 기능으로 인터넷, 동영상 재생 기능(무료 소프트웨어 제공-안드로이드용)
- 터치스크린 /조이스틱 방식
- 기존 17인치 제품들에 비해 11cm 컴팩트한 두께로 자리를 차지하지 않음
- OCR 읽기기능
- HDMI in 기능
- 세로 또는 가로 화면 자유전환
- 사진 모드 및 16가지 고대비 모드
- 최대 5.5시간 연속 사용 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각장애인들의 업무와 학업에 서류 확대 및 OCR기능과 안드로이드폰, 태블릿 미러링 기능으로 자립적인 활동이 가능하여 삶의 질을 향상시키고 사회 참여도를 높여줍니다.
- 360도 회전가능한 원거리 카메라는 시각장애학생들이 수업듣기에 편리합니다.

✓ 사용가능대상

- 시각장애인중 전맹을 제외한 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 정면의 동근란 흰색버튼으로 ON/OFF 한다
- ② 왼쪽 하단의 톨니바퀴 모양 버튼으로 색상모드를 변경하고, 왼쪽 하단의 확대경 버튼으로 확대, 축소를 조절한다. 왼쪽 하단 화살표전환 버튼으로 화면 전환 및 분할을 한다.
- ③ 가운데 주황색 조이스틱으로 화면 이동 한다
- ④ 안드로이드폰의 경우,제공 앱을 통해 미러링이 가능하다.
- ⑤ C-type케이블과 스마트폰, 태블릿을 연결하여 화면 미러링을 한다.
- ⑥ 본체 스크린 터치를 통해 화면 확대 및 동영상을 재생하고 확대한다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2025년

✓ 최근 업그레이드 : 2025년

미러패드플러스 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 17.3인치, 3-in-1 원거리/근거리/셀카 카메라, 휴대폰 미러링이 가능한 독서확대기입니다.
안드로이드폰, 태블릿 미러링 기능으로 SNS, 동영상 재생 등이 가능합니다.

개 인 부 담 금 일반 560,000원 / 기초수급대상·차상위계층 190,000원

제 조 원 SighthCare / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현
(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층
Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 모니터 : 17.3인치 IPS Ultra HD 4K 매트 터치스크린
- 배 율 : 근거리:1.5배~85배 / 원거리:30배
- 카 메 라 : 울트라HD 4K
- 건 전 지 : 분리형 충전식 Ni 건전지 팩(연속 시간:5.5시간)
- 크 기 : 46.8*40*11.1cm
- 무 게 : 3600g (배터리 포함)

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 사용설명서 1부
- 전원어댑터 1개
- 보호커버 1개
- 제품 고정틀 1개
- 전용 c 타입케이블 2개

✓ 주요기능

- 17인치 대화면을 편리하게 터치스크린으로 이용
- 원거리/근거리 화면 전환 기능
- 조이스틱으로 스크롤 편리성
- 스마트폰 미러링 기능으로 인터넷 검색 및 동영상 재생
- 세로 또는 가로 화면 자유전환
- 서류부터 두꺼운 책까지 한 화면에서 확대 가능

✓ 제품특징

- 3-in-1 원거리/근거리/셀카(필기)카메라 화면분할기능
- 스마트폰 미러링 기능으로 인터넷, 동영상 재생 기능(무료 소프트웨어 제공-안드로이드용)
- 터치스크린 /조이스틱 방식
- 기존 17인치 제품들에 비해 11cm 컴팩트한 두께로 자리를 차지하지 않음
- HDMI in 기능
- 세로 또는 가로 화면 자유전환
- 사진 모드 및 16가지 고대비 모드
- 최대 5.5시간 연속 사용 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각장애인들의 업무와 학업에 서류 확대 및 안드로이드폰, 태블릿 미러링 기능으로 자립적인 활동이 가능하여 삶의 질을 향상시키고 사회 참여도를 높여줍니다.
- 360도 회전가능한 원거리 카메라는 시각장애학생들이 수업듣기에 편리합니다.

✓ 사용가능대상

- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 정면의 동근란 흰색버튼으로 ON/OFF 한다
- ② 왼쪽 하단의 톱니바퀴 모양 버튼으로 색상모드를 변경하고, 왼쪽 하단의 확대경 버튼으로 확대, 축소를 조절한다. 왼쪽 하단 화살표전환 버튼으로 화면 전환 및 분할을 한다.
- ③ 가운데 주황색 조이스틱으로 화면 이동 한다
- ④ 안드로이드폰의 경우, 제공 앱을 통해 미러링이 가능하다.
- ⑤ C-type케이블과 스마트폰, 태블릿을 연결하여 화면 미러링을 한다.
- ⑥ 본체 스크린 터치를 통해 화면 확대 및 동영상을 재생하고 확대한다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2025년

✓ 최근 업그레이드 : 2025년

베오(Veo) [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 - 저시력인들에게 최적화 된 FULL HD, 고해상도의 24인치 모니터를 탑재한 탁상용 독서확대기
- x-y 테이블, 탈부착 리모컨 적용으로 사용이 편리한 독서확대기

개인부담금 일반 920,000원 / 기초수급대상·차상위계층 280,000원

제조원 (주)리이네커 / 독일

품질보증기간 24개월

납품방법 방문 설치

납품기간 30일

납품자 (주)어니스트비전 / 담당자: 권다솜

(21582) 인천광역시 남동구 선수촌공원로1 구월테크노밸리D동 805호

Tel : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / <http://www.fsteck.co.kr>

개인부담금계좌번호 (우체국) 103556-01-011371 예금주명 : (주)어니스트비전

✓ 제품사양

- LVHD 60Hz 카메라 (1920 X 1080픽셀)
- 24" 와이드 TFT 모니터
- 확대 배율 : x3.7 ~ x42
- x/y 테이블 적용
- 크기 : 53x53x52cm(24"),
- 중량 8Kg

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 리모콘(부착) 1개
- 매뉴얼 1부
- 전원 어댑터 1개

✓ 주요기능

- 고해상도 선명한 이미지의 화면 확대 기능
- 인체공학적 연결 장치(arm)에 의한 위치조정 가능
- 3개의 버튼으로 편리한 조작이 가능하도록 제조하여 저시력인들의 편의를 도모함
- 자동초점 기능
- 윈도우 마커, 라인마커 기능
- 릴리-라이트기술로 깜박거림, 흔들림 방지, 그림자 및 반사 최소화

✓ 제품특징

- 최신 기술인 고해상도(HD) 카메라 시스템을 적용하여 일반 LCD 독서확대기 대비 4.25배 선명
- 24" 와이드 모니터 탑재로 대화면 및 선명한 화면 제공
- 부착식 컨트롤 패널
- 인체공학적 연결장치(arm)에 의한 위치 조정
- 다양한 작동 모드/기능 채용

✓ 활용방안(기대효과)

- 본인의 시력으로 읽기 가능한 장애인은 본 제품 사용으로 효율적인 직업 활동 및 다양한 일상 생활을 도모할 수 있음

✓ 사용가능대상

- 저시력 시각장애인 : 1급~6급

✓ 사용방법

- ① 리모컨 하단에 노란색 파워 버튼을 누름
- ② 확대시킬 문서 및 그림을 x-y 테이블 위에 놓음
- ③ 확대시킬 문서의 배율을 컨트롤 패널 가운데 로터리 방식 조절장치를 돌려 맞춤
- ④ 리모콘 오른쪽 첫 번째 로터리 스위치를 이용하여 원하는 색상으로 모드 전환
- ⑤ 세 번째 로터리 스위치를 돌려서 밝기 조정

✓ 최소PC요구사항

- 별도 PC 필요 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 장시간 미사용 시 전원 off
- 충격을 가하면 손상될 수 있으니 주의

✓ 최초출시일 : 2010년 1월 8일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

소리안탭3 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 - 대화면 휴대용 독서확대기(시기능 사물인식)
 - 사용 시 공간 제약이 없어 시각장애인의 활동성을 개선할 수 있는 휴대용 독서확대기
 - 태블릿PC를 확대기 본체로 채용하여 일상 생활에서 다양하게 이용할 수 있는 제품

개인부담금 일반 825,000원 / 기초수급대상·차상위계층 256,250원

제 조 원 (주)어니스트비전 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 30일

납 품 자 (주)어니스트비전 / 담당자 : 권다솜

(21582) 인천광역시 남동구 선수촌공원로1 구월테크노밸리D동 805호

Tel : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / http://www.fsteck.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 103556-01-011371 예금주명 : (주)어니스트비전

✓ 제품사양

- [소리안탭3 본체]
 - 화면 크기 : 14.6인치
 - 패널 : Dynamic AMOLED 2X (해상도 : 2960 x 1848), 터치스크린
 - CPU : 3.36 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz
 - 메모리 : 내장메모리 256GB, RAM 12GB
 - 운영체제 : Android
 - 무게 : 732g
 - 인터넷 연결 : WiFi 전용
 - 탭거치대 카메라 사양
 - 근거리 기능
 - 화소 : 1945(H) X 1109(V) 2.16Megapixel
 - 센서 : Aptina 1/3.2" 프로그래시브스캔 CMOS, 2Megapixel
 - Video Output : 1020 X 1080 30F

- 시각장애인의 업무 특성을 고려하여 블루투스 연결이 가능하게 하였으며, TTS 기능이 가능한 체중계 및 혈압계(음선)제공

✓ 구성품목

- 소리안탭3 1대 / 탭거치대(카메라일체형) 1개
- 충전기 1개 / 가방 1개 / 매뉴얼 1개
- 체중계(음선) 1개 / 혈압계(음선) 1개

✓ 주요기능

- 소리안탭3는 14.6인치 대화면 및 시기능으로 다양한 정보를 수집하고 질문 및 답변 가능 또한 물건인식과 주변환경 안내 기능도 있음. Tab을 사용하는 다른확대기와 다르게 자체 개발한 카메라를 이용하여 확대기능이 탁월
- 체중계와 혈압계를 블루투스로 연결 후 음성안내 및 확대 글자로 디스플레이 및 저장되므로 향후 의료업에 종사하는 시각 장애인에게 업무능력 향상을 도움(음선)

✓ 제품특징

- 시기능 탑재를 통해서 그동안 접보접근이 어려웠던(사물인식, 문서요약 및 인식, 사진설명, 광범위한 질문(예: 최근올림픽에서 유도에서 금메달 딴 한국선수)을 가능하게 함
- 14.6인치 대화면의 휴대용 독서기
- 2.16메가 픽셀의 고성능 FHD 확대독서기
- 이동성, 작업성, 경량화로 사용 용이한 독서확대기

✓ 활용방안(기대효과)

- 다양한 정보접근이 필요하면서 IT작동방법 습득이 어려운 계층에, 시기능을 탑재하여 음성으로 질문과 답변이 가능함
- 이동이 자유롭고 경량의 대화면 휴대용 확대기 제품으로, 출장이 많고 사무공간이 협소한 사무 업무에 사용 시 편리함
- 또한 안마업을 영위하는 대다수의 시각장애인에게 제공하므로 고객의 몸무게 및 혈압을 측정 가능하게 하여 보다 높은 품질의 침술 및 의료 서비스를 제공해줄 수 있음

✓ 사용가능대상

- 저시력 시각장애인 : 1급~6급

✓ 사용방법

- ① 전원버튼을 누르면 효과음과 함께 단말기가 작동
- ② 시기능을 음성 및 터치로 확인
- ③ 초기 메뉴화면에서 원하는 기능의 아이콘(근거리 확대, 체중계, 혈압계 등)을 터치해서 실행
- ④ 근거리 확대의 경우 화면 터치를 통해 작동
- ⑤ 체중 측정의 경우 체중계 아이콘을 터치한 후 체중계에 올라가면 자동으로 블루투스 동기화를 하여 측정된 체중을 음성 송출
- ⑥ 혈압 측정의 경우 혈압계 아이콘을 터치하여 실행 후 혈압 패드를 올바른 위치에 맞춰준 후 혈압계의 버튼을 눌러주면 혈압을 측정하고 측정 값을 음성으로 송출

✓ 최소PC요구사항

- 별도 PC 필요 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2025년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

아미고 HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 아미고 HD는 근거리 및 원거리의 대상을 생동감 있고 맑은 HD 이미지로 보여주는 8인치 와이드 휴대용 독서확대기입니다. 가볍고 사용이 간편하며, 자료에 직접 놓거나, 잡고 보거나, 멀리 있는 자료를 볼 수 있는 다기능 제품으로 가격, 메뉴, 설명서, 거리의 간판 등 근거리 원거리 등, 무엇이든지 보여줄 것입니다.

개인부담금 일반 460,000원 / 기초수급대상·차상위계층 165,000원

제조원 Enhanced Vision / U.S.A

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배/우편

납품기간 25일

납품자 바투비전 / 담당자 : 정성오

(04798)서울시 성동구 아차산로15길 10 성원상떼뷰오피스텔 809호

Tel : 010-2760-4669 / FAX : 0504-848-4669 / www.batuvision.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 010934-02-162004 예금주명 : 정성오(바투비전)

✓ 제품사양

- LCD 크기 : 8인치 고해상도 LCD와 넓은 시야각(1280*720)
- 확대 배율 : 1.8~30배율
- USB-C(HDMI) 출력 가능
- 큰 모니터로 화면 출력
- 책이나 문서 보기, 근거리 물체 보기, 원거리 보기 가능
- 최대 3시간 30분 연속사용이 가능한 리튬이온 배터리 장착
- 라이브 이미지 패닝 : 제품을 움직이지 않고 라이브 이미지를 움직여 볼수 있음
- 본체 크기 : L 2.54 X W 22.86 X H 14.12 cm
- 중량 : 740g

✓ 구성품목

- 아미고 HD 본체 & 케이스 1대 / 전원 어댑터 1개
- USB-C 충전케이블 1개 / 사용설명서 1부

✓ 주요기능

- 선명한 색상, 맑은 화질을 보여주는 HD 카메라 장착
- 넓은 화면을 보여주는 고해상도의 와이드 8" LCD
- 잔상이 거의 없고, 선명하여 사용자 눈의 피로를 줄여줌
- 근거리, 원거리 등 어느 위치에서나 물체나 글씨를 볼 수 있음
- 1.8~30배의 광범위한 확대 배율
- 3시간30분 연속사용 가능한 리튬이온 배터리
- 화면 캡처 저장(배율, 색상 변경, 버튼으로 이동 보기/40GB 용량)
- 외부 모니터로 출력 가능 : USB-C(HDMI) 포트
- 24색상 모드(컬러, 흑백, 고대비, 역상, 특수20색상)
- 이동용 가방을 제공하여 사용의 편리성 및 보관의 안전성 확보

✓ 제품특징

- 아미고 HD는 근거리 및 원거리 등 물체나 글씨를 생동감 있는 색상, 선명하고 맑은 HD 화질로 보여주는 8인치 와이드 휴대용 독서확대기
- 컴팩트한 디자인, 가벼운 무게, 간편한 인터페이스, 선명한 화면의 휴대용 독서확대기
- 책이나 물체에 직접 사용하거나, 손으로 잡고 볼 수 있습니다.
- 간편한 구조의 버튼으로 쉽게 배율, 색상을 조절할 수 있습니다.

- 언제나 휴대하여 제품 가격, 음식 메뉴, 라벨, 건물 간판 등 모두 볼 수 있습니다.
- 화면을 외부 대형 TV, 모니터로 출력 가능(USB-C(HDMI) 포트 사용)

✓ 활용방안(기대효과)

- 휴대가 가능한 HD 화질의 8인치 휴대용 독서확대기로 이동성이 뛰어나며, 근거리 및 원거리 확대 기능으로 시각장애인이 어디서나 문서 보기, 예금통장, 의사 처방전, 가격표, 거리의 간판, 커피숍의 원거리 메뉴 등등 일상생활에서 필요한 인쇄물을 즉시 확대하여 보여주고, 최대 3시간 30분 사용이 가능한 리튬이온 충전 배터리를 장착하여 일상적인 정보 접근이 가능하게 도와주는 휴대용 독서확대기입니다.

✓ 사용가능대상

- 시각장애인 중 전맹을 제외한 전 저시력장애인(저시력자)

✓ 사용방법

- 아미고 HD의 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- 문서, 책 또는 신문 등 위에 아미고 HD를 올리거나 손으로 잡고 원하는 위치로 향하여 줍니다.
- 시력에 적합한 배율을 조절, 편안한 색상모드를 스위치를 눌러 선택하여 줍니다.
- 아미고 HD를 상하좌우로 움직여 문서, 책 또는 신문 등을 읽습니다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음(모니터 출력시 USB-C (HDMI) 단자 필요)

✓ 사용 시 유의사항

- LCD 화면의 특성상 가열 혹은 충격을 가할경우 제품이 손상될 우려가 있음
- 미사용 또는 장시간 사용하지 않을 때 에도 주기적인 충전을 하여야 배터리 효율이 높아짐

✓ 최초출시일 : 2026년도

아이러뷰 13 스마트 시 에디션 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 - 휴대용 확대기와 탁상형 확대기의 장점을 결합한 신개념 제품. 초경량 접이식 구조
 - 장시간 사용해도 눈이 편안한 특허기술 적용 멀리보기, 독서모드, 셀프뷰 모드 지원
 - 미국 교육부, APH, 일본, 유럽에 수출 중인 품질이 검증된 인기 제품
 - 세계적인 발명가 Mr. Chris Park의 작품. 미국, 영국, 독일, 일본 특허 등록

개 인 부 담 금 일반 760,000원 / 기초수급대상·차상위계층 240,000원

제 조 원 (주)씨애플 C&P / 한국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)씨애플 C&P

(서울) 서울특별시 강남구 언주로 201 (부산) 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 78
 010-3907-2206, 010-5679-2209, 02-6010-2209 문자 상담 콜백 서비스 가능

개인부담금계좌번호 (우체국) 601724-02-036650 예금주명 : (주)씨애플

✓ 제품사양

- 화면 : 13.3인치 와이드 LCD (1920x1080p)
- 확대배율 : 최소 1.8x ~ 최대 250x (기본배율 : 1.8x~30x)
- 크기 : 32 x 37.6 x 42cm (펼친 사이즈)
32x37.6x6.1cm (접은 사이즈)
- 무게 : 3.54 kg (배터리 미포함) / 3.91 kg (배터리 포함)
- 사용시간 : 최대 5시간 (대용량 배터리)

✓ 구성품목

- 아이러뷰 13 스마트 시에디션 1대 / 충전 어댑터 1개
- 제품용 파우치 1개 / 사용 설명서 1부 /
- 디스플레이 청소용 극세사 클리너 1개

✓ 주요기능

- 휴대가 편리한 "13.3인치의 Full HD 탁상형 확대기"
- 초경량 이동형 접이식 구조
- 1.8x ~ 250x(최대) 확대 가능
- 독서 모드, 거울모드(셀프 뷰 모드), 기울임 모드, 멀리보기 모드 등 다양한 편의 기능 지원
- 최대 35가지 컬러 모드 (사용자 맞춤형 색상 선택 및 편집 가능)
- 영상 최적화 기능 (화면 밝기 5단계)
- 실시간 영상 캡처 및 라인&마크 기능
- 외부 모니터(대형모니터) 연결을 통한 고해상도 영상 출력 가능
- 자동 절전 및 자동 전원 오프 기능 (사용자 시간 선택)
- 최대 5시간 연속 사용이 가능한 대용량 배터리 장착
- 공인인증 : KC(한국), CE(유럽), FCC(미국), RoHS(유럽), Medical CE(유럽) 등
- Plug & Play 기능 추가
번거로운 소프트웨어 설치 없이 크롬북, 아이패드, 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, 전자칠판, 안드로이드, PC와 연동하여 학습 및 업무 가능한 Smart Edition
*주씨애플의 지속적인 투자로 개발 성공. 연결시 자동 작동
- 스마트 디바이스의 인공지능, OCR, 번역기능 등 최첨단 기능과 확대기 동시 사용이 가능
- 2개의 듀얼 모니터 모드로 사용 가능, 양쪽의 콘텐츠를 동시 사용이 가능

✓ 제품특징

- 오래 사용해도 눈이 편안한 특허기술 적용
- 이동이 편리한 접이식 구조, 사용시에는 전용 특허기술
- 다양한 모드 사용 가능. 공간을 작게 차지하며 무게가 가벼움
- 13.3인치의 넓은 화면과 선명한 영상으로 책이나, 인쇄물의 판독이 용이하여 만족도가 높음
- 스마트 시 에디션 기능 :
- 스마트 디바이스의 인공지능, OCR, 번역 기능 등 최첨단 기능과 확대기 동시 사용 가능
- 2개의 듀얼 모니터 모드로 사용 가능하고, 양쪽의 콘텐츠를 동시

사용이 가능

- 크롬북, 아이패드, 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, 전자칠판, 안드로이드, PC 등의 콘텐츠를 연동하여 학습 및 업무 효율성 향상시키는 획기적인 신기능
- Plug & Play 기능 : 복잡한 소프트웨어의 설치나 관리가 필요없이 연결하면 바로 작동되는 획기적인 신기능
- *저시력자를 위한 눈을 보호하는 선명하고 노이즈 없는 영상 제공 + 스마트 기능, 콤팩트한 디자인과 접이식 구조로 인해 공간활용도가 높고 다양한 Viewing Mode를 제공하여 활용도가 높은 제품으로, 근거리, 셀프뷰 모드까지 가정, 학교, 고령자 작업장의 공간에서 업무보조기기로 활용성이 높은 제품

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각적 문제로 어려움을 겪는 분들에게 이동이 용이한 13.3인치 탁상형 확대기를 통해 사회활동을 장려하고 정보생활을 영위하는데 도움을 주고자함.
- 컬러모드 및 근거리, 원거리, 셀프 뷰 모드까지 다양한 Viewing Mode를 제공하여 가정, 학교, 직장, 고령자 작업 공간에서 업무 보조기기로 활용성이 높은 제품

✓ 사용가능대상

- 전맹을 제외한 모든 저시력 장애인

✓ 사용방법

1. 아이러뷰 13의 좌측면에 있는 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
2. 아이러뷰 13의 확대판에 책, 신문 등 보고자 하는 대상물을 놓거나(독서모드), 카메라를 회전하여 원거리에 있는 대상물을 위치시킵니다.(멀리보기/셀프뷰)
3. 모니터 중간의 위치한 (+),(-)축 배울 회전식 키를 좌우로 이동시켜 원하는 배울 조절을 합니다.
4. 모니터 우측의 컬러모드 버튼을 이용해 원하는 컬러모드를 선택합니다.
5. 캡처버튼을 이용하여 정지된 화면을 부분 확대하여 원하는 부분을 이동하여 읽을 수 있습니다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려가 있습니다.
- 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오

✓ 최초출시일 : 2018년 3월 출시

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

아이러뷰 16 프리미엄 스마트 시 에디션 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 - 아이폰, 전자칠판 등 스마트 디바이스 연동 - 학습/업무 효율성 향상 프리미엄 제품
 - 미국 교육부/보훈부, APH, 독일, 노르웨이, 프랑스, 일본 등에 수출중인 인기 제품
 - 이동가능한 초경량 접이식 구조. 장시간 사용해도 눈이 편한 특허기술 적용
 - 세계적인 발명가인 Mr. Chris Park의 작품. 미국, 영국, 유럽, 일본 특허 등록

개인부담금 일반 820,000원 / 기초수급대상·차상위계층 255,000원

제조원 (주)씨애플 C&P / 한국

품질보증기간 24개월

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)씨애플 C&P

(서울) 서울특별시 강남구 언주로 201 (부산) 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 78
 010-3907-2206, 010-5679-2209, 02-6010-2209 문자 상담 콜백 서비스 기능

개인부담금계좌번호 (우체국) 601724-02-036650 예금주명 : (주)씨애플

✓ 제품사양

- 화면 : 15.6인치 와이드 LCD (1920x1080p)
- 확대배율 : 최소 1.4x ~ 최대 388x (기본배율 : 2.3x~35x)
- 펼친 사이즈 : 38.1x40.6x47.4cm, 접은 사이즈 : 38.1x40.8x6.1cm
- 무게 : 4.36 kg (배터리 미포함) / 4.73 kg (배터리 포함)
- 사용시간 : 최대 5시간 (대용량 배터리)

✓ 구성품목

- 아이러뷰 16 프리미엄 스마트 시 에디션 1대 / 충전 어댑터 1개
- 제품용 파워치 1개 / 사용 설명서 1부
- 디스플레이 청소용 극세사 클리너 1개

✓ 주요기능

- 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, PC 연동하여 학습 및 업무 가능한 프리미엄 버전
- 휴대가 편리한 "15.6인치의 Full HD 탁상형 확대기"
- 초경량 이동형 접이식 구조 / 1.4x ~ 388x(최대) 확대 가능
- 독서 모드, 거울모드(셀프 뷰 모드), 기울임 모드, 멀리보기 모드 등 다양한 편의 기능 지원
- 최대 35가지 컬러 모드 (사용자 맞춤형 색상 선택 및 편집 가능)
- 영상 최적화 기능 (화면 밝기 5단계)
- 실시간 영상 캡처 및 라인&마크 기능
- 외부 모니터 대형모니터 연결을 통한 고해상도 영상 출력 가능
- USB 3.0 / HDMI 기능
- 자동 절전 및 자동 전원 오프 기능 (사용자 시간 선택)
- 최대 5시간 연속 사용이 가능한 대용량 배터리 장착
- 공인인증 : KC(한국), CE(유럽), FCC(미국), RoHS(유럽), Medical CE(유럽) 등 Plug & Play 기능 추가
- 번거로운 소프트웨어 설치 없이 크롬북, 아이패드, 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, 전자칠판, 안드로이드, PC와 연동하여 학습 및 업무 가능한 Smart Edition
- *씨애플의 지속적인 투자가 개발 성공. 연결시 자동 작동
- 스마트 디바이스의 인공지능, OCR, 번역기능 등 최첨단 기능과 확대기 동시 사용이 가능
- 2개의 듀얼 모니터 모드로 사용 가능, 양쪽의 콘텐츠를 동시 사용이 가능

✓ 제품특징

- 오래 사용해도 눈이 편한 특허기술
- 이동이 편리한 접이식 구조, 사용시에는 전용 특허기술 다양한 모드 사용 가능
- 공간을 작게 차지하며 무게가 가벼움
- 15.6인치의 넓은 화면과 선명한 영상으로 책이나, 인쇄물의 판독이 용이하여 만족도가 높음
- 스마트 시 에디션 기능 :
 - 스마트 디바이스의 인공지능, OCR, 번역 기능 등 최첨단 기능과 확대기 동시 사용 가능
 - 2개의 듀얼 모니터 모드로 사용 가능하고, 양쪽의 콘텐츠를 동시

사용이 가능

- 크롬북, 아이패드, 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, 전자칠판, 안드로이드, PC 등의 콘텐츠를 연동하여 학습 및 업무 효율성 향상시키는 획기적인 신기능
- Plug & Play 기능 : 복잡한 소프트웨어의 설치나 관리가 필요없이 연결하면 바로 작동되는 획기적인 신기능
- *저시력자를 위한 눈을 보호하는 선명하고 노이즈 없는 영상 제공 + 스마트 기능, 콤팩트한 디자인과 접이식 구조로 인해 공간활용도가 높고 다양한 Viewing Mode를 제공하여 활용도가 높은 제품으로, 근거리, 셀프뷰 모드까지 가정, 학교, 고령자 작업장의 공간에서 업무보조기기로 활용성이 높은 제품

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각적 문제로 어려움을 겪는 분들에게 이동이 용이한 15.6인치 탁상형 확대기를 통해 사회활동을 장려하고 정보생활을 영위하는데 도움을 주고자함.
- 컬러모드 및 근거리, 원거리, 셀프 뷰 모드까지 다양한 Viewing Mode를 제공하여 가정, 학교, 직장, 고령자 작업 공간에서 업무 보조기기로 활용성이 높은 제품

✓ 사용가능대상

- 전맹을 제외한 모든 저시력 장애인

✓ 사용방법

1. 아이러뷰 16의 좌측면에 있는 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
2. 아이러뷰 16의 확대판에 책, 신문 등 보고자 하는 대상물을 놓거나(독서모드), 카메라를 회전하여 원거리에 있는 대상물을 위치시킵니다.(멀리보기/셀프뷰)
3. 모니터 중간의 위치한 (+),(-)축 배율 회전식 키를 좌우로 이동시켜 원하는 배율 조절을 합니다.
4. 모니터 우측의 컬러모드 버튼을 이용해 원하는 컬러모드를 선택합니다.
5. 캡처버튼을 이용하여 정지된 화면을 부분 확대하여 원하는 부분을 이동하여 읽을 수 있습니다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 기열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려가 있습니다.
- 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오

✓ 최초출시일 : 2018년 3월 출시

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

아이러뷰 MAX 프리미엄 스마트 시 에디션 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 - 아이폰, 전자칠판 등 스마트 디바이스 연동 - 학습/업무 효율성 향상 프리미엄 제품
 - 미국 교육부/보훈부, APH, 독일, 노르웨이, 프랑스, 일본 등에 수출중인 인기 제품
 - 이동가능한 초경량 접이식 구조. 장시간 사용해도 눈이 편한 특허기술 적용
 - 세계적인 발명가인 Mr. Chris Park의 작품. 미국, 영국, 유럽, 일본 특허 등록

개인부담금 일반 860,000원 / 기초수급대상·차상위계층 265,000원

제조원 (주)씨애플 C&P / 한국

품질보증기간 24개월

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)씨애플 C&P

(서울) 서울특별시 강남구 언주로 201 (부산) 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 78
 010-3907-2206, 010-5679-2209, 02-6010-2209 문자 상담 콜백 서비스 가능

개인부담금계좌번호 (우체국) 601724-02-036650 예금주명 : (주)씨애플

✓ 제품사양

- 화면 : 17.3인치 와이드 LCD (1920x1080p)
- 확대배율 : 최소 1.4x ~ 최대 388x (기본배율 : 2.3x~35x)
- 펼친 사이즈 : 41.3 x 44.5 x 52cm, 접은 사이즈 : 41.3 x 43.4 x 6.8cm
- 무게 : 5.09 kg (배터리 미포함) / 5.46 kg (배터리 포함)
- 사용시간 : 최대 5시간 (대용량 배터리)

✓ 구성품목

- 아이러뷰 MAX 프리미엄 스마트 시 에디션 1대 / 충전 어댑터 1개
- 사용 설명서 1부 / 디스플레이 청소용 극세사 클리너 1개

✓ 주요기능

- 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, PC 연동하여 학습 및 업무 가능한 프리미엄 버전
- 휴대가 편리한 "17.3인치의 Full HD 탁상형 확대기"
- 초경량 이동형 접이식 구조 / 1.4x ~ 388x(최대) 확대 가능
- 독서 모드, 거울모드(셀프 뷰 모드), 기울임 모드, 멀리보기 모드 등 다양한 편의 기능 지원
- 최대 35가지 컬러 모드 (사용자 맞춤형 색상 선택 및 편집 기능)
- 영상 최적화 기능 (화면 밝기 5단계)
- 실시간 영상 캡처 및 라인&마스킹 기능
- 외부 모니터 대형모니터 연결을 통한 고해상도 영상 출력 가능
- USB 3.0 / HDMI 가능
- 자동 절전 및 자동 전원 오프 기능 (사용자 시간 선택)
- 최대 5시간 연속 사용이 가능한 대용량 배터리 장착
- 공인인증 : KC(한국), CE(유럽), FCC(미국), RoHS(유럽), Medical CE(유럽) 등
- Plug & Play 기능 추가
 번거로운 소프트웨어 설치 없이 크롬북, 아이패드, 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, 전자칠판, 안드로이드, PC와 연동하여 학습 및 업무 가능한 Smart Edition
 * (주)씨애플의 지속적인 투자로 개발 성공. 연결시 자동 작동
- 스마트 디바이스의 인공지능, OCR, 번역기능 등 최첨단 기능과 확대기 동시 사용이 가능
- 2개의 듀얼 모니터 모드로 사용 가능, 양쪽의 콘텐츠를 동시 사용이 가능

✓ 제품특징

- 오래 사용해도 눈이 편한 특허기술
- 이동이 편리한 접이식 구조, 사용시에는 전용 특허기술 다양한 모드 사용 가능
- 공간을 작게 차지하며 무게가 가벼움
- 17.3인치의 넓은 화면과 선명한 영상으로 책이나, 인쇄물의 판독이 용이하여 만족도가 높음
- 스마트 시 에디션 기능 :
 - 스마트 디바이스의 인공지능, OCR, 번역 기능 등 최첨단 기능과 확대기 동시 사용 가능
 - 2개의 듀얼 모니터 모드로 사용 가능하고, 양쪽의 콘텐츠를 동시

사용이 가능

- 크롬북, 아이패드, 아이폰, 휴대폰, 학습용 패드, 노트북, 전자칠판, 안드로이드, PC 등의 콘텐츠를 연동하여 학습 및 업무 효율성 향상시키는 획기적인 신기능
- Plug & Play 기능 : 복잡한 소프트웨어의 설치나 관리가 필요없이 연결하면 바로 작동되는 획기적인 신기능
- *저시력자를 위한 눈을 보호하는 선명하고 노이즈 없는 영상 제공 + 스마트 기능, 콤팩트한 디자인과 접이식 구조로 인해 공간활용도가 높고 다양한 Viewing Mode를 제공하여 활용도가 높은 제품으로, 근거리, 셀프 뷰 모드까지 가정, 학교, 교령자 작업장에서 업무보조기기로 활용성이 높은 제품

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각적 문제로 어려움을 겪는 분들에게 이동이 용이한 17.3인치 탁상형 확대기를 통해 사회활동을 장려하고 정보생활을 영위하는데 도움을 주고자함
- 컬러모드 및 근거리, 원거리, 셀프 뷰 모드까지 다양한 Viewing Mode를 제공하여 가정, 학교, 직장, 교령자 작업 공간에서 업무 보조기기로 활용성이 높은 제품

✓ 사용가능대상

- 전맹을 제외한 모든 저시력 장애인

✓ 사용방법

1. 아이러뷰 MAX의 좌측면에 있는 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
2. 아이러뷰 MAX의 확대판에 책, 신문 등 보고자 하는 대상물을 놓거나(독서모드), 카메라를 회전하여 원거리에 있는 대상물을 위치시킵니다.(멀리보기/셀프뷰)
3. 모니터 중간에 위치한 (+), (-)증 배율 회전식 키를 좌우로 이동시켜 원하는 배율 조절을 합니다.
4. 모니터 우측의 컬러모드 버튼을 이용해 원하는 컬러모드를 선택합니다.
5. 캡처버튼을 이용하여 정지된 화면을 부분 확대하여 원하는 부분을 이동하여 읽을 수 있습니다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려가 있습니다.
- 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오

✓ 최초출시일 : 2018년 3월 출시

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

올캠 탭 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 올캠의 실시간 OCR기능과 태블릿의 무선연결을 통한 확대기능을 결합한 올인원 독서확대기

개인부담금 일반 712,000원 / 기초수급대상·차상위계층 228,000원

제조원 (주)셀바스헬스케어 / 한국

품질보증기간 24개월

납품방법 방문설치

납품기간 21일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지

대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)

Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 올캠 본체
 - 크기: 12 x 2.5 x 1.3(cm)
 - 무게: 44.5g
 - 충전: USB-C타입
 - 카메라모드: 13메가픽셀
- 전용단말기
 - 크기: 10.9 인치
 - 운영체제: Android
 - 저장용량: 128GB
 - 배터리: 8,000mAh
 - RAM: 6GB
 - 무게: 524g

✓ 구성품목

- 본체(올캠, 태블릿 각 1대)
- 태블릿 전용 어댑터 1개
- 올캠 보관 케이스 1개
- 전용 거치대 1개
- 퀵 가이드 설명서 1부
- 케이블 1개
- 이어폰 1개
- 목걸이끈 1개

✓ 주요기능

- 확대기능: 최대확대배율 6배
- OCR기능: 인쇄물(손글씨 포함) 판독 및 음성출력
- 다양한 연결성: 제공 태블릿 외 휴대폰, 컴퓨터로 접속하여 확대기로 사용가능
- 전용 거치대로 안정적인 사용가능
- 편리하고 직관적인 사용방법 외 유, 무선 연결가능

✓ 제품특징

- 올인원 독서확대기: 전용 앱을 통해 연제어디서나 다양한 장치와 연결하여 사용가능
- 휴대성: 44g의 작고 가벼운 카메라로 기존 확대기 대비 휴대성의 극대화
- OCR문자판독: 인쇄물 및 손글씨 문자판독 및 음성출력(국문, 영문)
- 사용자 기호나 상황에 따라 태블릿 따로, 올캠 본체 단독으로 OCR기기로써 사용가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 휴대가 간편하고 인쇄물에 대한 판독이 용이하여 저시력 시각장애인의 교육, 취업, 일상생활에서 인쇄물 정보접근에 매우 용이함

✓ 사용가능대상

- 잔존시력이 있는 저시력 시각장애인(시각장애 1~6급)

✓ 사용방법

- 올캠 본체의 전원을 켜다.
- 전용 태블릿 또는 본인이 가지고 있는 컴퓨터나 태블릿 핸드폰을 켜다.
- 전용앱에 뜬 QR코드를 올캠 본체로 촬영한다. (와이파이를 연결)
- 올캠 본품을 스탠딩 거치대에 고정시킨다.
- 정보를 확인하고자 하는 물체를 본체 카메라가 비추도록 각도를 조절한다.
- 화면에 뜨는 확대 조절 기능을 활용하여 정보를 확인한다

✓ 최소PC요구사항

- 인터넷이 연결된 PC, 태블릿 등

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2024년 10월

캔디6 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 고해상도(HD)의 선명한 화질과 자동으로 초점을 조절해주는 Auto Focus 기능, 사용자 편의성을 고려한 인체 공학적인 손잡이 기능을 제공하는 5.5인치 크기의 휴대용 독서확대기

개인부담금 일반 198,000원 / 기초수급대상·차상위계층 99,000원

제조원 ZOOMAX / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배 배송

납품기간 14일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기 : 가로 16 x 세로 8 x 높이 1.1(cm)
- 무게 : 210g
- 확대배율 : 최소 2.5배 ~ 최대 19배
- 모니터 : 와이드형 5.5인치 TFT패널
- 색상/밝기 : 12가지 / 5단계
- HD카메라, 자동초점 기능
- 손잡이 : 3가지 각도 지원
- 배터리 : 3시간 충전 / 5시간 사용

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 케이스 1개
- 충전어댑터 1개
- 사용설명서 1개

✓ 주요기능

- 확대배율 : 최소 2.5배 ~ 최대 19배
- 화면 정지 및 이미지 저장
- 색상 및 밝기 조절 기능 : 기본 12가지 색상 모드를 제공하며 자연색을 제외한 11가지 색상은 사용자가 선택 가능, 5단계 밝기 조절
- 인체공학적인 손잡이 제공 : 손잡이에 3가지 각도를 지원하여 왼손, 오른손 사용자 모두 사용
- 자동절전모드 : 전원을 켜 상태에서 3분간 사용하지 않고 방치하면 절전모드로 전환
- Continuous Zoom 기능 : 최저에서 최대배율까지 부드럽게 확대되어 사용자의 시력 특성에 따라 최적의 배율을 선택가능
- 배터리 부족 아이콘 기능 : 배터리부족 아이콘이 화면에 자동으로 표시되어 배터리 방전을 방지할 수 있음

✓ 제품특징

- 13MP 고화질 카메라로 선명한 화질과 5.5인치 크기의 넓은 화면 제공
- 인체공학적으로 설계된 3단계 각도 회전식 손잡이
- 인쇄물 읽기에 최적화된 일체형 받침대
- 화면 정지 및 이미지 저장 기능
- Auto Focus 기능 : 사물 거리에 관계없이 모든 사물에 자동 초점
- 12가지 색상변경으로 색약, 색맹, 저시력자에게 최적의 독서환경 제공

✓ 활용방안(기대효과)

- 휴대가 간편하고 인쇄물에 대한 판독이 용이하여 저시력 시각장애인의 교육, 취업, 일상생활에서 인쇄물 정보접근에 매우 용이함

✓ 사용가능대상

- 잔존시력이 있는 저시력 시각장애인(시각장애 1~6급)

✓ 사용방법

- 전원 켜기 : 전원 스위치를 비프음이 나올 때까지 3초간 누름
- 읽기 기능(받침대 사용) : 인쇄물 위에 받침대를 편 상태로 기기를 올려놓고 확대/축소버튼, 컬러모드, 밝기모드를 본인 시력에 맞게 조절하여 좌우상하로 이동하면서 읽음.
- 읽기 기능(손잡이 사용) : 3가지 각도 중 편한 각도로 맞추어 사용

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2023년 1월

컴팩10HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 10인치의 터치스크린으로 팔(Arm)을 펼치면 전체보기와 필기가 가능한 휴대용 독서확대기

개인부담금 일반 400,000원 / 기초수급대상·차상위계층 150,000원

제 조 원 Optelec / 네덜란드

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현
(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층
Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 팔(Arm)을 펼치면 전체보기와 필기가 가능
- 화 면 : 10인치 터치스크린
- 배 율 : 0.5x~22x (확대배율 0.5배로 시작하는 우수기능)
- 화면모드 : 16가지 색상모드
- 무 게 : 915g
- 크 기 : 26.1x18.9x3.6 cm

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 충전어댑터 1개
- USB케이블 1개
- 사용설명서 1부
- 휴대용가방 1개

✓ 주요기능

- 팔(Arm)에 카메라 장착으로 전체보기, 필기 가능
- 화 면 : 10인치 터치 스크린
- 배 율 : 0.5x~22x (확대배율 0.5배로 시작하는 우수기능)
- 근거리, 원거리 보기 가능
- 팔을 펼쳐서 필기 가능
- 팔을 펼쳐서 문서 전체보기 가능
- 표준 사용시간 4시간

✓ 제품특징

- 선명한 색상과 화질을 보여주는 HD카메라 장착
- 터치스크린으로 사용 편리
- 0.5~22배의 정밀한 확대 배율
- 팔을 펼쳐서 문서 전체보기 및 필기 가능
- 학생, 직장인 문서 작업에 용이

✓ 활용방안(기대효과)

- 10인치 사이즈에 비해 가볍고 견고한 제품
- 전체보기와 필기 가능

✓ 사용가능대상

- 시각장애인증 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 왼쪽의 빨간 전원버튼을 눌러 ON/OFF한다.
- ② 화면에 있는 버튼을 터치하여 확대, 축소, 모드를 조절한다.
- ③ 왼쪽 상단의 팔을 위로 올려 펼치면 필기&전체보기 모드가 된다.
- ④ 팔을 펼쳐 사용할 때는 간편하게 문서만 이동하여 보면 된다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2020년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

컴팩7 HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 선명한 HD고화질의 독서확대기로 7인치 크기의 큰 화면을 장착

개 인 부 담 금 일반 330,000원 / 기초수급대상·차상위계층 132,500원

제 조 원 Optelec / 네덜란드

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 15일

납 품 자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자: 곽노현
(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층
Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명: (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 7인치 LCD 모니터
- 배율: 2배24배
- 규격: 19(W) x 13(D) x 6(H)cm
- 탁월한 해상도 (HD Camera장착)
- 자동초점, 소리 알람, Li-ion Battery
- 1m까지 자동초점
- 75개 화면 저장
- 표준사용시간 4.5시간
- 무게: 640g

✓ 구성품목

- 컴팩 7 HD 본체 1대
- 충전아답터 1개
- 한글사용설명서 1부
- 휴대가방 1개

✓ 주요기능

- HD Camera 7인치 휴대용 독서확대기로 만족도 높은 제품
- 탁월한 해상도: 기존 확대기보다 3배 선명함
- 2.6cm 두께로 최적의 휴대성 제공
- 버튼의 간소화로 사용자의 불편함 해소

✓ 제품특징

- 견고한 본체로 휴대로 편의성 높음
- 스냅사진의 확대 또한 저장
- 휴대용이지만 큰 화면과 선명한 화질로 사용자의 편의에 도움
- 버튼 간소화로 사용이 간편함
- 장시간 사용에도 눈의 피로함을 적게 느끼며 확대 축소가 자유자재로 작동 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 휴대용이지만 큰 화면을 이용하여 답답함 없이 시원하게 독서를 할 수 있음.
- 또한 원하는 경치나 상대의 얼굴을 스냅으로 찍어 확대하여 볼 수 있으며, 2배에서 24배까지의 확대는 사용자로 하여금 편안하고 즐거운 독서를 할 수 있게 도와줌.
- 선명하고 깨끗한 화면으로 인해 그전의 답답함을 해소 시켜주는 컴팩 7 HD는 시각장애인들에게 만족도가 높음.

✓ 사용가능대상

- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 전원을 켜 후 배율을 조절한다.
- ② 흑백, 칼라 등 사용자에게 맞는 모드를 선택한다.
- ③ 양끝 네모서리를 잡고 화면을 위로 올려서 편안하게 독서한다.
- ④ 원거리를 볼 때는 닫힘 상태로 해야 한다
- ⑤ 스냅샷 버튼을 눌러서 이미지를 정지시킨 후 확대 및 축소할 수 있다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.

✓ 최초출시일 : 2013년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

클로버 노트 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 12.5인치 휴대용 독서확대기로써 화면을 Joystick으로 360°를 돌려서 볼 수 있는 장점이 있음

개인부담금 일반 420,000원 / 기초수급대상·차상위계층 155,000원

제조원 SightCare / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현

(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층

Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 화면 : 12.5인치 IPS 터치스크린
- 배울 : 2.2~50배
- 크기 : 318x245x24mm(접었을시)
318x140x170mm (기기설정)
- 무게 : 1,105g (배터리 포함)

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 충전아답터 1개
- 한글사용설명서 1부
- 휴대가방 1개

✓ 주요기능

- 12.5인치 터치스크린 확대기능
- 2개의 카메라 장착 / 원거리, 근거리, 거울모드 가능
- Joystick을 이용한 편리한 사용
- 초경량 12.5인치 휴대용확대로 원거리보기(철판), 필기 사용 편리

✓ 제품특징

- 12.5인치의 넓은 터치스크린으로 확대기능 편리.
- 원거리, 근거리 보기가 가능. (철판보기, 필기 가능)
- 조이스틱(Joystick) 조작으로 확대 화면보기가 매우 수월.
- LED 조명: 좌/우 조명 On/Off

✓ 활용방안(기대효과)

- 심플한 디자인과 가벼운 무게로 휴대가 편리하며, 2개의 카메라 장착으로 영수증, 우편물, 설명서등의 근거리 보기와 표지판, 간판 등의 원거리 보기가 가능하기 때문에 사용자에게 다양한 편리함을 제공함.
- 조이스틱(Joystick) 조절을 통하여 확대된 화면을 편리하게 조작하여 볼 수 있음

✓ 사용가능대상

- 시각장애인증 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 스펀드 왼쪽에 동그란 흰색버튼으로 ON/OFF 한다.
- ② 두 번째 레버로 색상모드를 변경하고, 네 번째 레버로 확대, 축소를 조절한다.
- ③ 가운데 주황색 스틱으로 화면 이동 한다
- ④ 기기 옆면에 화면 전환 버튼으로 원거리, 근거리를 조절한다. (원거리 카메라 탈부착)

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2023년

✓ 최근 업그레이드 : 2024년

클로버 북프로 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 12.5인치 터치스크린으로 원거리,근거리,필기가 동시에 가능한 활용도가 높은 다목적 독서확대기, External screen 12.5 인치 추가 공급

개 인 부 담 금 일반 660,000원 / 기초수급대상·차상위계층 215,000원

제 조 원 SighthCare / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현

(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층

Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 모니터 : 2개의 12.5인치 스크린 제공
 - 1)12.5인치 터치스크린
 - 2)12.5인치 원거리용 모니터
- 배 율 : 근거리:1배-60배 / 원거리:1배-18배
- 카 메 라 : 근거리, 원거리 두 개의 카메라
- 원 거 리 : 카메라 팔(Arm) 360° 회전
- 스 크 린 : 12.5인치 스크린 2개로 분할화면 가능 (원거리, 근거리 동시가능)
- 3~4시간 사용/ 3~4시간 충전
- 크 기 : 38x26x4cm (접었을시)
38x26x25cm (펼쳤을시)
- 무 게 : 2.5kg

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 12.5인치 추가 스크린 1대
- 사용설명서 1부
- 전원어댑터 1개
- 휴대용가방 1개

✓ 주요기능

- 휴대용확대기지만 원거리(칠판,모니터)보기, 필기 사용 편리
- 스크린 두 개로 듀얼 스크린 가능(원거리, 근거리 보기가 동시에 가능)
- 자동초점
- HDMI 기능 (휴대폰,PC연결)

✓ 제품특징

- 듀얼스크린으로 원거리와 근거리를 동시에 볼 수 있음
- OCR 버전 사용 가능
- 학생, 직장인 필기,칠판 보기 최적인 제품

✓ 활용방안(기대효과)

- 접이식이기 때문에 이동이 용이하다
- 듀얼 스크린이 가능하기 때문에 원거리, 근거리 동시 보기가 가능하다

✓ 사용가능대상

- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 스펀드 왼쪽에 동그란 흰색버튼으로 ON/OFF 한다
- ② 두 번째 레버로 색상모드를 변경하고, 네 번째 레버로 확대, 축소를 조절한다.
- ③ 가운데 주황색 스틱으로 화면 이동 한다
- ④ 다섯 번째 버튼으로 OCR 사용을 한다.
- ⑤ 듀얼스크린 이용시 스크린을 하나 더 부착하여 오른쪽의 카메라를 조절하여 원거리, 근거리를 동시에 볼 수 있다.
- ⑥ 본체 스크린의 왼쪽 하단부분의 버튼을 눌러 화면 교체가 가능하다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2020년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

클로버10 HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 최초의 10인치 휴대용 독서확대기로서 확대한 화면을 Joystick으로 좌우상하를 움직여서 볼 수 있는 장점이 있음

개인부담금 일반 350,000원 / 기초수급대상·차상위계층 137,500원

제조원 SightCare / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현

(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층

Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 화면 : 10인치 고해상도 LCD 화면
- 배율 : 2.5x ~18x
- 모드 : 19가지 색상모드
- 무게 : 660g
- 크기 : 24.4x20x2.2mm
- 스탠드 제공

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 충전아답터 1개
- 스탠드 1개
- 한글사용설명서 1부
- 휴대용파우치 1개
- HDMI 케이블 1개

✓ 주요기능

- 2개의 카메라 장착 / 원거리, 근거리, 거울모드 가능
- Joystick을 이용한 편리한 사용
- 스탠드 사용시 필기와 원거리(PC모니터)보기 편리

✓ 제품특징

- 10인치의 넓은 화면으로 사용자의 편리함을 제공.
- 2개의 카메라로 원거리, 근거리 보기가 가능.
- 독서라인 지정으로 수월하게 독서 가능.
- 조이스틱(Joystick) 조작으로 확대 화면보기가 매우 수월.
- 스탠드 사용시 문서작업과 PC모니터(원거리) 보기 편리
- 필기가 필요한 학생, 직장인들에게 인기있는 제품.

✓ 활용방안(기대효과)

- 심플한 디자인과 가벼운 무게로 휴대가 편리하며, 2개의 카메라 장착으로 영수증, 우편물, 설명서등의 근거리 보기와 표지판, 간판 등의 원거리 보기가 가능하기 때문에 사용자에게 다양한 편리함을 제공함.
- 조이스틱(Joystick) 조절을 통하여 확대된 화면을 편리하게 조작하여 볼 수 있음

✓ 사용가능대상

- 시각장애인증 전맹을 제외한 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 스크린 하단의 가운데 버튼을 눌러 전원을 ON/OFF 한다.
- ② 전원 버튼 오른쪽 두 개의 버튼 확대, 확대 축소 버튼으로 사용자의 눈에 맞춘다.
- ③ 전원 버튼 왼쪽의 두 개의 버튼으로 색상모드 변경 및 스냅샷 촬영을 한다.
- ④ 스크린의 상단 가운데 버튼은 메뉴 버튼이며 사용자의 편의맞게 밝기, 색상, 갤러리, 언어 등을 조절한다.
- ⑤ 스크린의 좌우 옆면에는 확대한 화면을 상하좌우로 이동할 수 있는 버튼이 있다

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2018년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

클로버6 HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제 품 개 요 손잡이가 있어 학교, 회사 또는 외부 활동 및 휴대 시 사용이 간편하고 독서대가 있어 장시간 독서가 가능하여 탁상용 보다 활용도가 높음

개 인 부 담 금 일반 260,000원 / 기초수급대상·차상위계층 130,000원

제 조 원 Sightcare / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현

(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층

Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 화 면 : 6인치 IPS 터치 스크린
(눈부심 방지 스크린)
- 카 메 라 : 근거리, 원거리 보기 가능
- 배 율 : 1.5배 - 35배
- 모 드 : 17가지
- 크 기 : 159x90x208 mm
- 무 게 : 272g

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 충전아답터 1개
- 한글사용설명서 1부
- 휴대파우치 1개

✓ 주요기능

- 터치스크린
- 근거리, 원거리 가능
- 이미지 저장(약 2GB)
- 사용시간 3시간 (충전시간 3시간)
- 손잡이와 스텐드 장착으로 휴대 편리

✓ 제품특징

- 가벼운 무게 (272g)
- 터치스크린
- 눈부심 방지 스크린
- 손잡이로 더 편리하게 보기 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 심플한 디자인과 간단한 조작법, 가벼운 무게로 휴대 하기가 편리하고 터치가 가능하여 사용자가 업무 및 검수에 큰 도움을 받을 수 있다

✓ 사용가능대상

- 시각장애인증 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 왼쪽 측면 상단의 초록색 버튼으로 ON/OFF한다.
- ② 스텐드를 펼쳐 스텐드모드로 보거나, 스텐드를 우측방향으로 펼쳐 핸들모드로 셋팅합니다.
- ③ 오른쪽의 +, - 버튼으로 확대 축소 조절을 하고 가장 밑에 주황색 버튼으로는 스냅샷을 찍는다.
- ④ 화면 터치로 확대, 축소를 할 수 있고, 확대된 화면을 터치로 이동하며 볼 수 있다.
- ⑤ 왼쪽의 가장 상단에 있는 버튼으로는 색상모드 변경을 하고 색상모드변경중 그 밑에 버튼을누르면 원래 색상으로 돌아간다.
* 왼쪽 하단의 파란색 버튼은 라인설정을 할 수 있다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.

✓ 최초출시일 : 2021년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

클리어뷰 C 24 HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 선명하고 안정된 화면으로 다른 확대기에 비해 눈의 피로감이 덜 하며 C Type의 공간 활용도가 높은 탁상용 독서확대기

개인부담금 일반 740,000원 / 기초수급대상·차상위계층 235,000원

제조원 Optelec / 네덜란드

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현
(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층
Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 화 면 : Full color TFT 24인치 와이드스크린
- 배 율 : 1.5x ~ 75x
- 화면모드 : 16가지 색상 모드(칼라, 흑백, 고대비)
- 크 기 : 51(W) x 42(D)
- 무 게 : 16.5kg

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 전원선 1개
- 무선컨트롤 패드 1개
- 한글사용설명서 1부

✓ 주요기능

- Super Image를 위한 HD Camera (1080 Pixels)
- 화 면 : 24인치 Full Color TFT 와이드스크린
- 배 율 : 1.5x~75x
- 컨트롤패드는 기본과 고급으로 사용
- 표준설치(Compact Setup) : 일상사용 시
- 연장설치(Comfort Setup) : C Type로 제작되어 신문, 큰 문서, 수공예 작업 시 편리
- 자동초점 및 초점고정
- 라인 및 영역지정
- 조명 통합 및 반사 제어기능
- 초기화 기능 : 공장출고시의 초기화상태로 시스템복원

✓ 제품특징

- C Type기둥으로 제작하여 공간 활용으로 넓은 책, 문서를 독서하기에 편리함
- 화질이 선명하고 눈에 피로감이 없는 화면.
- 모니터를 옆으로 확장해서 사용 시 넓고 큰 자료를 볼 수 있다.

✓ 활용방안(기대효과)

- C Type로 기둥을 삼아서 뒤쪽공간을 넓게 사용할 수 있으며 동시에 넓은 자료를 볼 때에는 모니터를 옆으로 확장해서도 사용 할 수 있다.

✓ 사용가능대상

- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- 전원을 켜 후 줌 버튼으로 글자크기를 적절히 맞춘다.
- 밝기 버튼으로 사용자에게 맞는 밝기를 설정한다.
- 글자는 모드버튼, 그림은 칼라버튼을 사용한다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.

✓ 최초출시일 : 2015년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

페블 HD [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 저시력자들이 일상생활 혹은 여행시 라벨, 처방전, 메뉴, 지하철 노선표 등을 언제 어디서나 쉽게 읽을 수 있게 하여주는 필수적인 HD 화질의 초소형 휴대용 독서확대기

개인부담금 일반 170,000원 / 기초수급대상·차상위계층 85,000원

제조원 Enhanced Vision / U.S.A

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배/우편

납품기간 25일

납품자 바투비전 / 담당자 : 정성오

(04798)서울시 성동구 아차산로15길 10 성원상떼뷰오피스텔 809호

Tel : 010-2760-4669 / FAX : 0504-848-4669 / www.batuvision.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 010934-02-162004 예금주명 : 정성오(바투비전)

✓ 제품사양

- LCD크기 : 4.3인치 HD 와이드 액정
- 확대배율 : 1.25 ~ 20배최대
- 3시간 연속사용이 가능한 리튬이온 배터리 장착
- 0° ~ 210° 로 조절이 가능한 손잡이
- 본체 크기 : 가로 13.9 x 세로 7.8 x 높이 3.5 cm, 중량 : 320 g

✓ 구성품목

- 페블 HD 본체 1대
- 전원 어댑터 1대
- 이동용 케이스 1개
- 사용설명서 1부

✓ 주요기능

- HD 화질의 가볍고, 손잡이를 장착한 4.3" 와이드 휴대용 확대기
- 확대배율 : 1.25 ~ 20 배[핸들을 접었을 경우 7단계(4.5, 5.5, 7.9, 9.5, 13.5, 16.1, 20배)]
- 320그램 초경량으로 콤팩트 디자인
- 5단계 화면 밝기 조절 가능
- 무게중심 설계의 손잡이(0° ~ 210° 각도조절)로 다양한 활용이 가능(쓰기 기능 지원)
- 28가지 특수 색상 보기 모드
- 화면 캡처 ; 정지된 영상의 확대/축소 가능
- 자동 절전 모드 : 3분 이상 사용치 않을 경우 자동으로 전원이 꺼짐

✓ 제품특징

- HD 화질의 가볍고, 손잡이를 장착한 4.3" 와이드 휴대용 확대기
- 무게중심 설계의 손잡이로 다양한 활용이 가능
- 카메라 위치를 중심에 놓아 사용자의 사용시 편의성 도모
- 주머니에 휴대하기에 용이, 언제 어디서나 휴대사용이 편리함
- 확대기를 들고 보기에 불편하였던 문제점을 개선, 본 제품에서는 손잡이를 부착하여 들고 보거나, 접었을 경우에는 스탠드도 사용할 수 있음.

✓ 활용방안(기대효과)

- 휴대 가능한 HD 화질의 소형 독서확대기로 이동성이 뛰어나며, 손잡이 각도조절이 기능이 있어, 시각장애인이 어디서나 문서 보기, 예금통장, 의사처방전, 가격표 등등 일상생활에서 필요한 인쇄물을 즉시 확대하여 일상적인 정보접근이 가능하도록 하여줍니다.

✓ 사용가능대상

- 시각장애인중 전맹을 제외한 전 저시력장애인(저시력자)

✓ 사용방법

- 페블 HD의 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- 문서, 책 또는 신문 등 위에 페블 HD를 올리거나 손잡이를 펴서 손에 잡습니다.
- 시력에 적합한 배율을 배율조절 스위치를 눌러 선택하여 줍니다.
- 보기에 편안한 색상모드를 보기모드 스위치를 눌러 선택하여 줍니다.
- 페블 HD를 상하좌우로 움직여 문서, 책 또는 신문 등을 읽습니다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- LCD 화면의 특성상 가열 혹은 충격을 가할 경우 제품이 손상될 우려가 있음
- 미사용 또는 장시간 사용하지 않을 때에도 주기적인 충전을 하여야 배터리 효율이 높아짐

✓ 최초출시일 : 2014년도

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 10월 15일(렌즈, 카메라 구경확대, 모니터 화질개선)

포터비전(PortaVision) [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 최대 50배율 확대로 아주 작은 글씨나 물체를 쉽게 볼 수 있는 간편한 저시력인을 위한 휴대용 디지털 확대기입니다. 독서 시 지그재그로 움직이지 않고 한 방향으로 읽을 수 있는 직선형 탐색 기능을 통해 눈의 피로감을 줄여줍니다. 책, 신문, 전단지, 메뉴판, 고지서 등 인쇄물, 가게 간판 및 각종 표지판, 각종 전자기기 화면 등의 작은 글자를 확대하여 볼 수 있는 다용도 활용이 가능합니다.

개인부담금 일반 170,000원 / 기초수급대상·차상위계층 85,000원

제 조 원 (주)넥스트지 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)넥스트지 / 담당자 : 오정민

(03150) 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 216호 (수송동)

Tel : 02-734-1641 / FAX : 02-735-1641 / www.nextg.kr

개인부담금계좌번호 (국민은행) 578601-01-281203 예금주명 : (주)넥스트지

✓ 제품사양

- 1. 하드웨어
 - 운영체제 : Android / 저장공간 : 256GB / 램 : 8GB
 - 화면크기 : 6.5인치
 - 가로 7.55cm, 세로 16.2cm, 두께 1cm / 무게 208g
- 2. 소프트웨어
 - 포터비전 런처

✓ 활용방안(기대효과)

1. 일상생활의 편리성 증대
2. 눈의 피로 감소 및 집중력 향상
3. 다양한 환경에서의 활용성 증대
4. 정보 습득 및 활용 능력 향상

✓ 구성품목

- 본체 1대 / 매뉴얼 1부

✓ 사용가능대상

- 시각장애 중 저시력인

✓ 주요기능

1. 실시간 피사체 확대
2. 독서 집중을 돕는 직선형 탐색(linear navigation)기능
3. 안정적 시야 유지를 위한 라인포인터 기능
4. 선명한 화면 제공을 위한 화질 보정 기능
5. 색상 반전 기능
6. 조명 기능을 통한 야간 모드 지원
7. 화면 자동 스크롤 기능
8. 자동 스크롤 속도 조절 기능
9. 화면 캡처 기능
10. 확대 시야각 가로/세로 모드 지원

✓ 사용방법

1. 기능 선택
 - 런처에서 원하는 기능 (확대, 촬영, 보관함, 설정) 선택
2. 실시간 확대
 - 두 손가락으로 화면 확대/축소
 - 한 번 터치: 초점 자동 보정
 - 두 번 터치: 사진 저장
 - 길게 누르기: 어두울 땐 손전등 ON/OFF
3. 라인 포인터
 - 화면 왼쪽 위 터치로 라인 ON/OFF
4. 화질 변경
 - 옆면 버튼으로 화질 조절
5. 직선 탐색
 - 화면 드래그로 원하는 부분 탐색
6. 각도 조절
 - 화면 아래 양쪽 끝 터치
7. 자동 스크롤
 - 화면 위 양쪽 끝 터치

✓ 제품특징

1. 휴대성과 편리성 극대화
 - 작고 가벼운 디자인으로 언제 어디서든 간편하게 휴대 가능
2. 압도적인 시각 보조 기능
 - 최대 50배율 확대 및 화질 보정으로 작은 글씨도 선명하게
3. 눈 건강을 고려한 독서 환경
 - 직선형 탐색 & 라인 포인터로 눈의 피로 감소 및 집중력 향상
4. 어떤 환경에서도 선명하게
 - 조명, 화질 보정, 색상 반전 기능으로 실내외 및 야간 모드 완벽 지원
5. 스마트한 정보 활용
 - 캡처 기능으로 필요한 정보 즉시 저장 및 공유

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지 / 전용 충전기 사용 / 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2025년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 11월

플로워북 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 독서확대 기능과 컴퓨터 화면확대/음성출력 기능을 하나로 통합한 노트북 솔루션

개인부담금 일반 900,000원 / 기초수급대상·차상위계층 275,000원

제 조 원 (주)오버플로우 / 한국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)오버플로우 / 담당자 : 김상언

(04793) 서울시 성동구 성수일로12길 20 성동안심상가 801호

Tel : 02-465-3450 / FAX : 02-465-3452 / www.atoverflow.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 101907-01-004594 예금주명 : (주)오버플로우

✓ 제품사양

- FLOWY : 소프트웨어 설치
- CPU : 인텔 Ultra7
- RAM : 16GB
- 디스플레이 : 16인치
- SSD : 512GB
- 포트 : USB C타입, USB3.0, USB2.0
- 무선연결 : WIFI/블루투스
- 10배 광학줌 USB 3.1 카메라

✓ 구성품목

- 문서/화면 확대 전용기기(노트북) 1대
- USB 3.1 카메라 1개
- 플로워 소프트웨어 1식
- 무선마우스 1개
- 가방 1개

✓ 주요기능

- 1) 마우스를 활용한 접근성 향상**
문서 및 화면 확대시 마우스를 통해 간편하게 사용할 수 있도록 조작성 향상
- 2) 문서 확대 및 화면 확대 복합 기능**
 - 키보드 캐럿 위치 및 마우스 커서 위치 모양 및 색상조절을 쉽게 조작할 수 있음
 - 마우스 지정 부분의 텍스트를 큰 글자로 볼 수 있으며 타자 작업 시 글을 따라가면서 확대가 되어 오류 부분을 쉽게 인지하여 업무에 큰 도움이 됨
 - 여러개의 창 중 활성화된 창을 본인의 눈앞으로 쉽게 이동
 - 컴퓨터 화면 확대뿐 아니라 종이 문서의 확대 및 음성 출력 가능
 - 문서의 이동 없이 마우스의 이동에 따라 쉽게 확대 및 축소하여 문서의 내용을 습득할 수 있음 (OCR기능 활용)
- 3) 카메라 전환 기능**
전면, 후면 카메라를 사용 할 수 있을 뿐 아니라 USB가 적용되는 카메라의 경우 적용가능하여 원거리 사물도 확대 또한 셀프모드시에도 확대
- 4) 10배 광학줌 카메라**
원거리에 있는 정보를 선명하고 정확하게 확대하여 접근성 향상

✓ 제품특징

- 저시력을 위한 화면 확대 및 문서 확대가 통합된 솔루션으로 휴대성이 용이
- 광학줌 10배 카메라로 문서를 선명하게 확대할 수 있음

✓ 활용방안(기대효과)

- 1) 복지관, 안마원, 자립생활지원센터 및 학교, 가정 등 어떠한 환경에서도 많은 공간을 차지하지 않고도 독서확대 기능을 이용하여 문서를 확대해서 볼 수 있음
- 2) 컴퓨터를 사용할 때 화면 확대 및 음성 출력으로 업무의 효율을 높일 수 있음

✓ 사용가능대상

- 인쇄물 정보 접근이 필요한 시각장애인
- 사무 업무 및 컴퓨터 활용이 필요한 시각장애인
- 웹서핑 및 동영상을 통해 다양한 정보를 얻고자 하는 시각장애인

✓ 사용방법

- 1) 독서 확대기 사용**
 - 노트북 전원을 켜다.
 - 플로워 앱을 실행한다.
 - 메뉴창에 카메라 버튼을 실행한다.
- 2) 플로워 스크린(화면확대) 사용**
 - 노트북 전원을 켜다.
 - 플로워 소프트웨어를 실행한다.
 - 메뉴창에 스크린 버튼을 실행시킨다.
 - 큰글자/돋보기/전체화면 기능을 사용한다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 광학줌 카메라는 USB 3.0 포트에 연결해야 정상 동작함

✓ 최초출시일 : 2026년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 2월

플로워웍스 광학줌 [시각장애유형 | 영상확대시스템]



제품개요 독서확대 기능과 컴퓨터 화면확대/음성출력 기능을 하나로 통합한 고사양 데스크탑 솔루션

개인부담금 일반 817,000원 / 기초수급대상·차상위계층 254,250원

제조원 (주)오버플로우 / 한국

품질보증기간 24개월

납품방법 방문 설치

납품기간 14일

납품자 (주)오버플로우 / 담당자 : 김상언

(04793) 서울시 성동구 성수일로12길 20 성동안심상가 801호

Tel : 02-465-3450 / FAX : 02-465-3452 / www.atoverflow.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 101907-01-004594 예금주명 : (주)오버플로우

✓ 제품사양

- LG 27인치 4K 거치형 모니터
- 운영체제 : 윈도우 11 / SSD : 1TB / RAM : 16GB
- CPU : 인텔 Ultra5 / 10배 광학줌 USB 3.1 카메라

✓ 구성품목

- 플로워웍스 본체 1대 / USB 3.1카메라 1대
- LG 27인치 4K 모니터 1대 / 플로워 소프트웨어 1식
- 외장 스피커 1개 / 모니터 암 1개 / 매뉴얼 1부
- 무선 키보드 마우스 세트 1개

✓ 주요기능

- 1) 독서 확대 기능**
 - 문서의 확대 영역을 키보드로 간편하게 이동하며 탐색 가능한 플로워 줌 기능
 - 전체 이미지 중에서 확대 영역의 위치를 직관적으로 파악할 수 있는 PIP(Picture in Picture) 화면 제공 기능
 - 사용자 기호에 맞게 맞춤형으로 설정 가능한 명암고대비 기능
 - 화면 Freeze, 이미지 저장 및 공유 기능
 - 화면 회전 및 좌우 반전 기능 (거울보기)
 - 광학줌 10배 카메라로 문서를 확대할 수 있는 기능
 - 문서 내용을 음성으로 읽어주는 OCR 기능
- 2) 컴퓨터(전자문서) 화면확대 및 음성출력 기능**
 - 컴퓨터 화면의 활성창을 간편하게 커서 위치로 이동시키는 기능
 - 여러 개의 창 중 활성화된 창을 본인의 눈앞으로 쉽게 이동시키고 최소화/최대화/복구 시키는 기능
 - 키보드 커서 위치로 편집화면을 스크롤하고, 해당 위치를 크게 표시하여 간편하게 확인하는 기능
 - 마우스 포인터 위치의 텍스트를 큰 글자로 확인하고 음성으로 출력하는 기능
 - 화면 돋보기 기능 (돋보기 창 크기 조절 기능)
 - 전체 화면 확대 기능 (full screen)
 - 화면의 내용을 음성으로 읽어주는 OCR 기능
- 3) 자유로운 포지션을 제공하는 거치형 모니터**
 - 모니터를 상하좌우 자유롭게 이동시킬 수 있고, 키보드를 모니터 바로 밑에 놓을 수 있어서 바른 자세로 기기 이용 가능

✓ 제품특징

- 플로워웍스 광학줌 제품 하나로 많은 공간을 차지하지 않고도 독서확대기와 컴퓨터, 화면확대 및 음성출력 기능을 모두 사용할

수 있는 제품

- 자유로운 포지션을 제공하는 거치형 모니터를 제공하여 모니터를 내 눈앞으로 편하게 이동시킬 수 있고, 키보드를 모니터 바로 밑에 놓을 수 있어서 바른 자세로 컴퓨터를 사용할 수 있음
- 광학줌 10배 카메라로 문서를 선명하게 확대할 수 있음

✓ 활용방안(기대효과)

- 1) 복지관, 안마원, 자립생활지원센터 및 학교, 가정 등 어떠한 환경에서도 많은 공간을 차지하지 않고도 독서확대 기능을 이용하여 문서를 확대해서 볼 수 있음
- 2) 컴퓨터를 사용할 때 화면 확대 및 음성 출력으로 업무의 효율을 높일 수 있음

✓ 사용가능대상

- 인쇄물 정보 접근이 필요한 시각장애인
- 사무 업무 및 컴퓨터 활용이 필요한 시각장애인
- 웹서핑 및 동영상을 통해 다양한 정보를 얻고자 하는 시각장애인

✓ 사용방법

- 1) 독서 확대기 사용**
 - 컴퓨터 및 카메라/스피커를 동작시킨다.
 - 플로워 앱을 실행한다.
 - 메뉴창에 카메라 버튼을 실행한다.
- 2) 플로워 스크린(화면확대) 사용**
 - 컴퓨터 및 카메라/스피커를 동작시킨다.
 - 플로워 소프트웨어를 실행한다.
 - 메뉴창에 스크린 버튼을 실행시킨다.
 - 큰글자/돋보기/전체화면 기능을 사용한다.
- 3) 모니터 암 사용하기**
 - 모니터를 상하좌우 자유롭게 올바른 자세에 맞추어 이동하며 사용한다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 광학줌 카메라는 USB 3.0 포트에 연결해야 정상 동작함

✓ 최초출시일 : 2021년 4월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 2월

디지털 점자학습기(M25-01) [시각장애유형 | 점자교육용보조기기]



제 품 개 요 - 점자를 처음 배우는 시각장애 학생 및 중도실명 장애인을 위한 디지털 점자 학습기
 - Doti(점자학습기 본체)와 BrailleUp(스마트폰 학습 앱) 두 가지로 구성되며, 블루투스로 연결하여 함께 사용

개 인 부 담 금 일반 300,000원 / 기초수급대상·차상위계층 125,000원

제 조 원 모아드림주식회사 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 30일

납 품 자 모아드림주식회사 / 담당자 : 조돈우
 (05770) 서울특별시 송파구 오금로46길 9 BFK빌딩 503호
 Tel : 010-9116-3608

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0003-68653 예금주명 : 모아드림주식회사

✓ 제품사양

- 제품 크기 : 170mm × 100mm × 23mm / 제품 무게 : 295g
- 입력 방식 : Perkins 타입 키패드
- 점자셀 : 2*4 type 피에조방식 점자셀
- 출력기 : 이어폰, 스피커, 햅틱모터
- 배터리 : 1,500mAh LIPO 배터리 / 충전방식 : USB-C type

✓ 구성품목

- 본체 1대 / 충전케이블 1개(USB-C Type) / 사용설명서 1부 / 보충서 1부

✓ 주요기능

- 점자 읽기·쓰기 학습 : 10개의 점자셀이 실시간으로 점형(점자 모양)을 올려주며, 학습자가 직접 손으로 점자를 느끼고 익힐 수 있습니다.
- 음성 안내 : 모든 학습 내용이 음성으로 함께 안내되어, 시각에 의존하지 않아도 학습 진행이 가능합니다.
- 퀴즈형 자기주도 학습 : BrailleUp 앱이 문제를 음성으로 읽어주면, 학습자가 Doti의 점자 키패드로 답을 입력합니다. 정답이면 파파레, 오답이면 다시 학습할 수 있도록 안내합니다.
- 학습 기록 관리 : 모든 학습 이력이 서버에 저장되어, 보호자나 교사가 학생의 학습 진도와 결과를 확인할 수 있습니다.

✓ 제품특징

- 가볍고 작은 디자인 : 170mm × 100mm × 23mm, 295g으로 손에 쥐기 편하며 어린이도 무리 없이 사용할 수 있습니다.
- 국제 표준 규격 점자셀 : 전 세계 어디서든 통용되는 표준 규격의 피에조 방식 점자셀 10개를 탑재하여 정확한 점자 감각을 익힐 수 있습니다.
- 세 가지 피드백 동시 제공 : 점자셀(촉각) + 음성(청각) + 햅틱 진동이 함께 작동하여 학습 효과를 극대화합니다.
- 스마트폰 앱과 연동 : Bluetooth로 스마트폰의 BrailleUp 앱과 연결하여, 촉지 학습(점형 익히기), 한글 점자 등의 점자 읽기 및 점자 쓰기 학습이 가능합니다.
- 국제 인증 획득 : KC(한국) 인증을 받은 검증된 제품입니다.

✓ 활용방안(기대효과)

- 점자 입문자의 학습 장벽 해소 : 아날로그 점자 교구(점판, 점필 등)에만 의존하던 기존 교육 방식에서 벗어나, 언제 어디서나 디지털 기기 하나로 점자를 배울 수 있습니다.
- 중도시각장애인의 자립 지원 : 갑작스럽게 시력을 잃은 분들이 재활 과정에서 혼자서도 점자를 배울 수 있어, 정보접근성 향상 및 사회 복귀에 도움이 됩니다.
- 교육 기회 확대 : 전문 점자 교사가 없는 지역이나 가정에서도 원격 학습 기능을 통해 수준 높은 점자 교육을 받을 수 있습니다. (원격교사와 협약 필요)

- 보호자·교사의 학습 관리 편의 : 점자를 모르는 부모님 또는 활동보조사를 위한 각 학습 레슨별 안내사항 참조가 가능하여 학생의 수업을 도와줄 수 있습니다.

✓ 사용가능대상

- 점자를 처음 배우려고 하는 학생 및 중도시각장애인

✓ 사용방법

- [1단계] Doti 전원 켜기
 - Doti 기기의 왼쪽 면에 있는 전원 스위치를 위로 올리면 전원이 켜집니다.
 - "전원이 켜졌습니다"라는 음성과 함께 파란색 LED가 깜빡이기 시작합니다.
- [2단계] 블루투스 연결
 - 스마트폰에서 BrailleUp 앱을 실행한 후, 앱 설정의 '블루투스' 메뉴에서 'Doti-0000' 기기를 선택합니다. 연결이 되면 "블루투스가 연결되었습니다"라는 음성 안내와 함께 Doti의 LED가 파란색으로 고정됩니다. ※ 스마트폰은 가급적 wifi가 연결된 환경에서 사용하시기를 권장드립니다.
- [3단계] 학습 시작
 - 앱 화면에서 원하는 단원(점형 익히기 / 한글 점자 / 숫자 점자 등)을 선택합니다.
 - 앱에서 안내 음성으로 학습 내용을 안내합니다.
- [4단계] 문제 풀기
 - 폰에서 '학습하기(Start)' 버튼 또는 Doti에서 8번 버튼을 누르면 점자셀이 올라오고 문제가 음성으로 출력됩니다.
 - Doti의 키패드로 정답을 입력하면, 정답·오답 여부를 음성과 진동으로 알려줍니다.
- [5단계] 문제를 맞추면 자동으로 다음 레슨으로 이동하고, 틀리면 4단계 문제를 반복하여 풀게 됩니다.
- [6단계] 모르는 내용이 있을 때(원격교사와 협약 필요)
 - 앱의 '도움 요청(SOS)' 버튼을 누르면 원격지 선생님과 연결되어 실시간 지도를 받을 수 있습니다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

1. 직사광선이나 고온의 표면에 닿지 않도록 주의 바랍니다.
2. 기기를 떨어뜨리거나 밟지 않도록 주의 바랍니다.
3. 물, 음료수 등 액체류를 점자셀위에 얹지르지 않도록 주의 바랍니다.

✓ 최초출시일 : 2025년 7월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 1월

뉴포트브레이일 [시각장애유형 | 점자정보단말기]



제 품 개 요 - 시기능을 통해 시각장애인과 정안인의 통합 업무가 가능한 제품
 - 시각, 촉각, 청각으로 정안인이 사용하는 정보(문서)를 본 단말기를 통해 시각장애인이 사용할 수 있는 정보(점자 및 음성)으로 제공하는 단말기

개 인 부 담 금 일반 1,100,000원 / 기초수급대상·차상위계층 325,000원

제 조 원 (주)어니스트비전 / 대한민국 **품질보증기간** 24개월

납 품 방 법 방문 설치 **납 품 기 간** 30일

납 품 자 (주)어니스트비전 / 담당자 : 권다솜
 (21582) 인천광역시 남동구 선수촌공원로1 구월테크노밸리D동 805호
 Tel : 032-875-2295 / FAX : 032-872-2294 / http://www.fsteck.co.kr

개 인 부 담 금 계 좌 번 호 (우체국) 103556-01-011371 예금주명 : (주)어니스트비전

✓ 제품사양

- CPU : Ultra 7
- 메모리 : RAM 16GB DDR4
- 디스플레이 : 15.6인치 FHD AMOLED Display
- 저장장치 : 512GB SSD
- 네트워크 : Bluetooth / WiFi
- 포트 : HDMI, USB(A-type 1개, C-type 2개)
- 운영체제 : Window10 Home/Window11 Home
- OCR S/W : 소리안
- 스크린리더 S/W : 소리안리더
- OCR 카메라 사양
 - 화소 : 1300만화소 / 센서 : CMOS / 크기 : 0.43인치
- 출력장치
 - 점자 32cell / 통신방식 : Bluetooth

- 정안인이 사용하는 정보(문서)를 본 단말기를 통해 시각장애인이 사용할 수 있는 정보(점자 및 음성)으로 변환이 가능한 단말기
- 기존 여러 시각장애인 보조기기를 통합하여 하나의 단말기로 모든 업무가 수행 가능한 단말기
- 이동성, 편의성, 확장성을 가진 단말기

✓ 활용방안(기대효과)

- 모든 시각장애인이 본 기기를 이용하여 일반 목차책, 고지서, 관공서 서류(등본, 초본, 가족관계부, 인감증명 등)을 읽을 수 뿐아니라 점자로 확인이 가능하므로 새로운 수요확대
- 컴퓨터에 익숙하지 않은 시각장애인을 위해 컴퓨터기능의 OS를 탑재하여 점자로 구동 및 확인이 가능하므로 젊은 세대에 신규 수요확대 예상
- 학생 및 시험을 준비하는 시각장애인에게는 꼭 필요한 기기
- 본 기기를 통해 시각장애인에게 다양한 직업 영역이 확대될 것으로 기대

✓ 구성품목

- 뉴포트브레이일 본체 1대 / OCR카메라 1대 / 점자셀(32cell) 1대
- 충전 어댑터 1개 / 목자매뉴얼 1부 / 점자매뉴얼 1부
- 이동용 가방 1개 / 점자셀 가방 1대

✓ 사용가능대상

- 전맹 또는 모든 저시력 장애등급 (1급~6급까지 사용이 가능함)

✓ 주요기능

- 시기능이 탑재되어 물건인식, 설명기능
- 시기능에 의해 일상적인 질문과 답변가능
- 독립된 정보 접근이 불가능했던 텍스트 파일 정보를 점자와 음성으로 동시 출력
- 일반 문서 및 jpg 등의 파일을 텍스트 파일로 전환 및 음성 출력 기능
- 배터리가 탑재된 문서인식(OCR) 단말기
- 윈도우 OS를 런처 방식으로 구성하여 시각장애인의 편리한 접근성 확보
- 인터넷 검색 기능 및 스크린리더 사용 가능
- 녹음 기능 및 모든타입(mp3&mp4 등)의 멀티미디어 파일 재생 기능
- 한글, 영문, 한자(기본 4888자) 인식
- 캡처 후 빠른 시간 내 음성 변환 기능
- 1300만화소 카메라로 목자 및 외부파일 변환 가능

✓ 사용방법

- ① 전원버튼을 누르면 효과음과 함께 단말기가 작동
- ② 소리안 프로그램을 시작
- ③ 본 앱을 통해서 일반목차 문서 및 JPG파일을 TXT, 파일로 전환
- ④ txt,파일로 전환된 파일은 음성 및 점자셀로 출력
- ⑤ 음성 명령, 단축키, 사물 인식 기능을 지원하며 AI 기반 질의응답 기능을 추가하여 문서 내용 요약, 정보 검색, 상황 설명, 문맥 이해 기반 질문 응답까지 가능함
- ⑥ 전환된 파일은 저장할 수 있으며, 독서기 프로그램을 통해 점자셀로 출력 가능

✓ 최소PC요구사항

- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기

✓ 사용 시 유의사항

- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 제품특징

- AI 기능 탑재하여 기존의 스크린리더 습득의 부담감을 현저히 감소
- 시각장애인과 정안인이 함께 통합 업무가 가능한 제품
- 시각, 촉각, 청각으로 정보를 제공하는 유일한 단말기

✓ 최초출시일 : 2020년 3월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

한소네6 미니 [시각장애유형 | 점자정보단말기]



제품개요 기존 한소네 보다 가볍고 용이한 휴대성을 갖춘 점자정보단말기로, 소리(TTS)와 촉각(점자 셀)을 활용하여 문서작성, 인터넷 검색, 콘텐츠 활용 등 다양한 응용프로그램을 사용할 수 있는 점자정보단말기

개인부담금 일반 1,000,000원 / 기초수급대상·차상위계층 300,000원

제조원 (주)셀바스헬스케어 / 한국

품질보증기간 24개월

납품방법 방문설치

납품기간 21일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기 : 가로 18.5 x 세로 10.3 x 높이 2.3(cm)
- 무게 : 430g
- 점자 디스플레이 : 20셀
- 사용자 메모리 공간 : 128GB
- 네트워크 : 무선랜, 블루투스5.1
- 입력방식 : Perkins 타입
- 음성출력 : 내장 스테레오 스피커/헤드폰 잭
- 인터페이스 : USB Ctype 2EA, Micro SD Card

✓ 구성품목

- 본체 1대 / 배터리 1개 / 전원어댑터 1개 / USB젯더 1개
- 사용설명서 1개 / 이어폰 1개 / 가방 1개

✓ 주요기능

- 워드프로세서 : 워드, 엑셀, 파워포인트 등 문서프로그램을 자유롭게 활용하여 읽기, 작성, 편집이 가능하도록 지원
- 파일관리 : Windows의 탐색기와 유사한 구조로 파일관리의 편리성을 제공
- 안드로이드 어플리케이션 : 플레이 스토어를 통하여 다양한 안드로이드 앱을 다운받고 설치하여 사용자가 원하는 앱을 폭넓게 사용 가능
- 미디어 기능 : 오디오 파일(MP3, WAV 등), 미디어 파일(MP4, WMV 등)의 재생이 가능하며, 음성녹음 기능을 제공하여 일상생활이나 교육(강의녹음), 여가시간 등에 활용 가능
- 휴대성 : 약 430g의 가벼운 디자인으로 언제 어디서나 휴대가 간편하여 이동하면서 정보검색이 용이

✓ 제품특징

- 128GB의 대용량 저장 공간과 넉넉한 배터리 사용 시간
- 안드로이드12 OS 탑재 및 어플리케이션을 통한 다양한 활용성
- 워드, 엑셀, 파워포인트 등 오피스 프로그램 사용 가능
- 작고 가벼운 디자인으로 휴대성 증가
- 스테레오 내장 마이크를 통한 고품질 음성 녹음

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각장애인에게 있어 혁신적인 기기로 시각장애인의 학습 및 재활, 정보접근의 도구로서 삶의 질을 향상시키고 당당한 사회인으로서 정보생활을 영위하는데 필요
- 노트북 pc와 다르게 전원을 켜면 바로 사용이 가능하여 일상생활, 직장, 학교 등에서 매우 유용

✓ 사용가능대상

- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인(시각장애 1~3급)

✓ 사용방법

- 점자 킷 매뉴얼 제공

✓ 최소PC요구사항

- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2022년 4월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 9월

한소네7 32셀 [시각장애유형 | 점자정보단말기]



제품개요 스마트 스크롤 및 터치 제스처로 조작 가능한 터치형 점자 디스플레이를 탑재하였고, 구글 안드로이드 운영체제 기반의 Gemini AI 솔루션을 통합한 스마트 점자 단말기

개인부담금 일반 1,200,000원 / 기초수급대상·차상위계층 350,000원

제조원 (주)셀바스헬스케어 / 대한민국 **품질보증기간** 24개월

납품방법 방문 설치 **납품기간** 21일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 **예금주명** : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기: 가로 24.5 × 세로 14 × 높이 1.9 (cm)
- 무게: 705g
- 점자 디스플레이: 32셀
- 사용자 메모리 공간: 256GB
- 네트워크: 무선랜, 블루투스 5.3
- 입력 방식: Perkins 타입
- OS : 안드로이드15 OS
- 음성녹음: 스테레오, 마이크론
- 인터페이스: C타입 슬롯(2), micro SD슬롯(1), USB A타입 슬롯(2)

- 최신 안드로이드15 탑재와 어플리케이션을 통한 다양한 앱 접근 및 활용
- 워드, 엑셀, 파워포인트 등 오피스 프로그램 강화

✓ 구성품목

- 한소네7 32셀 본체 1대
- 배터리, 어댑터 각 1개
- 주요키 사용설명서 (점자) 1부
- 케이스 1개

✓ 활용방안(기대효과)

- 센터버튼 하나로 시각장애인이 간단하고 편리하게 구글 AI사용을 가능케 함
- 본체의 점자 키보드와 마그네틱 탈착식 쿼티 키보드 둘다 사용가능하여 점자 사용속련도에 따라 편리하게 선택하고 직장 생활에서 효율적이고 직무 수행이 가능함
- 점자를 읽는 사용자 손가락 움직임을 실시간 감지/분석하여 능동적으로 반응하는 터치 제스처 오토스크롤링 기능이 추가되어 콘텐츠 탐색 및 메뉴이동, 읽기속도 등 전반적 기기사용이 더욱 사용자와 동기화 됨

✓ 사용가능대상

- 점자를 손으로 읽을 수 있는 중증 시각장애인(시각장애1~3급)

✓ 주요기능

- 센터버튼 길게 누르기로 구글 AI Gemini 활성화 및 사용 가능
- 온디바이스 AI 'Gemini Nano' 빌트인으로 오프라인 환경에서도 AI 활용 가능
- 점자를 읽는 사용자 손가락 움직임을 실시간 감지/분석하여 능동적으로 반응하는 터치 제스처 및 스마트 스크롤 기능 제공
- 아날로그 휠 스크롤 UI로 섬세한 점자 콘텐츠 탐색 능력 제공
- 강력한 문서 편집 프로그램, E-mail, 웹브라우저, 미디어센터 등 업무 및 여가에 필요한 기능 제공
- 유틸리티: 계산기, 알람, 스탑 워치, 나침반, 취침예약 지원
- 플레이스토어 지원: Google Play Store 인증을 통한 다양한 앱 다운로드 지원으로 점자정보단말기 사용성 확장

✓ 사용방법

- 전원을 켜고 촉각 기반의 점자기 입력 UI, 손가락 제스처 UI, 음성 명령 UI로 기기 조작 가능.
- 센터버튼을 길게 눌러 구글 Gemini 활성화
- 탐색기, 노트패드, 개인관리도구, 이메일, 미디어센터, 인터넷도구 등 다양한 내장 응용 프로그램을 실행하여 활용.
- 구글 플레이스토어를 통해 앱을 다운로드 후 사용.

✓ 최소PC요구사항

- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기

✓ 제품특징

- 센터버튼 하나로 간단하고 편리하게 구글 AI사용가능
- 아날로그 휠 스크롤 UI로 콘텐츠 탐색 및 음성제어 미세 설정 가능
- 256GB의 대용량 저장 공간과 넉넉한 배터리 사용 시간

✓ 사용 시 유의사항

- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2026년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

한소네7 40셀 [시각장애유형 | 점자정보단말기]



제품개요 스마트 스크롤 및 터치 제스처로 조작 가능한 터치형 점자 디스플레이를 탑재하였고, 구글 안드로이드 운영체제 기반의 Gemini AI 솔루션을 통합한 스마트 점자 단말기

개인부담금 일반 1,340,000원 / 기초수급대상·차상위계층 385,000원

제조원 (주)셀바스헬스케어 / 대한민국 **품질보증기간** 24개월

납품방법 방문 설치 **납품기간** 21일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 **예금주명** : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기: 가로 30.1 × 세로 14 × 높이 1.9 (cm)
- 무게: 818g
- 점자 디스플레이: 40셀
- 사용자 메모리 공간: 256GB
- 네트워크: 무선랜, 블루투스 5.3
- 입력 방식: Perkins 타입
- OS : 안드로이드15 OS
- 음성녹음: 스테레오, 마이크로폰
- 인터페이스: C타입 슬롯(2), micro SD슬롯(1), USB A타입 슬롯(2)

- 최신 안드로이드15 탑재와 어플리케이션을 통한 다양한 앱 접근 및 활용
- 워드, 엑셀, 파워포인트 등 오피스 프로그램 강화

✓ 구성품목

- 한소네7 40셀 본체 1대
- 배터리, 어댑터 각 1개
- 주요키 사용설명서 (점자) 1부
- 케이스 1개

✓ 활용방안(기대효과)

- 센터버튼 하나로 시각장애인이 간단하고 편리하게 구글 AI사용을 가능케 함
- 본체의 점자 키보드와 마그네틱 탈착식 쿼티 키보드 둘다 사용가능하여 점자 사용속련도에 따라 편리하게 선택하고 직장 생활에서 효율적이고 직무 수행이 가능함
- 점자를 읽는 사용자 손가락 움직임을 실시간 감지/분석하여 능동적으로 반응하는 터치 제스처 오토스크롤링 기능이 추가되어 콘텐츠 탐색 및 메뉴이동, 읽기속도 등 전반적 기기사용이 더욱 사용자와 동기화 됨

✓ 주요기능

- 센터버튼 길게 누르기로 구글 AI Gemini 활성화 및 사용 가능
- 온디바이스 AI 'Gemini Nano' 빌트인으로 오프라인 환경에서도 AI 활용 가능
- 점자를 읽는 사용자 손가락 움직임을 실시간 감지/분석하여 능동적으로 반응하는 터치 제스처 및 스마트 스크롤 기능 제공
- 아날로그 휠 스크롤 UI로 섬세한 점자 콘텐츠 탐색 능력 제공
- 강력한 문서 편집 프로그램, E-mail, 웹브라우저, 미디어센터 등 업무 및 여가에 필요한 기능 제공
- 유틸리티: 계산기, 알람, 스탑 워치, 나침반, 취침예약 지원
- 플레이스토어 지원: Google Play Store 인증을 통한 다양한 앱 다운로드 지원으로 점자정보단말기 사용성 확장

✓ 사용가능대상

- 점자를 손으로 읽을 수 있는 중증 시각장애인(시각장애1~3급)

✓ 사용방법

- 전원을 켜고 촉각 기반의 점자키 입력 UI, 손가락 제스처 UI, 음성 명령 UI로 기기 조작 가능.
- 센터버튼을 길게 눌러 구글 Gemini 활성화
- 탐색기, 노트패드, 개인관리도구, 이메일, 미디어센터, 인터넷도구 등 다양한 내장 응용 프로그램을 실행하여 활용.
- 구글 플레이스토어를 통해 앱을 다운로드 후 사용.

✓ 제품특징

- 센터버튼 하나로 간단하고 편리하게 구글 AI사용가능
- 아날로그 휠 스크롤 UI로 콘텐츠 탐색 및 음성제어 미세 설정 가능
- 256GB의 대용량 저장 공간과 넉넉한 배터리 사용 시간

✓ 최소PC요구사항

- PC와 독립적으로 사용되는 점자정보단말기

✓ 사용 시 유의사항

- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2026년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

매직브레일(Magic Braille) [시각장애유형 | 점자출력기]



제품개요 교육자료, 행정 문서 등을 점자로 신속하게 출력할 수 있도록 지원하는 시각장애인을 위한 점자프린터

개인부담금 일반 900,000원 / 기초수급대상·차상위계층 275,000원

제 조 원 (주)블루워커 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 30일

납 품 자 (주)블루워커 / 담당자 : 김혜민
(34573) 대전광역시 동구 계족로392번길 137, 103호(가양동)
Tel : 010-2514-2732 / FAX : 042-710-8158

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0003-63365 예금주명 : (주)블루워커

✓ 제품사양

- 크기 : W460mm*D400mm*H420mm
- 제품 소재/재질 : 철재, 플라스틱
- 소비전력 : 220W
- 연결/설치 : 유선네트워크 사용연결
- 사용 용지 크기/두께 : 210*297mm(A4사이즈 점자 낱장 용지), 150g/m²

✓ 구성품목

- 매직브레일 점자프린터 1개
- 전원케이블 1개
- 통신케이블 1개/묵자 점자 설명서 1부

✓ 주요기능

- 시간당 최대 400페이지 점자 출력 지원
- 점자 용지 자동 급지 시스템 적용으로 연속 출력 지원
- 낱장 점자 전용 용지 사용 가능(용지 두께 150g/m²)
- 유선네트워크 연결 지원으로 안정적인 출력 환경 제공
- 저전력 및 저소음 설계

✓ 제품특징

- 시간당 최대 400페이지 점자 인쇄로 신속한 출력 가능
- 자동 급지 기능으로 작업 효율성이 향상
- 낱장 점자 전용 용지 사용 가능(용지 두께 150g/m²)
- 유선네트워크 연결 지원으로 안정적인 출력 환경 제공
- 저전력 및 저소음 구조로 사용 환경 최적화
- 탁상형 비치 가능한 사이즈 설계로 공간 활용이 용이한 컴팩트한 사이즈

✓ 활용방안(기대효과)

- 교육자료 및 교재를 점자로 신속하게 출력하여 시각장애인의 학습 접근성을 향상시키고, 안정적인 학습 환경을 제공함으로써 학습권 보장
- 민원 사이트 및 행정자료를 점자로 출력함으로써 시각장애인의 공공서비스 이용 편의성을 높이고, 정보 접근성 향상을 통해 정보격차 해소
- 시각장애인의 학습 취업 정보 접근 기회를 확대하고, 자립 역량 강화 및 사회 참여 확대

✓ 사용가능대상

- 점자를 배우거나 사용하고 있는 시각장애 전 등급

✓ 사용방법

- ① 출력하고자 하는 점자파일 준비
- ② 매직브레일 출력 프로그램 실행 후, 문서선택 버튼을 눌러 점자파일 불러오기
- ③ 매직브레일 출력 프로그램 내 출력 버튼을 눌러 인쇄

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 제품에 제공되는 부속품 사용 권장
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2025년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 1월

식스닷(점자라벨메이커) [시각장애유형 | 점자출력기]



제 품 개 요 일체형 점자 라벨 프린터
컴퓨터나 기타 다른 기기에 연결할 필요 없이 식스닷 제품 독립적으로 오래도록 선명하고 또렷한 고품질 점자 라벨 스티커를 출력할 수 있는 라벨 프린터

개 인 부 담 금 일반 370,000원 / 기초수급대상·차상위계층 142,500원

제 조 원 LoganTech / 미국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)오버플로우 / 담당자 : 김상언

(04793) 서울시 성동구 성수일로12길 20 성동안심상가 801호

Tel : 02-465-3450 / FAX : 02-465-3452 / www.atoverflow.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 101907-01-004594 예금주명 : (주)오버플로우

✓ 제품사양

- 6개의 퍼킨스 입력 점자키
- 크기: 20 x 15 x 7cm (가로 x 세로 x 높이)
- 무게: 500g
- 점자 라벨 테이프: 폭 9mm, 길이 3m
- 전원: AC어댑터 또는 AA 알카라인 건전지 6개 (입력) 100~240V / 60Hz / 0.5A
출력) DC12V / 1A

사용 가능하도록 도와줌

- 2) 크기와 모양이 비슷한 물건이나 용기, 도서나 CD 음반 등 구분이 필요한 모든 사물에 부착해서 즉시성 있게 구분해서 사용할 필요할 때 유용함.

✓ 구성품목

- 식스닷 본체 1대 / 9mm폭 점자 라벨 테이프 10롤
- AC 어댑터 1개 / AA 배터리 6개 (장착됨)
- 사용자 가이드(독자) 1부 / 퀵가이드(점자) 1부

✓ 사용가능대상

- 점자를 배우거나 사용하고 있는 시각장애 전 등급

✓ 주요기능

- 1) 퍼킨스 6점자 키보드 탑재
 - 점자 약어를 포함한 모든 언어 점자 출력 가능
- 2) 오래도록 선명하고 또렷한 고품질 점자 라벨 출력
 - 매일 일어도 오래도록 닳지 않는 고품질 점자 라벨 출력
 - 타 모택스 점자 라벨보다 2~3배 내구성이 뛰어난 점자 출력
- 3) 점자 라벨 자동 스코어링 및 커팅 기능
 - 자동 커팅 버튼으로 쉽게 점자 라벨 절단
 - 커팅 전 자동 스코어링 되어 출력된 점자라벨을 쉽게 분리할 수 있음
- 4) 두 가지 전원 방식 제공
 - 일반 AA 배터리 또는 AC 전원 어댑터 두 가지 모두 사용 가능
 - 야외에서도 얼마든지 간편하게 사용

✓ 사용방법

1. 점자 라벨 출력하기
 - 전원 스위치 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
 - 퍼킨스 입력 방식의 점자 키보드를 누르는 순간부터 점자 라벨이 출력됩니다.
2. 점자 라벨 절단하기
 - 라벨 출력이 완료되면 점자키와 스페이스바 사이 중앙에 위치한 파란색 동그란 절단 버튼을 누릅니다.
 - 라벨을 좌측 방향으로 살짝 밀어 잡아당깁니다.
3. 점자 라벨 교체하기
 - 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
 - 오른쪽에 위치한 테이프 장착부 커버를 열어 안에 있는 빈 카트리지를 제거합니다.
 - 교체할 라벨 카트리지에서 약 3~5cm 정도 라벨테이프를 잡아당겨 빼놓습니다.
 - 새 라벨 테이프 롤을 안쪽으로 밀어 넣습니다.
 - 전원을 켜 후 테이프 전진 휠을 동작을 위해 스페이스바를 한 번 또는 두 번 정도 눌러줍니다.
 - 테이프 장착부 커버를 닫습니다.

✓ 제품특징

- # 일체형 점자 라벨 프린터
- 점자 라벨 출력을 위해 컴퓨터를 켜고, 연결해야 하는 번거로움에서 해방 (사용편의성 극대화)
 - 컴퓨터 또는 기타 다른 기기가 필요 없는 독립형 이동식 단말기이기 때문에 점자 라벨이 필요한 순간, 그 즉시 바로 출력 해서 사용 가능함. (즉시성 충족)
 - 일반 AA배터리로도 동작 가능해서 야외에서도 이동 중에 사용 가능

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 점자라벨이 출력되는 동안에는 라벨 커팅 버튼을 눌러도 라벨이 절단되지 않음.
- 라벨 출력이 완료된 후에 커팅 버튼을 눌러야 점자 라벨이 커팅됨.

✓ 활용방안(기대효과)

- 1) 터치기반의 모든 생활가전, 홈인테리어, 정보통신기기 제품에 점자 라벨을 부착해서 타인의 도움 없이 제품 기능을 구분해서

✓ **최초출시일** : 2018년 2월 9일

✓ **최근 업그레이드** : 2026년 2월

닷패드 [시각장애유형 | 촉각디스플레이]



제 품 개 요 제조사의 핵심인 촉각셀의 다중배열구조로 구현된 촉각디스플레이 중심의 시각장애인용 보조기기

개 인 부 담 금 일반 1,750,000원 / 기초수급대상·차상위계층 487,500원

제 조 원 주식회사 닷 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 직접납품

납 품 기 간 20일

납 품 자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
(04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- 크기 : 273.6 x 228.5 x 28.7 mm
- 무게 : 1.2 kg
- 배터리 : LI 35E A103 3.6V 10,050mA 204*19 / Li-ion
- 셀 : 택타일 디스플레이(300셀), 점자 디스플레이(20셀)
- 프로세서 : ARM Cortex-M4 32-Bit 120MHz

사용하는 기능들을 물리적인 키로 구현한 것으로 스크린리더 및 관련 SW 등에 따라 기능이 다름

✓ 구성품목

- 기기 본체, 충전기, 충전케이블, 퀵가이드, 보증서, 여분 프로텍션 스킨(300셀용 3장, 20셀용 3장), 파우치, 범퍼케이스

✓ 활용방안(기대효과)

- 점자정보단말기를 통한 정보접근의 활용성을 향상시켜 교육, 취업, 일상생활에서 정보화를 역량을 유지·증진·향상시킬 수 있다.

✓ 주요기능

- 그래픽 디스플레이(300 cell)와 점자 디스플레이(20 cell)로 구성되어 점자와 그래픽 모두 표현
- 시각화 정보를 상세한 지문 혹은 음성으로만 인지해야 하는 제약된 시각장애인의 정보접근성 향상
- 닷패드와 연결하여 사용 가능한 닷 서비스 Dot Canvas(앱/웹)을 통해 다양한 유형의 정보(점, 선, 면, 도형, 그림, 단어 등)를 닷패드에 출력

✓ 사용가능대상

- 시각 장애인으로 문자 읽기가 불편한 장애인

✓ 사용방법

- ① 전원 켜기
- ② 연결할 기기의 스크린 리더 실행(S/N 확인 후 연결)
- ③ 디지털 정보 중 그래픽/점자 구분하여 닷 패드에 구현

* 전용 Dot Canvas App/Web 이용 방법

- ① 앱/웹 내에서 닷 패드 연결
- ② 콘텐츠 제작 및 출력 후 프린트 버튼을 클릭하여 닷 패드를 통해 실시간으로 콘텐츠 체험
- ③ 공용 드라이브에 업로드 되어있는 다양한 촉각 그래픽 콘텐츠 활용

✓ 제품특징

- ① **촉각 그래픽 표시 영역**
 - 8점 핀으로 이루어진 1개의 셀 300개를 표준 점자 간격보다 조밀하게 배치하여 화면에 나타나는 이미지 또는 DPA320A를 지원하는 전용 애플리케이션을 통해 촉각 그래픽 콘텐츠를 실시간으로 출력할 수 있음
 - 기존의 점자정보단말기에서는 불가능 했던 최대 10줄의 다중 점자를 출력할 수 있음
- ② **텍스트 점자 표시 영역**
 - 일반적인 점자정보단말기의 점자 출력 역할을 함. 가로로 긴 직사각형의 프레임 안에 8점 핀으로 이루어진 1개의 셀 20개가 표준 점자 간격으로 배치되어 있음
- ③ **키보드 영역**
 - 왼쪽에서 오른쪽으로 이전 패닝키, F1~F4키, 다음 패닝키 순서로 배치되어 있으며, 패닝키의 모양은 삼각형으로 타원형 모양의 Function키와 구별됨. 패닝키는 점자 셀 단위로 이전, 다음 줄로 이동하는 키이며, Function키는 시각장애인 사용자들이 자주

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2022년 12월 26일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 8월 20일

브레일 이모션 [시각장애유형 | 촉각디스플레이]



제품개요 기존 PC, 스마트폰을 이용하는 시각장애인에게 점자입력, 제어, 판독 등 원활한 사용을 제공하는 점자디스플레이

개인부담금 일반 800,000원 / 기초수급대상·차상위계층 250,000원

제조원 (주)셀바스헬스케어 / 한국

품질보증기간 24개월

납품방법 택배발송

납품기간 21일

납품자 (주)셀바스헬스케어 / 담당자 : 박은지
대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, (주)셀바스헬스케어)
Tel : 042-879-3056 / FAX : 042-864-4462 / www.selvashealthcare.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 013227-01-008127 예금주명 : (주)셀바스헬스케어

✓ 제품사양

- 크기: 32 x 9 x 2.1(cm)
- 무게: 740g
- 사용자 메모리: 내장 64GB
- 입력방식: 퍼킨스 키보드
- 점자디스플레이: 40셀
- 연결방식: 블루투스, USB C타입
- 인터페이스: USB C Type, 마이크로 SD슬롯, USB A Type
- 배터리: 5000mAh

✓ 구성품목

- 본체 1대 / 주요 사용키 설명서(점자) 1개 / 전원어댑터 1개
- USB케이블 1개 / 사용설명서 1개 / 가방 1개

✓ 주요기능

- 음성지원과 햅틱 피드백으로 더욱 편리한 사용
- 보이스레코딩 기능으로 음성메모, 강의녹음 가능
- 안드로이드기반 앱(노트패드, 북리더, 파일매니저, 데이지, 미디어플레이어 등)으로 원활한 사용가능
- 내장 64GB메모리 외 MICRO SD지원의 대용량 저장가능
- PC, Android, iOS 등 기기와 연결하여 해당 기기 제어 가능

✓ 제품특징

- 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 등 의 기기들과 연결 가능한 스마트 커넥션 기능의 퍼킨스키보드 점자디스플레이
- 외부 기기에서 전달받은 정보를 브레일 이모션에서 쉽고 편리하게 확인 가능
- 보이스레코딩 기능 / 햅틱 피드백 / 음성지원으로 더욱 편리한 사용가능
- 세미 점자정보단말기로서 다양한 문서 편집, 저장이 가능하며 자체메모리(64GB) 사용가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 시각장애인들은 PC나 스마트폰에 문자를 점자로 입력하거나 제어할 수 있는 기능을 필요로 했으며 해당 제품은 시각장애인의 학습 및 재활, 정보 접근의 도구로서 삶의 질을 향상시키고 사회인으로 정보생활을 영위하는데 맞춤형 제품임

✓ 사용가능대상

- 점자를 손으로 읽을 수 있는 시각장애인

✓ 사용방법

- 전면 우측에 있는 전원버튼으로 전원을 켜고 퍼킨스 키를 조작하여 점자로 확인
- 컴퓨터나 스마트폰, 태블릿과 같은 기기들을 블루투스나 유선 연결을 통해 연결하여 탐색기, 노트패드 등 여러 항목을 선택, 실행하여 사용

✓ 최소PC요구사항

- PC와 같이 사용되는 점자디스플레이

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리금지
- 전용 어댑터 사용

✓ 최초출시일 : 2024년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 11월

27인치 화면 확대 터치 모니터 [시각장애유형 | 터치모니터]



제품개요 - 컴퓨터 조작이 어려운 장애인이 손이나 신체부위, 모니터 화면을 터치하여 화면 확대 및 키보드, 마우스 기능이 모두 가능한 터치모니터
 - 스크린의 확대, 축소, 회전이 가능하며 부드럽고 정확한 터치제공
 - T스탠드 부착으로 터치시 안정적인 터치가능

개인부담금 일반 166,000원 / 기초수급대상·차상위계층 83,000원

제조원 한스정보 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
 (04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
 Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- 화면크기 : 68.6cm(27")
- 터치스크린 : 최신 PCT방식 10포인트 정전식 터치패널 적용
- 해상도 : 2560x1400 (16:9), 광시야각
- 밝 기 : 300cd/m2
- 터치패널 : 정전식 PCT 방식(스마트 터치방식)
- 영 상 : HDMI / Type-C
- 스피커 : 3W x 2way 스테레오
- 기 타 : 자동 고정중흥비 가능, 밀림 방지용 받침대 적용
- 스크린 : 정전식 10포인트 멀티터치스크린
- Glass : 2mm 강화유리 적용

✓ 구성품목

- 모니터 본체 1개
- HDMI케이블, 전원어댑터 1개
- 터치 USB 케이블 1개, C-Type 케이블 1개
- 밀림방지 스탠드 1개
- 사용 설명서 1부

✓ 주요기능

- 손이나 신체부위로 모니터화면을 터치하여 기존 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스의 기능을 대체할 수 있음
- 멀티터치 기능을 통해 문서 및 사진, 웹페이지 확대 및 축소 가능(Windows 7 이상)
- USB 연결시 사진 및 동영상 재생 가능

✓ 제품특징

- 10포인트 멀티터치 적용으로 Windows7 이상에서 최적의 터치활용 가능
- LED 광시야각 패널 적용으로 넓은 시야각 확보
- 터치드라이버 설치 및 좌표설정 불필요(Windows에서 자동 인식)
- 스크린의 확대, 축소, 회전이 가능하며 부드럽고 정확한 터치제공 (최신 터치 스크린 방식인 PCT 방식)
- LED 백라이트 적용으로 높은 에너지 효율과 탁월한 절전효과
- 전면 2mm 강화유리 + 센서 구조로 내구성 매우 우수
- 스탠드 부착으로 터치시 안정적인 터치가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있으며 터치모니터를 통한 컴퓨터, 인터넷 등 정보접근의 활용이 어려운 장애인이 정보통신보조기기 및 서비스를 이용할 수 있도록 정보접근 기회 제공

✓ 사용가능대상

- 지체장애, 뇌병변장애, 정신장애, 지적장애, 자폐성장애, 저시력장애
- 해당기기를 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능해야함

✓ 사용방법

- ① 기존 모니터를 컴퓨터 본체에서 제거
- ② 사용설명서 숙지 후 터치모니터의 전원 및 케이블을 본체와 연결
- ③ 터치 드라이브 USB잭 연결(자동으로 드라이브 설치 및 좌표 설정)
- ④ T자 스탠드 각도 조절
- ⑤ 터치모니터 사용

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2021년 1월 13일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 2월 2일

강한손 확대 터치모니터 32인치 [시각장애유형 | 터치모니터]



제품개요 적외선 터치 방식으로 손과 펜 등 사물을 가리지 않고 화면을 직접 터치하여 마우스 기능을 사용 가능한 대형 확대터치모니터

개인부담금 일반 176,000원 / 기초수급대상·차상위계층 88,000원

제 조 원 (주)엠브이아이 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)엠브이아이 / 담당자 : 원대호
대전광역시 유성구 테크노2로 199 405호 (용산동, 주식회사 엠브이아이)
Tel : 042-826-4358 / FAX : 042-826-4359 / www.mvi.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 313080-01-001137 예금주명 : (주)엠브이아이

✓ 제품사양

- 화면크기: 32인치(81.2cm)
- 해상도: 1,920 x 1,080(FHD)
- 명암비: 1,200 : 1
- 크기: 729(w)x513(h)
- 무게: 6.6kg
- 시야각: 좌/우-178, 상/하 178

- 후면 베사 마운트홀을 적용하여 벽걸이에 부착하여 사용할 수 있음.
- 내장 스피커를 탑재하여, 스크린리더, 윈도우 나레이터를 읽을 때 선명하게 호환하여 줌.

✓ 구성품목

- 제품 본체 1대
- AC전원케이블+어댑터 1개
- HDMI 케이블 1개
- 조립나사 1SET
- 스탠드 1개

✓ 활용방안(기대효과)

- FHD해상도와 정확한 색상을 표현하여 저시력 장애인의 색상 파악에 도움을 줌
- 화면의 확대가 가능하며, 중증 저시력 및 뇌병변 장애인의 가독성을 높임

✓ 사용가능대상

- 시각장애(중증 ~ 경증), 뇌병변장애(중증 ~ 경증)

✓ 주요기능

- 모니터 깜빡임을 막는 플리커프리 (Flicker Free) 기술과 시각장애인의 시기능을 보호할 수 있는 청색광을 억제하는 로우 블루라이트 (Low BlueLight) 기술을 탑재하여 시각장애인의 눈을 안전하게 보호.
- 사용 환경이 어두운 곳에서 더욱 어둡게, 밝은 곳에서는 더욱 밝게 할 수 있는 3,000:1의 명암비를 제공하여, 시각장애인의 시안성 확보를 지원.
- 영상화면을 확대하여 볼 경우 모니터 자체적으로 응답속도를 가속화하여, 움직임이 많은 영상도 부드럽고 선명하게 화면을 표현

✓ 사용방법

- ① 모니터와 PC 케이블 연결
- ② 터치스크린에 펜, 손가락을 활용하여 작동이 되는지 확인
- ③ 터치스크린 작동 시 마우스와 동일한 방식의 연결이 되는지 확인 (1번 누르기 - 클릭, 2번 누르기 - 더블클릭, 길게 누르기 - 메뉴 불러오기)

✓ 제품특징

- 왜곡 없이 또렷하게 문서 및 영상을 볼 수 있는 178도의 광시야각.
- 적외선 터치 방식으로 손가락, 펜 등 어떠한 도구로도 쉽게 터치동작이 가능
- 시각장애인의 민감한 접근성 환경 변화에 높은 내구성과 반응성
- 일반 모니터의 화면 찢어짐 현상을 없애주는 AMD FreeSync 기술 적용
- 저시력 장애인의 눈보호를 위한 플리커프리 & 로우 블루라이트 기술 탑재

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2021년 3월 30일

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 3월 10일

리보3S [시각장애유형 | 특수키보드]



제품개요 스마트폰을 효과적으로 사용하고 언제 어디서나 음성 녹음과 통화중 녹음을 통해 필요한 메모를 하며, 미디어 플레이어, 음성 및 진동시계, 계산기, 점자사전 등의 다양한 생활 필수 기능으로 일상을 스마트하게 변화시킬 수 있는 제품

개인부담금 일반 196,000원 / 기초수급대상·차상위계층 98,000원

제조원 리보㈜ / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 30일

납품자 리보㈜ / 담당자 : 정유라

(22004) 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 1-502 (송도동, 인천스타트업파크)

Tel : 010-2247-5402 / FAX : 050-5403-5403 / www.rivo.kr

개인부담금계좌번호 (국민은행) 928301-00-066044 예금주명 : 리보 주식회사

✓ 제품사양

- 가로 98mm x 세로 52mm x 두께 9.5mm, 무게 52g
- 버튼 27개, 블랙 색상, 배터리 530mA
- 스토리지 32G, USB-C 충전/업데이트, 스피커, 마이크, 3.5mm 이어폰잭
- 소프트웨어: Rivo 3.5.3 이상

✓ 구성품목

- 제품 본체, 제품보호용 TPU 케이스
- USB-C 충전 및 데이터 전송 케이블
- 목/손목 스트랩, 파우치, 유선이어폰

✓ 주요기능

1. 스마트기기 사용
 - 다양한 기기에 블루투스 무선으로 연결 (아이폰/아이패드/애플워치/애플TV, 안드로이드폰/태블릿)
 - 리모컨처럼 버튼을 눌러 스마트폰을 간편하게 사용
 - 빠르며 정확한 문자입력과 편집
 - 전화 걸기와 받기, 텔레뱅킹을 손쉽게 사용
2. 녹음
 - 메모가 어려운 시각장애인을 위한 음성녹음 기능
 - 통화중 메모가 어려운 시각장애인을 위한 통화중 녹음 기능
3. 미디어 : MP3 음악/오디오북 재생
4. 시계
 - 시간을 음성 또는 진동으로 확인
 - 간편하게 알람 및 타이머 사용
 - 양력/음력 날짜 확인 및 변환
5. 계산기 : 사칙연산을 음성으로 확인
6. 점자사전 : 모르는 점자를 검색하고 학습

✓ 제품특징

- 터치 제스처를 대신하여 화면 커서를 원하는 위치로 이동시키고 화면 항목을 선택해 클릭함으로써 스마트폰을 사용
- 전화 걸기/받기, ARS 텔레뱅킹 등을 손쉽게 사용
- 문자/기호/이모티콘 입력/편집 (천지인/나랏글/리보방식 지원)
- 음성녹음, 통화녹음을 통한 음성메모 (아이폰/안드로이드폰 통화녹음 지원)
- MP3 음악/오디오북 재생
- 시간을 음성뿐만 아니라 조음하게 진동으로도 확인
- 양력/음력 날짜 확인 및 변환
- 간편하게 알람과 타이머 사용
- 음성 계산기
- 점자사전으로 점자 검색 및 열람

- 단축번호로 전화걸기/앱실행하기/폰찾기
- 아이폰/아이패드 화면 확대 지원
- 최대 9개 장치간 빠른 연결
- 소프트웨어 업데이트를 통한 기능 추가 및 업그레이드

✓ 활용방안(기대효과)

- 버튼을 눌러 스마트 기기를 빠르고 정확하게 사용하여 정보 접근과 의사소통이 더욱 원활해짐
- 스마트폰에서 앱으로 제공되는 팟캐스트나 디지털도서를 리보의 내장 스피커와 이어폰 잭을 통해 보다 편리하게 들을 수 있음
- 평소 메모가 불편한 시각장애인이 음성메모와 통화 중 녹음 기능을 사용해 언제든지 음성 메모를 간편하게 함으로써 업무 능률이 향상됨
- 시간 확인의 불편 해소
- 점자사전기능을 통해 쉽고 간편하게 점자 학습

✓ 사용가능대상

- 중증, 경증 시각장애인
- 스마트폰을 사용하거나 사용하려는 시각장애인

✓ 사용방법

1. 매뉴얼: rivo.kr/rivo3/manual
2. 음성강의: rivo.kr/podcasts
3. 블루투스 연결 후 스마트폰 사용 (스마트폰 제어, 화면/앱 탐색, 전화, 문자)
4. 홈 버튼(S3)을 눌러 홈 메뉴 접근
5. 녹음버튼(L4)을 길게 눌러 음성녹음, 통화중 녹음
6. 음악/오디오북 메뉴에서 MP3 음악/오디오북 재생
7. 시계 버튼을 클릭, 롱클릭함으로써 현재시간을 음성, 진동으로 확인
8. 시계 버튼을 더블클릭, S3+클릭함으로써 양력, 음력 날짜를 확인
9. 시계 버튼과 전원 버튼을 동시에 눌러 알람 모드로 진입해 알람/타이머 설정
10. 점자사전 메뉴에서 점자 검색 및 열람 (한글, 영어)
11. 계산기 메뉴에서 음성 계산기 실행

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 수리나 개조 금지, 충격 및 낙하 주의

✓ 최초출시일 : 2023년 7월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 30일

리보미니 [시각장애유형 | 특수키보드]



제품 개요 스마트폰을 효과적으로 사용하고 언제 어디서나 음성 녹음과 통화중 녹음을 통해 필요한 메모를 하며, 미디어 플레이어, 음성 및 진동시계, 계산기, 전자사전 등의 다양한 생활 필수 기능으로 일상을 스마트하게 변화시킬 수 있는 제품

개인부담금 일반 180,000원 / 기초수급대상·차상위계층 90,000원

제 조 원 리보(주) / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 30일

납 품 자 리보(주) / 담당자 : 정유라
(22004) 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 1-502 (송도동, 인천스타트업파크)
Tel : 010-2247-5402 / FAX : 050-5403-5403 / www.rivo.kr

개인부담금계좌번호 (국민은행) 928301-00-066044 예금주명 : 리보 주식회사

✓ 제품사양

- 가로 63mm x 세로 49mm x 두께 9.5mm, 무게 30g
- 버튼 27개, 오프밀색 색상, 배터리 250mA
- 블루투스 LE 5.4, NFC, 가속도/자이로센서, USB-C 충전, 무선 업데이트
- 소프트웨어: Rivo mini 1.0.4 이상

✓ 구성품목

- 제품 본체
- USB-C 충전 케이블
- 목/손목 스트랩, 파우치

✓ 주요기능

- 스마트기기에 블루투스 무선으로 연결 (아이폰/아이패드, 안드로이드폰/태블릿)
- 리모컨처럼 버튼을 눌러 스마트폰을 간편하게 사용
- 빠르며 정확한 문자입력과 편집
- 미디어 간편 제어 (음악, 오디오북, 유튜브 등)
- 진동과 LED로 스마트폰 알림 수신
- 시간을 진동으로 확인
- 간편하게 알람, 정각 알람, 타이머 등을 사용
- 스마트신호등 음성유도기 호출

✓ 제품특징

- 버튼으로 스마트폰을 간편하게 조작
- 문자 입력 및 편집
- 미디어 제어 (음악, 오디오북, 유튜브 등)
- 단축 전화 걸기, 앱 실행, 폰 찾기
- 진동 시계, 알람, 타이머, 정각 알림
- 진동과 LED로 스마트폰 알림 수신 (문자, 카톡, 전화 등)
- 스마트 신호등 음성 유도기 호출 지원
- 무선 소프트웨어 업데이트를 통한 기능 추가 및 업그레이드

✓ 활용방안(기대효과)

- 버튼을 눌러 스마트 기기를 빠르고 정확하게 사용하여 정보 접근과 의사소통이 더욱 원활해짐
- 스마트한 일상을 위해 다양한 스마트기기 활용도가 높아짐

✓ 사용가능대상

- 중증, 경증 시각장애인
- 스마트폰을 사용하거나 사용하려는 시각장애인

✓ 사용방법

1. 매뉴얼: rivo.kr/rivomini/manual
2. 블루투스 연결 후 스마트폰 사용 (스마트폰 제어, 화면/앱 탐색, 문자)
3. 측면 액션 버튼을 눌러 스마트폰 리보앱 연결
4. 시계 버튼을 클릭/롱클릭함으로써 현재시간을 음성/진동으로 확인
5. 시계 버튼과 전원 버튼을 동시에 눌러 알람 모드로 진입해 알람/타이머 설정

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 수리나 개조 금지, 충격 및 낙하 주의

✓ 최초출시일 : 2025년 4월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 30일

센스리더 베이직 [시각장애유형 | 화면낭독S/W]



제 품 개 요 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램
 ※ 센스리더 어센드의 외국어 음성엔진, 전자사전, OCR기능 등 일부기능 제외

개 인 부 담 금 일반 70,000원 / 기초수급대상·차상위계층 35,000원

제 조 원 (주)엑스비전테크놀로지 / 대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배·우편 배송 **납 품 기 간** 4일

납 품 자 (주)엑스비전테크놀로지 / 담당자 : 노임성
 (08750) 서울시 관악구 은천로62 광림빌딩 201호
 Tel : 02-888-1623 / FAX : 02-888-1624 / <https://xvtech.com>

개인부담금계좌번호 (우체국) 013664-01-001695 예금주명 : (주)엑스비전테크놀로지

✓ 제품사양

- 포장 규격: 크기 24(가로)×16(세로)×5(높이)cm / 무게 0.7kg
- 버전 : 8.X
- 정품 인증 : 인터넷 기반 디지털 인증서 사용
- 제공 음성 엔진 : 한국어(유미)

- 파이어폭스, 크롬, Edge) 지원 기능으로 더욱 향상된 인터넷 사용자 체험 제공
- 독서 및 파일 관리 유틸리티를 지원하여 편리한 파일 탐색 기능 제공
- 센스 주소록, 센스 타자연습 등의 사용자 편의 기능 제공
- 다양한 점자정보단말기 점자 입/출력 기능 지원

✓ 구성품목

- 프로그램 설치용 USB 메모리(센스리더 프로그램, 전자 매뉴얼, 음성강의), 점자 핸드북

✓ 활용방안(기대효과)

- 장애와 경제적, 사회적 환경에 따른 정보격차 해소, 정보소외 극복
- 시각장애인의 역량 증진에 따른 사회적, 경제적 활동 증가

✓ 주요기능

1. 윈도 11 64비트 지원 화면낭독 S/W
2. 터치 기반의 객체 내비게이션 지원
 - 다양한 사용자의 요구에 맞도록 고성능 컴퓨터 환경을 지원
3. 편리한 인터넷 지원 기능
 - 한국형 웹 접근성 지침을 준수한 인터넷 기능 개발
 - ARIA 지원으로 보다 다양한 웹 체험 기회 제공
 - 인터넷 익스플로러, 파이어폭스, 크롬, Edge 등 다양한 브라우저 지원
4. 인터넷 기반의 디지털 인증서 사용
 - 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 인터넷 기반 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용 환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음
5. 점자 디스플레이 및 점자 키보드 지원
 - 화면에 출력되는 내용을 점자 디스플레이에 표시
 - 점자정보단말기의 점자 키보드를 입력장치로 사용해 화면 읽기와 키보드 입력을 하나의 장치에서 효율적으로 처리 가능
6. 다양한 편의 기능
 - 독서 및 파일 관리 유틸리티 기능과 동영상 자막 처리의 자동화로 초보 사용자에게 편리한 사용자 경험 제공
7. 접근성 있는 디지털 콘텐츠 지원
 - 독서장애인 전용 디지털 포맷(DAISY 3.0)을 지원하여 국내외 온라인도서관에서 풍부한 도서 이용 지원
 - 시각장애인 전용 콘텐츠 포맷 VBF 2.1을 지원함으로써 저작권 보호와 멀티미디어 독서, 학습 환경의 기반 제공

✓ 사용가능대상

- 육안으로 컴퓨터 모니터를 구분할 수 없는 중증 시각장애인
- 장문의 전자문서를 읽을 때 시력의 피로감을 쉽게 느끼는 저시력인 일상생활(여가, 정보검색 등)에서 컴퓨터를 활용하는 시각장애인

✓ 사용방법

- 인터넷 인증을 위해 제품 설치 전 사용자번호(ID)를 유저에게 발급함
- 제공된 프로그램 USB를 컴퓨터에 삽입하여 프로그램 설치
- 시스템 재부팅 후 사전에 등록된 사용자번호와 비밀번호를 입력해 인증을 완료함

✓ 최소PC요구사항

- 윈도 11 기준 권장사항
- 프로세서 : 듀얼코어 이상의 CPU
- 주 메모리 : 4G 이상의 메모리
- 저장장치 : 3G 이상의 하드디스크 여유 공간
- 비디오 장치 : WDDM 1.2 지원 비디오 장치
- 사운드 장치 : 음성출력을 위한 사운드카드
- * 운영체제 종류에 따라 권장사항은 달라질 수 있음

✓ 사용 시 유의사항

- 복수의 컴퓨터에 설치해 동시에 접속하는 경우, 가장 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용가능

✓ 제품특징

- 터치 기반의 객체 내비게이션 지원
- 웹 접근성 가이드라인 준수 및 다양한 브라우저(익스플로러,

✓ **최초출시일** : 2008년 7월 1일

✓ **최근 업그레이드** : 2025년 11월 14일

센스리더 어센드 [시각장애유형 | 화면낭독S/W]



제품개요 컴퓨터 모니터에 표시되는 정보를 음성 출력과 점자 디스플레이로 출력해 주는 화면읽기 프로그램
 ※ 외국어 음성엔진 및 전자사전, OCR(문자 판독)기능 등 다양한 기능 지원

개인부담금 일반 197,000원 / 기초수급대상·차상위계층 98,500원

제 조 원 (주)엑스비전테크놀로지 / 대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배·우편 배송 **납 품 기 간** 4일

납 품 자 (주)엑스비전테크놀로지 / 담당자 : 노임성
 (08750) 서울시 관악구 은천로62 광림빌딩 201호
 Tel : 02-888-1623 / FAX : 02-888-1624 / <https://xvtech.com>

개인부담금계좌번호 (우체국) 013664-01-001695 예금주명 : (주)엑스비전테크놀로지

✓ 제품사양

- 포장 규격 : 크기 24(가로)×16(세로)×5(높이)cm / 무게 0.7kg
- 버전 : 1.X
- 정품 인증 : USB 내장 디지털 인증서 사용
- 제품 음성 엔진 : 한국어(유미, 혜련), 영어(Kate), 일본어(Misaki)
- 전자사전 : 영한, 한영, 국어사전
- 화면 판독 및 제어 OCR(Optical Character Recognition)

✓ 구성품목

- 프로그램 설치 및 인증용 USB 메모리(센스리더 프로그램, 전자 매뉴얼, 음성강의), 점자 핸드북

✓ 주요기능

- 시 활용 기기 여부
 - 주요 시 서비스 인터페이스 제공
 - 시각장애인 맞춤 시 지원 기능: 쿼리 검색, 이미지 설정
- 1. 원도 11 64비트 지원 화면낭독 S/W
- 2. 주요 사무업무용 소프트웨어 지원
 - 마이크로소프트 오피스, 한컴 오피스 지원
- 3. OCR(Optical Character Recognition)기능 지원
 - 타인의 도움 없이 인쇄물이나 그래픽 정보접근이 가능하도록 편의성 제공
- 4. 터치 기반의 객체 내비게이션 지원
- 5. 편리한 인터넷 지원 기능
 - 한국형 웹 접근성 지침을 준수한 인터넷 기능 개발
 - 인터넷 익스플로러, 파이어폭스, 크롬, Edge 등 다양한 브라우저 지원
 - 웹 사이트의 구성요소 중 대체 텍스트가 없는 이미지 콘텐츠를 인식해 음성 출력할 수 있는 기능을 지원하여 자체접근성 확립
- 6. USB 기반의 디지털 인증서 사용
 - 소프트웨어 불법 복제 및 저작권 보호를 위해 디지털 인증서를 사용함으로써 컴퓨터 사용 환경에 상관없이 쉽고 안전하게 정품 소프트웨어를 사용할 수 있음
- 7. 점자 디스플레이 및 점자 키보드 지원
 - 화면에 출력되는 내용을 점자 디스플레이에 표시
 - 이미지 정보를 2차원 촉각 디스플레이에 표시하여 그래프, 차트, 지도 등 활용지원
 - 점자정보단말기의 점자 키보드를 입력장치로 사용해 화면 읽기와 키보드 입력을 하나의 장치에서 효율적으로 처리 가능
- 8. 다양한 편의 기능
 - 동영상 자막 처리의 자동화로 초보 사용자에게 편리한 사용자 경험 제공
- 9. 어학학습 기능 지원
 - 영한, 한영, 국어 전자사전 지원 및 한국어(유미, 혜련), 영어(Kate), 일어(misaki) 등 3종의 음성엔진 추가 제공

✓ 제품특징

- 최신 OCR(Optical Character Recognition) 엔진을 탑재하여 접근성을 제공하지 않는 애플리케이션에 대한 화면 판독 및 제어 기능 지원
- 웹 사이트의 이미지 내용을 인식하여 음성 출력 기능 지원
- 이미지 PDF문서 변환 및 읽기 기능 지원

- 스캐너를 이용해 고지서나 각종 인쇄물의 내용 인식 및 문서 파일로 저장가능 지원
- 터치 기반의 객체 내비게이션 지원
- 웹 접근성 가이드라인 준수 및 플래시, 자바 애플릿, 실버 라이트 지원과 다양한 브라우저(익스플로러, 파이어폭스, 크롬, Edge) 지원 기능으로 더욱 향상된 인터넷 사용자 체험 제공
- 센스 주소록, 센스 타자연습 등의 사용자 편의 기능 제공
- 다양한 점자정보단말기 점자 입/출력 기능 지원
- 이미지 정보를 2차원 촉각 디스플레이에 표시하여 그래프, 차트, 지도 등 활용지원
- 영한/한영/국어 전자사전 제공
- 오피스 계열 프로그램 지원기능 강화
- 영어, 일어, 한국어 음성엔진 추가 제공

✓ 활용방안(기대효과)

- 장애와 경제적, 사회적 환경에 따른 정보격차 해소
- 시각장애인의 역량 증진에 따른 사회적, 경제적 활동 증가
- 사무용 S/W 사용능력 배양을 통한 고용 안정 및 기회 확대

✓ 사용가능대상

- 접근성을 제공하지 않는 애플리케이션에 대한 화면 판독 및 제어 기능을 필요로 하는 중증 시각장애인
- 사무직에 종사하며 타인의 도움 없이는 문서 확인이 어려운 시각장애인
- 사무직 종사자, 직업재활 훈련과정생 및 고등교육 이상 교육생으로 전문적 컴퓨터 활용이 필요한 사용자
- 웹 서핑을 통해 다양한 정보를 얻고자하는 시각장애인

✓ 사용방법

- 제공된 프로그램 USB를 컴퓨터에 삽입하여 프로그램 설치
- 설치 즉시 인증서를 생성하여 USB 자체에서 인증을 완료함

✓ 최소PC요구사항

- 원도 11 기준 권장사항
- 프로세서 : 듀얼코어 이상의 CPU
- 주 메모리 : 4G 이상의 메모리
- 저장장치 : 3G 이상의 하드디스크 여유 공간
- 비디오 장치 : WDDM 1.2 지원 비디오 장치
- 사운드 장치 : 음성출력을 위한 사운드카드
 - * 운영체제 종류에 따라 권장사항은 달라질 수 있음

✓ 사용 시 유의사항

- 여러 컴퓨터에 설치하여 사용하는 경우, 인증용 USB가 연결된 컴퓨터에서만 사용 가능
- 단, 인증용 USB가 연결된 컴퓨터가 없을시 인터넷 연결된 컴퓨터 중 마지막에 센스리더가 실행된 컴퓨터에서만 사용 가능

✓ 최초출시일 : 2024년 12월 31일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 11월 14일

센스원 [시각장애유형 | 화면낭독S/W]



제 품 개 요 시각장애 특성 맞춤형 스마트 워크 솔루션

개 인 부 담 금 일반 700,000원 / 기초수급대상·차상위계층 225,000원

제 조 원 (주)엑스비전테크놀로지 / 대한민국 **품질보증기간** 24개월

납 품 방 법 방문설치

납 품 기 간 30일

납 품 자 (주)엑스비전테크놀로지 / 담당자 : 노임성
(08750) 서울시 관악구 은천로62 광림빌딩 201호
Tel : 02-888-1623 / FAX : 02-888-1624 / <https://xvtech.com>

개인부담금계좌번호 (우체국) 013664-01-001695 예금주명 : (주)엑스비전테크놀로지

✓ 제품사양

- 356(가로)×223(세로)×16.9(높이)cm / 무게 1.29kg
- 버전 : 2026
- S/W : 윈도 11pro(64bit), 자체 음성지원 기능, 음성지원 복구 솔루션

✓ 구성품목

- 센스원 본체, 점자 사용 매뉴얼, 어댑터, 마우스, 렌젠더, 가방

✓ 주요기능

- AI 활용 기기 여부
- 주요 AI 서비스 인터페이스 제공
- 시각장애인 맞춤 AI 지원 기능: 쿼리 검색, 이미지 설명
- 1. 복구 솔루션도 스마트하게! 복구 과정을 음성으로 듣다
 - 바이러스 공격 또는 특정 환경에 노출되어 시스템에 문제가 발생한 경우 사용자가 직접 단시간에 문제를 해결할 수 있는 원클릭 음성지원 복구 솔루션 탑재
- 2. 복잡한 소프트웨어 설치는 그만! 원격 서비스는 기본
 - 시스템에 경미한 문제 발생 시 스스로 해결할 수 없는 경우 복잡한 소프트웨어 설치 없이 센스원 사용자들끼리 도움이 될 수 있는 원격 지원 서비스 탑재
- 3. 합리적인 가격으로 만나는 스마트 워크 솔루션
 - 음성지원 소프트웨어는 물론 다국어가 지원되는 고성능 문자 판독기능을 하나로 제공
- 4. 고속 양방향 충전은 기본! 대용량 배터리를 장착한 초경량 스마트 워크 솔루션
 - 장에 특성상 배터리 소모량이 많은 사용 패턴을 고려하여 대용량 배터리 탑재로 24시간 어디서든 자유로운 작업 가능
- 5. 심플한 기기 조작
 - 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 적합한 구성으로 설계하여 필요한 Application을 원클릭 실행 및 조작
- 6. 다양한 모바일 기기 원격 제어 기능
 - 스마트폰이나 태블릿 PC를 키보드를 사용해 제어할 수 있는 원격 제어기능 제공
- 7. 엠포는 시선을 원천 차단한다! 사생활 보호 기능 탑재
 - 타인의 시선을 걱정하지 않고 사용할 수 있도록 음성지원 소프트웨어만으로 작업할 수 있는 환경 조성

✓ 제품특징

- 사용자가 스스로 문제를 탐지하고 단시간에 해결할 수 있는 음성지원 복구 솔루션 탑재
- 스마트한 원격 서비스를 통해 사용자가 해결할 수 없는 문제에 대한

신속한 지원

- 시각장애 특성 맞춤형 설계를 통한 손쉬운 사용 가능
- 원클릭으로 다양한 환경의 Application 실행 및 조작
- 사용자의 생산성을 증대하기 위해 결합된 고성능 스마트 워크 솔루션
- 전자 문서나 종이 서류를 쉽게 음성으로 읽을 수 있는 고성능 문자 판독 기능 내장
- 각종 스마트 기기와의 연결을 통한 원격 제어

✓ 활용방안(기대효과)

- 장애와 경제적, 사회적 환경에 따른 정보격차 해소
- 시각장애인의 역량 증진에 따른 사회적, 경제적 활동 증가
- 사무용 S/W 사용능력 배양을 통한 고용 안정 및 기회 확대

✓ 사용가능대상

- 컴퓨터 등 정보통신 기기 사용 시각장애인
- 취업해 있거나 직업 훈련 과정을 이수하고 있는 시각장애인
- 대학 이상 교육을 받고 있는 시각장애인

✓ 사용방법

- 대기업 제품과 같이 전원 연결 후 바로 사용 가능
- 시각장애 특성에 맞는 설계와 관련 소프트웨어를 기본으로 내장하여 초급 사용자도 즉시 사용 가능

✓ 최소PC요구사항

- 화면 : 15.6 LED
- CPU : Ultra5-125H
- RAM : 16GB(DDR5)
- SSD : M.2 256GB
- OS : 윈도 11(64bit)
- 센스원 디바이스 존속으로 다른 pc는 해당 없음.

✓ 사용 시 유의사항

- ※ 센스원에 탑재된 운영체제는 해당 하드웨어에 한정된 라이선스 조건에 의해 제공되며, 기타 서비스 조건은 아래와 같습니다.
- 사용자 과실에 의한 하드웨어 손상 발생 시 하드웨어 제조사 a/s 정책에 준한 실비 서비스 제공

✓ 최초출시일 : 2024년 12월 31일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 11월 14일

숲나무 (Sync View-Tree in the forest) [시각장애유형 | 화면확대S/W]



제품개요 숲나무는 윈도우 화면을 별도의 태블릿에서 확대하여 볼 수 있는 제품으로, PC 전체 화면(숲)과 확대된 일부(나무)를 동시에 볼 수 있어, 다른 제품과 차별화된 혁신적인 경험을 제공합니다. PC 화면을 통해서서는 전체의 구조 및 맥락을 파악하고, 동시에 확대된 화면을 통해서서는, 보다 크게 세부 정보를 볼 수 있습니다.

개인부담금 일반 460,000원 / 기초수급대상·차상위계층 165,000원

제 조 원 (주)넥스트지 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)넥스트지 / 담당자 : 오정민

(03150) 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 216호 (수송동)

Tel : 02-734-1641 / FAX : 02-735-1641 / www.nextg.kr

개인부담금계좌번호 (국민은행) 578601-01-281203 예금주명 : (주)넥스트지

✓ 제품사양

- 1. 하드웨어
디스플레이: 11인치 / 저장공간: 128GB / 램: 12GB
운영체제: Android / 네트워크: Wi-Fi / Bluetooth
- 2. 소프트웨어
숲나무 Windows용 / 숲나무 안드로이드용

- 시력 보호를 통한 업무 피로도 완화
- 학습 능력 향상 및 교육 기회 확대
- 정보 접근성 향상

✓ 사용가능대상

- 시각장애 중 저시력인

✓ 구성품목

- 본체 갤럭시 태블릿 1대 / 태블릿 거치대 1대 / 설치 파일 USB 1개
- 점자/목자 매뉴얼 1부

✓ 사용방법

- 1. 장치 페어링
 - PC용 숲나무를 실행한 후, 숲나무 장치를 켜
 - 숲나무 장치에 표시된 돋보기 버튼을 눌러 pc의 IP주소를 입력 (1회만)
 - 이후 돋보기 연결 버튼을 누르면 PC 화면이 숲나무 장치에 출력됨
- 2. 모드 호출
 - 단축키 ctrl+win+f10를 누르면 확대 모드로 전환 (토글)
 - 단축키 ctrl+win+f10를 누르면 터치 포인터 모드로 전환 (토글)
 - 단축키 ctrl+win+f12를 누르면 음성 합성 모드로 전환
 - 단축키 ctrl+win+f11를 누르면 음성 입력 모드로 전환
- 3. 확대모드(Zoom mode) 사용
 - 단축키 ctrl+win+numpad+를 누르면 숲나무 장치의 화면이 확대
 - 단축키 ctrl+win+numpad-를 누르면 숲나무 장치의 화면이 축소
 - 단축키 ctrl+win+f9를 누르면 숲나무 장치의 화면 색상이 반전
 - 단축키 ctrl+win+f8를 누르면 숲나무 장치의 화면 화질이 보정
- 4. 터치스크린 마우스 (Touch pointer mode) 사용
 - 숲나무에서 임의의 영역을 터치하면 해당 좌표와 균일한 위치로 PC의 마우스 포인터가 이동
 - 숲나무에서 임의의 영역을 드래그하면 해당 좌표와 균일한 위치로 PC의 마우스 포인터가 이동
 - 숲나무에서 임의의 영역을 더블 터치하면 해당 좌표와 균일한 위치로 PC의 마우스 포인터 작동
- 5. 음성으로 글자 읽기(TTS mode) 사용
 - PC 화면에서 문장이 표시된 부분을 불러주어 선택.
 - 단축키 ctrl+win+f12를 누르면 PC 화면에서 선택된 문장이 숲나무 장치에서 음성으로 출력.
- 6. 음성으로 글자 입력하기(STT mode) 사용
 - PC 화면에서 입력 가능한 상태를 선택
 - 단축키 ctrl+win+f11를 누르면 신호음이 들리는데, 이때 음성으로 말하면 PC 화면에 입력.

✓ 주요기능

- 1. Zoom Mode (화면확대 기능)
 - 최대 50배 이상 확대 가능하며, 확대시에도 화면의 떨림 현상 없이 원본 화질을 유지하면서 선명하게 제공
- 2. Touch Pointer Mode (터치 스크린 마우스 기능)
 - 태블릿을 마우스패드처럼 쓸 수 있는 기능. 절대 좌표 방식으로 작동하여 PC 화면의 마우스 포인터를 헤bel 필요 없이 바로 터치 가능
- 3. TTS Mode (음성으로 글자 읽기 기능)
 - 긴 글도 문제없이 PC 화면에 보이는 텍스트를 태블릿이 또렷한 음성으로 읽어줍니다.
- 4. STT Mode (음성으로 글자 입력하기 기능)
 - 문서 작성, 검색, 채팅 등 텍스트 입력이 필요한 편집창에서 음성 입력 가능

✓ 제품특징

- 1. 전체와 부분을 동시에 볼 수 있음 (숲과 나무를 동시에)
 - 다른 제품에서는 볼 수 없는 혁신적인 기능으로 PC 화면 전체 맥락과 확대된 세부 정보를 동시에 파악할 수 있어 작업의 효율성과 정확성을 높임
- 2. 고도화된 시력 보호 기능
 - 눈의 피로를 최소화하는 설계로 불필요한 화면 조작은 줄이고, 화면의 떨림 현상 없이 제공.
 - 색상 반전 및 보정을 통해 선명한 화면 제공
- 3. 직관적인 조작성과 접근성
 - 사용자 친화적 인터페이스를 제공하여, 누구나 쉽게 사용할 수 있음.
 - 화면확대, 터치 스크린 마우스 조작, 음성 기능 등은 사용자를 배려하여 설계
- 4. 음성 인식과 출력의 활용
 - 사용 환경에 따라 음성으로 텍스트 입력(STT)과 텍스트를 음성으로 변환하는 기능(TTS)을 제공하여, 사용자가 키보드나 마우스 없이도 효율적으로 작업할 수 있게 제공함.
- 5. 고도의 맞춤화 가능성
 - 사용자의 특성과 요구에 따라 다양하게 맞춤 설정이 가능. 화면확대 비율, 화질 보정, 색상 반전 등의 기능을 사용자가 원하는 대로 조절할 수 있어, 개인의 선호와 필요에 따라 최적화된 사용 환경을 설정할 수 있음

✓ 최소PC요구사항

- 와이파이 등의 인터넷 온라인 상태에서 사용 가능

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2024년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 11월

✓ 활용방안(기대효과)

- 업무 능력 증대 및 효율성 극대화

플로리더 광학줌 [시각장애유형 | 화면확대S/W]



제품개요 독서확대 기능과 화면확대/음성출력 기능을 하나로 통합한 소프트웨어 + 광학줌 10배 카메라

개인부담금 일반 350,000원 / 기초수급대상·차상위계층 137,500원

제 조 원 (주)오버플로우 / 한국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)오버플로우 / 담당자 : 김상언

(04793) 서울시 성동구 성수일로12길 20 성동안심상가 801호

Tel : 02-465-3450 / FAX : 02-465-3452 / www.atoverflow.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 101907-01-004594 예금주명 : (주)오버플로우

✓ 제품사양

- 플로리 소프트웨어
- 10배 광학줌 USB 3.1 카메라

✓ 구성품목

- 플로리 소프트웨어 1식
- USB 3.1 카메라 1개

✓ 주요기능

- 1) 독서 확대 기능
 - 문서의 확대 영역을 키보드로 간편하게 이동하며 탐색 가능한 플로리 줌 기능
 - 전체 이미지 중에서 확대 영역의 위치를 직관적으로 파악할 수 있는 PIP(Picture in Picture) 화면 제공 기능
 - 사용자 기호에 맞게 맞춤형으로 설정 가능한 명암고대비 기능
 - 화면 Freeze, 이미지 저장 및 공유 기능
 - 화면 회전 및 좌우 반전 기능 (거울보기)
 - 광학줌 10배 카메라로 문서를 확대할 수 있는 기능
 - 문서 내용을 음성으로 읽어주는 OCR 기능
- 2) 컴퓨터(전자문서) 화면확대 및 음성출력 기능
 - 컴퓨터 화면의 활성창을 간편하게 커서 위치로 이동시키는 기능
 - 여러 개의 창 중 활성화된 창을 본인의 눈앞으로 쉽게 이동시키고 최소화/최대화/복구시키는 기능
 - 키보드 커서 위치로 편집화면을 스크롤하고, 해당 위치를 크게 표시하여 간편하게 확인하는 기능
 - 마우스 포인터 위치의 텍스트를 큰 글자로 확인하고 음성으로 출력하는 기능
 - 화면 돋보기 기능 (돋보기 창 크기 조절 기능)
 - 전체 화면 확대 기능 (full screen)
 - 화면의 내용을 음성으로 읽어주는 OCR 기능

✓ 제품특징

- 사용자가 가지고 있는 노트북이나 데스크탑을 고성능 독서확대/화면확대/음성출력 솔루션으로 이용하게 해주는 소프트웨어
- 광학줌 10배 카메라로 문서를 선명하게 확대할 수 있음

✓ 활용방안(기대효과)

- 1) 복지관, 안마원, 자립생활지원센터 및 학교, 가정 등 어떠한 환경에서도 많은 공간을 차지하지 않고도 독서확대 기능을 이용하여 문서를 확대해서 볼 수 있음
- 2) 컴퓨터를 사용할 때 화면 확대 및 음성 출력으로 업무의 효율을 높일 수 있음

✓ 사용가능대상

- 인쇄물 정보 접근이 필요한 시각장애인
- 사무 업무 및 컴퓨터 활용이 필요한 시각장애인
- 웹서핑 및 동영상을 통해 다양한 정보를 얻고자 하는 시각장애인

✓ 사용방법

- 1) 독서 확대기 사용
 - 컴퓨터 및 카메라/스피커를 동작시킨다.
 - 플로리 앱을 실행한다.
 - 메뉴창에 카메라 버튼을 실행한다.
- 2) 플로리 스크린(화면확대) 사용
 - 컴퓨터 및 카메라/스피커를 동작시킨다.
 - 플로리 소프트웨어를 실행한다.
 - 메뉴창에 스크린 버튼을 실행시킨다.
 - 큰글자/돋보기/전체화면 기능을 사용한다.

✓ 최소PC요구사항

- CPU : i3 / RAM 메모리 : 4GB / 하드용량 : 5GB

✓ 사용 시 유의사항

- 광학줌 카메라는 USB 3.0 포트에 연결해야 정상 동작함

✓ 최초출시일 : 2021년 10월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 2월

VES [시각장애유형 | 확대용 돋보기]



제 품 개 요 - 원거리와근거리보기가능한 생체 광학 안경입니다.
- 뛰어난 이미지 선명도와 밝기를 제공하며, 현대적이고 가벼운 인체 공학적이며 완벽하게 조절가능한 디자인은 하루 종일 편안하고 편안한 시야를 제공합니다.

개 인 부 담 금 일반 400,000원 / 기초수급대상·차상위계층 150,000원

제 조 원 Ocutech / USA

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 15일

납 품 자 (주)헨디인터내셔널 / 담당자 : 곽노현
(03635) 서울시 서대문구 통일로 360 보하빌딩 3층
Tel : 02-725-2190 / FAX : 02-725-4442 / www.hendi.org

개인부담금계좌번호 (우체국) 011783-02-248505 예금주명 : (주)헨디인터내셔널

✓ 제품사양

- 배율 및 시야 : 4배 (12.2도)
- 배율 및 시야 : 5배 (10.5도)
- 배율 및 시야 : 6배 (9.6도)
- 근거리 초점거리 : 4배 23cm
- 근거리 초점거리 : 5배 25cm
- 근거리 초점거리 : 6배 - 30cm
- 무 게 : 25.5g

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 케이스 1개

✓ 주요기능

- 중거리 및 원거리 : 중앙에 있는 초점조절버튼 조절로 근거리, 중거리, 원거리를 자유로이 볼 수 있음
- 좌안 우안 변경할 수 있음
- 예: PC 모니터 보기, 악기 연주 시 악보 보기, 칠판 보기, 버스 번호 보기 등

✓ 제품특징

- 저시력자에게 필요한 중거리~원거리를 볼 수 있는 장점

✓ 활용방안(기대효과)

- 좌우안 변경가능

✓ 사용가능대상

- 시각장애인증 전맹을 제외한 전 저시력장애인

✓ 사용방법

- ① 기계의 눈위치를 렌즈에 맞게 조절한다
- ② 좌,우측 눈이 좋은 쪽을 선택한다
- ③ 앞쪽에 위치한 초점 조정간을 돌려서 초점을 맞추어 사용한다

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 강한 충격이나 떨어트리는 행위는 제품에 손상을 줄 수 있음.
- 제품을 안정된 위치에 두고 장시간 사용시 눈의 보호를 위해 쉬어주기 바람.
- 화기나 고온, 습기에 유의해야 함.
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2010년

✓ 최근 업그레이드 : 2022년

AI 아토 뷰어 (AIAToViewer) [시각장애유형 | 기타]



제품개요 AI 아토뷰어는 생성형 AI 기술을 기반으로, 시각장애인의 정보 접근성과 활용성을 극대화하기 위해 개발된 특별한 정보 단말기입니다. 채팅형 질의응답을 통해 여러 분야별 전문 시를 통해 전문적인 답변을 받을 수 있으며, 복잡한 사진이나 그래프 등의 시각정보를 시각장애인이 이해할 수 있도록 해설해줍니다.

개인부담금 일반 682,000원 / 기초수급대상·차상위계층 220,500원

제 조 원 (주)넥스트지 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)넥스트지 / 담당자 : 오정민

(03150) 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 216호 (수송동)

Tel : 02-734-1641 / FAX : 02-735-1641 / www.nextg.kr

개인부담금계좌번호 (국민은행) 578601-01-281203 예금주명 : (주)넥스트지

✓ 제품사양

- 1. 하드웨어
 - 저장공간: 256GB
 - RAM: 16GB / 디스플레이: 15인치 / 운영체제: Windows 11
 - 무게: 1,190g
 - 네트워크: Wi-Fi/ Bluetooth
- 2. 소프트웨어
 - AI 아토 뷰어 / AI 아토 런처

전문적인 해설 기능 제공

- 6. 하드웨어-소프트웨어 일체화: 빠르고 안정적인 성능, 최적화된 사용 경험 제공
- 7. 뛰어난 휴대성: 언제 어디서나 편리하게 사용 가능.

✓ 구성품목

- 본체 노트북 1대 / 설치 파일 USB 1개 / 점자/목자 매뉴얼 1부

✓ 활용방안(기대효과)

- 정보 접근성 향상
- 학습 자료 접근성 향상 및 자기 주도 학습 능력 향상
- 직무 능력 향상 및 경쟁력 강화
- 삶의 질 향상
- 경제 및 사회 활동 참여 확대

✓ 주요기능

- 국내 최초 생성형 AI 특화 보조공학기기
- 시각장애인이 최첨단 시를 온전히 활용할 수 있도록 설계된 전용 플랫폼
- 단순한 접근성 도구가 아닌, GPT-5-03-GPT-4.1 등 OpenAI의 최신 모델을 직접 선택해 사용하는 멀티 모델 AI 환경을 시각장애인 맞춤형으로 구현한 최초의 기기
- 1) 생성형 AI 중심 설계
 - OpenAI의 최신모델(GPT-5, 03, GPT-4.1 등)을 직접 선택하여 사용하는 멀티모델구조
 - 이미지 해설(Visual AI) + 텍스트/추론 AI를 통합한 전문가급 AI 환경 제공
 - 고난도 수학 과학 코딩 문서작성까지 대응하는 고성능 추론 시스템
- 2) AI 기능의 고도화
 - 실시간 웹 검색으로 최신 정보 반영
 - 심층 추론 옵션으로 논리적 사고 강화
 - 검색 + 추론을 결합한 하이브리드 모드 지원
 - 특히 GPT-5와 03 같은 최첨단 추론 모델로 시각장애인이 전문가 수준의 AI 경험을 누릴 수 있도록 한 점이 가장 큰 차별점
- 3) 시각장애인 맞춤 AI 인터페이스
 - 시각장애인이 가장 선호하는 대화형 구조
 - 단축키로 사용성 제고 (Ctrl+F, F3, F4 등)
 - 음성 피드백 기반 상태 인지
 - 복잡한 메뉴 없이 AI와 바로 연결되는 UX

✓ 사용가능대상

- 모든 중증 경증의 시각장애인

✓ 사용방법

- 1. 질문하고 답변받기
 - Ctrl + Win + a : 어시스턴트 단축키
 - Ctrl + Win + i : 이미지 해설 단축키
 - 원하는 단축키를 누르고 질문 편집창에 질문할 내용을 입력하고 Enter 키를 누르세요.
 - AI가 자동으로 답변을 생성하여 답변 영역에 보여줍니다.
 - 질문 입력 후, 자동으로 답변 영역으로 이동합니다.
- 2. 단축키로 원하는 기능 바로 실행: 어떤 화면에서든 단축키를 누르면 해당 기능이 즉시 실행
 - Ctrl + Win + F1: 모든 분야 질문/답변 생성
 - Ctrl + Win + F2: 이미지 해설
 - Ctrl + Win + F3: 컴퓨터 관련 질문/답변 생성
 - Ctrl + Win + F4: 의학 관련 질문/답변 생성
 - Ctrl + Win + F5: 심리 상담 관련 질문/답변 생성
 - Ctrl + Win + F6: 법률 관련 질문/답변 생성
 - Ctrl + Win + F7: 세무 관련 질문/답변 생성
- 3. 질문/답변 영역 간편 이동
 - Alt + D: 질문 편집창으로 바로 이동
 - Tab: 답변 영역으로 이동

✓ 제품특징

1. 시각장애인 맞춤 설계: 시각장애인의 사용성을 최우선으로 고려하여 설계된 정보 단말기
2. 생성형 AI 기반: 최첨단 생성형 AI 기술을 활용하여 정보 접근성 및 활용성 극대화
3. 사용자 친화적인 UI: 쉽고 편리한 정보 접근 및 활용을 위한 직관적인 인터페이스 제공
4. 전문 분야 정보 제공: 다양한 전문 분야에 대한 지식과 정보를 제공하여 맞춤형 답변 생성(프롬프트 엔지니어링 기술 적용)
5. 이미지 및 시각정보 해설: 시각정보에 대한 깊이 있는 이해를 돕는

✓ 최소PC요구사항

- 와이파이 등의 인터넷 온라인 상태에서 사용 가능

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2024년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 11월

온기소리 2026 [시각장애유형 | 기타]



제 품 개 요 “내 목소리가 비서가 되다” 음성 시 제어 보조기기

개 인 부 담 금 일반 140,000원 / 기초수급대상·차상위계층 70,000원

제 조 원 (주)키핀 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
(04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- 스마트워치 : 주니젠GT3
- 크기 (L x W x H) mm : 44.7 x 37.7 x 10.5
- 시계줄 너비 : 22mm
- 배터리 : 290mAh (5~7일 사용)
- 무게 : 41.4g / 재질 : 아연 합금 / 색상 : 검정
- 앱 : 온기소리
- OS : 안드로이드 버전 8 이상, iOS 버전 16 이상*
- 기능 : 24시간 건강 모니터링, 인터넷 검색, 뉴스, 건강정보 안내, 폰찾기, 전화걸기, 시각, 날씨, 알람설정, 말벗대화, 긴급 SOS콜등
- * iOS 앱의 경우 애플의 개인정보 보호 정책에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

✓ 구성품목

- 주니젠 GT3 본체 1개 / 자석식 걸쇠형 시계줄 1개
- 충전기 1개 / 사용자설명서 1부 / 보증서 1부 / USB 연장선 1개

✓ 주요기능

1. 인터넷 검색
2. 건강정보 안내
3. 폰찾기
4. 전화걸기
5. 시각 정보
6. 날씨 정보
7. 알람설정
8. 말벗대화
9. 긴급 SOS콜 기능

✓ 제품특징

1. 간편한 대화 모드 활성화
2. 음성 명령 기반 조작
3. 인터넷 검색 및 뉴스 제공
4. 실시간 건강정보 모니터링
5. 휴대폰 찾기 및 전화 걸기 지원
6. 기본 정보 제공 기능
7. 말벗대화 기능
8. 시각장애인에 최적화된 사용자 인터페이스
9. 긴급 SOS콜 기능
10. 연장된 사용 시간

✓ 활용방안(기대효과)

1. 자립 생활 지원
2. 안전성 강화
3. 정보 접근 시간 및 비용 절감
4. 사회적 참여 및 통합 촉진

5. 보건 복지 체계 강화

✓ 사용가능대상

- 시각 장애인 (경증 ~ 중증)

✓ 사용방법

- 최초 설정
 1. 앱 다운로드 : 앱 검색창에서 ‘온기소리’를 검색한 후 앱을 다운로드합니다.
 2. 앱 실행 : 앱을 실행하고, 요청되는 각종 권한을 허용합니다.
 3. 사용자 정보 입력 : 본인의 이름을 입력합니다. 선택 사항으로 보호자 연락처를 입력합니다.
 4. 주니젠GT3 전원 켜기 : 주니젠GT3 기기의 전원을 켭니다.
 5. 연결 메뉴 선택 : 앱 내 ‘연결’ 메뉴를 선택하여 기기와의 연결을 진행합니다.
 6. 연결 완료 확인 : “온기소리가 연결되었습니다.”라는 안내 멘트를 확인합니다.

· 사용시

1. 대화 모드 활성화 : 주니젠GT3의 아래쪽 버튼을 두 번 클릭한 후, 화면 중앙의 버튼을 클릭합니다.
2. 안내 멘트 청취 : ‘온기소리’의 안내 멘트가 시작되고 마지막에 ‘땡땡’ 소리가 나올 때까지 기다립니다.
3. 명령어 발화 : ‘땡땡’ 소리 후에 발화합니다.
예) “지금 몇시지?”, “내일 날씨 알려줘”, “1시간 뒤 알람해줘” 등 원하는 명령어를 말합니다.
4. 답변 청취 : 사용자의 명령에 맞는 답변을 음성으로 안내합니다.
5. 반복 사용 : 대화 모드에서는 2번부터 4번의 과정이 반복됩니다. 3번에서 “그만하자”라고 말씀하시면 종료됩니다.

· 명령어

“오늘 뉴스 알려줘”, “내 폰 찾아줘”, “~에게 전화해줘”, “(오늘/내일/모레) 날씨 알려줘”, “지금 몇시야”, “건강정보 알려줘”, “~분(시)뒤에 알람 켜줘”, “그만하자”

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용시 유의사항

- 전용 충전기 사용
- 저속 어댑터 사용 (150mA/DC5V)
- 생활 방수 지원
- 임의개조, 분리, 수리금지
- iOS 앱의 경우 애플의 개인정보 보호 정책에 따라 일부 기능이 제한될 수 있음

✓ **최초출시일** : 2025년 3월 13일

✓ **최근 업그레이드** : 2026년 3월 11일



“

몸은 불편하지만
스마트한 디지털 세상에선
언제나 자유로워요!

”



터치모니터

- 27인치 멀티터치모니터 106
- 27인치 정전식 터치모니터 107
- 32인치 IR 터치모니터 108
- 애니터치드로잉27 (ANYTouch2026-27) 109

특수마우스

- EA-2 특수마우스 110
- 립스틱 마우스 111
- 안경마우스2-스위치 5종 택1(바이트,손가락,발, 압력,필로우) 112
- 안경마우스2-터치, 센서 스위치 택1 113
- 안경마우스2-호흡스위치 114
- 안구마우스 (PCEye 5) 115
- 안구마우스거치대세트 (PCEye 5 mounting set) 116
- 엔에이블러조이스틱 117
- 엔에이블러트랙볼 118
- 친 플러스 마우스 119
- 퀘스터 조이스틱 120
- 큐하조노X 마우스 121

특수키보드

- 티피키보드 122

기타

- IOT 아코이 호출기 123
- 온기드림 2026 124

27인치 멀티터치모니터 [지체/뇌병변장애유형 | 터치모니터]



제 품 개 요 - 컴퓨터 조작이 어려운 장애인이 손이나 신체부위, 모니터 화면을 터치하여 화면 확대 및 키보드, 마우스 기능이 모두 가능한 터치모니터
 - 스크린의 확대, 축소, 회전이 가능하며 부드럽고 정확한 터치제공
 - 스탠드 부착으로 터치시 안정적인 터치가능

개 인 부 담 금 일반 166,000원 / 기초수급대상·차상위계층 83,000원

제 조 원 한스정보 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
 (04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
 Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✔ 제품사양

- 화면크기 : 68.6cm(27")
- 터치스크린 : 최신 PCT방식 10포인트 정전식 터치패널 적용
- 해상도 : 2560x1400 (16:9), 광시야각
- 밝 기 : 300cd/m2
- 터치패널 : 정전식 PCT 방식(스마트 터치방식)
- 영 상 : HDMI / Type-C
- 스피커 : 3W x 2way 스테레오
- 기 타 : 자동 고정중립비 가능, 밀림 방지용 받침대 적용
- 스크린 : 정전식 10포인트 멀티터치스크린
- Glass : 2mm 강화유리 적용

✔ 구성품목

- 모니터 본체 1개
- HDMI케이블, 전원어댑터 1개
- 터치 USB 케이블 1개, C-Type 케이블 1개
- 밀림방지 스탠드 1개
- 사용 설명서 1부

✔ 주요기능

- 손이나 신체부위로 모니터화면을 터치하여 기존 일반 컴퓨터에서 사용하는 키보드와 마우스의 기능을 대체할 수 있음
- 멀티터치 기능을 통해 문서 및 사진, 웹페이지 확대 및 축소 가능(Windows 7 이상)
- USB 연결시 사진 및 동영상 재생 가능

✔ 제품특징

- 10포인트 멀티터치 적용으로 Windows7 이상에서 최적의 터치활용 가능
- LED 광시야각 패널 적용으로 넓은 시야각 확보
- 터치드라이버 설치 및 좌표설정 불필요(Windows에서 자동 인식)
- 스크린의 확대, 축소, 회전이 가능하며 부드럽고 정확한 터치제공 (최신 터치 스크린 방식인 PCT 방식)
- LED 백라이트 적용으로 높은 에너지 효율과 탁월한 절전효과
- 전면 2mm 강화유리 + 센서 구조로 내구성 매우 우수
- 스탠드 부착으로 터치시 안정적인 터치가능

✔ 활용방안(기대효과)

- 컴퓨터 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있으며 터치모니터를 통한 컴퓨터, 인터넷 등 정보접근의 활용이 어려운 장애인이 정보통신 보조기기 및 서비스를 이용할 수 있도록 정보접근 기회 제공

✔ 사용가능대상

- 지체장애, 뇌병변장애, 정신장애, 지적장애, 자폐성장애, 저시력장애
- 해당기기를 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능해야함

✔ 사용방법

- ① 기존 모니터를 컴퓨터 본체에서 제거
- ② 사용설명서 숙지 후 터치모니터의 전원 및 케이블을 본체와 연결
- ③ 터치 드라이브 USB잭 연결(자동으로 드라이브 설치 및 좌표 설정)
- ④ 스탠드 각도 조절
- ⑤ 터치모니터 사용

✔ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✔ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✔ 최초출시일 : 2021년 1월 13일

✔ 최근 업그레이드 : 2025년 2월 2일

27인치 정전식 터치모니터 [지체/뇌병변장애유형 | 터치모니터]



제품개요 손끝에서 발생하는 정전기를 감지, 모니터의 화면을 직접 터치해서 원하는 정보를 입력하거나 명령어를 실행하는 보조공학 기기

개인부담금 일반 162,000원 / 기초수급대상·차상위계층 81,000원

제 조 원 (주)엘피케이에스

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 방문 설치

납 품 기 간 3일

납 품 자 (주)엘피케이에스 / 담당자 : 이현수
(06572) 서울특별시 서초구 방배로 27길 27 동우빌딩 502호
Tel : 02-3477-3006,7 / FAX : 02-3477-3050 / www.lpks.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 110-0047-04589 예금주명 : 주) 엘피케이에스


✔ 제품사양

- 모니터
 - 화면 크기: 27인치
 - 화면 비: 16:9
 - 해상도: 1920:1080
 - 터치 방식: 정전식
 - 터치 포인트: 10 포인트
- 브라켓
 - 허용 중량: 15Kg
 - 높이 가변: 33cm
 - 상하각: 90도
 - 좌우각: 180도
 - 재질: 알루미늄

✔ 구성품목

- 모니터 본체, HDMI 케이블, 이동용 브라켓

✔ 주요기능

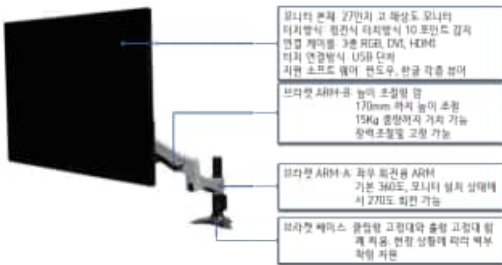

✔ 제품특징

- 키보드 조작이 힘든 지체, 뇌병변 장애인을 위한 보조 입력 장치이다.
- 정전식 터치입력방식으로 휴대전화와 사용법이 동일하며 확대 축소등이 용이하다.
- 일체형 브라켓으로 사용자의 장애 유형, 작업 환경에 맞게 조정이 가능하다.
- 전문가가 아니더라도 쉽게 설치가 가능하다.
- 전용 소프트웨어 없이 설치만으로 윈도우 또는 업무용 프로그램을 사용 가능하다.
- Full HD 해상도로 깨끗한 화면을 제공한다.

✔ 활용방안(기대효과)

- 1) 장애 유형에 따라 정보접근의 유리함 확보
- 2) 공간 활용이 뛰어나고 장애 유형에 맞게 편하게 사용할 수 있는 입력보조장치.
- 3) 실생활에 밀접하게 사용되는 장애인 맞춤 보조공학기기

✔ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인, 시각 장애인

✔ 사용방법



✔ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✔ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✔ 최초출시일 : 2024년 1월 13일

32인치 IR 터치모니터 [지체/뇌병변장애유형 | 터치모니터]



제 품 개 요 모니터 화면 전면에 전자적 그물망이 사용자의 손가락, 터치 스틱 등을 감지해 마우스, 키보드 등의 입력장치의 역할을 대신하는 보조공학 기기

개 인 부 담 금 일반 168,000원 / 기초수급대상·차상위계층 84,000원

제 조 원 (주)엘피케이에스

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 방문 설치

납 품 기 간 3일

납 품 자 (주)엘피케이에스 / 담당자 : 이현수
(06572) 서울특별시 서초구 방배로 27길 27 동우빌딩 502호
Tel : 02-3477-3006,7 / FAX : 02-3477-3050 / www.lpks.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 110-0047-04589 예금주명 : 주) 엘피케이에스


✓ 제품사양

- 모니터
 - 화면 크기: 32인치
 - 화면 비: 16:9
 - 해상도: 1920:1080
 - 터치 방식: IR 터치방식
 - 터치 포인트: 10 포인트
- 브라켓
 - 허용 중량: 15Kg
 - 높이 가변: 33cm
 - 상하각: 90도
 - 좌우각: 180도
 - 재질: 알루미늄

✓ 구성품목

- 모니터 본체, HDMI 케이블, 이동용 브라켓

✓ 주요기능

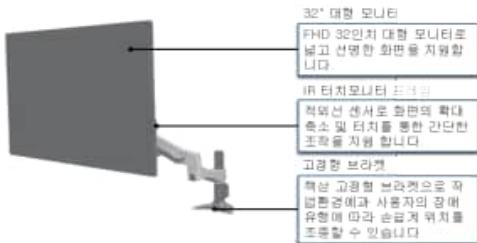

✓ 제품특징

- 키보드 조작이 힘든 지체, 뇌병변 장애인을 위한 보조 입력 장치이다.
- IR 터치입력방식으로 휴대전화와 사용법이 동일하며 확대 축소등이 용이합니다.
- 일체형 브라켓으로 사용자의 장애 유형, 작업 환경에 맞게 조정 가능하다.
- 전문가가 아니더라도 쉽게 설치가 가능하다.
- 전용 소프트웨어 없이 설치만으로 윈도우 또는 업무용 프로그램을 사용 가능하다.
- Full HD 해상도로 깨끗한 화면을 제공한다.

✓ 활용방안(기대효과)

- 1) 장애 유형에 따라 정보접근의 유리함 확보
- 2) 공간 활용이 뛰어나고 장애 유형에 맞게 편하게 사용할 수 있는 입력보조장치.
- 3) 실생활에 밀접하게 사용되는 장애인 맞춤 보조공학기기

✓ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인, 시각 장애인

✓ 사용방법



✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 어댑터 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2024년 1월 13일

애니터치드로잉27(ANYTouch2026-27) [지체/뇌병변장애유형 | 터치모니터]



제품개요 지체/뇌병변 장애인들에게 『터치 모니터』와 『따라 그리기』 소프트웨어를 제공함으로써 신체 및 운동능력 향상, 인지 및 지각 능력 발달, 심리적 및 정서적 지원 그리고 디지털 기기 적응력 강화 등의 재활효과를 제공함.

개인부담금 일반 176,000원 / 기초수급대상·차상위계층 88,000원

제조원 (주)애니케이알 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)애니케이알 / 담당자 : 한찬명

(42699) 대구 달서구 성서공단로 357, 405호 (엠겔러리, 4층)

Tel : 053-653-8835 / FAX : 053-722-0835 / www.anykr.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0003-64471 예금주명 : (주)애니케이알

✓ 제품사양

- 터치 모니터
- 1. 2556X1440@100Hz 27인치
- 2. 응답속도 : 5ms
- 3. 밝기 : 450 cd/m2
- 4. USB C(출력, PD충전), DP, HDMI, Audio In, USB(허브), 양방향 스피커
- 5. 소비전력/대기전력 : 41W(최대), 34W(평균) / 14W(최저), 0.5W이하
- 6. 시야각 178도(H) / 178도(V)
- 7. 전원공급 장치 : 24V 4A / 96W
- 8. 사이즈 : 614(W) X 363(H) X 40(D)
- 9. 무게 (스탠드 포함/미포함) : 6.9Kg / 4.2Kg

✓ 구성품목

- 터치 모니터 1대 / 별도 모니터 거치대 1개
- 터치펜 1개 / 따라 그리기 SW 1식 / 사용 설명서 1부

✓ 주요기능

- 터치 모니터
- 10포인트 정전압 터치 IPS 패널 - 손가락 드로잉, 웹서핑 기능
- USB 허브기능 (키보드 마우스 연결 등)
- DEX 연결 기능 / 스마트폰과 태블릿을 휴대용 PC처럼 사용
- 178도 광시야각 / 어떤 각도에서도 선명한 영상을 제공
- HDMI 및 DP 인터페이스 / PC, 플레이스테이션, 닌텐도 연결가능
- 양방향 스피커 / 별도 스피커 불필요
- 3세대 프리덤 스탠드 / 틸드, 피벗, 스윙, 엘리베이션 가능
- 별도 모니터 거치대 제공 / 침대환경에서 사용환경 최적화
- 정전식 터치펜 / 디스크형 및 터치볼 타입
- 따라 그리기 소프트웨어
- 밑그림 자동 선택(임의선택)
- 다시 그리기 / 초기화
- 펜 색깔 / 굵기 선택 기능
- 밑그림 확대 축소
- 완료 시 따라 그리기 평가기능(피드백)
- 밑그림 추가 및 기능 자동 업데이트

✓ 제품특징

- 따라 그리기 소프트웨어 제공(밑그림을 보고 손가락 혹은 터치펜으로 윤곽선 따라 그리기를 할 수 있음)
- 따라 그리기 소프트웨어는 웹앱 방식으로 추후 자동으로 기능추가 및 콘텐츠가 추가될 수 있음.

- 고해상도 터치패널은 멀티 터치 기능을 제공하여 장애인에 최적인 터치 환경제공
- 프리덤 스탠드와 별도 모니터 암 제공으로 다양한 모니터 설치 환경제공
- PC의 터치 모니터, 스마트폰 혹은 태블릿의 확장 모니터로 이용 가능(DEX 지원)
- USB 허브 기능, USB Type-C PD 충전 포트로 사용 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- [신체 및 운동능력 향상] : 눈-손 협응력을 강화, 소근육 및 상지 운동 기능 증진, 운동 통제력 향상
- [인지 및 지각 능력 발달] : 시각/지각 및 공간 지각력 향상, 집중력 및 주의력 향상, 기억력 자극
- [심리적 및 정서적 지원] : 성취감 및 자아효능감 고취, 스트레스 해소 (미술 치료 효과), 재활에 대한 동기부여
- [디지털 기기 적응력 강화] : DEX 기능을 이용한 스마트폰, 태블릿을 큰 화면으로 이용 가능

✓ 사용가능대상

- 경증 및 중증 지체 장애, 뇌병변 장애, 정신장애, 지적장애, 자폐성 장애, 저시력 장애

✓ 사용방법

- 삼성 스마트폰 연결 (S20 시리즈 이상)
- 삼성 스마트폰 연결 (S20 시리즈 이상)
 1. USB C 포트를 이용하여 스마트폰과 모니터를 연결한다.
 2. 스마트폰에서 유선 DEX 기능을 활성화한다.
- PC 연결
 1. 터치 모니터의 영상 케이블(HDMI, DP)과 USB 케이블을 PC에 연결한다.
 2. 웹 브라우저를 이용하여 따라 그리기 웹앱을 실행(접속)한다.

✓ 최소PC요구사항

- PC 환경 : Windows 10 이상
- 태블릿 환경 : Galaxy Tab S4 이후 S 시리즈
- 스마트폰 환경 : 안드로이드 S 시리즈, Z 폴더블 시리즈: Z Fold7, Z Fold6, Z Fold5, 노트 시리즈(Note8 이상)

✓ 사용 시 유의사항

- 터치 모니터를 별도 모니터 거치대로 고정할 때 터치 모니터가 쓰러지지 않도록 단단히 고정할 것

✓ 최초출시일 : 2026년 1월 10일

EA-2 특수마우스 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제 품 개 요 지체/뇌병변장애로 인해 상하지를 사용하기 어려운 장애인 분들 중 머리의 움직임을 통해 (조이스틱 타입의 마우스로 스틱의 움직임을 통해 마우스 포인터가 움직이고, 입으로 가해주는 압력을 통해 기능 실행) 일반 마우스 및 손가락의 기능처럼 PC, 핸드폰 등의 마우스 포인터를 컨트롤 할 수 있는 특수 마우스입니다.

개 인 부 담 금 일반 180,000원 / 기초수급대상·차상위계층 90,000원

제 조 원 (주)에이아이컨트롤 / 대한민국

품 질 보 증 기 간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개 인 부 담 금 계 좌 번 호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✓ 제품사양

- 본체 사양
 - 무게: 60g, 사이즈 13*52*47cm
 - 사용시간: 약 10시간 이상, 조이스틱 타입 구조
 - 색상: 흰색
 - 재질: 플라스틱, Li-Po충전 배터리

✓ 구성품목

- 본체, 사용설명서, 충전 케이블, USB동글, 패턴카드, 클램프, 링크암

✓ 주요기능

- EA-2는 조이스틱 타입의 마우스피스를 입에 물고 움직이면, 그 방향에 맞게 마우스 포인터가 움직이게 되고, 빨대 구조에 입으로 압력을 불어넣거나 빨아들이면 그 패턴에 의해 다양한 클릭 기능이 실행되는 특수 마우스입니다.
- KC, CE, RoHS 인증 획득
- 안드로이드, iOS, PC 모드에서 패턴에 따른 기능 실행이 가능합니다.

✓ 제품특징

- 조이스틱을 입으로 물고 움직이면 마우스 포인터가 움직이고 패턴에 맞게 불고 빨아 다양한 기능의 실행이 가능한 특수 마우스입니다.

✓ 활용방안(기대효과)

- 장애로 인해 상지 및 하지를 사용하지 못해 PC 등을 활용하지 못하는 분들에게 PC 및 스마트 기기의 접근성 및 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.

✓ 사용가능대상

- 지체, 뇌병변 장애인, 루게릭/근육병 장애인 중 상하지의 움직임이 제한적이며 머리를 움직일 수 있고, 입으로 짧은 호흡을 볼 수 있어야 합니다.

✓ 사용방법

- EA-2 본체와 마운트 연결 후 사용자의 환경에 따라 마운트 위치를 조절 합니다.
- EA-2 하단의 전원 스위치를 켜고 사용 기기의 블루투스에 연결 합니다.
- 심플모드와 패턴모드 선택에 따라 사용 기능이 달라집니다. 확인 후 사용
- 심플모드: 한번 불면 클릭, 길게 불면 드래그, 한번 빨면 우 클릭 길게 빨면 스크롤
- 패턴모드: 두 번 불면 더블클릭, 불고 빨면 이전 페이지, 빨고 불면 다음페이지 두 번 빨면 엔터, Ctrl C 불고 빨고 불고, Ctrl V 빨고 불고 빨고, 등

✓ 최소PC요구사항

- 블루투스 연결이 가능한 PC 및 스마트 기기에서 사용가능

✓ 사용 시 유의사항

- 사용자 환경에 따라 클램프와 링크 암 고정을 확실히 진행 후 사용 합니다.

✓ 최초출시일 : 2022년 10월

립스틱 마우스 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제품개요 지체/뇌병변장애로 인해 상하지를 사용하기 어려운 장애인 중에서도 머리의 움직임이 제한 적인 분들을 위한 특수 마우스입니다. 기존의 호흡을 통한 클릭이 아닌 팁의 아래면 과 윗면을 입술로 터치하는 동작으로 클릭을 합니다. 작은 움직임으로 마우스 포인트의 이동이 가능 합니다.

개인부담금 일반 500,000원 / 기초수급대상·차상위계층 175,000원

제조원 Shannon Electronics / 네덜란드 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납품방법 방문 설치

납품기간 30일

납품자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✔ 제품사양

- 본체 사양
- 본체: 사이즈 80x37mm, 클램프 90mm, 무게 116g
- 마운트: 암길이 530mm, 클램프 길이96mm, 무게 1461g

✔ 구성품목

- 본체 1대 / 거치대(마운트) 1개 / 소프트웨어 설치용 USB
- USB-C 연결용 젠더 / 한글 매뉴얼 1부

✔ 주요기능

- 머리를 움직일 수 없는 대상자도 입술만 움직일수 있으면 사용이 가능합니다.
- 마운트를 통해 사용자 위치에 맞게 조절이 가능 합니다.
- 팁을 입술로 물고 입술을 움직이면 마우스 포인터가 이동 됩니다.
- 팁의 아래 면 또는 윗 면을 터치 하면 클릭을 할 수 있습니다. (왼쪽/오른쪽/드래그/더블/스크롤)
- 세팅 프로그램을 통해 민감도 및 한계점 진폭 등을 조절 할 수 있습니다.
- 프로그램 상에서 사용자를 위한 연습기능이 포함 되어 있습니다.
- 프로필 관리로 5가지의 사용자 설정 및 저장이 가능 합니다.
- 원도우용 화상키보드를 사용해 일반 키보드 기능을 사용할 수 있습니다.

✔ 제품특징

- 밀폐형 디자인으로 별도의 유지 부품이 필요 하지 않습니다.
- 마운트 조절을 통해 사용자의 위치에 따라 조절이 가능 합니다.
- 입술로 팁을 아래위로 물고 입술을 움직이면 마우스 포인터가 이동 합니다.
- 아랫입술과 윗입술의 터치로 클릭 및 드래그 스크롤 기능을 선택 사용이 가능 합니다.
- PC 외에 젠더를 통해 안드로이드 IOS 제품에서도 사용이 가능 합니다.

✔ 활용방안(기대효과)

- 장애로 인해 상지 및 하지를 사용하지 못해 PC 등을 활용하지 못하는 분들에게 PC의 접근성 및 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.

✔ 사용가능대상

- 지체, 뇌병변 장애인, 루게릭/근육병 장애인 중 상하지의 움직임이 제한적이며 머리의 움직임이 제한적인 장애인에게 적합 합니다.

✔ 사용방법

- 본체와 마운트를 연결 후 마운트를 조절 해 사용자가 사용하기 편한 위치로 조절합니다.
- 립스틱 마우스와 PC를 USB로 연결 후 설정 소프트웨어를 설치합니다. (설정 값이 적합하면 설치를 안 해도 사용 가능)
- 윗입술과 아랫입술을 사용해 립스틱 마우스의 팁(붉은색)을 물어줍니다.
- 입술을 사용 해 원하는 방향으로 팁을 밀면 마우스 포인터가 이동합니다.(팁은 고정되어 있으며 팁이 움직이지는 않습니다.)
- 아랫입술로 팁 아랫부분 원터치 왼쪽클릭, 팁 아랫부분 더블터치: 왼쪽 더블클릭
- 팁 아랫부분 원터치 지속 후 윗부분을 터치 해 이동: 드래그 기능
- 윗 입술로 팁 윗부분 원터치: 오른쪽 클릭 (※ 아래 위 터치 기능 전환 가능)
- 팁의 윗부분을 약 2초간 길게 터치 후 스크롤 기능 사용 가능 해제 시 윗부분 터치

✔ 최소PC요구사항

- 윈도우 OS, 맥 OS, 리눅스 OS, 사용 가능 안드로이드/IOS 사용 가능(USB-C 연결용 젠더 필요)
- 한글 화상키보드 운영체제용, 윈도우용 클릭키 사용 가능

✔ 사용 시 유의사항

- 오 작동으로 인한 포인터 움직임 시 몇 초 동안 팁을 사용하지 않으면 움직임이 멈춥니다.
- 클릭 동작과 마우스 포인터의 움직임이 서로 방해가 되는 경우 약 20초 동안 팁을 움직이지 않으면 자동 리셋 되어 사용이 가능합니다.
- 마운트의 클램프 폭이 4.5cm입니다. 최대 4.5cm 두께의 판에 고정 가능합니다.
- 사용 시 고정 되는 테이블 및 책상 등의 두께를 확인 후 설치합니다.

✔ **최초출시일 : 2016년 1월**

✔ **최근 업그레이드 : 2026년 12버전 설정프로그램 추가**

안경마우스2-스위치 5종 택1(바이트,손가락,발,압력,필로우) [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제 품 개 요 상지의 절단, 마비, 관절 등의 장애가 있어 손으로 일반 마우스 사용이 어려운 장애인이 블루투스 연결방식으로 얼굴에 착용하여 사용하는 안경모양의 무선 마우스

개 인 부 담 금 일반 180,000원 / 기초수급대상·차상위계층 90,000원

제 조 원 Ennopro Group Limited / 중국 **품 질 보 증 기 간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
(04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개 인 부 담 금 제 좌 번 호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- <안경마우스 2 본체>
- 크기 : 본체 16 * 14.5 * 5cm
- 무게 : 본체 47.2g
- 재질 : 플라스틱
- 연결방식 : Bluetooth
- 스위치 택 1

- 호환되는 통신기기가 다양함
- ※ 블루투스 방식으로 연결이 가능한 PC(노트북), 태블릿(Android, Windows), 핸드폰(Android, IOS 130이상)

✓ 활용방안(기대효과)

- 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있으며 안경마우스를 통한 컴퓨터, 인터넷 등 정보접근의 활용이 어려운 장애인에게 정보접근 기회 제공

✓ 구성품목

- <바이트 스위치>
- 마우스 본체
- 충전케이블
- 고정걸이 2개
- 스위치 1개
- <손가락 스위치>
- 마우스 본체
- 충전케이블
- 고정걸이 2개
- 스위치 1개
- <발 스위치>
- 마우스 본체
- 충전케이블
- 고정걸이 2개
- 스위치 1개
- <압력 스위치>
- 마우스 본체
- 충전케이블
- 고정걸이 2개
- 스위치 1개
- <필로우 스위치>
- 마우스 본체
- 충전케이블
- 고정걸이 2개
- 스위치 1개

✓ 사용가능대상

- 지체장애, 뇌병변장애
- 해당기기를 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북) 태블릿, 핸드폰을 보유하고 사용이 가능해야함. (연결에 필요한 블루투스 동글 별도 구매)

✓ 사용방법

- ① 안경 마우스와 스위치 연결하기
 - ② 안경 마우스의 전원 켜기
 - ③ 사용할 통신기기의 블루투스 설정 켜기
 - ④ 통신기기와 안경마우스를 블루투스로 연결하기
 - ⑤ 마우스 감도설정 확인
 - ⑥ 마우스 사용하기
- 자석 근처에 두지 않기
 - 전용 충전기를 사용하기
 - 클릭버튼을 심하게 물지 않기
 - 손을 사용할 수 없는 사용자는 작동에 도움을 받아야함

✓ 주요기능

- 머리의 움직임으로 마우스 커서 이동
- 블루투스 방식으로 다양한 전자기기(핸드폰, 태블릿, 노트북, PC)에 사용가능
- 배터리 완충시 15시간 정도 사용가능

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 제품특징

- 배우기 쉽고 사용이 간편함
- 상지 장애가 있어 일반 마우스 사용이 어려운 장애인 사용가능
- 프로그램 없이 연결 후 즉시 사용가능
- 마우스 감도설정 가능

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2021년 1월 13일

✓ 최근 업그레이드 : 2021년 3월 10일

안경마우스2-터치, 센서 스위치 택1 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제 품 개 요 상지의 절단, 마비, 관절 등의 장애가 있어 손으로 일반 마우스 사용이 어려운 장애인이 블루투스 연결방식으로 얼굴에 착용하여 사용하는 안경모양의 무선 마우스

※ 사용자의 장애 상태에 따라 스위치 1개 선택

개 인 부 담 금 일반 190,000원 / 기초수급대상·차상위계층 95,000원

제 조 원 Ennopro Group Limited / 중국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철 (04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- 〈터치〉
 - 크기 : 본체 16 * 14.5 * 5cm
스위치 : 지름 9.6cm / 2.5cm
 - 무게 : 본체 47.2g / 스위치 125g
 - 재질 : 플라스틱
 - 연결방식 : Bluetooth
- 〈센서〉
 - 크기 : 본체 16 * 14.5 * 5cm
스위치 : 지름 9.6cm
 - 무게 : 본체 47.2g / 스위치 125g
 - 재질 : 플라스틱
 - 연결방식 : Bluetooth

✓ 구성품목

- 〈터치〉
 - 본체 충전케이블고정걸이 2개
 - 터치 스위치 1개 연결 보조 스위치 1개
- 〈센서〉
 - 크기 : 본체 16 * 14.5 * 5cm
스위치 : 지름 9.6cm
 - 무게 : 본체 47.2g / 스위치 125g
 - 재질 : 플라스틱
 - 연결방식 : Bluetooth

✓ 주요기능

- 〈공통기능〉
 - 머리의 움직임으로 마우스 커서 이동
 - 블루투스 방식으로 다양한 전자기기(핸드폰, 태블릿, 노트북, PC)에 사용가능
 - 배터리 완충 시 15시간 정도 사용가능
 - 스위치 옵션설정을 통한 청각적 피드백, 시각적 피드백 선택 가능
 - 보조스위치를 연결한 다양한 활용 가능

✓ 제품특징

- 배우기 쉽고 사용이 간편함
- 상지 장애가 있어 일반 마우스 사용이 어려운 장애인 사용가능
- 프로그램 없이 연결 후 즉시 사용가능
- 마우스 감도설정 가능
- 호환되는 통신기기가 다양함
 - ※ 블루투스 방식으로 연결이 가능한 PC(노트북), 태블릿(Android, Windows), 핸드폰(Android, IOS 13이상)

✓ 활용방안(기대효과)

- 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있으며 안경마우스를 통한 컴퓨터, 인터넷 등 정보접근의 활용이 어려운 장애인에게 정보접근 기회 제공

✓ 사용가능대상

- 지체장애, 뇌병변장애
- 해당기기를 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북) 태블릿, 핸드폰을 보유하고 사용이 가능해야함.(블루투스 동글 별도 구매)

✓ 사용방법

- ① 안경 마우스와 스위치 연결하기
- ② 안경 마우스와 스위치의 전원 켜기
- ③ 사용할 통신기기의 블루투스 설정 켜기
- ④ 통신기기와 안경마우스를 블루투스로 연결하기
- ⑤ 마우스 감도설정 확인
- ⑥ 마우스 사용하기

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2021년 1월 13일

✓ 최근 업그레이드 : 2021년 3월 10일

안경마우스2-호흡스위치 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제품개요 상지의 절단, 마비, 관절 등의 장애가 있어 손으로 일반 마우스 사용이 어려운 장애인이 블루투스 연결방식으로 얼굴에 착용하여 사용하는 안경모양의 무선 마우스

개인부담금 일반 210,000원 / 기초수급대상·차상위계층 105,000원

제조원 Ennopro Group Limited / 중국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납품방법 택배 **납품기간** 14일

납품자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
(04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- 크기 : 본체 16 * 14.5 * 5cm
스위치 : 17 * 2 * 1cm
- 무게 : 본체 47.2g
스위치 11g
- 재질 : 플라스틱
- 연결방식 : Bluetooth

✓ 구성품목

- 본체
- 충전케이블
- 고정걸이 2개
- 호흡 스위치 1개

✓ 주요기능

- 머리의 움직임으로 마우스 커서 이동
- 스위치를 입김으로 불어서 클릭
- 블루투스 방식으로 다양한 전자기기(핸드폰, 태블릿, 노트북, PC)에 사용가능
- 배터리 완충 시 15시간 정도 사용가능

✓ 제품특징

- 배우기 쉽고 사용이 간편함
- 상지 장애가 있어 일반 마우스 사용이 어려운 장애인 사용가능
- 프로그램 없이 연결 후 즉시 사용가능
- 마우스 감도설정 가능
- 호환되는 통신기기가 다양함
- ※ 블루투스 방식으로 연결이 가능한 PC(노트북), 태블릿 (Android, Windows), 핸드폰(Android, IOS 130이상)

✓ 활용방안(기대효과)

- 초보 사용자도 쉽게 사용할 수 있으며 안경마우스를 통한 컴퓨터, 인터넷 등 정보접근의 활용이 어려운 장애인에게 정보접근 기회 제공

✓ 사용가능대상

- 지체장애, 뇌병변장애, 정신장애, 지적장애, 자폐성장애, 저시력장애
- 해당기기를 연결, 구동할 수 있는 PC(노트북)를 보유하고 사용이 가능해야함

✓ 사용방법

- ① 안경 마우스와 스위치 연결하기
- ② 안경 마우스의 전원 켜기
- ③ 사용할 통신기기의 블루투스 설정 켜기
- ④ 통신기기와 안경마우스를 블루투스로 연결하기
- ⑤ 마우스 감도설정 확인
- ⑥ 마우스 사용하기

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ **최초출시일 : 2021년 1월 13일**

✓ **최근 업그레이드 : 2021년 3월 10일**

안구마우스 (PCEye 5) [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제품개요 눈동자를 움직여 마우스커서를 움직이고, 눈 응시 기능을 이용하여 눈동자의 움직임을 멈추면 마우스클릭기능이 활성화 되어 상지기능제한으로 일반 마우스나 키보드를 사용하기 어려운 장애인이 눈의 움직임으로 컴퓨터를 사용합니다

개인부담금 일반 1,100,000원 / 기초수급대상·차상위계층 325,000원

제조원 tobiidynavox / 스웨덴 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납품방법 방문 설치 **납품기간** 30일

납품자 월비 / 담당자 : 김준혁
(06176) 서울특별시 강동구 천호대로 182길 12, 201호(둔촌동, 사인하우스)
Tel : 010-8258-7807 / FAX : 02-6455-1258 / www.willbe.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 013102-01-009626 예금주명 : 김준혁(월비)

✔ 제품사양

- 마우스본체 크기 : 285 x 15 x 8 mm
- 무게 : 약 93 g
- 연결 유형 : USB-C type
- 눈추적방법 : 어두운 동공/ 밝은 동공, 단일 또는 양눈 추적
- 소비전력 : 약 2.2W
- 작동거리 : 50 ~ 95 cm

✔ 구성품목

- 안구마우스 본체 1대 / USB 연장케이블 1개
- Mounting Plate 1개 / Carrying case 1개
- 한글 사용설명서 및 보증서 1부 / USB-A to USB-C 어댑터 1개

✔ 주요기능

- 왼쪽/오른 쪽 마우스 기능 및 드래그, 스크롤 등 일반마우스 기능 사용
- 전용화상키보드 사용
- 업데이트 기능 제공
- 마우스클릭을 위한 외부 스위치 사용 가능(별도의 인터페필요)
- 최대 27인치 화면에서 사용 가능

✔ 제품특징

- 눈 응시 에 대한 시간을 조절할 수 있음
- 밝은 조명에서도 사용이 가능하여 외부환경에서도 사용이 가능
- 자석으로 고정 되어 탈부착이 가능
- Carrying Case를 제공하여 이동 및 보관이 가능

✔ 활용방안(기대효과)

- 상지를 사용하지 못하여 컴퓨터기기 활용이 어려운 분들에게 정보접근성을 향상 시킬 수 있습니다.

✔ 사용가능대상

- 지체, 뇌병변, 척수손상 등 상지 장애로 일반 마우스나 키보드 사용에 어려움이 있는 장애인.
- 특히 루게릭, 근이영양증 등 근위축과 근쇠약으로 인하여 근육 기능이 상실 되어 상지를 움직이지 못하더라도 눈동자 움직임이 가능한 장애인

✔ 사용방법

- TD Control을 실행합니다
- 캘리브레이션 메뉴를 실행하여 내 눈의 위치와 안구마우스의 위치를 확인 또는 조정 한 후 위치 보정을 실행합니다
- 눈을 움직이면 트레이서(화면상 동그란 원)가 내 눈의 움직임대로 움직입니다
- 실행하고자 하는 아이콘 위치로 눈을 움직여 트레이서를 이동한 후 눈움직임을 멈추면 인터랙션 마우스 동작 그림이 있는 메뉴가 활성화 됩니다
- 인터랙션안에 있는 커서의 위치가 실행하고자 하는 곳에 정확히 놓여 있다면, 마우스더블클릭이 있는 버튼 쪽으로 눈동자를 움직이고 멈추면 더블클릭이 실행됩니다
- 만일 커서위치가 원활하지 않다면 위치 조절 버튼 쪽으로 눈을 움직이고 멈추면 커서가 있는 부분이 확대되며 커서를 이동 할 수 있습니다.
- 인터랙션 메뉴에는 더블클릭 외에도 왼쪽 원클릭, 오른쪽 클릭, 드래그, 스크롤, 화상키보드 기능의 버튼이 있습니다.

✔ 최소PC요구사항

- CPU : 2,0GHz 이상, 6세대 Intel Core(i5/i7-6xxx) 이상 또는 동급 AMD 64비트 프로세서
- Memory : 8GB 이상
- Hard Disk : 450 MB 이상
- Window 10(64-bit) 또는 Window 11

✔ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 임의 개조, 분리, 수리 금지
- 컴퓨터 및 모니터는 제공되지 않습니다.
- 모니터나 노트북 하단이 안구마우스를 붙일 수 있는 공간이 있어야 합니다.
- 서피스프로와 같이 유리로 되어 있는 부분에는 장착할 수 없습니다.

✔ 최초출시일 : 2021년 11월

안구마우스거치대세트 (PCEye 5 mounting set) [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제품개요 눈동자를 움직여 마우스커서를 움직이고, 눈 응시 기능을 이용하여 눈동자의 움직임을 멈추면 마우스클릭기능이 활성화 되어 상지기능제한으로 일반 마우스 나 키보드를 사용하기 어려운 장애인이 눈의 움직임으로 컴퓨터를 사용합니다
각도조절 및 높낮이 조절가능한 거치대를 제공하여 누운자세에서도 사용할 수 있습니다

개인부담금 일반 1,426,000원 / 기초수급대상·차상위계층 406,500원

제조원 안구마우스(tobii dynavox/스웨덴), 거치대(엔산마운트) **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납품방법 방문 설치

납품기간 30일

납품자 월비 / 담당자 : 김준혁
(06176) 서울특별시 강동구 천호대로 182길 12, 201호(둔촌동, 사인하우스)
Tel : 010-8258-7807 / FAX : 02-6455-1258 / www.willbe.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 013102-01-009626 예금주명 : 김준혁(월비)

✓ 제품사양

- 마우스본체
 - 크기 : 285 x 15 x 8 mm,
 - 무게 : 약 93 g
 - 연결 유형 : USB-C type
 - 눈추적방법 : 어두운 동공/밝은 동공, 단일 또는 양눈 추적
 - 소비전력 : 약 2.2W
 - 작동거리 : 50 ~ 95 cm
- 거치대
 - 제품높이 : 900~1565mm(베사판까지)
 - 적용화면크기 : 15인치 ~ 32인치
 - 수용무게 : 8Kg 이하
 - 노트폭양 : 11.6인치 ~ 17.3인치
 - 베사규격 : 75x75, 100x100

✓ 구성품목

- 안구마우스
 - PCEye 5본체 1대
 - USB 연장케이블 1개
 - Mounting Plate 1개
 - Carrying case 1개
 - 한글 사용설명서 및 보증서 1부
 - USB-A to USB-C 어댑터 1개
- 거치대
 - HC-13L 1개
 - HC-노트북암 1개
 - HC-마우스트레이암 1개
 - EM2022 또는 EM1050 1개

✓ 주요기능

- 왼쪽/오른쪽 마우스기능 및 드래그, 스크롤 등 일반마우스기능 사용
- 전용화상키보드 사용
- 업데이트 기능 제공
- 마우스클릭을 위한 외부 스위치 사용 가능(별도의 인터페이스 필요)
- 최대 27인치 화면에서 사용 가능

✓ 제품특징

- 눈 응시 에 대한 시간을 조절할 수 있음
- 밝은 조명에서도 사용이 가능하여 외부환경에서도 사용이 가능
- 자석으로 고정 되어 탈부착이 가능
- Carrying Case를 제공하여 이동 및 보관이 가능
- 높낮이 및 각도 조절을 위한 노트북암과 마우스패드암이 장착된 거치대 제공

✓ 활용방안(기대효과)

- 상지를 사용하지 못하여 컴퓨터기기 활용이 어려운 분들에게 정보 접근성을 향상 시킬 수 있습니다.

✓ 사용가능대상

- 지체, 뇌병변, 척수손상 등 상지 장애로 일반 마우스나 키보드 사용에 어려움이 있는 장애인.
- 특히 루게릭, 근이영양증 등 근위축과 근쇠약으로 인하여 근육기능이 상실 되어 상지를 움직이지 못하더라도 눈동자 움직임이 가능한 장애인

✓ 사용방법

- TD Control을 실행합니다
- 캘리브레이션 메뉴를 실행하여 내 눈의 위치와 안구마우스의 위치를 확인 또는 조정 한 후 위치 보정을 실행합니다
- 눈을 움직이면 트레이서(화면상 동그런 원)가 내 눈의 움직임대로 움직입니다
- 실행하고자 하는 아이콘 위치로 눈을 움직여 트레이서를 이동한 후 눈움직임을 멈추면 인터랙션에는 마우스 동작 그림이 있는 메뉴가 활성화 됩니다
- 인터랙션안에 있는 커서의 위치가 실행하고자 하는 곳에 정확히 놓여 있다면, 마우스더블클릭이 있는 버튼 쪽으로 눈동자를 움직이고 멈추면 더블클릭이 실행됩니다
- 만일 커서위치가 원활하지 않다면 위치 조절 버튼 쪽으로 눈을 움직이고 멈추면 커서가 있는 부분이 확대되며 커서를 이동 할 수 있습니다.
- 인터랙션 메뉴에는 더블클릭 외에도 왼쪽 원클릭, 오른 쪽 클릭, 드래그, 스크롤, 화상키보드 기능의 버튼이 있습니다.

✓ 최소PC요구사항

- CPU : 2.0GHz 이상, 6세대 Intel Core(i5/i7-6xxx) 이상 또는 동급 AMD 64비트 프로세서
- Memory : 8GB 이상
- Hard Disk : 450 MB 이상
- Window 10(64-bit) 또는 Window 11

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 임의 개조, 분리, 수리 금지
- 컴퓨터 및 모니터는 제공하지 않습니다.
- 모니터나 노트북 하단이 안구마우스를 붙일 수 있는 공간이 있어야 합니다.
- 서피스프로와 같이 유리로 되어 있는 부분에는 장착할 수 없습니다.

✓ 최초출시일 : 2021년 11월

엔에이블러조이스틱 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제 품 개 요 장애로 인해 상지의 움직임이 불편해 일반 마우스를 사용하기 어려운 분들에게 적합한 조이스틱 마우스입니다.

개 인 부 담 금 일반 114,000원 / 기초수급대상·차상위계층 57,000원

제 조 원 프리토리안 사 / 영국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✔ 제품사양

- 본체 사양
 - 본체 : 230 x 128 x 72(30)mm
 - 무게 : 820g
 - 케이블 : USB (USB포트사용)

✔ 구성품목

- 본체 1대 (기본 바 장착) / 조이스틱 교체 바 : 원형 바, T형 바 / 사용 설명서 1 부 / 버튼보조고무 2개

✔ 주요기능

- 엔에이블러 조이스틱은 조이스틱을 통해 PC의 마우스 포인터를 컨트롤 합니다.
- 왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 더블 클릭, 드래그 버튼이 장착되어 있으며 가로/세로 고정
- 버튼은 인터넷 페이지/문서 등에서 스크롤 기능으로 사용이 가능합니다.
- 강직 등으로 정확한 동작이 어려운 분들을 위해 가로 세로 고정 버튼이 장착 되어 있으며, 마우스 포인터의 속도 조절 기능도 장착 되어 있습니다.
- 중증 사용자를 위한 클릭 대체 기능으로 별도옵션인 스위치의 연결이 가능한 스위치 연결 잭이 장착 되어 있습니다. (왼쪽 클릭 / 오른쪽 클릭 등)

✔ 제품특징

- 사용 환경에 따라 기본 바, 구형 바, T형 바 등의 선택 사용이 가능합니다.
- 왼쪽 클릭 / 오른쪽 클릭 / 더블클릭 / 드래그 / 가로세로고정 (스크롤 기능) / 포인터 속도 조절 버튼/ 왼쪽 오른쪽 클릭 스위치 연결 잭 장착
- 젠더 연결을 통해 안드로이드 및 IOS 기기에서도 사용이 가능합니다.
- 홀 방식의 버튼을 사용하기 어려운 분들을 위한 버튼보조고무 2개를 함께 보급해 드립니다.

✔ 활용방안(기대효과)

- 지체/뇌병변 장애인 중 팔의 움직임이 원활하지 못해 일반 마우스 사용이 어려운 분들에게 PC의 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.

✔ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인 (팔과 손가락의 움직임이 원활하지 못한 대상 또는 팔 대신 발 등을 이용 마우스를 사용하는 대상)

✔ 사용방법

- 엔에이블러 조이스틱을 사용자의 환경에 따라 설치합니다.
- 사용자의 PC에 USB케이블을 연결합니다.
- 운영체제에 따라 자동으로 드라이버가 설치됩니다.
- 조이스틱을 통해 마우스 포인터를 컨트롤합니다.
- 사용자 환경에 따라 마우스 포인터의 스피드를 조절합니다. (4단계 조절 가능)

✔ 최소PC요구사항

- 윈도우 OS, 맥 OS, 안드로이드/IOS (USB-C 젠더 필요) 사용 가능

✔ 사용 시 유의사항

- 사용자의 환경에 따라 하단의 고정너트를 통해 테이블 등에 고정 사용이 가능합니다.
- 별도의 프로그램 설치가 필요 없으며 PC에 USB 연결 시 자동으로 드라이버가 설치됩니다. (최초 설치 시에는 자동 드라이버가 설치되는 시간이 소요됩니다.)

✔ 최초출시일 : 2012년 2월

✔ 최근 업그레이드 : 버튼 보조고무 추가지원

엔에이블러 트랙볼 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제품개요 장애로 인해 상지의 움직임이 불편 해 일반 마우스를 사용하기 어려운 분들에게 적합한 트랙볼 마우스입니다.

개인부담금 일반 104,000원 / 기초수급대상·차상위계층 52,000원

제조원 프리토리안 사 / 영국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배 배송

납품기간 30일

납품자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✓ 제품사양

- 본체사양
 - 본체 : 230 x 128 x 72(30)mm
 - 무게 : 1120g
 - 케이블 : USB (USB포트사용)

✓ 구성품목

- 본체 1대 / 사용설명서 1부 / 버튼보조고무 2개

✓ 주요기능

- 엔에이블러 트랙볼은 트랙볼을 통해 PC의 마우스 포인터를 컨트롤 합니다.
- 왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 더블 클릭, 드래그 버튼이 장착되어 있으며 가로세로 고정 버튼은 인터넷 페이지/ 문서 등에서 스크롤 기능으로 사용이 가능합니다.
- 강직 등으로 정확한 동작이 어려운 분들을 위해 가로 세로 고정 버튼이 장착 되어 있으며, 마우스 포인터의 속도 조절 기능도 장착 되어 있습니다.
- 중증 사용자를 위한 클릭 대체 기능으로 별도옵션인 스위치의 연결이 가능한 스위치 연결 잭이 장착 되어 있습니다. (왼쪽 클릭 / 오른쪽 클릭 등 세팅 가능)

✓ 제품특징

- 왼쪽 클릭/오른쪽 클릭/ 더블클릭/ 드래그/ 가로세로고정(스크롤 기능) / 포인터 속도 조절 버튼/ 왼쪽 오른쪽 클릭 스위치 연결 잭 장착
- 젠더 연결을 통해 안드로이드 및 IOS 기기에서도 사용이 가능합니다.
- 홀 방식의 버튼을 사용하기 어려운 분들을 위한 버튼보조고무 2개를 함께 보급해 드립니다.

✓ 활용방안(기대효과)

- 지체/뇌병변 장애인 중 팔의 움직임이 원활하지 못해 일반 마우스 사용이 어려운 분들에게 PC의 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.

✓ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인 (팔과 손가락의 움직임이 원활하지 못한 대상 또는 팔 대신 발 등을 이용 마우스를 사용하는 대상)

✓ 사용방법

- 엔에이블러 트랙볼을 사용자의 환경에 따라 설치합니다.
- 사용자의 PC에 USB케이블을 연결합니다.
- 운영체제에 따라 자동으로 드라이브가 설치됩니다.
- 트랙볼을 통해 마우스 포인터를 컨트롤합니다.
- 사용자 환경에 따라 마우스 포인터의 스피드를 조절합니다.

✓ 최소PC요구사항

- 윈도우 OS, 맥 OS, 안드로이드/IOS (USB-C 젠더 필요) 사용 가능

✓ 사용 시 유의사항

- 사용자의 환경에 따라 하단의 고정너트를 통해 테이블 등에 고정 사용이 가능합니다.
- 별도의 프로그램 설치가 필요 없으며 PC에 USB 연결 시 자동으로 드라이브가 설치됩니다.(최초 설치 시에는 자동 드라이브가 설치되는 시간이 소요됩니다.)

✓ 최초출시일 : 2012년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 버튼 보조고무 추가지원

친 플러스 마우스 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제 품 개 요 지체/뇌병변 장애인, 루게릭/근육병 장애인 중 상하지의 움직임이 제한적이며 안정적인 머리 움직임과 호츠클릭이 어려운 분들에게 적합 합니다.

개 인 부 담 금 일반 280,000원 / 기초수급대상·차상위계층 140,000원

제 조 원 BJLIVE / 스페인

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개 인 부 담 금 계 좌 번 호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✔ 제품사양

- 본체 : 13 x 12 x 5 mm, 무게 298g
- 마운트 : 암길이 530mm, 클램프 길이 96mm, 무게 1461g

✔ 구성품목

- 본체 1대 / 거치대(마운트) 1개 / USB-C 연결용 젠더 / 사용설명서 1부

✔ 주요기능

- 마운트를 통해 사용자 위치에 맞게 조절 합니다.
- 턱을 사용한 마우스 포인터의 이동과 양쪽의 스위치를 통해 클릭 기능을 사용합니다.
- 세팅 프로그램을 통해 포인터 속도조절, 클릭 인식시간, 드래그 클릭 인식시간, 사용자 환경에 따라 회전각도 조절, 역전 기능, 4방향, 8방향, 자유방향 3가지 움직임 조절, 비프음 설정이 가능합니다.
- 스위치 클릭이 어려운 경우, 별도 소프트웨어 클릭 사용 가능합니다. (별도 클릭 프로그램 사용)
- 화상키보드를 사용해 일반 키보드 기능을 사용 할수 있습니다. (원도우 화상키보드 사용)

✔ 제품특징

- 친플러스 마우스 중앙의 홈에 턱을 기대고 사용 해 안정적인 머리의 움직임이 어려운 분들도 사용이 가능 합니다.
- 사용자의 숙련도에 따라 4방향 움직임, 8방향 움직임 자유 움직임 선택 사용이 가능 합니다.
- 양쪽 스위치 클릭을 통해 왼쪽클릭 왼쪽 더블클릭 오른쪽클릭 드래그 등의 사용 가능 합니다.
- 직관적인 디자인으로 사용이 편리 합니다.

✔ 활용방안(기대효과)

- 장애로 인해 상지 및 하지를 사용하지 못해 PC 등을 활용하지 못하는 분들에게 PC의 접근성 및 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.

✔ 사용가능대상

- 지체, 뇌병변 장애인, 루게릭/근육병 장애인 중 상하지의 움직임이 제한적이며 안정적인 머리 움직임과 호츠클릭이 어려운 분들에게 적합 합니다.

✔ 사용방법

- 본체와 마운트를 연결 후 마운트를 조절해 사용자가 사용하기 편한 위치로 세팅합니다. 본체의 USB를 사용자 PC USB 포트에 연결 합니다.
- 설정 프로그램을 PC에 설치합니다. (www.carelifemall.co.kr 자료실 17번 다운로드)
- 사용 환경에 따라 설정 프로그램의 설정 값을 조절 합니다.
- 중앙 홈에 턱을 대고 마우스 포인터를 이동 합니다.
- 왼쪽 스위치를 통해 왼쪽 클릭 왼쪽 더블클릭 드래그 등의 기능을 사용 합니다.
- 오른쪽 스위치를 통해 오른쪽 클릭 기능을 사용 합니다.

✔ 최소PC요구사항

- 윈도우 OS, 맥 OS, 리눅스 OS, 사용 가능 안드로이드/IOS 사용 가능(USB-C 연결용 젠더 필요)
- 한글 화상키보드 운영체제용, 윈도우 용 클릭키 사용 가능

✔ 사용 시 유의사항

- 사용자의 환경에 따라 마운트 위치 설정 후 PC에 설치한 설정 프로그램을 통해 친플러스 마우스의 회전 각도를 설정해 줍니다.
- 마운트의 클램프 폭이 45mm입니다. 최대 45mm 두께의 판에 고정 가능합니다.
- 사용 시 고정 되는 테이블 및 책상 등의 두께를 확인 후 설치합니다.

✔ 최초출시일 : 2019년 1월

퀘스터 조이스틱 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제 품 개 요 장애로 인해 상지의 움직임이 불편해 일반 마우스를 사용하기 어려운 분들에게 적합한 조이스틱 마우스입니다. (마우스 모드, WASD 모드, 방향키 모드 선택 사용)

개 인 부 담 금 일반 136,000원 / 기초수급대상·차상위계층 68,000원

제 조 원 프리토리안 사 / 영국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✔ 제품사양

- 본체 사양
 - 본체 : 180 x 102 x 112mm (팔받침 높이 35mm)
 - 무게 : 445g
 - 케이블 : USB (USB포트사용)

✔ 구성품목

- 본체 1대 (기본 바 장착) / 조이스틱 교체 바 : 원형 바, T형 바 / 사용설명서 1부 / 버튼보조고무 2개

✔ 주요기능

- 퀘스터 조이스틱은 조이스틱을 통해 PC의 마우스 포인터를 컨트롤 합니다.
- 모드 변환 버튼을 통해 마우스 모드, WASD 모드, 방향 키 모드 선택 사용이 가능 해 PC용 게임 및 스마트폰 게임 시 모드 별 선택 사용이 가능 합니다.
- 왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 및 중증 사용자를 위한 클릭 대체 기능으로 별도 옵션인 스위치의 연결이 가능한 스위치 연결 잭이 2개 장착 되어 있습니다.
- 학습모드에서 4단계 마우스 포인터의 속도 조절이 가능합니다.
- 0.5뉴턴의 가벼운 힘으로 조이스틱을 컨트롤 할수 있습니다.

✔ 제품특징

- PC 및 스마트폰 게임 시 마우스모드, WASD모드, 방향키모드 3가지 선택 사용이 가능합니다.
- 사용 환경에 따라 기본 바, 구형 바, T형 바 등의 선택 사용이 가능합니다.
- 왼쪽 클릭 / 오른쪽 클릭 / 학습모드에서 4단계 마우스 포인터 속도 조절 기능 합니다.
- 홀 방식의 버튼을 사용하기 어려운 분들을 위한 버튼보조고무 2개를 함께 보급 해 드립니다.

✔ 활용방안(기대효과)

- 지체/뇌병변 장애인 중 팔의 움직임이 원활하지 못해 일반 마우스 사용이 어려운 분들에게 PC의 활용성을 높여 정보접근성을 향상 시켜줍니다.

✔ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인 (팔과 손가락의 움직임이 원활하지 못한 대상 또는 팔 대신 발 등을 이용
- 마우스를 사용하는 대상) 중 PC사용 및 PC용 게임을 사용 하는 대상자

✔ 사용방법

- 퀘스터 조이스틱을 사용자의 환경에 따라 설치합니다.
- 사용자의 PC에 USB 선을 연결 합니다.
- 운영체제에 따라 자동으로 드라이버가 설치됩니다.
- 조이스틱을 통해 마우스 포인터를 컨트롤 합니다.
- PC 게임 시 WASD 모드 또는 방향키 모드를 선택 해 사용 합니다.
- 사용자 환경에 따라 마우스 포인터 스피드를 조절 합니다. (4단계)

✔ 최소PC요구사항

- 윈도우 OS, 맥 OS, 안드로이드/IOS (USB-C 젠더 필요) 사용 가능

✔ 사용 시 유의사항

- 사용자의 환경에 따라 하단의 고정너트를 통해 테이블 등에 고정 사용이 가능합니다.
- 별도의 프로그램 설치가 필요 없으며 PC에 USB 연결 시 자동으로 드라이버가 설치됩니다.(최초 설치 시에는 자동 드라이버가 설치되는 시간이 소요됩니다.)

✔ 최초출시일 : 2024년 4월

큐하조노X 마우스 [지체/뇌병변장애유형 | 특수마우스]



제품개요 지체/뇌병변 장애인, 루게릭/근육병 장애 등 중증장애로 상하지를 사용하지 못해 PC와 태블릿, 스마트 폰 등을 활용 하지 못하는 분들에게 적합한 블루투스 마우스입니다.

개인부담금 일반 680,000원 / 기초수급대상·차상위계층 220,000원

제 조 원 Quha oy / 핀란드

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✔ 제품사양

- 본체 사양
 - 본체: 44x25x13mm / 12g
 - 센토: 조절 길이 220mm / 47g(꼭 조절 가능)
 - 큐하조노X 장착 시 중량 58g
 - 사용가능거리: 약 10m
 - 배터리: 90mAh
 - 사용시간: 약 18시간 (충전시간 2시간)

✔ 구성품목

- 본체 1대, 센토 1대, 충전용 거치대 1대, 충전케이블, 이어클립, 이어팁 3개, 안경클립, 큐하듀웰2 원도우용 클릭소프트웨어 USB (설치용 시리얼 포함) / 사용설명서 1부

✔ 주요기능

- 윈도우, 맥OS, 크롬OS, 안드로이드, 아이패드OS, IOS, 리눅스에서 사용이 가능합니다. (최대 4대의 장치와 멀티 페어링 가능)
- 픽셀 단위의 정확도를 가지고 있어 세밀한 작업이 가능합니다.
- 전용 설정 소프트웨어를 통해 마우스 포인터의 속도 및 떨림 필터링과 마우스 성능을 설정할 수 있습니다. (소프트웨어는 윈도우 PC 와 안드로이드 운영체제 기기에 설치 가능)
- 제스처 인식을 통해 마우스 포인터의 일시 정지 및 스크롤, 마우스 포인터 중심 맞추기, 멀티 페어링 기기 전환 기능을 사용할 수 있습니다.
- 센토를 통한 호흡클릭 기능과 큐하듀웰2 클릭 전용 소프트웨어를 동시 또는 선택 사용으로 마우스의 모든 클릭 기능을 사용할 수 있습니다. (윈도우 PC 사용 기준)

✔ 제품특징

- 큐하조노X 마우스는 작고 슬림한 디자인의 자이로스코프 블루투스 마우스로 블루투스를 지원 하는 기기에 사용이 가능합니다.
- USB C 타입 전용 충전독을 지원 해 쉽게 충전 사용이 가능 합니다. (2시간 충전 약 18시간 사용)
- 자석 부착 방식을 사용 해 쉽게 사용이 가능합니다.
- 센토를 통한 호흡클릭 및 큐하듀웰2를 통해 소프트웨어 클릭 기능을 선택 해 사용 하거나 동시에 사용이 가능합니다.
- 제스처 기능 탑재로 마우스 포인터의 정지 및 사용, 스크롤 기능, 멀티페어링 기기 전환 기능 등을 머리의 제스처 움직임으로 컨트롤할 수 있습니다.

✔ 활용방안(기대효과)

- 장애로 인해 상지 하지를 사용하지 못해 PC 등을 활용하지 못하는 분들에게 PC 및 모바일 기기의 접근성 및 활용성을 높여 정보 접근성을 향상 시켜줍니다.

✔ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인(상·하지 마비인 경우), 루게릭/근육병 (희귀병으로 상·하지 마비인 경우) 장애인 중 머릿움직임이 가능 하고 PC 및 태블릿 스마트폰 등을 사용하기 원하는 분들에게 적합합니다.

✔ 사용방법

- 큐하조노X 마우스 본체를 충전용 거치대에 거치 후 충전케이블에 연결 해 충전을 합니다.
- 사용하는 PC에 큐하조노X 마우스 설정 소프트웨어를 설치 또는 사용하는 안드로이드 기기에 큐하조노X 마우스 설정 앱을 설치 합니다. / PC에는 큐하듀웰2(소프트웨어 클릭)를 설치 합니다.
- 큐하조노X 마우스 본체를 센토(호흡클릭 사용) 또는 이어클립, 안경클립(소프트웨어 클릭 사용)에 장착 합니다.
- 큐하조노X 마우스의 본체의 전원버튼을 눌러 전원을 키고 사용할 기기의 블루투스 연결 창을 열어 연결 합니다. (블루투스 연결은 최초 진행 후 추후에는 자동연결 가능)최대 4대 연결 가능
- 큐하조노X 마우스의 설정 소프트웨어(앱)를 실행 해 사용자에게 적합한 설정을 진행 합니다.
- 머리의 움직임으로 마우스 포인터를 컨트롤 하고 호흡 또는 소프트웨어를 통해 클릭을 진행 합니다. (제스처 모드 선택 사용 가능)

✔ 최소PC요구사항

- 윈도우 OS, 맥 OS, 안드로이드, IOS, 크롬OS 사용 가능
- 윈도우용 화상키보드 사용 가능

✔ 사용 시 유의사항

- 사용 할 PC에 블루투스 기능이 있는지 확인 합니다. (없을 시 블루투스 동글 장착 후 사용)
- 처음 사용 시 마우스 포인터가 흐르는 경우 제품을 평평한 바닥에 내려 놓고 마우스 포인터가 멈출 때 까지 기다립니다. (센서 초기화 진행)

✔ 최초출시일 : 2024년 4월

✔ 최근 업그레이드 : 큐하조노X 펌웨어 V1.4 /설치 프로그램 V1.42 지원

티피키보드 [지체/뇌병변장애유형 | 특수키보드]



제 품 개 요 지체/뇌병변장애로 인해 한손만 사용하는 장애인을 위한 한손사용자용 키보드입니다. 블루투스 연결 및 유선 연결과 휴대용 가방을 통해 휴대 및 이동이 간편하고 PC, IOS, 안드로이드 등 다양한 운영체제에서 사용이 가능합니다. 키보드 기능 외에 마우스 기능도 탑재 되어 있습니다.

개 인 부 담 금 일반 520,000원 / 기초수급대상·차상위계층 180,000원

제 조 원 Tipy Gmbh / 오스트리아

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개 인 부 담 금 계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✓ 제품사양

- 본체 사양
 - 본체: 170*270*17 mm
 - 무게: 558g
 - 사용가능거리: 약 10m
 - 배터리: 300mAh
 - 사용시간: 최대 약 100시간 (충전시간 4시간)

- 한글자판 타이핑 연습을 위한 타자 연습 페이지 지원
(www.carelifemall.co.kr 참조)

✓ 구성품목

- 본체 1대 / 휴대용가방 / 충전케이블 / 사용설명서 1부 / 여분의 자판 스티커 1부

✓ 활용방안(기대효과)

- 상지 장애 및 편마비 등으로 일반 키보드를 사용하기 어려워 PC 등을 활용하지 못하는 분들에게 PC 및 모바일 기기의 접근성 및 활용성을 높여 정보 접근성을 향상 시켜줍니다.

✓ 주요기능

- 키보드와 마우스 기능이 결합된 티피키보드는 한손으로 모든 키보드 입력이 가능하며 마우스 사용이 자유로워 사용자의 학업 및 업무 등의 활동을 더욱 빠르고 효율적으로 만들어 줍니다.
- 핸드패드의 방향 전환을 통해 한 대의 키보드를 가지고 사용자에 따라 왼손 / 오른손 선택 사용이 가능합니다.
- 장착 되어 있는 조이스틱을 통해 마우스 사용이 가능하며 좌우 클릭 스크롤 기능 사용이 가능합니다.
- 블루투스 연결 기능으로 Windows, Mac, ios, Android, Linux, 사용이 가능합니다.
- 블루투스 연결이 불가능 할 경우 동봉 되어 있는 USB C to A 케이블 통해 유선 사용도 가능합니다.
- 4시간 충전으로 약 100시간 사용이 가능합니다.
- 영문 버전 키보드에 한글 자판 스티커를 부착 해 드립니다. (여분 스티커 1부 포함)
- Windows 사용 시 한글 변환을 위한 키맵프로그램 or 윈도우 키보드 설정 변경 필요
- www.carelifemall.co.kr 자료실 2번 키맵프로그램 다운로드 및 설치
- 휴대용 가방 포함으로 보관 및 이동 사용이 편리 합니다.

✓ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인 중 한손만 사용 해 키보드를 사용하는 대상자

✓ 사용방법

- 티피키보드 본체와 충전케이블을 pc 또는 노트북의 USB 포트를 통해 충전 해 줍니다.
- 마우스 컨트롤러가 검지손가락 방향이 되도록 왼손, 오른손에 따라 핸드 패드를 선택해 장착해 줍니다.
- 사용할 PC 또는 태블릿 스마트 폰의 블루투스 설정을 열어 티피키보드를 연결해 줍니다.
- 블루투스 연결 시 화면에 표시 되는 숫자를 티피키보드로 타이핑 합니다.
- 한영 전환을 위한 방법을 사용하는 기기에 따라 확인 합니다.(매뉴얼 참고)
- 일반 자판 배열과 다르기 때문에 티피키보드 자판 배열 및 입력에 대해 연습을 진행 합니다. (www.carelifemall.co.kr 참조 한글 타자 연습 페이지 활용)
- 마우스 포인터 컨트롤 및 클릭 방법을 연습 합니다.

✓ 제품특징

- 블루투스 기반의 한손사용자용 키보드 휴대 및 이동이 편리 합니다. (휴대용 가방 포함)
- 한면은 오른손, 한면은 왼손 디자인으로 대상자에 따라 핸드패드의 방향 전환으로 오른손, 왼손 선택 사용이 가능합니다.
- 마우스 기능 탑재 (왼쪽 클릭, 오른쪽 클릭, 더블 클릭, 드래그 등 사용 가능)
- 약 4시간 충전으로 최대 100시간 사용 가능

✓ 최소PC요구사항

- 윈도우 OS, 맥 OS, 안드로이드, IOS, 사용 가능

✓ 사용 시 유의사항

- 사용 할 PC에 블루투스 기능이 있는지 확인 합니다. (없을 시 블루투스 dongle 장착 후 사용)
- 블루투스 기능이 없는 기기 사용 시 동봉되어 있는 C to A 케이블을 활용 해 연결 해 사용합니다.

✓ 최초출시일 : 2024년 10월

✓ 최근 업그레이드 : 2026.2 펌웨어 1.33V 지원

IOT 아코이 호출기 [지체/뇌병변장애유형 | 기타]



제품개요 지체/뇌병변/근육병 장애인이 도움이 필요한 경우 호출 버튼을 눌러 돌봄(보호자) 가족을 불러 자세변환 등 다양한 도움을 요청할 수 있습니다. 또한 긴급 상황의 경우 주변의 아코이호출기 버튼을 2초간 눌러 비상 호출을 할 수 있으며, 비상 발생 시 주변의 아코이호출기에 LED 적색 조명 점멸로 알려줍니다. 또한 웹서버 연동을 통해 보호자 스마트폰 앱에 언제, 어디서나 실시간으로 알려주는 스마트한 보조기기입니다.

개인부담금 일반 254,000원 / 기초수급대상·차상위계층 127,000원

제조원 (주)함께하는사람들 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배 배송

납품기간 30일

납품자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✔ 제품사양

- 아코이허브(AKOIHUB10)
 - DC5V, 크기 : 60mm(가로) * 60mm(세로) * 12mm(높이), 무게 : 35g
 - 통신 : WiFi 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth
- 아코이호출기(TRX-CALL)
 - DC5V, 크기 : 46mm(상부) * 57mm(하부) * 33mm(두께), 무게 : 70g
 - 통신 : Bluetooth, 무선호출
- 안드로이드 11이상, 앱, iOS 15이상 앱 연동

✔ 활용방안(기대효과)

- 도움이 필요한 경우 일반 호출로 돌봄(보호자) 가족을 호출
- 장애인이 위험 등 비상 시 비상 호출로 긴급 도움 요청
- 언제 어디서나 실시간으로 스마트폰 앱으로 호출을 알림(집안, 외출 등)
- 보호자가 호출기를 통해 지체/뇌병변/근육병 직장인, 학생 등 기상 알림 가능
- 지체/뇌병변/근육병 장애인을 위해 3가지 알림 기능(식사시간, 약먹을 시간 등)

✔ 구성품목

- 아코이허브(AKOIHUB10)
- 아코이호출기(TRX-CALL) 3개
- 안드로이드, iOS 스마트폰 앱
- 아답터(DC5V)
- 사용설명서 1부

✔ 사용가능대상

- 지체/뇌병변/근육병 장애인

✔ 주요기능

- 장애인이 아코이호출기 버튼을 눌러 보호자(관리자) 아코이호출기를 호출함
- 보호자 아코이호출기 및 스마트폰 앱에서 일반/비상 호출 및 알림 기능(LED 색상 점멸)
- 3가지 알림 기능(사용자 설정 : 식사시간, 약먹을 시간 등)

✔ 사용방법

- 제품 포장을 개봉한 후 설명서에 있는 제품 구성품목을 확인합니다.
- 사용설명서를 학습한 후 설명서에 있는 방법으로 제품을 설치합니다.
- 스마트폰 앱에 IoT 아코이호출기 앱을 설치한 후 사용설명서와 같이 제품 등록합니다.
- 장애인이 아코이호출기에서 호출 버튼을 눌러 돌봄(보호자) 가족을 호출합니다.
- 스마트폰 앱에서 3가지 알림 기능을 통해 아코이호출기에 알림 기능을 사용합니다.

✔ 제품특징

- 아코이호출기의 무선호출 기능
 - 일반 호출
 - 비상 호출
- 아코이호출기에서 호출 시 관리자(보호자) 호출기에 호출 알림(LED 조명, 부저)
- 스마트폰 앱에 언제 어디서나 호출 알림(소리, 진동)
- 스마트폰 앱 알림으로 3가지 알림을 LED 색상으로 알림(노랑, 보라, 하늘색)

✔ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✔ 사용 시 유의사항

- 제품에 어댑터 전원을 항상 공급하여야 합니다.
- 제품 위에 무거운 물건, 물컵 등을 올려놓지 말아야 합니다. (제품손상)
- 젖은 손, 젖은 도구를 이용하여 제품을 만지지 말아야 합니다.

✔ 최초출시일 : 2025년 4월

온기드림 2026 [지체/뇌병변장애유형 | 기타]



제 품 개 요 “내 목소리가 비서가 되다” 음성 AI 제어 보조기기

개인부담금 일반 140,000원 / 기초수급대상·차상위계층 70,000원

제 조 원 (주)키핀 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (재)파라다이스복지재단 / 담당자 : 김원철
(04560) 서울시 중구 퇴계로 299, 3층
Tel : 070-8630-9678 / FAX : 02-2273-2658 / www.paradise.or.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 010231-05-000650 예금주명 : (재)파라다이스복지재단

✓ 제품사양

- 스마트워치 : 주니젠GT3
- 크기 (L x W x H) mm : 44.7 x 37.7 x 10.5
- 시계줄 너비 : 22mm
- 배터리 : 290mAh (5-7일 사용)
- 무게 : 41.4g / 재질 : 아연 합금 / 색상 : 검정
- 앱 : 온기드림
- OS : 안드로이드 버전 8 이상, iOS 버전 16 이상*
- 기능 : 24시간 건강 모니터링, 인터넷 검색, 뉴스, 건강정보 안내, 폰찾기, 전화걸기, 시각, 날씨, 알람설정, 말벗대화, 긴급 SOS콜 등
- * iOS 앱의 경우 애플의 개인정보 보호 정책에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

✓ 구성품목

- 주니젠 GT3 본체 1개 / 자석식 걸쇠형 시계줄 1개
- 충전기 1개 / 사용설명서 1부 / 보증서 1부 / USB 연장선 1개

✓ 주요기능

1. 인터넷 검색
2. 건강정보 안내
3. 폰찾기
4. 전화걸기
5. 시각 정보
6. 날씨 정보
7. 알람설정
8. 말벗대화
9. 긴급 SOS콜 기능

✓ 제품특징

1. 간편한 대화 모드 활성화
2. 음성 명령 기반 조작
3. 인터넷 검색 및 뉴스 제공
4. 실시간 건강정보 모니터링
5. 휴대폰 찾기 및 전화 걸기 지원
6. 기본 정보 제공 기능
7. 말벗대화 기능
8. 지체, 뇌병변 장애인에 최적화된 사용자 인터페이스
9. 긴급 SOS 콜 기능
10. 연장된 사용 시간

✓ 활용방안(기대효과)

1. 자립 생활 지원
2. 안전성 강화
3. 정보 접근 시간 및 비용 절감
4. 사회적 참여 및 통합 촉진
5. 보건·복지 체계 강화

✓ 사용가능대상

- 지체/뇌병변 장애인

✓ 사용방법

- 최초 설정
 1. 앱 다운로드 : 앱 검색창에서 ‘온기드림’을 검색한 후 앱을 다운로드합니다.
 2. 앱 실행 : 앱을 실행하고, 요청되는 각종 권한을 허용합니다.
 3. 사용자 정보 입력 : 본인의 이름을 입력합니다. 선택 사항으로 보호자 연락처를 입력합니다.
 4. 주니젠GT3 전원 켜기 : 주니젠GT3 기기의 전원을 켭니다.
 5. 연결 메뉴 선택 : 앱 내 ‘연결’ 메뉴를 선택하여 기기와의 연결을 진행합니다.
 6. 연결 완료 확인 : “온기드림이 연결되었습니다.”라는 안내 멘트를 확인합니다.

· 사용 시

1. 대화 모드 활성화 : 주니젠GT3의 아래쪽 버튼을 두 번 클릭한 후, 화면 중앙의 버튼을 클릭합니다.
2. 안내 멘트 청취 : ‘온기드림’의 안내 멘트가 시작되고 마지막에 ‘땡땡’ 소리가 나올 때까지 기다립니다.
3. 명령어 발화 : ‘땡땡’ 소리 후에 발화합니다.
예) “지금 몇시지?”, “내일 날씨 알려줘”, “1시간 뒤 알람해줘” 등 원하는 명령어를 말합니다.
4. 답변 청취 : 사용자의 명령에 맞는 답변을 음성으로 안내합니다.
5. 반복 사용 : 대화 모드에서는 2번부터 4번의 과정이 반복됩니다. 3번에서 “그만하자”라고 말씀하시면 종료됩니다.

· 명령어

“오늘 뉴스 알려줘”, “내 폰 찾아줘”, “~에게 전화해줘”, “(오늘/내일/모레) 날씨 알려줘”, “지금 몇시야”, “건강정보 알려줘”, “~분(시)뒤에 알람 켜줘”, “그만하자”

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 전용 충전기 사용
- 저속 어댑터 사용 (150mA/DC5V)
- 생활 방수 지원
- 임의개조, 분리, 수리금지
- iOS 앱의 경우 애플의 개인정보 보호 정책에 따라 일부 기능이 제한될 수 있음

✓ 최초출시일 : 2025년 3월 13일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 23일



“

잘 들리지 않지만
스마트한 디지털 세상에선
즐거운 소리도 들을 수 있어요!

”



다기능의사소통시스템

- 스마트비주폰 올인원 128
- 씨토크이음070스마트 영상폰 콤보 129

대화용 장치

- 드림폰3 (DP-03-PL-R1) 130
- 마이토키GEO 131
- 마이토키NOTE 132
- 마이토키스마트 133
- 마이토키스마트PRO 134
- 보이스탭 135
- 보이스탭 PROSE 136
- 비주톡 WE 137
- 스마트톡킹 138
- 스마트톡킹펜 139
- 위드톡 140
- 위드톡 펜 141
- 키즈보이스스마트+ 142
- 키즈보이스윈도우 143
- 프록스토커(Proxtalker) 144
- 마스터 인지력 한글 145
- 메시지스톤 에듀 AI 146
- 보듬 인지력 한글 147
- 소리에음 AI 148
- 소리에음 AI 라이트 149
- 한뼘상황중심AAC 150
- 히어링스톤 AI 151
- 히어링스톤 AI 대화면 152

소리증폭기

- 골전도보청기 (음성증폭기) 153
- 하하3(HAHA3) 154

신호장치

- 네비게이션 신호기 세트 155
- 데프아코이 호출기 156
- 무선호출기 비주콜 157

언어훈련S/W

- 여우 언어-인지 학습 패키지+(Plus) 158
- 모모야 모모 언어훈련 PAD 159
- 소리자람(for Pad) 160
- 소리자람 (for Windows) 161
- 스마트언어향상프로그램 162
- 스마트언어향상프로그램 - 플러스펜 163
- 스피치미러 (SM1.01.0029) 164
- 스피치미러탭 (SMT1.01.0029) 165
- 애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전 166
- 언어,인지,수리력 터치 167
- 언어-인지 재활프로그램 랭콕-HS (Home Special) 168
- 에이드 프로 169
- 에이드 프로 대화면 170
- 에이드 플러스 AI 171
- 한글바르미 172
- 한글잼잼 173
- 한글짱탭 (SMT2.01.190) 174

기타

- 액자형 스마트 히어링루프 175

스마트비주얼 올인원 [청각/언어장애유형 | 다기능의사소통시스템]



제 품 개 요 - 대화면을 통해 빠르고 선명한 영상을 구현한 청각장애인 수화 의사소통용 영상전화기
 - 안드로이드를 적용한 강력한 스마트기기 운영시스템을 적용한 장애인 편의 정보통신보조기기
 - 유선인터넷(RJ45) / 무선인터넷(WiFi)를 이용한 안정적 데이터 전송 및 편리성 확보
 - 키보드 및 마우스를 적용하여 영상은 물론 SNS, 정보검색 등 편리한 기기 활용이 가능한 정보단말기

개 인 부 담 금 일반 190,000원 / 기초수급대상·차상위계층 95,000원

제 조 원 주식회사 샘물정보통신/대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 방문 설치 **납 품 기 간** 30일

납 품 자 주식회사 샘물정보통신 / 담당자: 정연술
 (13207) 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 메가동 810호 (SKn테크노파크)
 Tel : 031-753-0293, 010-6335-3167 / FAX : 031-734-0293 / www.vizufon.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 103713-01-005379 예금주명: 샘물정보통신

✓ 제품사양

- 크기 : 533 x 368 x 31 mm
- 무게 : 4050g
- 시스템 : 안드로이드
- CPU : ARM Coretex A17, Quad Core 1.8Ghz
- Memory : Built in 16 GB / MAX 32GB
- LCD : 18.5 Full HD TFT 스크린
- LCD해상도 : 1920*1280 (16:10)
- 카메라 : 전면 5.0M,, 외장 5.0M
- 동작전원 : 12V DC 3A
- 네트워크 : 유선 RJ45, 무선 WiFi (802.11 a/b/g/n), 블루투스 V4.0.
- 외부입출력 : USB, Micro USB, SD, HDMI, 이어폰, HDMI, 키보드, 마우스

- 스마트기기의 다양한 기능을 활용 가능 (SNS, 인터넷, 동영상, 교육서비스 등)

✓ 활용방안(기대효과)

- 대화면을 통해 청각장애인 전연령대가 수화로 상호간 의사소통이 가능하여 장애인 불편해소 가능
- 스마트기기의 활용성을 이용해 다양한 의사소통 활용방법 확대 (카톡, IMO, 라인 등)
- 문자/영상 통신중계서비스 시스템을 활용할 수 있어 정보 서비스 활용 만족도 증가

✓ 구성품목

- 스마트비주얼 올인원 본체 1개 / 수신알림장치 (LED LAMP) 1개
- 수신알림장치 (호출버튼) 1개 / 무선 키보드/마우스
- 램프용 전원아답터(5V 2A) / USB케이블, 랜선 각 1개
- 사용설명서, 보증서 1부

✓ 사용가능대상

- 청각언어장애 : 난청인이나 말을 하지 못하는 농아인들에게 수화를 통하여 상호간의 의사전달 수단으로 사용
- 수화를 배우는 학생, 수화통역사, 사회복지사 등 : 스마트패드 - 어플리케이션을 활용을 통해 복지서비스 강화

✓ 주요기능

- 화상통화 : 대화면을 통해 수화를 이용한 원활한 의사소통 기능
- 무선인터넷(WiFi)와 유선인터넷(RJ45)를 적용하여 편리성 및 안정적 데이터 전송 확보
- 전화 수신시 수신알림기능(비주얼_블루투스 불빛/진동)
- 키보드 / 마우스를 통한 정보검색, SNS 등 편리한 스마트기기 활용이 용이
- 디지털 전자앨범(슬라이드쇼) 기능

✓ 사용방법

- 스마트비주얼의 초기화면에서 프로그램을 실행하여 등록 확인
- 전화번호 입력후 전화연결 시도 (단축번호 이용시 : 끝 5자리 누름)
- 상대방이 영상 전화기일 경우 자동적으로 서로간의 영상을 주고 받으면서 통화를 시도
- 종료버튼을 누르면 통화가 종료됨
- * 정보단말기 활용 : SNS(카카오톡, IMO 등) 동영상, 오피스 기능 및 107통신중계센터 연결 등

✓ 제품특징

- 안드로이드 스마트 기능을 이용한 수화용 영상전화 및 정보단말기 기능
- 통화중 화면선택을 이용하여 다양한 화면을 구현할 수 있음 (화면선택 기능, 1:1 및 확장)
- 통화중 음성.영상차단 버튼을 이용하여 상대방에게 프라이버시를 보호할 수 있음

✓ 최소PC요구사항

- 별도의 PC는 필요 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 과도한 시스템 설치하는 기기의 원활한 사용에 지장을 줄수 있음 (게임 등)
- 인터넷이 연결 되어야 사용 가능함 (랜선 및 와이파이)

✓ 최초출시일 : 2017년 3월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 1월 (안드로이드 업그레이드)

씨토크이음070스마트영상폰 콤보 [청각/언어장애유형 | 다기능의사소통시스템]



제품개요 ■ 데스크탑 영상스크린폰과 스마트폰용 070영상앱서비스를 합친 콤보제품입니다.
 ■ 8인치 터치 화면 + 각도조절 돌출카메라 + 수동식 키패드+ 핸즈프리 버튼을 지원하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있으며, 107손말이음센터/경기도의사소통지원센터와 핫키로 연결 되어 24시간 라이브 수어통역서비스를 받을 수 있습니다. 아울러, 씨토크070콤보앱을 설치하여 외출 시에는 본인의 스마트폰에서 107번호만 누르면 '들고 다니는 라이브 수어통역기'로 활용할 수 있습니다.

개인부담금 일반 240,000원 / 기초수급대상·차상위계층 120,000원

제조원 GTT / 중국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배 설치

납품기간 21일

납품자 (주)씨토크커뮤니케이션즈 / 담당자 : 서은희
 (15848) 경기도 군포시 공단로 93-9, 302호(당동, 영창빌딩)
 Tel : 010-4575-5991, 대표번호 070-7945-1010

개인부담금계좌번호 (우체국) 013276-02-463584 예금주명 : (주)씨토크커뮤니케이션즈

✓ 제품사양

- 8인치 액정, 1280×800, IPS 멀티터치 스크린
- 카메라-외장형, 각도조절, 500만 화소,개폐식
- 안드로이드11 - 검색, 이메일, 동영상
- 네트워크 - 4G(LTE), WAN, LAN, WiFi,
- 영상통화-H.264/해상도:HD, 4CIF /720P*30fps

✓ 구성품목

- 본체 1대, 수화기, USB카메라
- 충전케이블 1개, 랜케이블 1개, 경광등 1개
- 사용설명서, 보증서 1부

✓ 주요기능

- 핫키 버튼(5개)
 - M1 : 107손말이음센터와 직통 연결
 - M2 : 경기도의사소통지원센터와 직통연결
 - M3/M4 : 임의 번호 입력
 - M5 : 카카오톡앱 팝업 버튼
- 성능 및 기능
 - 수신 기능 편의성 : 핸즈프리 버튼 또는 화면 터치
 - 발신 기능 편의성 : 보이는 전화번호부 30개

✓ 제품특징

- 데스크탑 영상스크린폰과 스마트폰용 070영상앱서비스를 합친 콤보제품
- 8인치 대형 화면 + 돌출형 카메라 + 수동식 키패드
- 070영상통화/카카오톡/IMO영상 통화 지원
- 데이터유심 지원 - 유심요금제 가입
- 스마트폰용 씨토크070콤보앱 서비스 무료 지원 - 들고 다니는 라이브 수어통역기

✓ 활용방안(기대효과)

- 핫키 라이브 수어통역기-손말이음센터, 경기도의사소통지원센터
- 수어상담센터 070연결-다산콜,금융기관(은행,카드,캐피탈), 국민연금/건보/권익위원회 등 70여 곳
- 기존 구형기기(H263코덱) 교체 - 손말이음센터(H264기반)와 통화 불가
- 스마트폰용 씨토크070영상앱 서비스 무료 지원
- 들고 다니는 '라이브070통역기' - 손말센터와 무료통화
- 통합돌봄서비스(생활지원사 상담)

✓ 사용가능대상

- 수어 사용 청각장애인

✓ 사용방법

- 발신
 - ① 070번호 부여하여 스마트폰, 유선전화와 동일한 방식
 - ② 스피커폰 버튼을 누르면 다이얼 키패드 팝업
 - ③ 상대방 전화번호를 수동 입력하거나, 전화번호부에서 선택 발신
 - ④ 핫키 발신 - 원터치로 전화번호가 사전에 입력된 상대방에게 자동 발신
- 수신
 - ① 화면의 통화버튼 터치 또는 스피커폰 버튼 누르면 통화
 - ② 수신 전화가 걸려오면 수신벨소리와 함께 경광등이 반짝거림.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

1. 기기를 떨어뜨리거나, 충격이 가지 않도록 주의하십시오.
2. 물이나 음료가 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

✓ **최초출시일** : 2025년 12월 15일

✓ **최근 업그레이드** : 2026년 3월 15일

드림폰3(DP-03-PL-R1) [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 - 본인 소유의 스마트폰이나 유선전화기를 이용하여 건청인과의 전화 통화를 지원하는 통화보조 기기
- 마이크를 탑재하여 구화 송신 지원

개인부담금 일반 333,000원 / 기초수급대상·차상위계층 132,500원

제 조 원 (주)씨와이디정보기술 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 발송

납 품 기 간 3일

납 품 자 (주)씨와이디정보기술 / 담당자 : 임재현
(13449) 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 판교글로벌비즈니스센터 A동 401~2호 (시흥동)
Tel : 070-8880-6681 / FAX : 02-525-6682 / www.cyinfo.com

개인부담금계좌번호 (국민은행) 782701-04-136028 예금주명 : (주)씨와이디정보기술

✓ 제품사양

- 드림폰3 어댑터
 - 크기 : 180 x 100 x 20 mm
 - 무게 : 140 그램
 - 재질 : 플라스틱
- 태블릿
 - 삼성전자 갤럭시
 - 안드로이드

충전이 가능

- 태블릿과 블루투스 키보드 연결을 통해 효율적인 문자 입력이 가능

✓ 구성품목

- 드림폰3 어댑터
- 삼성전자 태블릿
- USB 허브
- USB C-to-C 케이블
- 블루투스 키보드
- 유선전화 연결 키트
- 사용설명서 및 품질보증서

✓ 활용방안(기대효과)

- 청각장애, 언어장애를 가진 장애인의 일상생활에서 음성 통화 가능
- 장애로 인해 소상공인 창업이 어려웠던 장애인들에게 도움
- 상대방이 일반 유선전화인 경우에도 사용 가능하여 관공서, 금융기관 등의 통화 접근성 향상
- 통화가 중요한 직업군으로의 진출가능성 향상

✓ 사용가능대상

- 의사소통이 불편하여 스마트폰이나 유선전화 통화가 어려운 청각, 언어 장애인

✓ 주요기능

- 의사소통 장애인과 건청인간의 통화 가능(통화용 전화기 필요)
- 통화 상대방이 스마트폰이 아니어도 통화 가능
- 통화 상대방의 통신사에 무관
- 통화 상대방이 유선이어도 상관 없음
- 드림폰과 태블릿을 연결하면 언제든지 통화 가능
- 상대방의 음성은 문자로 표시, 장애인이 문자로 입력하면 음성으로 변환하여 송신
- 상징 기반 입력과 사용자 맞춤 이미지 및 문구의 편집

✓ 사용방법

1. 어댑터와 태블릿을 동봉된 케이블로 연결
2. 태블릿과 블루투스 키보드 연결
3. 태블릿에서 통화 앱을 실행
4. 스마트폰 블루투스 설정에서 드림폰을 찾아 연결
5. 전화걸기 : 태블릿의 통화 앱에서 전화걸기 이용하여 전화 연결
6. 전화받기 : 전화가 오면 통화 앱에서 전화받기 눌러서 전화 연결
7. 전화 연결 후 상대방의 음성을 태블릿에서 텍스트로 수신하고, 상대방에게 보낼 내용을 입력기로 입력하여 송신
8. 종료 버튼을 누르면 통화 종료

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 제품특징

- 수신통화, 송신통화 모두 지원하는 양방향 음성 통화 보조 기기
- 마이크를 탑재하여 구화 송신 지원
- 태블릿을 사용하기 편리한 거치대 형태
- 블루투스 중계기이긴 드림폰 어댑터와 어댑터를 제어하는 통화 앱으로 구성
- 통화 앱은 동봉된 태블릿에 설치되어 배포
- 보청기 연동을 위한 전용 오디오 출력 단자 제공
- USB 허브를 통해 태블릿을 드림폰 어댑터에 연결과 동시에

✓ 사용 시 유의사항

- 태블릿에 탑재된 통화 앱을 이용해서 송신 및 수신
- 던지거나 충격 금지
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2026년 3월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 1일

마이토키GEO [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 : 조음 및 발성에 어려움이 있는 장애인(지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성 및 중복 장애인 등)의 원활한 의사소통을 위해 국내 최고 언어치료 및 특수교육 전문가의 기초 연구를 통하여 의사소통 장애인의 생활환경 제어 및 자기관리(생활 정보검색, 오디오/비디오 등 인터넷 서비스와의 상호작용)가 가능하도록 하였으며, 지역사회에서 원활한 사회활동을 위한 다양한 장소 및 상황에 따라 효과적인 의사소통을 할 수 있는 사용자 중심 위치, 상황 기반 보완대체의사소통(AAC) 보조기기

개 인 부 담 금 일반 296,000원 / 기초수급대상·차상위계층 148,000원

제 조 원 (주)리드스피커코리아 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)리드스피커코리아 / 담당자 : 윤여훈 책임연구원(010-6796-1232)

서울특별시 성동구 아차산로 153 9층 (성수동2가 예림출판문화센터)

Tel : 02-3016-8520 / FAX : 02-3016-8501 / www.mytalkie.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011973-02-235479 예금주명 : (주)리드스피커코리아

✓ 제품사양

- 삼성 갤럭시탭A 11인치
- 크기(HxWxD) : 168.7X257.1X6.9 (mm) / 무게 : 477g
- 디스플레이 : 278.2 mm(1920X1200)
- OS : 안드로이드 16 baclava
- 저장공간 : 128GB / 배터리 7,040mAh / 카메라 : 8MP/5MP
- Main Memory : 6GB / CPU : 미디어텍 Dimensity 7300
- 사운드 : 내장 스테레오스피커, 내장마이크
- 전원 : DC 5.0V 1.2A / 마이토키GEO 소프트웨어 버전 : 1.0

프로토콜 개발 적용

- 한국 문화와 생활환경을 반영한 심벌 내장 (한국 최대 심벌 약 10,000여개)
- 어휘, 심벌은 사용 환경 및 상황에 맞게 다양한 범주로 구성
- 키보드 입력 화면을 제공하여 원하는 글자 입력
- 심벌 크기 및 심벌 글자 크기 변경을 통하여, 사용자가 원하는 크기의 터치영역 설정가능
- 아동, 청소년, 청년, 장년 각 남녀 총 14가지 음성 기본제공

✓ 구성품목

- 본체 1대(마이토키GEO, 소프트웨어 설치됨)
- 충전 케이블 1개
- 온라인 사용 설명서
- 케이스1개, 전면 보호 필름1장, 터치펜1개

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어장애인 사용자가 자신의 의사를 문장으로 만들어 상대방에게 음성으로 의사를 전달
- 언어장애인 사용자의 대화를 촉진함으로써 인지능력 향상과 대인관계 질 향상
- 사회 참여로 인한 경제 활동 증가 및 삶의 질 향상

✓ 주요기능

- 신청 대상 장애유형 : 지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성
- 위치 상황에 따른 보드 제공 (위치보드 : 58개, 상황보드 : 75개, 그룹보드 : 43개, IoT보드 : 10개)
- AI 스피커를 활용한 인터넷 서비스 및 홈 IoT와의 보완대체 의사소통 작동 체계 적용
- 화면상의 심벌을 눌러 어휘나 문장을 만들어 음성합성기능을 통하여 상대방에게 의사를 전달
- 한국 문화와 생활 문화, 환경에 맞는 국내 최대 어휘, 심벌 약 10,000개 제공
- 글자판 기능을 제공하여 원하는 글자 입력 후, 음성합성 출력 가능
- 사용자가 원하는 심벌 배치 및 어휘 내용 편집
- 키보드, 터치가 어려운 사용자를 위한 스캐닝 기능 (보조기기 인터페이스 이용)
- 사용자가 직접 사진을 찍어 심벌 등록 가능
- 상대방 음성을 듣기 위한 음성인식 기능
- 상황에 따른 상징 순환
- 정품 인증 : 인터넷 기반 디지털 인증서 사용

✓ 사용가능대상

- 조음 및 발성의 어려움이 있는 언어 장애인
- 패드 형태의 단말기를 들거나 거치한 후 특정 위치를 터치하여 선택할 수 있는 자
- 심벌 또는 어휘에 대한, 인지능력이 있는 자
- 언어장애인의 보호자 및 특수교육 교사의 사용 환경 설정 보조 필요

✓ 사용방법

- ① 제공된 단말기를 켜다.
- ② 설치된 마이토키GEO 프로그램을 터치하여 선택한다.
- ③ 소프트웨어 상세 실행 내용은 사용자 매뉴얼에 기술됨

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2025년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 2월

✓ 제품특징

- 특수교육 전문가를 통한 기존 기기의 분석 및 요구조사, AAC

마이토키NOTE [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 조음 및 발성에 어려움이 있는 장애인(지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성 및 중복 장애인 등)의 원활한 의사소통을 위해 국내 유일의 Windows OS에서 탑재되는 의사소통보조기기로 다양한 주변기기(안구마우스, 트랙볼, 스위치 등)를 연결하여 사용 가능한 보완체제의사소통(AAC) 보조기기입니다. 또한 각 개인별로 상징물(10,000여개)을 출력 가능하며, 마우스 사용이 어려운 경우 모니터를 터치하여 다양한 목소리로(남녀노소 약 40여종) 의사소통이 가능합니다.

개 인 부 담 금 일반 624,000원 / 기초수급대상·차상위계층 206,000원

제 조 원 (주)리드스피커코리아 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)리드스피커코리아 / 담당자 : 윤여훈 책임연구원(010-6796-1232)

서울특별시 성동구 아차산로 153 9층 (성수동2가 예림출판문화센터)

Tel : 02-3016-8520 / FAX : 02-3016-8501 / www.mytalkie.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011973-02-235479 예금주명 : (주)리드스피커코리아

✓ 제품사양

- LG 노트북 16인치
- 무게 : 1.239kg
- 디스플레이 : 해상도(2880*1600 WQXGA)
- OS : Windows 11 Home / 저장공간 : SSD 512GB
- Main Memory : 16GB / CPU : 코어Ultra5 애로우레이크
- 마이토키윈도우 소프트웨어 / 버전 : 윈도우 2.0

- 사용자 수준별 판 제공(가로 심벌 수 1~10개, 세로 심벌 수 1~6개 지원, 기본, 활용, 글자판)
- 키보드 입력 화면을 제공하여 원하는 글자 입력
- 심벌 크기 및 심벌 글자 크기 변경을 통하여, 사용자가 원하는 크기의 터치영역 설정가능
- 아동, 청소년, 청년, 장년 각 남녀 총 40가지 음성 기본제공
- 감정 음성 추가 ("기쁨", "슬픔", "화남") 3가지 감정 표현 가능)
- 안구마우스 및 인터페이스 이용이 자유롭다

✓ 구성품목

- 본체 1대(마이토키윈도우 2.0 소프트웨어 설치됨)
- 충전기 1대(충전/데이터 케이블 포함)
- 한글 사용 설명서 1권

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어장애인 사용자가 자신의 의사를 문장으로 만들어 상대방에게 음성으로 의사를 전달
- 언어장애인 사용자의 대화를 촉진함으로써 인지능력 향상과 대인관계 질 향상
- 사회참여로 인한 경제 활동 증가 및 삶의 질 향상

✓ 주요기능

- 대상 장애유형 : 지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성
- 화면상의 심벌을 눌러 어휘나 문장을 만들어 음성합성기능을 통하여 상대방에게 의사를 전달
- 한국 문화와 생활 문화, 환경에 맞는 국내 최대 어휘, 심벌 약 10,000개 제공
- 기본판, 활용판, 예측판, 글자판 제공 (예측판의 경우 한국어 특징에 따른 존대/하대, 긍정/부정, 시제, 의문/평서, 자동 문장생성 사용방법 제공)
- 글자판 기능을 제공하여 원하는 글자 입력 후, 음성합성 출력 가능
- 사용자가 원하는 심벌 배치 및 어휘 내용 편집
- 키보드, 터치가 어려운 사용자를 위한 스캐닝 기능 (기본판에서만 제공)
- 사용자가 직접 사진을 찍어 심벌 등록 가능
- 상대방 음성을 듣기 위한 음성인식 기능(인터넷 사용 가능할 시)
- 업무환경에서 사용 할 수 있는 샘플판 제공(사용자 자신의 업무환경에 맞도록 수정하여 사용)
- 감정 음성(TTS)을 통한 사용자의 기본 감정 발화 가능 ("기쁨", "슬픔", "화남") 3가지 감정 표현 가능)
- 정품 인증 : 인터넷 기반 디지털 인증서 사용

✓ 사용가능대상

- 조음 및 발성의 어려움이 있는 언어 장애인
- 심벌 또는 어휘에 대한 인지능력이 있는 자
- 언어장애인의 보호자 및 특수교육 교사의 사용 환경 설정 보조 필요
- 안구마우스 또는 다양한 인터페이스 이용이 필요한 장애인

✓ 사용방법

- ① 제공된 단말기를 켜다.
- ② 설치된 마이토키NOTE 프로그램을 터치하여 선택한다.
- ③ 원하는 기능을 선택한 후 심벌 터치 또는 글자 입력을 통하여 자신의 의사를 음성합성음(TTS)을 통하여 출력한다.
- ④ 소프트웨어 상세 실행 내용은 사용자 매뉴얼에 기술됨

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2025년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

✓ 제품특징

- 특수교육 전문가를 통한 기존 기기의 분석 및 요구조사, 한국어 AAC 프로토콜 개발 적용
- 한국 문화와 생활 환경을 반영한 심벌 내장 (한국 최대 심벌 약 10,000여개)
- 어휘, 심벌은 사용 환경 및 상황에 맞게 다양한 범주로 구성

마이토키스마트 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 조음 및 발성에 어려움이 있는 장애인(지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성 및 중복 장애인 등)의 원활한 의사소통을 위해 국내 최고 특수교육 전문가들이 공동으로 10,000여개의 한국형 상징 및 연령대별 40여가지의 목소리를 연구 개발한 국내 최고 보완대체의사소통(AAC)기기

개인부담금 일반 160,000원 / 기초수급대상·차상위계층 80,000원

제 조 원 (주)리드스피커코리아 / 대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 (주)리드스피커코리아 / 담당자 : 윤여훈 책임연구원(010-6796-1232)
서울특별시 성동구 아차산로 153 9층 (성수동2가 예림출판문화센터)
Tel : 02-3016-8520 / FAX : 02-3016-8501 / www.mytalkie.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011973-02-235479 예금주명 : (주)리드스피커코리아

✓ 제품사양

- 삼성 갤럭시탭 A 11인치
- 크기(HxWxD) : 168.7X257.1X6.9 (mm)
- 무게 : 477g / 디스플레이 : 278.2 mm(1920X1200)
- OS : 안드로이드 16 baclava /
- 저장공간 : 128GB / 배터리 7,040mAh
- 카메라 : 8MP/5MP / Main Memory : 6GB
- CPU : 미디어텍 Dimensity 7300
- 사운드 : 내장 스테레오스피커, 내장마이크
- 전원 : DC 5.0V 1.2A / 마이토키 소프트웨어 버전 : 스마트 2.1

✓ 구성품목

- 본체 1대(마이토키스마트 2.1 소프트웨어 설치됨)
- 충전 케이블 1개
- 한글 사용 설명서 1권 / 케이스1개 / 전면보호 필름1장 / 터치펜1개

✓ 주요기능

- 신청 대상 장애유형 : 지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성
- 화면상의 심벌을 눌러 어휘나 문장을 만들어 음성합성기능을 통하여 상대방에게 의사를 전달
- 한국 문화와 생활 문화, 환경에 맞는 국내 최대 어휘, 심벌 약 10,000개 제공
- 기본판, 활용판, 예측판, 글자판 제공 (예측판의 경우 한국어 특징에 따른 존대/하대, 긍정/부정, 시제, 의문/평서, 자동 문장생성 사용 방법 제공)
- 글자판 기능을 제공하여 원하는 글자 입력 후, 음성합성 출력 가능
- 사용자가 원하는 심벌 배치 및 어휘 내용 편집
- 키보드, 터치가 어려운 사용자를 위한 스캐닝 기능(7분판에서만 제공)
- 사용자가 직접 사진을 찍어 심벌 등록 가능
- 상대방 음성을 듣기 위한 음성인식 기능(인터넷 사용 가능할 시)
- 업무환경에서 사용 할 수 있는 샘플판 제공(사용자 자신의 업무환경에 맞도록 수정하여 사용)
- 감정 음성(TTS)을 통한 사용자의 기본 감정 발화 가능 ("기쁨", "슬픔", "화남") 3가지 감정 표현 가능)
- 파일 로드 기능
- 정품 인증 : 인터넷 기반 디지털 인증서 사용

✓ 제품특징

- 특수교육 전문가를 통한 기존 기기의 분석 및 요구조사, AAC 프로토콜 개발 적용
- 한국 문화와 생활 환경을 반영한 심벌 내장 (한국 최대 심벌 약

10,000여개)

- 어휘, 심벌은 사용 환경 및 상황에 맞게 다양한 범주로 구성
- 사용자 수준별 판 제공(가로 심벌 수 1~10개, 세로 심벌 수 1~6개 지원, 기본, 활용, 글자판)
- 키보드 입력 화면을 제공하여 원하는 글자 입력
- 심벌 크기 및 심벌 글자 크기 변경을 통하여, 사용자가 원하는 크기의 터치영역 설정 가능
- 아동, 청소년, 청년, 장년 각 남녀 총 40가지 음색 기본제공
- 감정 음성 추가 ("기쁨", "슬픔", "화남") 3가지 감정 표현 기능)
- 신규 프로파일 추가

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어장애인 사용자가 자신의 의사를 문장으로 만들어 상대방에게 음성으로 의사를 전달
- 언어장애인 사용자의 대화를 촉진함으로써 인지능력 향상과 대인관계 질 향상
- 사회 참여로 인한 경제 활동 증가 및 삶의 질 향상

✓ 사용가능대상

- 조음 및 발성의 어려움이 있는 언어 장애인
- 패드 형태의 단말기를 들거나 거처한 후 특정 위치를 터치하여 선택할 수 있는 자
- 심벌 또는 어휘에 대한, 인지능력이 있는 자
- 언어장애인의 보호자 및 특수교육 교사의 사용 환경 설정 보조 필요

✓ 사용방법

- ① 제공된 단말기를 켜다.
- ② 설치된 마이토키 스마트 프로그램을 터치하여 선택한다.
- ③ 원하는 기능을 선택한 후 심벌 터치 또는 글자 입력을 통하여 자신의 의사를 음성합성음(TTS)을 통하여 출력한다.
- ④ 소프트웨어 상세 실행 내용은 사용자 매뉴얼에 기술됨

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2022년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 3월

마이토키스마트PRO [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 의사소통에 어려움이 있는 지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성 및 중증 장애인의 원활한 의사소통을 위한 국내 최고의 보완대체의사소통(AAC) 보조기기이며, 필담 기능을 제공함으로써 단순한 상징을 통한 의사소통 이외에 장애인이 직접 필기하여 의사소통이 가능합니다.

개인부담금 일반 280,000원 / 기초수급대상·차상위계층 140,000원

제조원 (주)리드스피커코리아 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배/우편

납품기간 14일

납품자 (주)리드스피커코리아 / 담당자 : 윤여훈 책임연구원(010-6796-1232)
서울특별시 성동구 아차산로 153 9층 (성수동2가 예림출판문화센터)
Tel : 02-3016-8520 / FAX : 02-3016-8501 / www.mytalkie.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011973-02-235479 예금주명 : (주)리드스피커코리아

✓ 제품사양

- 삼성 갤럭시탭S10 FE 10.9인치 S Pen
- 크기(HxWxD) : 165.8X254.3X6 (mm) / 무게 : 497g
- 디스플레이 : 277.0 mm(2304X1440)
- OS : 안드로이드 16 baclava / 저장공간 : 128GB
- 배터리 8,000mAh / 카메라 : 12MP/8MP
- Main Memory : 8GB / CPU : 삼성 엑시노스 1580
- 사운드 : 내장 스테레오스피커, 내장마이크
- 전원 : DC 5.0V 1.2A
- 마이토키스마트PRO 소프트웨어 버전 : 스마트 2.1

✓ 구성품목

- 본체 1대(마이토키스마트 2.1 소프트웨어 설치됨)
- 충전 케이블 1개 / 한글 사용 설명서 1권
- 케이스1개, 전원 보호 필름1장, 터치펜1개

✓ 주요기능

- 신청 대상 장애유형 : 지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성
- 화면상의 심벌을 눌러 어휘나 문장을 만들어 음성합성기능을 통하여 상대방에게 의사를 전달
- 한국 문화와 생활 문화, 환경에 맞는 국내 최대 어휘, 심벌 약 10,000개 제공
- 기본판, 활용판, 예측판, 글자판 제공 (예측판의 경우 한국어 특징에 따른 존대/하대, 긍정/부정, 시제, 의문/평서, 자동 문장생성 사용 방법 제공)
- 글자판 기능을 제공하여 원하는 글자 입력 후, 음성합성 출력 가능
- 사용자가 원하는 심벌 배치 및 어휘 내용 편집
- 키보드, 터치가 어려운 사용자를 위한 스캐닝 기능 (기본판에서만 제공)
- 사용자가 직접 사진을 찍어 심벌 등록 가능
- 상대방 음성을 듣기 위한 음성인식 기능(인터넷 사용가능 할시)
- 업무환경에서 사용할 수 있는 샘플판 제공(사용자 자신의 업무환경에 맞도록 수정하여 사용)
- 감정 음성(TTS)을 통한 사용자의 기본 감정 발화 가능 ("기쁨", "슬픔", "화남") 3가지 감정 표현 가능)
- 파일 로드 기능
- 정품 인증 : 인터넷 기반 디지털 인증서 사용
- 필담 기능

✓ 제품특징

- 특수 교육 전문가를 통한 기존 기기의 분석 및 요구조사, AAC 프로토콜 개발 적용

- 한국 문화와 생활 환경을 반영한 심벌 내장 (한국 최대 심벌 약 10,000여개)
- 어휘, 심벌은 사용 환경 및 상황에 맞게 다양한 범주로 구성
- 사용자 수준별 판 제공(가로 심벌 수 1~10개, 세로 심벌 수 1~6개 지원, 기본, 활용, 글자판)
- 키보드 입력 화면을 제공하여 원하는 글자 입력
- 심벌 크기 및 심벌 글자 크기 변경을 통하여, 사용자가 원하는 크기의 터치영역 설정 가능
- 아동, 청소년, 청년, 장년 각 남녀 총 40가지 음성 기본제공
- 감정 음성 추가 ("기쁨", "슬픔", "화남") 3가지 감정 표현 기능)
- 신규 프로파일 추가

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어장애인 사용자가 자신의 의사를 문장으로 만들어 상대방에게 음성으로 의사를 전달
- 언어장애인사용자의대화를 촉진함으로써인지능력향상과대인관계질향상
- 사회 참여로 인한 경제 활동 증가 및 삶의 질 향상

✓ 사용가능대상

- 조음 및 발성의 어려움이 있는 언어 장애인
- 패드 형태의 단말기를 들고나가지않은후특정위치를 터치하여선택할수있는자
- 심벌 또는 어휘에 대한, 인지능력이 있는 자
- 언어장애인의 보호자 및 특수교육 교사의 사용 환경 설정 보조 필요

✓ 사용방법

- ① 제공된 단말기를 켜다.
- ② 설치된 마이토키스마트 프로그램을 터치하여 선택한다.
- ③ 원하는 기능을 선택한 후 심벌 터치 또는 글자 입력을 통하여 자신의 의사를 음성합성음(TTS)을 통하여 출력한다.
- ④ 소프트웨어 상세 실행 내용은 사용자 매뉴얼에 기술됨

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2024년 1월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 1월

보이스탭 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 “보이스탭”은 최신 IT 솔루션을 기반으로 개발이 되었으며 휴대성 및 활용성을 고려하여 장소를 가리지 않고 보다 쉽게 언어의 표현방법과 의사전달을 통합하여 개발한 의사소통 단말기

개인부담금 일반 154,000원 / 기초수급대상·차상위계층 77,000원

제 조 원 (주)샤크로 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 우편

납 품 기 간 5일

납 품 자 (주)샤크로 / 담당자 : 김중호(010-5448-1171)

(08389)서울특별시구로구 디지털로26길5, 711호 (구로동, 에이스하이엔드타워1차)

Tel : 070-7410-6594 / FAX : 02-6280-6581 / www.sharkro.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 012245-01-015655 예금주명 : (주)샤크로

✓ 제품사양

화면 해상도	크기	220.5mm	프로세서	cpu속도	2.2GHz, 2.0GHz
	해상도	1340×800(WXGA+)		cpu종류	Octa-Core
메모리	RAM size(GB)	4GB	운영체제	Android 11	
	ROM size(GB)	64GB	외관사양	크기	211.0x124.7x8.0 단위:mm
	외장저원메모리	MicroSD(최대1TB)		무게(g)	332
연결	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80	배터리 용량	5100(mAh)	
	Bluetooth	Bluetooth v5.3			
오디오/비디오	동영상지원해상도	FHD(1920×1080) 30fps			
	오디오지원	듀얼 스테레오스피커, 돌비 애트모스			

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 매뉴얼 1권
- 휴대용 거치대겸용 케이스
- 충전 케이블 1개

✓ 주요기능

- 언어훈련 프로그램 과 안드로이드 OS 두 개의 기능 제공
- 음성인식 및 범주어 게임을 이용한 언어훈련
- 안드로이드 OS 사용 스마트 폰과 같이 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있음
- TTS시스템을 이용한 의사소통 전달기능

✓ 제품특징

- 본 제품은 언어장애를 가진 사람들을 위한 언어훈련 휴대용 단말기
- 게임을 이용한 언어훈련 및 인지 학습
- 8.7인치 터치스크린, 내장 wifi지원
- 간결하고 직관적인 인터페이스제공, 안드로이드 OS 탑재
- USB 2.0 및 MICROSD카드 SLOT 지원, USB키보드, 마우스 사용가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 상대방과의 원활한 의사소통이 가능하도록 도와주는 의사소통 보조기기
- 청각장애인 및 지적장애 언어 장애가 있는 장애인들의 사회참여 확대 및 일상생활의 질을 향상 시킬 수 있으며, 수혜자들의 재활 및 자활에도 도움을 줌으로써 사용 만족도가 높을 것으로 예상.
- 휴대가 용이하여 아이 어른 구분 없이 어떠한 장소와 공간에서도 활용이 가능함

✓ 사용가능대상

- 청각, 언어 장애인 선천적 청각 장애인 뿐만 아니라 말은 할 수 있으나 청각에 이상이 있어 들을 수 없는 후천적 청각 장애인, 난청인, 노인들도 사용 가능 대상임

✓ 사용방법

- ① 오른쪽 상단 파워버튼을 약 3~5초간 눌러 전원이 들어오도록 한다.
- ② 부팅화면이 끝난 후 손가락 끝을 이용하여 오른쪽 하단 자물쇠 버튼을 화면 위로 올려 프로그램선택화면으로 들어간다.
- ③ 표현하고자 하는 상징을 손가락으로 터치하여 실행 시킨다

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 본 제품의 음성인식 기능은 소음이 적은 곳에서 사용하셔야 인식률이 높아집니다.
- 본 제품을 인터넷 및 콘텐츠 다운로드를 사용하기 위해서는 무선인터넷을 이용하여 접속하여야 합니다.
- 본 제품의 안드로이드 마켓을 사용하기 위해서는 마켓에 가입이 되어있어야 합니다.
- 본 제품에 앱 콘텐츠를 적용 시 설치 문의 및 실행관련에 대한 문의는 받지 않습니다.

✓ 최초출시일 : 2011년 11월 1일

보이스탭 PRO SE [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 장애인 스스로 필요 정보를 찾고 해결하도록 도움을 주며, 독립적인 장애인 자립생활 지원을 위한 정보제공용 AAC 모델입니다. 필요 정보에 맞는 맞춤형 의사소통판을 제공하여 빠르고 손쉬운 의사소통이 가능합니다.

개인부담금 일반 296,000원 / 기초수급대상·차상위계층 148,000원

제조원 (주)샤크로 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배 / 우편

납품기간 5일

납품자 (주)샤크로 / 담당자 : 김종호(010-5448-1171)

(08389)서울특별시 구로구 디지털로26길5, 711호 (구로동, 에이스하이엔드타워1차)
Tel : 070-7410-6594 / FAX : 02-6280-6581 / www.sharkro.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 012245-01-015655 예금주명 : (주)샤크로

제품사양

화면 해상도	크기	277.0mm	프로세서	cpu속도	2.4GHz, 2GHz
	해상도	2304 x 1440 (WUXGA+)		cpu종류	Octa-Core
메모리	RAM size(GB)	6GB	운영체제	Android	
	ROM size(GB)	128GB	외관사양	크기	165.8 x 254.3 x 6.5 단위:mm
	외장저장메모리	MicroSD(최대1TB)		무게(g)	523
연결	Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz	배터리	배터리 용량	8000(mAh)
	Bluetooth	Bluetooth v5.3			
오디오/비디오	동영상지원 포맷	MP4,M4V,3GP,3G2,WVMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM			
	오디오지원 포맷	MP3,M4A,3GA,AAC,OGG등			

필요한 어휘를 취사선택하여 상황에 따라 의사소통을 할 수 있는 하이테크형 대화용 AAC 도구

- 음성대화가 불편한 장애인, 청각장애인 등에게 음성을 텍스트로 변환하여 제공하는 텍스트뷰를 제공하여 정확하고 명확한 의사소통이 가능하도록 지원해주는 AAC 도구
- 휴대가 용이하여 아이 어른 구분 없이 어떠한 장소와 공간에서도 활용이 가능함

사용가능대상

- 청각, 언어 장애인 선천적 청각 장애인 뿐만 아니라 말은 할 수 있으나 청각에 이상이 있어 들을 수 없는 후천적 청각 장애인, 난청인, 노인들도 사용 가능 대상임

사용방법

- ① 오른쪽 상단 파워버튼을 약3-5초간 눌러 전원이 들어오도록 한다.
- ② 부팅화면이 끝난 후 손가락 끝을 이용하여 오른쪽 하단 자물쇠 버튼을 화면 위로 올려 프로그램 선택화면으로 들어간다.
- ③ 필요한 정보(민원, 복지 등)를 선택하여 내용을 확인하고 (음성 청취 기능) 의사소통판을 구동하여 의사소통 진행
- ④ 표현하고자 하는 상징을 손가락으로 터치하여 필요한 의사를 전달한다

최소PC요구사항

- 해당 없음

사용 시 유의사항

- 본 제품의 음성출력의 크기는 소음이 많은 곳에서는 잘 들리지 않을 수 있습니다.
- 본 제품을 인터넷 및 콘텐츠 다운로드를 사용하기 위해서는 무선인터넷을 이용하여 접속하여야 합니다.
- 본 제품의 안드로이드 마켓을 이용하기 위해서는 마켓에 가입이 되어있어야 합니다.
- 본 제품에 앱 콘텐츠를 적용 시 설치 문의 및 실행관련에 대한 문의는 받지 않습니다.

최초출시일 : 2025년 3월 31일

최근 업그레이드 : 새로운 기기 적합화

구성품목

- 본체 1대 / 매뉴얼 1권 / 휴대용 거치대겸용 케이스 / 충전케이블 1개

주요기능

- 정보전달 중심의 대화형 의사소통보조기기와 안드로이드태블릿 기능 제공
- 장애인 자립을 위한 복지, 민원 등의 정보제공용 서비스 제공
- 필요한 정보에 맞는 의사소통판을 맞춤형으로 제공하는 AAC
- 상대방이 표현하는 음성을 텍스트로 변환하여 사용자에게 글자(TEXT)를 제공

제품특징

- 장애인 스스로 정보를 찾아 해결할 수 있도록 대화중심의 정보제공용 서비스 AAC 모델
- 음성 안내 및 지막 제공
- 쉬운 언어와 시각 자료 활용
- 선택 정보에 맞는 의사소통판을 맞춤형으로 제공
- 상대가 표현하는 음성을 텍스트로 제공하는 텍스트뷰 제공

활용방안(기대효과)

- 상대방과의 원활한 의사소통이 가능하도록 도와주는 의사소통 보조기기
- 일상생활에 필요한 정보를 장애인 스스로 취득하고 활용함으로써

비쥬톡 WE [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 - 다양한 이미지와 미디어를 통해 보다 쉽게 의사소통이 가능한 의사소통 보조기기
 - 이미지 및 동영상 등을 메시지 전송을 통해 의사를 전달하는 의사소통 보조기기
 - 비상벨 버튼을 이용해 긴급메세지, 긴급통화가 가능한 비상호출 정보통신 보조기기

개 인 부 담 금 일반 290,000원 / 기초수급대상·차상위계층 145,000원

제 조 원 주식회사 샘물정보통신/대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 방문 설치 **납 품 기 간** 30일

납 품 자 주식회사 샘물정보통신 / 담당자: 정연술
 (13207) 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 메가동 810호 (SKn테크노파크)
 Tel : 031-753-0293, 010-6335-3167 / FAX : 031-734-0293 / www.vizufon.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 103713-01-005379 예금주명 : 샘물정보통신

✓ 제품사양

- 시스템 : Android OS 15.0(U),
- 지원사항 : S-PEN, GPS, Smart view
- CPU : Octa-Core 2.4 Ghz, 2.0 Ghz
- RAM / ROM : 8GB / 내장 128GB + 외장 1TB
- Camera : Front 500만 (5MP)Pixel, Rear: 800만 (8MP) pixel
- LCD : 277.0mm(10.9") 2304*1400(WUXGA) TFT, 90Hz
- Network : WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5G, Bluetooth 5.3 (2Mbps)
- Battery Life : Li-Polymer / 8000mAh
- Weight : 524g
- Dimension : 165.8 x 254.3 x 6.5 (세로x가로x두께, mm)
- 비콘벨 : 자기발전, BTLE 2402~2480 MHz, Bluetooth 5.3 2.4 GHz
- 비주콜 : (송신부)자기발전, 무선 315MHz, (수신부)3색 LED램프, BECON/블루투스

✓ 구성품목

- 비쥬톡 WE 본체 (S-PEN포함) 1대 / 비콘벨 (호출버튼) 2개
- 비주콜 (호출버튼, LED LAMP) 각 1개 / 램프용 전원아답터(5V 2A)
- 본체케이스 1개 / 사용설명서, 보증서 1부

✓ 주요기능

- 시기관 의사소통 기능
 - 의사표현 이미지를 AI 생성 기능을 통해 자연스러운 문장으로 표현
 - 사물(이미지)에 대한 AI 응답받기 기능을 통해 언어적 표현으로 변환 및 읽어주기
- 이미지/이모티콘/동영상을 이용한 의사소통 기능
 - 영역별 그림 및 동영상을 이용하여 청각.언어.발달장애인의 의사표현
 - 메시지 전송 기능을 통해 자신의 의사표현을 지정수신자에게 그림.동영상으로 전송
- 비상시 응급 및 비상호출을 위한 통화 기능
 - 장애인의 부모, 통역사 및 기관에 "비콘벨"을 지정수신자에게 연결 (4인까지 가능)
- 근거리 호출 기능 (방문, 수신알림, 비상호출)
 - 방문자 확인시 "비주콜" 호출벨을 통해 수신램프 점등 및 휴대폰 진동, 문자 알림
 - 전화, 문자, 카톡, 영상전화, 알람 등 휴대폰 수신시 비주콜 램프 점등 알림
 - 비상시 및 언어사용이 어려울시, 혹은 상대방의 소리인식이 어려울시 신호음으로 활용

✓ 제품특징

- 청각, 언어 등 언어사용에 어려움이 있는 장애인의 의사소통 보조기능

- 그림 이미지 및 동영상을 통해 의사소통이 가능하고 간편한 추가삭제 기능
- 선택된 이미지 및 동영상을 지정수신자에게 메시지 전송을 통한 연락 기능
- 무선 BLE "비콘벨"을 이용한 긴급(SOS) 통화 연결 (다른기기문자, 전화 연결시)
- 무선통신(비콘, 블루투스)을 이용하여 근거리 방문 알림, 호출, 전화수신 알림기능
- 스마트기기의 다양한 기능을 활용 가능 (SNS, 인터넷, 동영상, 교육서비스 등)
- S-PEN 기능을 활용한 지필사용으로 간단한 의사표현 및 소통

✓ 활용방안(기대효과)

- 청각, 언어 및 발달 장애인들이 사용 용도에 따라 다양한 대체 의사소통 활용 (AAC, 메시지 전송, 긴급통화, 비상호출, 방문확인, 수신알림 등)
- 별도의 기기는 필요 없으며, 안드로이드 계정 등록시 앱 활용 용이, 제공되는 앱 및 호출, 램프 등은 개인용 휴대폰 연동 동시 사용 가능

✓ 사용가능대상

- 청각, 언어장애 : 의사전달 수단으로 사용 (이미지전달, 비상호출, 방문확인 및 호출음)
- 발달, 지적.뇌병변장애 : 이미지를 이용한 의사전달, 메시지전송, 응급호출,
- 의사소통에 어려움이 있는 장애인은 누구나 적합한 기능을 선택하여 사용 가능

✓ 사용방법

- 비쥬톡의 초기화면에서 프로그램을 실행하여 등록 확인 (비쥬톡, 비주콜 등)
- 네트워크 (와이파이 등) 연결하여 메시지 전송이 가능토록 수신자 지정 등록
- 이미지 및 영상을 선택하여 의사전달 및 메시지 전송
- 비상상황 및 긴급요청 필요시 "비콘벨" 버튼을 눌러 "전화" 연결 (휴대폰 사용시 영상 가능)
- 상대방 호출 필요시 "비주콜" 버튼을 눌러 램프 작동

✓ 최소PC요구사항

- 별도의 PC는 필요 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 과도한 시스템 설치는 기기의 원활한 사용에 지장을 줄수 있음 (게임 등)
- 메시지 전송 및 응급전화 등은 인터넷이 연결 및 휴대폰 삼성계정 가입 필요함 (와이파이)

✓ 최초출시일 : 2025년 3월

✓ 최근업그레이드 : 2026년 3월 (시기능 적용)

스마트톡킹 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 의사소통에 어려움을 겪는 장애인을 위한 프로그램으로 장애인의 수준에 맞는 학습을 통해 의사소통에 필요한 개인 맞춤형 학습 기능과 기본 문장, 상황별 장소별 문장, 자주 사용하는 문장, 대화하기 기능을 통해 의사소통기기로 활용하는 제품입니다

개 인 부 담 금 일반 198,000원 / 기초수급대상·차상위계층 99,000원

제 조 원 (주)다함께하는/대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편 배송

납 품 기 간 7일

납 품 자 (주)다함께하는 / 담당자 : 이승안

(10545) 경기도 고양시 덕양구 향동로 218 현대 테라타워 DMC 씨동 1501호
Tel : 02-334-3303 / FAX : 02-710-5595

개인부담금계좌번호 (우리은행) 1005-804-691838 예금주명 : (주)다함께하는

✓ 제품사양

- 규격: 257(가로) x 168(세로) x 7(높이)
- 11인치 터치스크린
- OS: 안드로이드 13
- CPU: 2.2 GHz, 1.8GHz Octa-Core
- 메모리: 4GB
- 해상도: 1920 x 1200
- HDD: 64GB 이상
- 카메라: 5MP / 8MP

✓ 구성품목

- 스마트톡킹 SW, 스마트 패드, 케이스, 보호필름 사용설명서

✓ 주요기능

- 의사 소통에 어려움을 겪는 장애인을 위한 프로그램으로 의사소통을 합니다
- 학습하기 기능 : 명사, 동사, 형용사를 초급 → 중급 → 고급 수준으로 단계별 학습기능
- 학습기능에 단어 및 문장 추가 기능 (보호자 or 교육자)
- 발음(발성) / 반복횟수 조절기능 / 음성속도 조절기능 / 음성 높낮이조절기능
- 의사소통판
 - 1. 기본문장 (감정표현, 인사말, 질문, 위급상황, 선택과 결정 관련 문구와 그림으로 구성)
 - 2. 상황별문장 특정장소 집, 학교, 병원, 식당, 공원, 대중교통, 상점/마트, 행사축제, 공공기관 관련문구와그림
 - 3. 나만의 문장 : 본인이 자주 사용하는 문장을 추가 편집하여 추가 가능
 - 4. 대화하기 기능 : 목록에 표현할 말을 미리 입력하여 음성 표현 기능 (TTS기능) 음성인식 버튼 누르면 상대방 음성 텍스트로 표현 (STT 기능)
 - 5. 1대1 대화기능 : 상대방과 1대1로 대화하기 창 열림

✓ 제품특징

- 학습하기 기능과 의사 소통판을 활용 할 때 편리하고 간단한 추가 확장기능을 통해 장애인에게 학습과 의사소통기기로서의 최적의 솔루션을 제공하는 제품입니다

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어와 인지 능력이 낮은 장애인이 본 기기의 학습기능과 의사소통 기능을 통해 언어 인지 능력 향상
- 그림 상징을 통해 빠른 의사소통이나 간편 대화가 가능
- 비 장애인과 의사 소통 가능 (TTS , STT 기능)

✓ 사용가능대상

1. 발성의 어려움이 있는 장애인 (언어 장애인)
2. 인지능력이 낮은 장애인 (지적, 발달, 자폐)
3. 소리를 듣지 못하거나 발성을 할 수 없는 장애인 (청각, 뇌병변 장애인)

✓ 사용방법

- ① 설치된 스마트톡킹 프로그램을 터치하여 실행한다.
- ② 원하는 학습 카테고리로 이동하여 수준별 학습을 하거나
- ③ 의사소통카테고리로 이동하여 의사표현 (기본문장, 상황별문장, 나만의 소통판, 대화하기 기능 활용(TTS, STT기능 사용))

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지

✓ 최초출시일 : 2025년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 1월

스마트톡킹펜 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 의사소통에 어려움을 겪는 장애인을 위한 프로그램으로 장애인의 수준에 맞는 학습을 통해 의사소통에 필요한 개인 맞춤형 학습 기능과 기본 문장, 상황별 장소별 문장, 자주 사용하는 문장, 대화하기 기능을 통해 의사소통기기로 활용하는 제품입니다

개인부담금 일반 298,000원 / 기초수급대상·차상위계층 149,000원

제 조 원 (주)다함께하는/대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편 배송 **납 품 기 간** 7일

납 품 자 (주)다함께하는 / 담당자 : 이승안
(10545) 경기도 고양시 덕양구 향동로 218 현대 테라타워 DMC 씨동 1501호
Tel : 02-334-3303 / FAX : 02-710-5595

개인부담금계좌번호 (우리은행) 1005-804-691838 예금주명 : (주)다함께하는

✓ 제품사양

- 규격: 254.3(가로) x 165.8(세로) x 6.5(높이)
- 10.9인치 터치스크린
- OS: 안드로이드 13
- CPU: 2.2 GHz, 1.8GHz Octa-Core
- 메모리: 6GB
- 해상도: 1920 x 1200
- HDD: 128 GB
- 카메라: 8MP / 12MP

✓ 구성품목

- 스마트톡킹 SW, 스마트 패드, 블루투스키보드, 케이스, 보호필름, 사용설명서

✓ 주요기능

- 의사 소통에 어려움을 겪는 장애인을 위한 프로그램으로 의사소통을 합니다
- 학습하기 기능 : 명사, 동사, 형용사를 초급 → 중급 → 고급 수준으로 단계별 학습기능
- 학습기능에 단어 및 문장 추가 기능 (보호자 or 교육자)
- 발음(발성) / 반복횟수 조절기능 / 음성속도 조절기능 / 음성 높낮이조절기능
- 의사소통판
 - 1. 기본문장 (감정표현, 인사말, 질문, 위급상황, 선택과 결정 관련 문구와 그림으로 구성
 - 2. 상황별문장 특정장소 집, 학교, 병원, 식당, 공원, 대중교통, 상점/마트, 행사축제, 공공기관 관련문구와그림
 - 3. 나만의 문장 : 본인이 자주사용하는 문장을 추가 편집하여 추가 가능
 - 4. 대화하기 기능 : 목록에 표현할 말을 미리 입력하여 음성 표현 기능 (TTS기능) 음성인식 버튼 누르면 상대방 음성 텍스트로 표현 (STT 기능)
 - 5. 다양한 입력장치 : 블루투스 키보드, 마우스, 스마트펜 추가

✓ 제품특징

- 학습하기 기능과 의사 소통판을 활용할 때 편리하고 간단한 추가 확장기능을 통해 장애인에게 학습과 의사소통기기로서의 최적의 솔루션을 제공하는 제품입니다

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어와 인지 능력이 낮은 장애인이 본 기기의 학습기능과 의사소통 기능을 통해 언어 인지 능력 향상
- 그림 상징을 통해 빠른 의사소통이나 간편 대화가 가능
- 비 장애인과 의사소통 가능 (TTS, STT 기능)

✓ 사용가능대상

1. 발성의 어려움이 있는 장애인 (언어 장애인)
2. 인지능력이 낮은 장애인 (지적, 발달, 자폐)
3. 소리를 듣지 못하거나 발성을 할 수 없는 장애인 (청각, 뇌병변 장애인)

✓ 사용방법

- ① 설치된 스마트톡킹 프로그램을 터치하여 실행한다.
- ② 원하는 학습 카테고리로 이동하여 수준별 학습을 하거나
- ③ 의사소통카테고리로 이동하여 의사표현 (기본문장, 상황별문장, 나만의 소통판, 대화하기 기능 활용(TTS, STT기능 사용))

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지

✓ 최초출시일 : 2025년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 1월

위드톡 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 구어활동에 어려움을 겪는 분이나 언어발달이 늦은 장애인의 의사소통능력을 향상시키기 위해 국제 표준 규격에 맞춘 그림을 활용한 의사 소통에 가장 최적화 된 보완 대체 의사 소통(AAC)기기

개인부담금 일반 174,000원 / 기초수급대상·차상위계층 87,000원

제 조 원 (주)핑키밍키/대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배·우편 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)핑키밍키 / 담당자 : 김승철
(153-803) 서울시 금천구 가산디지털 1로 142, 414호 (가산동, 더스카이밸리1차)
Tel : 070-4481-4877 / FAX : 02-814-4840 / www.goodedu.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 014530-02-026091 예금주명 : (주)핑키밍키

✓ 제품사양

- 규격: 257.1x168.7x6.9(mm),508g
- OS: Android
- CPU:2.2 GHz, 1.8GHz / Octa-Core
- RAM: 4 GB
- 내장메모리:64GB 외장 1TB지원
- 디스플레이 : 11 인치
1920x1200 해상도 (WUXGA)
- 무선통신 : 802.11 b/g/n Wifi
- 배터리 : 7040 mAh
- 카메라 : 5M Pixel 전면 카메라 / 8M Pixel 후면 카메라

✓ 구성품목

- 스마트패드(삼성sm x205n) -500
- With Talk Ver 3.0
- 학습메뉴얼
- 스마트패드 케이스, 보호필름

✓ 주요기능

- 언어 표현에 어려움이 있는 장애인과 일반인 사이의 의사소통을 도와주기 위해 기획된 제품임
- 개인, 기초생활, 가정생활 등 8개 범주의 3000여개 그림상징(국제 공용 기준)을 '명사+조사+하위 동사' 형태로 제공하여 그림상징을 누르고 출력되는 음성을 통해 의사소통
- 내 의사 소통판으로 직접 사진을 찍고 음성을 녹음하여 나만의 의사소통판 편집 기능
- TTS 기능-키패드에 직접 문장을 입력하면 With Talk에서 음성이 출력되는 '대화하기' 기능
- STT 상대방 목소리를 문자로 표현 해주는 기능 (네트워크(WIFI, 테더링, LTE) 연결시 가능 함)
- 중증 장애로 키보드나 터치가 어려운 분들을 위한 Keyboard 스캐닝 기능을 이용한 의사소통기능 제공
- 블루투스 스피커를 사용 소음이 심한곳에서도 의사표현이 가능. 마우스 적용가능 (유선,블루투스)
- 수화익히기 등 각종 어플을 활용한 교육기능

✓ 제품특징

- 구어활동에 어려움을 겪는 분들이나 언어발달이 늦은 아동의 의사소통 능력을 향상
- 그림 상징을 통해 빠른 의사소통이나 간편 대화가 가능
- 스캐닝 기능 및 블루투스 마우스를 통한 중증 장애인용 입력 시스템 제공
- 대화하기 기능 문장 및 문구 원하는 만큼 추가 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 구어활동에 어려움을 겪는 분들이나 언어발달이 늦은 아동의 의사소통 능력을 향상
- 그림 상징을 통해 빠른 의사소통이나 간편 대화가 가능
- 스캐닝 기능 및 블루투스 마우스를 통한 중증 장애인용 입력 시스템 제공
- 비 장애인과 의사 소통 가능 (TTS, STT 기능)

✓ 사용가능대상

- 자신의 의사를 적절하게 표현 할 수 없는 언어, 청각장애인, 지적, 발달장애인, 지체뇌병변 중복장애인

✓ 사용방법

- 전원버튼 누른후 전원이 들어오도록 한다
- 본인 사용하고자 하는 어플을 터치하여 선택한다.
- 사용시 중증 장애로 화면에 직접 터치가 어려울 경우 스캐닝 기능과 마우스, 스위치를 활용한다
- 사용자 의지에 따라 다양한 어플을 활용, 사용 용도가 다양함 (수화배우기, 화상전화)

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지

✓ 최초출시일 : 2013년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 8월

위드톡 펜 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 구어활동에 어려움을 겪는 분이나 언어발달이 늦은 장애인의 의사소통능력을 향상시키기 위해 국제 표준 규격에 맞춘 그림을 활용한 의사 소통에 가장 최적화된 보완 대체 의사 소통(AAC)기기

개인부담금 일반 297,000원 / 기초수급대상·차상위계층 148,500원

제 조 원 (주)핑키밍키/대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배·우편 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)핑키밍키 / 담당자 : 김승철
(153-803) 서울시 금천구 가산디지털 1로 142, 414호 (가산동, 더스카이밸리1차)
Tel : 070-4481-4877 / FAX : 02-814-4840 / www.goodedu.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 014530-02-026091 예금주명 : (주)핑키밍키

✓ 제품사양

- 규격: 254.3x165.8x6.3(mm),523g
- OS: Android 13
- CPU: Octacore
- RAM: 6 GB
- 내장메모리:128GB 외장 1TB지원
- 디스플레이 : 11인치
1920x1200 해상도 (WUXGA)
- 무선통신 : 802.11 b/g/n Wifi or LTE
- 배터리 : 8,000 mAh
- 카메라 : 5M Pixel 전면 카메라 / 8M Pixel 후면 카메라

✓ 구성품목

- 스마트패드, 블루투스키보드
- With Talk Ver 3.0 학습메뉴얼
- 스마트패드 케이스, 보호필름
- 멀티터치펜-SD CARD 64GB

✓ 주요기능

- 언어 표현에 어려움이 있는 장애인과 일반인 사이의 의사소통을 도와주기 위해 기획된 제품임
- 개인, 기초생활, 가정생활 등 8개 범주의 3000여개 그림상징(국제 공용 기준)을 '명사+조사+하위 동사' 형태로 제공하여 그림상징을 누르거나, PEN으로 직접 입력하여 음성을 통해 의사소통
- 내 의사 소통판으로 직접 사진을 찍고 음성을 녹음하여 나만의 의사소통판 편집 기능
- TTS 기능 : 문장 입력(키패드+ s pen)하면 With Talk에서 음성이 출력되는 '대화하기' 기능
- STT 상대방 목소리를 문자로 표현 해주는 기능 (네트워크(WIFI, 테더링, LTE) 연결시 가능 함)
- 중증 장애로 키보드나 터치가 어려운 분들을 위한 Keyboard 스캐닝 기능을 이용한 의사소통기능 제공
- 블루투스 스피커를 사용 소음이 심한곳에서도 의사표현이 가능. 마우스 적용가능 (유선,블루투스)
- DEX 기능으로 업무 처리에 활용

✓ 제품특징

- 구어활동에 어려움을 겪는 분들이나 언어발달이 늦은 아동의 의사소통 능력을 향상
- 그림 상징을 통해 빠른 의사소통이나 간편 대화가 가능
- 스캐닝 기능 및 블루투스 마우스를 통한 중증 장애인용 입력 시스템 제공
- 대화하기 기능 문장 및 문구 원하는 만큼 추가 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 구어활동에 어려움을 겪는 분들이나 언어발달이 늦은 아동의 의사소통 능력을 향상
- 그림 상징을 통해 빠른 의사소통이나 간편 대화가 가능
- 스캐닝 기능 및 블루투스 마우스를 통한 중증 장애인용 입력 시스템 제공
- 비 장애인과 의사소통 가능 (TTS, STT 기능)

✓ 사용가능대상

- 자신의 의사를 적절하게 표현 할 수 없는 언어, 청각장애인, 지적, 발달장애인, 지체 뇌병변 중증장애인

✓ 사용방법

- 전원버튼 누른 후 전원이 들어오도록 한다
- 본인 사용하고자 하는 어플을 터치하여 선택한다.
- 사용시 중증 장애로 화면에 직접 터치가 어려울 경우 스캐닝 기능과 마우스, 스위치를 활용한다
- 사용자 의지에 따라 다양한 어플을 활용, 사용 용도가 다양함 (수화배우기, 화상전화)

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지

✓ 최초출시일 : 2013년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 8월

키즈보이스스마트+ [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 뇌병변, 지적장애, 자폐성 장애, 언어장애, 중증 중복장애인, 청각장애인 등 모든 의사소통장애인이 사용할 수 있는 의사소통기기로 의사소통의 문제로 발생할 수 있는 문제행동이나 분노 등을 줄여주고, 언어발달 촉진, 언어습득 훈련, 발성발어 촉진, 발음훈련을 위한 기기로 한국형 그림상징과 사진 등을 이용하여 누구나 쉽게 사용할 수 있는 보완대체의사소통기기

개 인 부 담 금 일반 286,000원 / 기초수급대상·차상위계층 143,000원

제 조 원 유비큐판매(주)/대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/방문 설치

납 품 기 간 20일

납 품 자 유비큐판매(주) / 담당자 : 설민환

인천광역시 부평구 부평북로313 (태화APT상가 202호)

Tel : 010-9590-6003 / FAX : 031-996-6614 / www.aackorea.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 104638-01-002398 예금주명 : 유비큐판매(주)

✓ 제품사양

- 크기 : 254×165×6.5(mm)
- 무게 : 523g
- 운영체제 : Window/Android
- CPU : 옥타코어2.0~2.4GHz
- Main Memory : DDR4 6GB이상
- Display : 10.9인치 터치모니터
- 사운드 : 스테레오, 내장 마이크
- 배터리 : 리튬폴리머 4800mAh
- 메모리 : 128GB이상

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 사용설명서 1매
- 파우치 1개
- 충전기 1개

✓ 주요기능

- 원하는 문장을 입력해서 음성으로 재생하는 문장 의사소통 기능
- 그림상징 및 어휘를 탑재하여 화면을 터치하는 사용
- 문자를 음성으로 읽어주는 음성합성엔진(TTS) 탑재하여 음성출력
- 터치스크린에 직접 필기하여 음성출력하는 기능
- 음성인식기능
- 어휘/그림상징 편집(추가/삭제/수정기능, 음성 녹음 및 재생 기능, 면분할 기능, 외부소리 저장기능 등 다양한 기능 제공

✓ 제품특징

- 국내 연구진이 개발한 한국형 그림상징(K-PCS) 탑재(3200개)
- 멀티페이지 카테고리 만들기, Search 기능, 터치스크린 인터페이스 제공으로 사용이 편리
- 그림 어휘 추가 기능
- 가벼워서 보관 및 관리용이
- 간편한 휴대성과 이동성

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어치료 및 재활 치료 등의 도구로 활용될 수 있어 구어의 발달을 촉진하여 대화술의 발전 가능
- 문장이해력 향상으로 인터넷 등을 활용할 수 있는 능력향상
- 의사소통에 어려움을 겪고 있는 아동 또는 성인의 의사소통을 좀 더 쉽게 해주어 삶의 질 향상
- 의사소통 실패로 인한 좌절을 줄이고, 문제행동 감소에 도움
- 다양한 상호작용 안에서 효과적으로 참여하여 사회적 향상 및 더 많은 일반 활동 참여 가능

✓ 사용가능대상

- 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 뇌병변, 지적장애, 자폐성장애, 언어장애, 중증·중복장애인, 청각장애인 등 모든 의사소통장애인

✓ 사용방법

- 파워(오른쪽 상단)를 누른 후 그림상징 의사소통을 사용하려면 [시작], 문장으로 의사소통을 하려면 [대화하기]를 선택
- 의사소통이 필요한 상황에 해당하는 그림을 선택(화면터치)
- 어휘를 누른 후 하단의 관련 동사를 눌러 의사소통(음성으로 터치와 동시에 출력됨)
- [대화하기]를 눌러 문장을 입력하여 [소리듣기]로 음성을 출력

✓ 최소PC요구사항

- S펜 필기기능

✓ 사용 시 유의사항

- 본체에 무리한 충격을 가하면 고장의 원인이 됩니다
- 젖은손이나 세척제등은 표면 및 내부를 오염시킵니다

✓ 최초출시일 : 2024년 12월 10일

키즈보이스윈도우 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 뇌병변, 지적장애, 자폐성 장애, 언어장애, 중증 중복장애인, 청각장애인 등 모든 의사소통장애인이 사용할 수 있는 의사소통기기로 의사소통의 문제로 발생할 수 있는 문제행동이나 분노 등을 줄여주고, 언어발달 촉진, 언어습득 훈련, 발성발어 촉진, 발음훈련을 위한 기기로 한국형 그림상징과 사진 등을 이용하여 누구나 쉽게 사용할 수 있는 보완대체의사소통기기

개인부담금 일반 176,000원 / 기초수급대상·차상위계층 88,000원

제조원 유비큐판매(주)/대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납품방법 택배/방문 설치 **납품기간** 20일

납품자 유비큐판매(주) / 담당자 : 설민환
인천광역시 부평구 부평북로313 (태화APT상가 202호)
Tel : 010-9590-6003 / FAX : 031-996-6614 / www.aackorea.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 104638-01-002398 예금주명 : 유비큐판매(주)

✓ 제품사양

- 크기 : 252×167×100(mm)
- 무게 : 586g
- 운영체제 : Window/Android
- CPU : intel 셀레론 N4000이상
- Main Memory : DDR3 4GB
- Display : 10인치 터치모니터
- 사운드 : 스테레오, 내장 마이크
- 배터리 : 리튬폴리머 4800mAh
- 메모리 : 64GB

✓ 구성품목

- 본체 1대
- 사용설명서 1매
- 파우치 1개
- 충전기 1개

✓ 주요기능

- 원하는 문장을 입력해서 음성으로 재생하는 문장 의사소통 기능
- 그림상징 및 어휘를 탑재하여 화면을 터치하는 사용
- 문자를 음성으로 읽어주는 음성합성엔진(TTS) 탑재하여 음성출력
- 어휘/그림상징 편집(추가/삭제/수정기능, 음성 녹음 및 재생 기능, 면분할 기능, 외부소리 저장기능 등 다양한 기능 제공

✓ 제품특징

- 국내 연구진이 개발한 한국형 그림상징(K-PCS) 탑재(3200개)
- 멀티페이지 카테고리 만들기, Search 기능, 터치스크린 인터페이스 제공으로 사용이 편리
- 그림 어휘 추가 기능
- 가벼워서 보관 및 관리용이
- 간편한 휴대성과 이동성

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어치료 및 재활 치료 등의 도구로 활용될 수 있어 구어의 발달을 촉진하여 대화술의 발전 가능
- 문장이해력 향상으로 인터넷 등을 활용할 수 있는 능력향상
- 의사소통에 어려움을 겪고 있는 아동 또는 성인의 의사소통을 좀 더 쉽게 해주어 삶의 질 향상
- 의사소통 실패로 인한 좌절을 줄이고, 문제행동 감소에 도움
- 다양한 상호작용 안에서 효과적으로 참여하여 사회적 향상 및 더 많은 일반 활동 참여 가능

✓ 사용가능대상

- 조음 및 음성장애로 자신의 의사를 적절하게 표현할 수 없는 뇌병변, 지적장애, 자폐성장애, 언어장애, 중증·중복장애인, 청각장애인 등 모든 의사소통장애인

✓ 사용방법

- 파워(오른쪽 상단)를 누른 후 그림상징 의사소통을 사용하려면 [시작], 문장으로 의사소통을 하려면 [대화하기]를 선택
- 의사소통이 필요한 상황에 해당하는 그림을 선택(화면터치)
- 어휘를 누른 후 하단의 관련 동사를 눌러 의사소통(음성으로 터치와 동시에 출력됨)
- [대화하기]를 눌러 문장을 입력하여 [소리듣기]로 음성을 출력

✓ 최소PC요구사항

- 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 본체에 무리한 충격을 가하면 고장의 원인이 됩니다
- 젖은손이나 세척제등은 표면 및 내부를 오염시킵니다

✓ 최초출시일 : 2023년 1월

프록스토커(Proxtalker) [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 RFID 기술을 사용하여 RF 태그에 저장된 해당 어휘를 출력하는 언어훈련, 학습 및 의사소통보조장치로 청각, 발달, 뇌병변, 자폐, 시각, 기타 발생 및 의사소통의 어려움이 있는 모든 사람이 사용할 수 있는 보조기기입니다

개 인 부 담 금 일반 1,202,000원 / 기초수급대상·차상위계층 350,500원

제 조 원 LoganTech / 미국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 방문 설치

납 품 기 간 30일

납 품 자 월비 / 담당자: 김준혁
(06176) 서울특별시 강동구 천호대로 182길 12, 201호(둔촌동, 사인하우스)
Tel : 010-8258-7807 / FAX : 02-6455-1258 / www.willbe.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 013102-01-009626 예금주명: 김준혁(월비)

✓ 제품사양

- 본체 : 285 x 175 x 37 mm, 백팩 : 330 x 178 x 89 mm
- 배터리 : C 듀라셀 배터리 x 4 ea 사용
- RF 태그 : 37 x 37 mm / 버튼 : 37 x 37 mm
- 버튼 활성화 압력 : 18oz(5N)

✓ 구성품목

- 본체 1대 / 백팩 1개 / 프로그래밍태그 2개
- 스피크 올 태그 1개 / 사전 녹음된 스몰태그(영어) 80개
- 스몰빈 태그 120개 / 태그용 종이라벨 2장
- 종이라벨보호용 필름 2장

✓ 주요기능

- 태그당 2초에서 최대 8초까지 녹음
- RF 프로그래밍 태그를 사용하여 불꽃조절, 녹음, 녹음지우기, 배터리 잔량 확인을 할 수 있습니다
- RF 태그에 그림 상징 또는 글자 뿐 만 아니라 촉각기호가 있는 제품을 태그에 부착하여 촉각 훈련이 필요하거나 또는 시각 장애를 동반한 경우에도 사용할 수 있습니다.

✓ 제품특징

- 견고하고 방수기능이 있으며 사용이 쉽습니다
- 5개의 버튼이 있어 태그 순서를 변경하여 문장구조를 배우고 바른 문장 훈련이 가능합니다
- 각각의 버튼에 놓여 있는 태그만 재생할 수 도 있고, 버튼에 올려진 태그(최대4개)를 한 번에 재생할 수 있습니다.
- RF 프로그래밍 태그를 사용하여 내장된 마이크로 간단하게 단어또는 문장을 녹음할 수 있습니다.
- 태그를 모아 놓은 벨크로판을 넘기면서 직관적으로 원하는 단어를 사용자가 직접 찾을 수 있습니다
- 백팩을 제공하여 보관 및 이동하여 사용이 간편합니다
- RF 태그는 반복적인 녹음 및 지우기가 가능합니다
- 녹음을 위한 별도의 소프트웨어나 컴퓨터가 필요하지 않습니다

✓ 활용방안(기대효과)

- 상지를 사용하지 못하여 컴퓨터기기 활용이 어려운 분들에게 정보접근성을 향상 시킬 수 있습니다.

✓ 사용가능대상

- 조음 및 음성장애등으로 자신의 의사를 적절하게 표현하기 어려운 뇌성마비, 뇌졸중, 정신지체, 발달장애, 언어장애, 자폐성 장애, 청각 장애인등 의사소통에 어려움을 겪는 모든 장애인 및 언어훈련이 필요한 시각장애인

✓ 사용방법

- ① 녹음할 RF태그를 5개 버튼 중 한 곳에 올려놓습니다.
- ② 녹음 프로그래밍 태그를 5개 버튼 중 한 곳에 놓고 눌렀다 땁니다.
- ③ 녹음할 태그를 누르라고 하는 영어 음성이 나오면 태그를 계속 누릅니다.
- ④ 녹음을 시작하는 영어메시지와 함께 빕 소리가 나면 녹음이 시작됩니다
- ⑤ 최대 8초 까지 녹음이 가능하며, 녹음이 끝나면 누르고 있던 태그를 놓습니다.
- ⑥ 빕빕 소리가 나며 잠시기다리라는 영어메시지가 나온 후 빕빕빕 소리가 나면 녹음이 완료 됩니다.
- ⑦ 녹음된 RF 태그를 5개 버튼 중 한 곳에 놓고 태그를 누르면 녹음된 소리가 재생이 됩니다.
- ⑧ 5개 버튼 중Speak all 태그를 한 곳에 놓고 다른 4개 버튼에 녹음된 태그를 올려놓은 후 Speak all 태그를 누르면, 좌 측에서 우 측 순서로 올려진 태그에 녹음된 소리가 재생됩니다

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 임의 개조, 분리, 수리 금지
- RF 태그는 태그별 고유번호가 있어서, 태그를 추가 구매 할 경우 중복되지 않은 번호로 구매하셔야 합니다.

✓ 최초출시일 : 2010년

마스터 인지력 한글 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 마스터 한글 인지력은 키보드 및 마우스 조작이 원활치 않은 장애인을 위해 정전식 터치패드(태블릿 PC)를 이용해 애니메이션, 사진 및 한글 초성 퀴즈 등을 통하여 한글의 기본개념 및 읽기, 쓰기에 도움을 줄 수 있는 프로그램임.

개인부담금 일반 258,000원 / 기초수급대상·차상위계층 129,000원

제 조 원 (주)세라핌/대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 방문 설치

납 품 기 간 14일

납 품 자 주식회사 세라핌 / 담당자 : 이승우
(11810) 경기도 의정부시 오목로 91번길 18
Tel : 010-8200-6077 / FAX : 070-7966-5694

개인부담금계좌번호 (국민은행) 218301-04-397386 예금주명 : (주)세라핌

✓ 제품사양

- 모델명 : 갤럭시탭 S9FE
- 외관 사양 : 크기 : 185.4 * 285.4 * 6.5, 무게 : 627g
- 프로세서 : CPU : Octa-Core,
- CPU 속도 : 2.4GHz, 2GHz
- 디스플레이 : 크기 : 315mm, 해상도 : 2560 * 1600 (WQXGA), 종류 : TFT
- 카메라
 - 후면 카메라 화소 : 8.0 MP + 8.0 MP
 - 전면 카메라 화소 : 12.0 MP
 - 동영상 녹화 해상도 : UHD 4K (3840 * 2160) @30fps
- 메모리/스토리지 : 메모리 : 8GB, 스토리지 : 128GB / 256GB 사용가능

✓ 구성품목

- 태블릿PC본체, 사용설명서, 배터리, 충전기, 휴대용 파워치, 액정강화필름 등

✓ 주요기능

- 마스터 한글 인지력은 애니메이션, 사진 및 한글 초성 퀴즈 등을 통하여 한글의 기본개념 및 읽기, 쓰기에 도움을 줄 수 있는 프로그램임.

✓ 제품특징

- 마스터 인지력 한글은 총 5종의 한글 게임을 통하여 한글 및 인지력 향상에 도움을 줄 수 있도록 목적을 두고 있음.
 - 1종은 한글 초성 퀴즈를 통하여 한글의 흥미를 가지고 훈련할 수 있음.
 - 2종은 자주 사용하는 명사를 위주로 가정에서 자주 사용하는 문장 프로그램임.
 - 3종과 4종은 동물 이름 및 교통신단의 종류를 통하여 단어를 인지할 수 있는 프로그램임.
 - 5종은 단계별 종합평가 및 학습 프로그램으로 1, 2, 3, 4단계를 반복훈련 평가할 수 있음.

✓ 활용방안(기대효과)

- 한글, 키보드 사용이 원활치 않은 사용자에게 터치패드를 통하여 교육 능력을 향상시킴에 목적을 두고 있음(정전식 터치펜 내장)
- 마스터 인지력 한글을 통하여 애니메이션 및 사진을 통하여 한글의 기본개념 및 읽기, 쓰기에 도움을 줄 수 있는 프로그램임.

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련을 필요로 하는 정신지체(지적장애) 및 자폐성 장애인
- 의사소통에 어려움이 있는 언어 장애인
- 언어 훈련을 필요로 하는 지체장애(뇌성마비)인

✓ 사용방법

- 기기의 전원을 켜다
- 활동 주제를 선택한다
- 대상자의 수준에 맞춰 설정
- 주제 활동
- 종합 평가
- 활동 종료

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2024년 10월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 10월 1일

메시지스톤 에듀 시 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



- 제 품 개 요**
- 청각·언어장애인을 위한 인공지능 실시간 문자통역보조기기
 - 대면·등교 상황뿐만 아니라 비대면·온라인 상황 모두 활용이 가능하며, 최신 노트북 형태로 사용이 편리함
 - 화상회의·원격·온라인수업 실시간 자막 서비스 제공. 듀얼 창 모드로 시인성 확보

개 인 부 담 금 일반 680,000원 / 기초수급대상·차상위계층 220,000원

제 조 원 주식회사 허브티 / 대한민국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 주식회사 허브티 / 담당자 : 조성하
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 107호 (문지동)
Tel : 1660-1676 / FAX : 0503-8379-2812 / www.hubt.co.kr

개인부담금계좌번호 (하나은행) 661-910013-19104 예금주명 : 주식회사 허브티

✓ 제품사양

- 노트북모델명 : 2026 갤럭시북
- 마이크규격 : 20.6 x 16.0 x 47.9mm
- 마이크무게 : 약 11g
- 자막처리규격 : 94 x 52 x 22 (mm)
- 자막처리무게 : 약 100g
- 무선주파수 : 2402~2480MHz
- OS : Windows 11 이상
- 정격전압 : 3.7VDC
- 배터리 용량 : 240mAh
- 지원 프로토콜 : 블루투스 / USB-A Type

✓ 구성품목

- 메시지스톤에듀시 마이크 본체, 메시지스톤에듀시 자막처리기
- 메시지 수신용 디바이스(노트북), 아답터, 충전선, 전용파우치

✓ 주요기능

- 대면·비대면 상황에 모두 활용이 가능하며, 인공지능 음성인식 엔진과 필터링 기술로 인하여 높은 인식률의 문자통역을 제공
- 대면시에는 전용 마이크를 통해 상대방의 음성을 텍스트로 변환하여 보여줌
- 비대면·온라인상황에서는 실시간 자막 서비스 제공. 듀얼 창 모드로 시인성 확보
- 전용마이크가 가볍고 사용이 간편함. 무선연결로 발화자와 사용자의 거리제한 없음 (최대 20m)

✓ 제품특징

- 포스트코로나, 대면·비대면 병행시대에 청각장애인을 위한 인공지능 문자통역 보조기기
- 기존 메시지스톤 에듀 제품에 인공지능 음성인식엔진과 필터링 기술을 더하여 더 정확한 문자통역을 제공
- 대면·비대면 상황에 모두 활용이 가능하며, Windows OS 사용으로 다양하게 활용이 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 포스트 코로나 시대의 청각·언어장애인의 온라인 정보접근 및 학습에 정보전달의 질과 인식을 상승을 기대

✓ 사용가능대상

- 청각장애인(중증, 경증), 농아인, 언어장애인(중증, 경증), 청각·언어 중복장애인, 발달장애인

✓ 사용방법

- ① 메시지스톤 에듀시 노트북의 전원을 켜다
- ② 대면상황에서 사용시에는 메시지스톤 마이크를 블루투스로 연결하여, 발화자 근처에 마이크를 위치시킨다
- ③ 전용 어플리케이션을 실행하여 문자통역서비스를 제공받는다
- ④ 비대면상황에서 사용시에는 메시지스톤 에듀시 자막처리기를 USB로 연결한다
- ⑤ 온라인으로 서비스 받을 어플 (유튜브, 줌 등)과 전용 어플리케이션을 실행하여 문자통역서비스를 제공받는다

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2021년 1월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 1일

보듬 인지력 한글 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 보듬 인지력 한글은 14인치 이상의 노트북을 이용하여 애니메이션, 사진 및 한글 초성 퀴즈 등을 통하여 한글의 기본개념 및 읽기, 쓰기에 도움을 줄 수 있는 프로그램임.

개 인 부 담 금 일반 264,000원 / 기초수급대상·차상위계층 132,000원

제 조 원 (주)세라핌 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 방문 설치 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 주식회사 세라핌 / 담당자 : 이승우
(11810) 경기도 의정부시 오목로 91번길 18
Tel : 010-8200-6077 / FAX : 070-7966-5694

개인부담금계좌번호 (국민은행) 218301-04-397386 예금주명 : (주)세라핌

✓ 제품사양

- 14인치 노트북컴퓨터
- 크기 : 309 × 209 × 15.8(mm)
- 무게 : 1250g
- 운영체제 : Windows11
- CPU : intel Pentium silver quad클러
- RAM : DDR4 8GB 이상
- 내장메모리 : SSD 128GB 이상
- Display : 14인치 모니터
- 해상도 : 1920 x 1080 이상
- 배터리 : 리튬폴리머 5000mAh
- 카메라 : 2.0M Pixel 전면 카메라
- 블루투스 5.0 지원

✓ 구성품목

- 본체, 사용설명서, 배터리, 충전기, 가방, 마우스, 마우스패드 등

✓ 주요기능

- 보듬 인지력 한글은 애니메이션, 사진 및 한글 초성 퀴즈 등을 통하여 한글의 기본개념 및 읽기, 쓰기에 도움을 줄 수 있는 프로그램임.

✓ 제품특징

- 프로그램 3종으로 구성되어 있으면 1종은 인지능력 향상과 재활, 발달장애인을 위한 인지력 향상 프로그램으로, 6가지 영역의 인지기능을 습득하거나 증진시킬 수 있도록 개발된 프로그램으로 구성되어 있고, 1종은 언어 발달 지체, 장애아동 및 실어증 환자를 위한 언어 치료 프로그램, 1종은 수 세기, 익히기 기초부터 시작하여 화폐 단위 익히기 등 일상생활에 필요한 수와 관련된 기본적인 개념을 학습할 수 있는 프로그램으로 구성되어 있음.

✓ 활용방안(기대효과)

- 일상에서 터치패드(태블릿PC) 사용이 원활치 않은 장애인에게 14인치 이상의 노트북을 가지고, 간단한 마우스 클릭만으로 한글에 어려움을 겪는 장애인에게 일상생활에서 자주 접하는 장소별로 가장 많이 사용하는 익숙한 단어로, 학습의 흥미를 가지도록 장소별 단어 교육을 통하여 학습 능력을 극대화하였으며, 애니메이션을 활용해 사물의 이해 및 낱말의 이해를 돕도록 하는 프로그램임.

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련을 필요로 하는 정신지체(지적장애) 및 자폐성 장애인
- 의사소통에 어려움이 있는 언어 장애인
- 언어 훈련을 필요로 하는 지체장애(뇌성마비)인

✓ 사용방법

- 기기의 전원을 켜다
- 활동 주제를 선택한다
- 대상자의 수준에 맞춰 설정
- 종합 평가
- 활동 종료
- 주제 활동

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 충전기 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ **최초출시일 : 2024년 10월 1일**

✓ **최근 업그레이드 : 2024년 10월 1일**

소리이음 AI [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 의사소통이 어려운 장애인과 비장애인의 원활한 의사소통을 지원하며, AI 기술을 활용한 사용자 맞춤형 의사 소통판 생성 기능과 음성인식, 손 글씨 입력 기능 및 발달장애인을 위한 AI 기반의 언어훈련을 제공합니다.

개인부담금 일반 286,000원 / 기초수급대상·차상위계층 143,000원

제조원 (주)소프트젠 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)소프트젠 / 담당자 : 김연표

(13449) 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교글로벌비즈니스센터 B동 707호
Tel : 02-6462-0420 / FAX : 031-604-0041

개인부담금계좌번호 (우체국) 예금주명 : (주)소프트젠

✓ 제품사양

- 제품 HW 사양 태블릿 PC : 10.9인치 Android 단말기

화면 해상도	크기	277 mm	프로세스	CPU 종류	Octa-Core
	해상도	2112 x 1320 (WUXGA)		CPU 속도	2.4 GHz, 2GHz
메모리	메모리 (GB)	6 GB	외관사양	운영체제	
	스토리지 (GB)	128 GB		Android	
	외장 스토리지 지원	MicroSD (최대 2 TB)		크기 (세로x가로x 두께, mm)	168.7 x 257.1 x 6.9
			무게 (g)	524	

- 제품 SW 사양
 - 프로그램명 : 소리이음 AI (Android)
 - 최소구동조건 : Android OS 8.0 이상, 한국어 TTS 지원

✓ 구성품목

- 사용설명서
- 보완 대체 의사소통프로그램 탑재 태블릿 1EA
- 태블릿 거치대 겸용 커버 1EA
- 충전기 및 케이블

✓ 주요기능

- 직관적이고 편리한 화면 구성과 사용자 친화적인 UI/UX
- 장소 중심의 어휘 분류: 학교, 병원, 마트 등 일상적인 장소별로 어휘를 분류하여 해당 환경에서 바로 사용할 수 있는 실용성 향상
- 발달장애인 맞춤형 문장 구성:복잡한 조사나 문법적 완성도 보다는 낱말 조합에 집중하여 쉽고 명확한 의사표현 가능
- 풍부한 전용 상징 데이터 : 발달장애인의 이해도를 높이기 위해 제작된 4,000여 개의 전용 그림 상징을 탑재하여 보다 풍부한 시각적 자료를 제공
- 인공지능 (AI) 기반의 의사소통판 자동생성 및 STT, 언어훈련 기능 제공

✓ 제품특징

- 자주 사용하는 상징와 의사 소통판을 홈 메뉴에서 자동으로 분류하여 배치하여 사용자에게 최적화되는 UI 환경 제공
- (AI 기능) 특정 장소나 상황(예: "학교", "병원") 등 주제어만 입력하면 시가 관련 핵심 어휘를 추출하여 의사소통판을 즉시 구성
- (AI 기능) 음성인식 기능 기반으로 STT (Speech-To-Text) 기능을 제공하여 청각장애인을 위한 양방향 소통 (상징과 텍스트 양방향)이 가능

- (AI 기능) 태블릿에 내장된 AI 엔진을 이용하여 AI 선생님과 함께 의사소통판과 언어훈련을 함께 수행 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 대부분의 기존 AAC 솔루션은 보호자나 언어치료사가 수천 개의 상징을 일일이 검색하고 상황에 맞게 배치해야 하는 수동적인 세팅 방식에 머물러 있어, 현장에서 요구되는 즉각적인 대처가 불가능하고 돌봄 제공자에게 과도한 시간과 노력을 요구함.
- 인공지능 (AI) 기술을 도입하여 상황별 의사소통판을 실시간으로 자동 구성하고, 사용자의 서툰 음성도 인식하고, AI 교사의 도움을 받아 스스로 언어훈련을 할 수 있는 지능형 솔루션이 필요
- 인공지능(AI) 기반의 맞춤형 훈련을 통해 발달장애인의 능동적인 사회 참여와 인지 발달을 촉진하고, 나아가 보호자와 특수교사의 심리적·물리적 부담을 획기적으로 경감시키는 사회적, 기술적 혁신을 달성할것으로 기대

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련을 필요로 하는 정신지체(지적장애) 및 자폐성장애 아동 1~3급
- 어휘에 대한 발생발화 훈련이 필요로 하는 청각장애 아동 1~3급
- 의사소통에 어려움이 있는 언어장애 아동 1~3급
- 언어 훈련을 필요로 하는 지체장애(뇌성마비) 아동 1~3급

✓ 사용방법

- ① 제공된 태블릿PC의 전원을 켜다.
 - ② 설치된 소리이음 AI 프로그램을 터치하여 실행한다.
 - ③ 의사소통이 필요한 상황을 터치하여 자신의 의사를 음성 메시지로 출력한다.
 - ④ 언어훈련 메뉴를 선택하여 AI 선생님의 지도하에 언어훈련을 수행한다.
- ※ 소프트웨어 상세 실행 내용 및 방법은 사용설명서에 기술되어 있음

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리 금지
- 충격으로 인한 파손 주의

✓ **최초출시일** : 2026년 1월 1일

✓ **최근 업그레이드** : 2026년 4월 1일

소리이음 시 라이트 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제품개요 의사소통이 어려운 장애인과 비장애인의 원활한 의사소통을 지원하며, AI 기술을 활용한 사용자 맞춤형 의사 소통판 생성 기능과 음성인식, 손 글씨 입력 기능 및 발달장애인을 위한 시 기반의 언어훈련을 제공합니다.

개인부담금 일반 198,000원 / 기초수급대상·차상위계층 99,000원

제조원 (주)소프트젠 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납품방법 택배

납품기간 14일

납품자 (주)소프트젠 / 담당자 : 김연표
(13449) 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교글로벌비즈니스센터 B동 707호
Tel : 02-6462-0420 / FAX : 031-604-0041

개인부담금계좌번호 (우체국) 예금주명 : (주)소프트젠

✓ 제품사양

- 제품 HW 사양 : 11인치 Android 단말기

화면 해상도	크기	278.2 mm	프로세스	CPU 종류	Octa-Core
	해상도	1920 x 1200 (WUXGA)		CPU 속도	2.5 GHz, 2 GHz
메모리	메모리 (GB)	6 GB	외관사양	운영체제	Android
	스토리지 (GB)	128 GB		크기 (세로x가로x두께, mm)	168.7 x 257.1 x 6.9
	외장 스토리지 지원	MicroSD (최대 2TB)		무게 (g)	477

- 제품 SW 사양
 - 프로그램명 : 소리 이음 시 라이트 (Android)
 - 최소구동조건 : Android OS 8.0 이상, 한국어 TTS 지원

✓ 구성품목

- 사용설명서
- 보안 대체 의사소통프로그램 탑재 태블릿 1EA
- 충전기 및 케이블

✓ 주요기능

- 직관적이고 편리한 화면 구성과 사용자 친화적인 UI/UX
- 장소 중심의 어휘 분류: 학교, 병원, 마트 등 일상적인 장소별 어휘를 분류하여 해당 환경에서 바로 사용할 수 있는 실용성 향상
- 발달장애인 맞춤형 문장 구성:복잡한 조사나 문법적 완성도 보다는 낱말 조합에 집중하여 쉽고 명확한 의사표현 가능
- 풍부한 전용 상징 데이터: 발달장애인의 이해도를 높이기 위해 제작된 4,000여 개의 전용 그림 상징을 탑재하여 보다 풍부한 시각적 자료를 제공
- 인공지능 (AI) 기반의 의사소통판 자동생성 및 언어훈련 기능 제공

✓ 제품특징

- 자주 사용하는 상징과 의사 소통판을 홈 메뉴에서 자동으로 분류하여 배치하여 사용자에게 최적화되는 UI 환경 제공
- (AI 기능) 특정 장소나 상황(예: "학교", "병원") 등 주제어만 입력하면 시가 관련 핵심 어휘를 추출하여 의사소통판을 즉시 구성
- (AI 기능) 태블릿에 내장된 AI 엔진을 이용하여 시 선생님과 함께 의사소통판과 언어훈련을 함께 수행 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 대부분의 기존 AAC 솔루션은 보호자나 언어치료사가 수천 개의 상징을 일일이 검색하고 상황에 맞게 배치해야 하는 수동적인 세팅 방식에 머물러 있어, 현장에서 요구되는 즉각적인 대처가 불가능하고 돌봄 제공자에게 과도한 시간과 노력을 요구함.
- 인공지능 (AI) 기술을 도입하여 상황별 의사소통판을 실시간으로 자동 구성하고, AI 교사의 도움을 받아 스스로 언어훈련을 할 수 있는 지능형 솔루션이 필요
- 인공지능(AI) 기반의 맞춤형 훈련을 통해 발달장애인의 능동적인 사회 참여와 인지 발달을 촉진하고, 나아가 보호자와 특수교사의 심리적·물리적 부담을 획기적으로 경감시키는 사회적, 기술적 혁신을 달성할것으로 기대

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련을 필요로 하는 정신신체(지적장애) 및 자폐성장애 아동 1~3급
- 어휘에 대한 발생발화 훈련이 필요로 하는 청각장애 아동 1~3급
- 의사소통에 어려움이 있는 언어장애 아동 1~3급
- 언어 훈련을 필요로 하는 지체장애(뇌성마비) 아동 1~3급

✓ 사용방법

- ① 제공된 태블릿PC의 전원을 켜다.
- ② 설치된 소리이음 시 라이트 프로그램을 터치하여 실행한다.
- ③ 의사소통이 필요한 상황을 터치하여 자신의 의사를 음성 메시지로 출력한다.
- ④ 언어훈련 메뉴를 선택하여 시 선생님의 지도하에 언어훈련을 수행한다.
※ 소프트웨어 상세 실행 내용 및 방법은 사용설명서에 기술되어 있음

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 임의 개조, 분리, 수리 금지
- 충격으로 인한 파손 주의

✓ 최초출시일 : 2026년 1월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 4월 1일

한뼌상황중심AAC [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 의사소통이 어려운 장애인과 비장애인이 상호 간에 쉽게 접근 가능한 환경 중심 AAC 체계를 통해 장애인들의 의사소통 및 사회관계 발전에 도움을 줄 수 있는 보완대체의사소통 기기

개 인 부 담 금 일반 192,000원 / 기초수급대상·차상위계층 96,000원

제 조 원 (주)한뼌 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 (유)함께걷는발달연구소 / 담당자 : 윤진화
(51143) 경남 창원시 의창구 사림로 63 (함께걷는발달연구소 본점)
Tel : 055-289-6694 / FAX : 055-289-6695

개인부담금계좌번호 (우체국) 110-0144-42645 예금주명 : (유)함께걷는발달연구소

✓ 제품사양

- 본체 사양
 - 태블릿PC(패드형)
 - 통신규격 : WIFI 전용 / 운영체제 : 안드로이드 OS
 - 프로세서 : 옥타코어 / 속도 : 2.2GHz
 - 디스플레이 : 10.5인치 / 해상도 : 1920x1200
 - 메모리 : 4G / 저장용량 : 64G
 - 카메라 : 8.0 MP(후면), 5.0 MP(전면) / 블루투스 : v5.1
 - 크기 : 가로 168.7x세로 257.1x두께 6.9(cm) / 무게 : 480g

✓ 구성품목

- 한뼌 상황중심 AAC 프로그램이 탑재된 태블릿PC 1대
- 충전기 1개 / 사용설명서 1부

✓ 주요기능

- 장치 접근성 강화와 유해 매체 차단: 기존의 복잡한 홈 화면에 간소화하여 장애인의 프로그램 접근성을 높였음. 또한 홈 화면에 나오는 프로그램만을 연결할 수 있게 하여 유해 매체를 차단함.
- 일상생활 환경중심 의사소통 목록 제공(기본제공): 13가지 상황(우리동네, 우리몸, 거실, 식당, 화장실, 학교, 냉장고, 옷장, 싱크대, 놀이터, 세면용품, 숙웃서랍장, 신발장)과 의사소통 목록을 통하여 실사용에 필요한 의사소통 목록을 학습 가능
- 실사 사진 입력 가능: 기본제공 목록 외 이용자 환경에서 필요한 목록이나 실사 사진 입력을 통해 활용을 극대화할 수 있음
- 개별화된 의사소통방법 제공: 장애인의 선호 및 수준에 맞는 의사소통 방법을 선택할 수 있도록 함.
- 언어의 학습효과: 클릭하여 제공되는 소리 정보를 통해 단어를 매칭하는 학습기능, 자막기능설정을 통해 그림을 통한 한글학습 가능
- 생활기술의 학습효과: 특정한 장소에서 순차적으로 이루어지는 과제를 쪼개어 훈련하는 생활기술 학습 가능
- 지역사회 활용 접근성 증대: 자막기능을 추가하여 생활소음 상황에서 표현언어가 상대방에게 잘 전달될 수 있도록 함

✓ 제품특징

- 안드로이드 OS 사용으로 일반 태블릿PC로도 활용 가능
- 장애인들의 접근성과 유해 매체 차단을 위한 즐겨찾기 홈 화면 제공
- 대체 의사소통에서 상징의 개수에 따라 사용자에 최적화되는 UI 환경 제공
- 일상생활에서 의사소통이 필요한 기본 13가지 상황제공(우리 동네, 우리 몸, 거실, 식당, 화장실, 학교, 냉장고, 옷장, 싱크대, 놀이터, 세면용품, 숙웃서랍장, 신발장)

- 사용자 환경에 따라 필요한 상황을 자유롭게 추가할 수 있는 기능 제공
- 새로운 단어를 자유롭게 추가 및 삭제할 수 있는 기능 제공
- 생활 소음 속에서 의사소통이 가능할 수 있도록 자막기능 송출 가능 (일반모드, 자막모드 선택가능)

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어 학습효과: 클릭하여 제공되는 소리 정보를 통해 단어를 연결하는 학습이 가능, 자막기능설정을 통해 그림을 통한 한글학습에 활용 가능.
- 생활기술의 학습효과: 동영상 삽입기능을 활용하여 특정한 장소에서 순차적으로 이루어지는 과제를 쪼개어 훈련하는 생활기술 학습 자료로 활용 가능
- 접근성 높은 홈 화면 프로그램, 상징 및 글자 혼합형 대체 의사소통 프로그램, 상징 학습 프로그램 등을 통해 넓은 스펙트럼 장애인의 요구를 충족시킴으로써 장애인들의 의사소통 및 사회관계 발전에 이바지할 수 있을 것으로 기대함

✓ 사용가능대상

- 변별 분류 능력이 있는 의사소통장애, 발달장애, 뇌병변장애, 언어장애인 등

✓ 사용방법

- ① 제공된 태블릿PC의 전원을 켜다.
 - ② 왼쪽 위를 클릭해 비밀번호를 입력한다. (초기비밀번호:0000)
 - ③ 설치된 한뼌 상황중심AAC 프로그램을 터치하여 선택한다.
 - ④ 의사소통이 필요한 상황을 터치하여 자신의 의사를 음성 메시지로 출력한다.
- ※ 소프트웨어 상세 실행 내용 및 방법은 사용설명서에 기술되어 있음

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 즐겨찾기 홈 화면 비밀번호 분실 주의
- 충격으로 인한 파손 주의

✓ 최초출시일 : 2023년 1월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 1일

히어링스톤 AI [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



제 품 개 요 • 인공지능 음성인식엔진과 무선전용 마이크를 제공하여 음성을 인식하여 텍스트로 변환하여 의사소통을 도와주는 의사소통보조기기
 • 청각·언어장애인을 위한 온라인 멀티미디어 청취보조기기 기능, 온라인학습, 강의, 음악, 등의 사용환경에 따른 최적화 모드 제공

개 인 부 담 금 일반 294,000원 / 기초수급대상·차상위계층 147,000원

제 조 원 주식회사 허브티 / 대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 주식회사 허브티 / 담당자 : 조성하
 대전광역시 유성구 문지로 272-16, 107호 (문지동)
 Tel : 1660-1676 / FAX : 0503-8379-2812 / www.hubt.co.kr

개인부담금계좌번호 (하나은행) 661-910013-19104 예금주명 : 주식회사 허브티

✓ 제품사양

- 모델명 : 2026 갤럭시탭 A11 플러스
- 규격 : 168.7 X 257.1 X 6.9mm
- 무게 : 약 480g
- OS : 안드로이드 12.0 이상
- 디스플레이 : 11.0인치
- 배터리 용량 : 7,040mAh
- 전용 마이크 규격 : 150 X 103 X 20mm
- 히어링스톤AI 어플리케이션 탑재

✓ 구성품목

- 히어링스톤AI가 탑재된 태블릿PC 1대, 대화전용 무선마이크 1개, 충전기 1개, 아답터 1개, 사용설명서 1부

✓ 주요기능

- 인공지능 음성인식기술 적용: 인공지능 음성인식엔진과 무선 전용 마이크를 제공하여 음성을 인식하여 텍스트로 변환가능. 최대 15M
- 멀티미디어 재생: 태블릿 PC를 연결하여 업무 또는 학업 환경에 적합한 멀티미디어 매체를 명료하게 수신할 수 있음
- 다양한 환경 지원: 온라인 동영상, 강의, 음악감상 등 다양한 멀티미디어 매체에 따른 최적화된 음향 모드 제공
- 간편한 조작 및 편의성: 활용성이 높은 안드로이드 운영체제의 최신 태블릿 PC를 기본적으로 제공하여 직관적으로 구성

✓ 제품특징

- 포스트코로나 시대에 청각·언어장애인을 위한 온라인 청취 보조기기
- 온라인학습, 강의, 음악, 등의 사용환경에 따른 최적화 모드 제공
- 어플리케이션을 구동할수 있는 최신 태블릿PC 제공

✓ 활용방안(기대효과)

- 포스트 코로나 시대의 청각·언어장애인의 온라인 정보접근 및 학습에 정보전달의 질과 인식을 상승을 기대

✓ 사용가능대상

- 청각장애인(중증, 경중), 농아인, 언어장애인(중증, 경중), 청각·언어 중복장애인

✓ 사용방법

- 사용전 히어링스톤AI 태블릿 PC를 충전시킨다
- 충전이 완료되면 히어링스톤AI의 전원을 켜고, 히어링스톤AI 어플리케이션을 실행
- 화면의 사용안내와 사용설명서를 참고하여 사용함

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2018년 1월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 3월 1일

히어링스톤 AI 대화면 [청각/언어장애유형 | 대화용 장치]



- 제 품 개 요**
- 인공지능 음성인식엔진과 무선전용 마이크를 제공하여 음성을 인식하여 텍스트로 변환하여 의사소통을 도와주는 의사소통보조기기
 - 청각·언어장애인을 위한 온라인 멀티미디어 청취보조기기 기능. 온라인학습, 강의, 음악, 등의 사용환경에 따른 최적화 모드 제공

개 인 부 담 금 일반 296,000원 / 기초수급대상·차상위계층 148,000원

제 조 원 주식회사 허브티 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 주식회사 허브티 / 담당자 : 조성하
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 107호 (문지동)
Tel : 1660-1676 / FAX : 0503-8379-2812 / www.hubt.co.kr

개인부담금계좌번호 (하나은행) 661-910013-19104 예금주명 : 주식회사 허브티

✓ 제품사양

- 디바이스 : 32인치 스탠드일체형 태블릿PC
- 규격 : 1,144 x 734 x 430mm
- 무게 : 약 22kg
- OS : 안드로이드 12.0 이상
- 디스플레이 : 32인치
- 배터리 용량 : 8,000mAh
- 전용 마이크 규격 : 150 X 103 X 20mm
- 히어링스톤AI 어플리케이션 탑재

✓ 구성품목

- 히어링스톤AI가 탑재된 32인치 태블릿PC 1대, 대화전용 무선마이크 1개, 충전기 1개, 아답터 1개, 사용설명서 1부

✓ 주요기능

- 32인치 대화면 디바이스로 시안성, 사용편리성 강화
- 무선 전용 마이크를 제공하여 음성을 인식하여 텍스트로 변환 가능. 최대 20M
- 태블릿 PC를 연결하여 업무 또는 학업 환경에 적합한 멀티미디어 매체를 명료하게 수신할 수 있음
- 온라인 동영상, 강의, 음악감상 등 다양한 멀티미디어 매체에 따른 최적화된 음향 모드 제공

✓ 제품특징

- 32인치 대화면 디바이스와 스탠드 및 배터리 일체형으로 사용 편리성 강화
- 포스트코로나 시대에 청각·언어장애인을 위한 온라인 청취 보조기기
- 온라인학습, 강의, 음악, 등의 사용환경에 따른 최적화 모드 제공

✓ 활용방안(기대효과)

- 포스트 코로나 시대의 청각·언어장애인의 온라인 정보접근 및 학습에 정보전달의 질과 인식을 상승을 기대

✓ 사용가능대상

- 청각장애인(중증, 경증), 농아인, 언어장애인(중증, 경증), 청각·언어 중복장애인

✓ 사용방법

- 사용전 히어링스톤AI 스탠드 일체형 태블릿 PC를 충전시킨다
- 충전이 완료되면 히어링스톤AI의 전원을 켜고, 히어링스톤AI 어플리케이션을 실행
- 화면의 사용안내와 사용설명서를 참고하여 사용함

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ **최초출시일** : 2026년 3월 1일

✓ **최근 업그레이드** : 2026년 3월 1일

골전도보청기(음성증폭기) [청각/언어장애유형 | 소리증폭기]



제 품 개 요 청각장애인이 소리를 청취할 수 있는 보청기 기능으로 골전도 헤드폰과 이어폰을 겸용으로 사용할 수 있으며 특히 골전도 헤드폰은 진동자 스피커를 사용하므로 장시간 사용하더라도 귀에 통증을 유발시키지 않고 청력저하 및 난청의 문제를 염려하지 않아도 되며, 이어폰으로 착용시에는 음성증폭기 기능으로 간편하게 사용할 수 있어 청각장애인이 소리를 청취할 수 있는 꼭 필요한 제품임

개 인 부 담 금 일반 59,400원 / 기초수급대상·차상위계층 29,700원

제 조 원 현호ICT / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 5일

납 품 자 현호ICT / 담당자 : 조규혁
(01029) 서울특별시 강북구 삼양로123길 6-8 (수유동)
Tel : 010-5381-9910

개인부담금계좌번호 (우체국) 014266-02-119355 예금주명 : 현호ICT(조규혁)

✓ 제품사양

- 헤드폰 : 골전도 진동자 스피커 Max. 1W/Vibrator
- 수신기 : Audio 출력 45mW, 충전용 배터리 DC 3.7V/1A, 크기 49(W) * 88(H) * 22(D)mm
- 송신기 : RF 출력 Max. 500μW 이하, 어댑터 DC 5V/1A, 크기 88(W) * 125(H) * 77(D)mm

✓ 구성품목

- 송신기 1대 / 수신기 1대 / 헤드폰 및 케이블 각 1개
- 이어폰 1개 / DC 아답타 1개 / TV 연결케이블 1개
- 오디오케이블 1개 / USB 충전케이블 1개 / 제품 사용설명서 1개

✓ 주요기능

- 마이크 기능
 - 사용자가 주위 사람과 대화할 때 사용하는 기능입니다.
 - 수신기의 기능을 마이크 (MIC)에 맞춰놓으면, 주변 소리가 수신기 내의 마이크에 의해서 잡히게 됩니다.
 - 마이크에 잡힌 신호를 증폭시켜 케이블을 따라 골전도 헤드폰 및 이어폰으로 전달됩니다.
- 오디오 기능
 - 사용자가 텔레비전 소리를 듣고자 할 때 사용하는 기능입니다.
 - 송신기를 텔레비전 음성출력 단자와 연결합니다.
 - 송신기가 텔레비전으로부터 음성신호를 전달받아 무선으로 수신기로 보냅니다.
 - 수신기가 오디오 (AUDIO)에 맞춰져 있으면 음성신호를 증폭시켜 골전도 헤드폰 및 이어폰으로 전달됩니다.

✓ 제품특징

- 청각장애인 및 난청자가 소리를 들을 수 있는 보청기 기능으로 상대방과 대화 및 텔레비전 방송을 명확하게 들을 수 있음
- 수신기에 장착된 마이크로 보청기를 착용하지 않고 주위의 소리를 들을 수 있음
- 골전도 헤드폰과 이어폰을 겸용으로 사용할 수 있는 기능으로 청각 장애인이 사용 환경에 따라 선택하여 사용할수 있음
- 골전도 헤드폰은 진동자 스피커를 사용하므로 장시간 사용하더라도 귀에 통증을 유발시키지 않고 청력저하 및 난청의 문제를 염려하지 않아도 됨
- 이어폰으로 착용 시에는 음성증폭기 기능으로 간편하게 사용
- 텔레비전 음성출력 단자와 송신기 연결시 텔레비전 음량 조절과 상관없이 텔레비전 소리를 들을 수 있음

✓ 활용방안(기대효과)

- 청각장애인의 소리 청취를 위해 골전도보청기(음성증폭기)의 마이크 기능을 이용하여 상대방과 대화 및 텔레비전 소리를 명확하게 들을 수 있는 생활 편의 기능 제공
- 골전도보청기(음성증폭기)를 이용하여 청각장애인과 비장애인과의 상호

원활한 교류 활성화에 기여

- 골전도보청기(음성증폭기)를 이용하여 청각장애인의 정보 접근성을 위해 제품의 필요성이 대두
- 청각장애인에게 골전도보청기(음성증폭기)를 제공함으로써 청각장애인의 삶의 질 향상

✓ 사용가능대상

- 청각장애 2급~6급 및 난청자

✓ 사용방법

- 수신기와 골전도 헤드폰 또는 이어폰을 연결하고 수신기 좌측면의 전원 스위치를 켭니다.
- 이때 수신기의 전원 램프는 파란색으로 점등됩니다.
- 수신기 좌측면의 기능전환 스위치를 대화 (MIC) 기능으로 선택합니다.
- 골전도 헤드폰을 귀 앞쪽 부분에 착용하시고 가장 잘 들리는 부분에 헤드폰의 진동부가 위치하도록 조정합니다.
- 이어폰은 귓속형 이어폰으로 일반 이어폰과 같은 방법으로 사용하시면 됩니다.
- 말하는 상대방에게 수신기의 마이크 쪽을 향하고 상대방과 대화를 합니다.
- 수신기 우측면의 소리크기 조절 스위치로 소리크기를 적당히 조절합니다.
- 무선을 이용할 경우 무선 송신기를 텔레비전 음성출력단자에 연결한 후 무선주파수를 설정합니다.
- 수신기의 좌측면의 기능전환 스위치를 오디오 (AUDIO) 기능으로 선택합니다.
- 수신기의 무선주파수를 송신기와 동일하게 설정합니다.
- 수신기 우측면의 소리크기 조절 스위치로 소리크기를 적당히 조절합니다.

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 본 제품을 사용하기 위해서는 수신기의 충전상태를 확인한다.
 - 전원 OFF 시 : 전원 램프가 붉은색으로 점등 (충전 완료시 꺼짐)
 - 전원 ON 시 : 전원 램프가 보라색으로 점등 (충전 완료시 파란색)
- 본 제품을 사용하기 위해서는 송신기와 수신기의 주파수를 동일하게 설정한다.
 - 4Ch RF 무선주파수 사용 (70.1MHz, 75.4MHz, 88.3MHz, 90.5MHz)
- 본 제품을 사용하기 위해서는 송신기를 텔레비전 아날로그 음성출력단자에 연결한다.
 - 최근에 출시되는 텔레비전의 디지털 음성출력단자는 호환이 안될수 있습니다.

✓ 최초출시일 : 2017년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 3월

하하3(HAHA3) [청각/언어장애유형 | 소리증폭기]



제 품 개 요

- 청력이 나쁜 노인 및 난청 장애인이 대화 시 무선으로 상대방의 말소리를 잘 듣게 하는 디지털 무선 음성 증폭 기기
- 무선 음성 증폭 기기로 시끄럽거나, 청취 환경이 좋지 않은 장소에서도 상대방의 말소리를 명료하게 들을 수 있음
- 귓속에 넣지 않고 전화 수화기처럼 귀에 장착하여 사용함으로써 사용하기 용이함
- T-mode를 통한 인공와우 및 보청기 무선 전송
- 개인 사용뿐 아니라 다중 이용장소에서 비치하여 난청 노인들과 쉽게 대화할 수 있게 하는 편의 기기

개 인 부 담 금 일반 110,000원 / 기초수급대상·차상위계층 55,000원

제 조 원 (주)건용아이비씨 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)건용아이비씨 / 담당자 : 양태용(010-5470-5860)
서울 금천구 범안로 1130. 디지털엠파이어 1210호
Tel : 02-563-5260 / FAX : 02-561-5928

개인부담금계좌번호 (우체국) 014530-02-021579 예금주명 : (주)건용아이비씨

✓ 제품 사양

- <음성 청취 무선 수신기>
 - 음원처리 : 디지털처리 (DSP) 적용
 - 무선사용주파수 : 2.4GHz(SM Band)
 - 최대출력 / 최대증폭도 : 130dB / 40dB
 - 동작전원 : 리튬이온بات데리(충전용 : 3.7V)
 - 충전방식 : 전용 충전기(거치형)
 - 연속사용시간 : 10시간 이내
 - 외형 : 54mm(W) X 143mm(D) X 44.5mm(H)
 - 무게 : 84g
- <충전 겸용 송신기>
 - 무선사용주파수 : 2.4GHz(SM Band)
 - 동작전원 : 리튬이온بات데리(충전용 : 3.7V)
 - 무선송수신거리 : 약 10m
 - 충전방식 : 전용 충전기(거치형)
 - 연속사용시간 : 10시간 이내
 - 외형 : 86mm(W) x 133mm(D) x 37mm(H)
 - 무게 : 215g

- 충전시 UV살균 기능이 있어 누구나 쉽게 위생적으로 사용 할 수 있다.
- 충전방식으로 이동 및 휴대가 매우 쉽고 한번 충전으로 오랫동안 사용할 수 있어 편리함.

✓ 사용가능대상

- 청각장애인(1~6급)

✓ 사용방법

1. 일반 실내 환경에서 사용시.
 - 1) 송신기에서 수신기를 들면 자동으로 전원이 ON이 된다.
 - 2) 송신기는 대화 상대방에게 가깝게 놓고 사용한다. (송신기의 내장 마이크를 통해 상대방의 음성을 무선으로 청취하게 됨으로 가능한 가깝게 하면 효과가 더욱 좋다.) 회의 등 여러명과 같이 대화시에는 말하는 사람을 중심에 놓고 사용한다.
2. 주변 소음이 심한 환경에서 사용시
 - 1) 송신기에 핀 마이크를 꽂아 사용한다.
 - 2) 핀 마이크를 대화 상대방의 입 근방에 위치시켜 사용하면 소음이 많은 환경에서도 말하는사람의 목소리를 잘 들을 수 있다.
3. 볼륨조절
 - 1) 사용자는 자신의 청력에 따라 수신기의 볼륨 스위치로 볼륨을 조절 할 수 있다.
 - 2) 자신에게 잘 들리는 볼륨 조절 후 볼륨 스위치를 한번 누르면 전원이 꺼지며 볼륨 조절내용이 저장된다.
 - 3) 다시 한번 볼륨 스위치를 누르면 전원이 켜지며 조절된 볼륨으로 출력된다.(한번만 조절해 놓으면 자동으로 켜고 끄더라도 항상 볼륨이 유지 된다. 만일 다시 볼륨을 조절하고 싶으면 같은 동작을 반복하면 된다.)
4. 충전

전용 충전용 어댑터를 이용해 충전한다. (적색 LED → 충전 완료시 초록색 LED로 전환)

✓ 구성품목

- 음성청취 무선 수신기 1개 / 충전 겸용 송신기 1개
- 충전케이블 1개 / 한달 매뉴얼 1부

✓ 주요기능

- 무선 송·수신기능
- UV살균 기능으로 위생적임.
- T-coil이 내장되어 있어 보청기나 인공와우의 T-mode연동
- 자동 ON/OFF 기능으로 사용시 매번 켜거나 끌 필요가 없다
- 충전기능 : 3.7V Lithium polymer battery 적용

✓ 제품특징

- 디지털 무선 소리증폭 기기로서 주변 소음 환경 등에 무관하게 상대방의 소리를 명료하게 청취할 수 있음.
- 노인이나 청각 장애인과의 대화에서 연성을 높이지 않고 조용하게 대화를 가능하게 한다
- 개인 가정 및 다중 이용시설 등에서 사용이 용이함.
- 귓속에 넣지 않고 귀에 밀착하여 사용함.
- 수신기 및 송신기는 충전 배터리가 내장되어 이동 및 휴대 사용이 가능함.

✓ 최소PC요구사항

- 해당없음

✓ 사용 시 유의사항

- 사용시 사용 통신 환경이 나쁠 경우 수신 거리가 짧아질 수 있음.
- 건전지 전량이 적을 시 음질이 떨어지거나 소음이 생길 수 있으며, 충전 후 사용할 것.

✓ 활용방안(기대효과)

- 평상시 일반 보청기는 계속 귓속 삽입해야 함으로 귓병이 있거나 보청기 착용을 꺼리는 경우, HAHA3는 귓속에 넣지 않고 소리를 잘 들을 수 있음.
- 무선 음성증폭 방식이기 때문에 주변에 소음이 많아도 여러사람들과 대화가능.

✓ 최초출사일 : 2023년 6월 30일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 2월 20일

네비게이션 신호기 세트 [청각/언어장애유형 | 신호장치]



제 품 개 요 청각/언어 장애인이 운전 또는 도보로 이동할 때 네비게이션에서 방향 등 음성 메시지를 안내할 때 블루투스 진동알림기에서 진동과 조명으로 알려주어 목적지까지 안전하게 이동할 수 있도록 도와줍니다.

개 인 부 담 금 일반 196,000원 / 기초수급대상·차상위계층 98,000원

제 조 원 (주)함께하는사람들 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✓ 제품사양

- 본체 사양
 - 네비게이션 가능(도보, 차량)
 - 기상알림, 카톡 알림 기능
 - 블루투스 진동, 조명 알림 기능
 - 무선표시기, 무선리모컨 호출 기능
 - LED 조명 : 7색 조명
 - 소리 감지 기능
 - 작동온도 : 0~40℃ (보관시 0~60℃)
 - 사용전원 : DC 5V1.5A
 - 블루투스 진동기 외형크기 : 48(가로) × 70(세로)mm × 20(높이) / 무게 : 37g

- 7가지 조명 색상
- 소리 감지 시 다양한 색상으로 표시

✓ 활용방안(기대효과)

- 도보, 차량으로 이동하는 청각/언어 장애인이 네비게이션을 사용하는 경우
- 직장인, 학생 등 기상 시 알람 진동의 도움이 필요한 청각장애인
- 외부 방문객의 호출 정보를 알 수 없는 청각장애인(택배, 방문객)
- 의사소통이 어려운 청각/언어 장애인이 가족/도우미를 호출하고자 할 경우
- 소리를 듣지 못해 소리 감지 시 조명으로 안내받고자 할 경우

✓ 구성품목

- 갤럭시탭A / 블루투스진동기(TP-VB3000)
- 무선표시기(TP-SH300R) / 무선 리모컨(TP-SR3000)
- 아답터(DC5V) / 사용설명서 1부

✓ 사용가능대상

- 청각/언어 장애인

✓ 사용방법

- 제품 포장을 개봉한 후 설명서에 있는 제품 구성 품목을 확인합니다.
- 사용설명서를 학습한 후 설명서에 있는 방법으로 제품을 설치합니다.
- 갤럭시탭A8과 블루투스 진동알림기를 커넥션한 후 사용합니다.
- 터치 버튼을 이용하여 조명 기능을 사용합니다. 또한 소리 감지 시 조명안내를 확인합니다.
- 리모컨을 눌러 무선진동기의 진동을 확인합니다.

✓ 주요기능

- 네비게이션 알림을 진동과 조명으로 알림 기능 (블루투스 진동알림기-안드로이드)
- 기상알림, 카톡 알림 기능 (블루투스 진동기-안드로이드)
- 무선 리모컨 호출시 조명으로 알림 기능 (무선 표시기)
- 조명 제어기능 7가지 색상

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 제품특징

- 네비게이션 알림 기능 (갤럭시탭 네비게이션)
 - 도보, 운전 중 네비게이션 방향, 속도 안내 시 진동 및 조명 알림 기능
 - 알람 설정 시 기상 강한 진동 알림 기능
 - 카톡 메시지 등 조명 진동 알림 기능
- 무선 리모컨 호출 기능
 - 방문객 또는 가족 등 호출하고자 할 경우 무선리모컨을 누르면, 무선으로 무선 표시기로 알려주어 조명으로 호출 상태를 알려줍니다.
- 조명 및 소리감지 기능
 - 야간에 취침, 보조 조명으로 사용 가능합니다.

✓ 사용 시 유의사항

- 제품에 어댑터 전원을 항상 공급하여야 합니다. (배터리 충전)
- 제품 위에 무거운 물건, 물컵 등을 올려놓지 말아야 합니다. (제품손상)
- 젖은 손, 젖은 도구를 이용하여 제품을 만지지 말아야 합니다.

✓ 최초출시일 : 2018년 4월

✓ 최근 업그레이드 : 갤럭시탭A 제품 공급

데프아코이 호출기 [청각/언어장애유형 | 신호장치]



제 품 개 요 청각 장애인이 비디오폰 호출 소리를 듣지 못하여 불편을 많이 겪고 있습니다. 데프 아코이호출기는 비디오폰 호출 시 영상신호를 감지하여, 아코이호출기에 LED 조명 점멸로 알려줍니다. 또한 웹서버와 연동하여 스마트폰 앱에 언제, 어디서나 실시간으로 알려줍니다.

개 인 부 담 금 일반 254,000원 / 기초수급대상·차상위계층 127,000원

제 조 원 (주)함께하는사람들 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 배송

납 품 기 간 30일

납 품 자 케어라이프코리아(주) / 담당자 : 박정민
(05246) 서울시 강동구 선사로50
Tel : 02-455-0858 / FAX : 02-455-0853 / www.carelifemall.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011817-01-013688 예금주명 : 케어라이프코리아(주)

✓ 제품사양

- 아코이허브(AKOIHUB10)
 - DC5V, 크기 : 60mm(가로) * 60mm(세로) * 12mm(높이), 무게 : 35g
 - 통신 : WiFi 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth
- 아코이호출기(TRX-CALL)
 - DC5V, 크기 : 46mm(상부) * 57mm(하부) * 33mm(두께), 무게 : 70g
 - 통신 : Bluetooth, 무선호출
- 아코이초인종(TX-CALL)
 - DC5V, 크기 : 37mm(가로) * 26mm(세로) * 10mm(높이), 무게 : 10g
 - 통신 : Bluetooth, 무선호출, LCD 비디오폰 인식 및 연동
- 안드로이드 11이상, 앱, iOS 15이상 앱 연동

· 스마트폰 앱 알림 기능

- 스마트폰 앱 설정으로 3가지 알림을 LED 색상으로 알림(노랑, 보라, 하늘색)

✓ 활용방안(기대효과)

- 외부 방문객의 비디오폰 호출 정보를 알 수 없는 청각/언어장애인 (택배, 주차문제 방문객 등)
- 직장인, 학생 등 기상 시 가족 호출로 스마트폰 앱 진동의 도움이 필요한 청각장애인
- 의사소통이 어려운 청각/언어 장애인이 가족/도우미를 호출하고자 할 경우
- 청각장애인이 위험 등 비상 시 비상 호출로 긴급 도움 요청
- 스마트폰 앱에서 3가지 알림 기능(식사시간, 약먹을 시간 등)

✓ 구성품목

- 아코이허브(AKOIHUB10)아코이호출기(TRX-CALL) 2개
- 아코이호출기(TX-CALL) 안드로이드, iOS 스마트폰 앱
- 아답터(DC5V)
- 사용설명서 1부

✓ 사용가능대상

- 청각/언어 장애인

✓ 사용방법

- 제품 포장을 개봉한 후 설명서에 있는 제품 구성품목을 확인 합니다.
- 사용설명서를 학습한 후 설명서에 있는 방법으로 제품을 설치 합니다.
- 스마트폰 앱에 IoT 아코이호출기 앱을 설치한 후 사용설명서와 같이 제품 등록합니다.
- 비디오폰 영상 호출이 감지되면, 아코이호출기와 스마트폰 앱에 호출정보를 알려줍니다.
- 아코이호출기 호출 버튼 및 스마트폰 앱에서 아코이호출기를 호출합니다.

✓ 주요기능

- LCD 비디오폰에서 공동현관, 개별현관의 호출 시 스마트폰 앱과 아코이호출기에 호출 알림
- 아코이호출기 및 스마트폰 앱에서 일반/비상 호출 및 알림 기능(LED 색상 점멸)
- 3가지 알림 기능(사용자 설정 : 식사시간, 약먹을시간, 기상시간 등)

✓ 제품특징

- 비디오폰(LCD) 호출 알림
 - 공동현관 및 개별 현관에서 세대 비디오폰을 호출하면 영상을 감지하여 호출 정보를 아코이호출기에 녹색 LED 점멸로 알려 줍니다.
 - 언제, 어디서나 스마트폰 앱에 비디오폰 호출 정보를 수신 할 수 있습니다.
- 아코이호출기의 무선호출 기능
 - 아코이호출기에서 호출 시 관리자(보호자) 호출기에 호출 알림
 - 스마트폰 앱에 언제 어디서나 호출 알림

✓ 최소PC요구사항

- 해당 사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 제품에 어댑터 전원을 항상 공급하여야 합니다.
- 제품 위에 무거운 물건, 물컵 등을 올려놓지 말아야 합니다. (제품손상)
- 젖은 손, 젖은 도구를 이용하여 제품을 만지지 말아야 합니다.

✓ 최초출시일 : 2025년 4월

무선호출기 비주얼 [청각/언어장애유형 | 신호장치]



제 품 개 요 청각장애인 가정의 방문자 확인을 위해 2개의 램프를 적용하고 스마트폰 문자/진동을 통해 방문 확인이 가능한 청각장애인용 무선호출 보조기기로 근무환경에서 알림/호출기능으로 활용이 가능한 정보통신 보조기기

개 인 부 담 금 일반 110,000원 / 기초수급대상·차상위계층 55,000원

제 조 원 주식회사 샘물정보통신/대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 우편 **납 품 기 간** 30일

납 품 자 주식회사 샘물정보통신 / 담당자: 정연술
(13207) 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 메가동 810호 (SKn테크노파크)
Tel : 031-753-0293, 010-6335-3167 / FAX : 031-734-0293 / www.vizufon.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 103713-01-005379 예금주명: 샘물정보통신

✓ 제품사양

- 크기 : Lamp 66φ *130 mm, 충전시스템 150*100*105mm, 송신기 50*44*35mm
- 주파수 : Lamp 315MHz, Beacon : 2.4GHz
- 전압 : 5V 3A Adapter
- 배터리 : 2600 mAh Lithium-ion
- Port : DC IN, USB 충전 Port
- LED : 고휘도 LED Chip 12개
- Application : Android / IOS앱 호환

✓ 구성품목

- 호출(송신)기 2개, 수신기(LED Lamp) 2개
- 충전용 USB Cable 1개
- 충전시스템 본체 1개
- 아답터/DC JACK Cable 2개
- 램프용 전원아답터(5V 2A)
- Beacon 앱 프로그램
- 사용설명서, 보증서 1부

✓ 주요기능

- 호출 버튼을 이용한 방문자 확인 기능 (LED LAMP 수신기 2개)
- BECON시스템을 통한 휴대폰 문자 및 진동알림 (앱 사용자 무한대)
- LED램프를 이용한 조명 및 비상등 활용
- 신호연계시스템을 이용한 안정적 신호전달 기능
- 램프 탈부착이 가능하여 필요한 장소에 자유롭게 이동 가능
- 충전식 배터리 내장 및 USB포트를 이용한 스마트기기 충전 기능
- 업무공간 및 긴급상황시 호출기능 활용

✓ 제품특징

- 방문확인 및 호출 : LED램프를 이용한 방문확인 및 긴급 호출 기능
- 스마트폰의 Beacon앱을 통한 문자 및 진동 알림 (안드로이드 및 아이폰 호환)
- 방문호출 및 업무공간에서 호출용으로 사용가능하고, 무선 호출 기능을 통한 자유로운 이동성
- 충전식 배터리 내장으로 휴대성이 용이하고 램프에 고장력 자석을 적용하여 자유롭게 탈부착 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 방문자 확인을 위해 램프를 이용한 방문 확인 및 스마트폰 알림용 보조기기로 활용
- 의사소통이 어려운 청각장애인의 도우미 요청 및 긴급호출용으로 활용
- 작업현장 및 야외 활동시 조명으로 활용 가능하고 비상시 전등으로 활용 가능함
- 소리인지가 어려운 청각장애/난청인의 불빛 및 스마트폰 알림기능을 통한 생활편의 기능 제공

✓ 사용가능대상

- 소리를 듣지 못하여 방문객 확인 어려운 청각장애인
- 청각기능의 저하로 인한 노인성 난청인
- 사무공간에서 의사소통에 어려움을 겪는 농아 직장인의 호출용으로 활용

✓ 사용방법

- 송신기와 수신기 2대 무선연결 확인 및 스마트폰 앱 설치
- 수신기와 충전기를 결합하고 아답터 연결하여 수신기 충전
- 수신기 충전 완료후 수신기 1대를 충전기와 분리하여 적정 장소에 부착
- 램프로 사용시 푸쉬버튼을 이용하여 ON / OFF (ON시에도 깜박임)
- 수신기를 통한 발신 및 송신기 2개 깜박임, 스마트폰 문자/진동 알림
- USB 충전Port를 통한 휴대폰 및 스마트기기 충전
- Lamp 충전 및 방전시 램프 탈부착하여 충전 및 조명으로 활용

✓ 최소PC요구사항

- 별도의 PC는 필요 없음.
- 스마트기기 사용시 앱설치하여 문자 및 진동 알림기능 활용

✓ 사용 시 유의사항

- LED LAMP는 가급적 조명기능으로 사용을 자제 (램프 수명 단축)
- 발신기는 철물,방화문 등에 부착 금지 (수신거리 단축)
- 수신기 설치시 가급적 발신기와 가까운 자점에 설치 (테스트 후 설치 권장)

✓ **최초출시일** : 2021년 3월 1일

✓ **최근 업그레이드** : 2023년 3월 (IMO 수신알림 추가)

여유 언어-인지 학습 패키지+(Plus) [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 '애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전'(p166 참조)과 '언어-인지 재활프로그램 랭콕_HS'(p168 참조)를 한 대의 삼성 태블릿에 탑재한 제품

개 인 부 담 금 일반 299,200원 / 기초수급대상·차상위계층 149,600원

제 조 원 (주)여우 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배, 우편 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)여우 / 담당자 : 조준성

대구광역시 달서구 진천로 120, 3층 302호 (주)여우

Tel : 053-721-7858 / FAX : 053-721-7859 / www.yeooo.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 703710-01-003186 예금주명 : 주식회사 여우

✓ 제품사양

- 삼성 갤럭시탭 A11+(단, 동급 또는 상급사양으로 변경될 수 있음)태블릿PC / 안드로이드 11 / 11인치 / WUXGA 1920×1200(216 ppi) / 16:10 / 멀티터치 / UNISOC Tiger T618 SoC / 램 4GB 내장 64GB / microSD 최대 1TB / WiFi 듀얼밴드 / GPS / 블루투스 v5.0 / 후면 800만 화소 / 전면 500만 화소 / 동영상 촬영 / 스피커 4개 / USB C타입 / 얼굴인식 / 마이크
- 입력 방식:터치 방식
- OS : 안드로이드 OS
- 용량 : 446MB

✓ 구성품목

- 삼성 갤럭시탭 A11+(전용 앱 포함)
※ 전용 앱은 업데이트 가능
- 사용설명서 및 매뉴얼(동영상과 튜토리얼 방식으로 기기에 탑재)
- 파손방지용 탭 케이스 1EA

✓ 주요기능

- 애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전
 - 8단계 탭 보기 기능(다양한 학습 기능)
 - 프린트 기능(바로 인쇄)
 - 선택한 단어 저장하기/불러오기
 - 단어검색(범주검색, 조음검색, 음성검색 등)
 - 음성출력 기능(단어, 2어문, 3어문 단위 음성 출력), 사진/ 녹음 가능
 - 컬러 사진, 흑백사진, 그림, 선화의 4가지 이미지 표현 가능
 - 애니메이션 동영상 보기 기능
 - 애니메이션 조음 위치 및 방법 동영상
 - 목표 단어 테스트 기능(문제풀이)
- 언어-인지 재활프로그램 랭콕_HS
 - 장애 아동들이 쉽게 재미있게 접근할 수 있도록 게임 방식으로 고안
 - 140여 개의 활동은 뇌활성화(반응속도, 시각변별, 대상재인, 안구운동, 눈-손 협응, 시각항등성), 인지(기억력, 지남력, 지각력, 주의집중력), 언어(언어력, 문제해결력, 수리력, 감정코칭, 확산적 사고) 영역으로 구성되어 전반적인 뇌기능 증진 가능

✓ 제품특징

- 애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전
 - 각 단어별로 스토리가 있는 애니메이션 동영상 보기 기능으로

재미와 언어훈련 효과 극대화

- 각 음소별로 조음할 때의 공기 기류와 혀의 위치와 움직임을 애니메이션 영상으로 표현
- 언어-인지 재활프로그램 랭콕_HS
 - 단순한 인지치료 위주의 프로그램이 아닌 언어와 인지 체계가 결합되고 일반화 과정이 포함된 언어-인지 재활치료 프로그램
 - 수준에 따른 단계별 훈련 기능 제공
 - 게임 또는 문제풀이 방식으로 설계하여 재미있고 집중력 있는 훈련 가능
 - 훈련 결과를 비교·분석할 수 있는 데이터 및 그래프 기반 통계 화면을 제공하여 수행 결과를 객관적이고 체계적으로 관리 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 한 대의 태블릿만 휴대하여 지적장애, 발달장애, 뇌병변장애, 언어장애 등 인지 및 언어능력에 어려움이 있는 성장기 아동, 학령기 아동, 청소년 및 성인에게 효과적으로 활용 가능
- 장애아동의 가정 내 인지-언어 통합 훈련이 가능하며, 전문가의 인지-언어 재활치료와 연계하여 체계적이고 지속적인 훈련을 통해 언어-인지 발달 증진 효과를 극대화할 수 있음

✓ 사용가능대상

- 지적장애, 발달장애, 뇌병변장애, 청각-언어장애 아동 및 성인

✓ 사용방법

- 태블릿 화면에서 '애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전' 또는 'LangCog_HS' 중 원하는 아이콘을 선택하여 클릭
- 나머지 사용 방법은 (1) '애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전과 (2) 언어-인지 재활프로그램 랭콕_Home의 성능 및 기능 참조

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 인터넷(Wi-fi) 연결 필수
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2024년 2월 26일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 2월 22일

모모야 모모 언어훈련 PAD [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 - 언어재활 전문 프로그램으로 체계적 언어훈련을 통하여 효과적으로 언어능력을 향상시킴

- 청능훈련으로 언어훈련 극대화

- 소리체험학습에 '동요따라부르기' 개발 탑재, 정서안정 및 언어발달에 효과 탁월

개 인 부 담 금 일반 172,000원 / 기초수급대상·차상위계층 86,000원

제 조 원 (주)에듀엔젤/한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 5일

납 품 자 (주)에듀엔젤 / 담당자 : 김병진
(03122) 서울시 종로구 대학로36-9 대건빌딩 4층
Tel : 010-6494-7044 / FAX : 02-3210-0220

개인부담금계좌번호 (국민은행) 807701-00-013941 예금주명 : (주)에듀엔젤

✓ 제품사양

- 본체 사양
- 크기 25.7x168.72x9.5 무게 612g
- 메인칩 인텔프로세서 N100
- 메모리 LPDDR5 12GB
- OS 윈도우 11 내장메모리 256GB
- 카메라 전면 500만, 후면 800만
- 11" 광시야각 디스플레이
- 스피커, 와이파이, 블루투스 지원
- 저장장치 M2 2280 SATA3
- 글래스 커버 82채널 정전식 터치패널
- 스타일러스 펜, 키보드(별도 구매 가능)
- 최대 8시간 동영상 시청 가능

✓ 구성품목

- 프로그램 탑재된 패드 1대 / 패드케이스(거치 및 완충작용) 1개
- 충전기 1개 / 완충 파우치(휴대가능) 1개
- 사용설명서(패드에 탑재) 1개 / 지도서 및 가정용지도서 각1권

✓ 주요기능

- 기초학습(발성, 발화훈련), 낱말, 문장, 상황학습 등 세분화된 체계적 훈련 가능
- 총 20,000여개의 문제풀이로 풍부한 자료 제공
- 문제풀이 후 녹음, 재생으로 정확한 발음교정
- 음성인식 활용하여 말하기학습 등 자동평가 가능
- 학습결과를 저장하여 계획적이고 체계적 학습에 활용 가능
- AAC 탑재하여 중증장애인의 의사표현 가능
- 다양한 실생활에서의 소리, 동물 및 각종 악기소리 등을 체험할 수 있음
- 음악치료 기법을 활용한 '동요따라부르기'를 통한 정서적 안정 및 언어훈련 효과
- 게임만들기를 통한 창의력학습 탑재, 보호자와의 유대 강화 및 창의력 향상 기대 효과

✓ 제품특징

- 중증장애인의 발화 및 발성 훈련 가능
- 음파그래프를 통한 음성의 시각화로 자연스럽고 정확한 발음 유도 가능
- '동요따라부르기'를 통한 음악치료 및 언어훈련 효과
- 창의력 향상을 위한 '창의력학습' 신규 탑재 상호작용 및

언어훈련 효과 증대

- 풍부한 자료와 다양한 형태의 언어훈련이 가능
- 학습의 결과 저장으로 인하여 효과적이고 체계적인 언어훈련 가능
- 숫자놀이를 통한 수에 대한 개념을 이해하고 간단한 연산을 배울 수 있음

✓ 활용방안(기대효과)

- 발화가 잘 안되는 장애인들의 발성, 발화훈련(기초학습)
- 음성녹음 기능을 활용한 발음 교정
- 다양한 상황에서의 표현을 위한 상황학습
- 자주 사용하는 표현을 따로 저장하여 손쉽게 의사표현 가능(AAC)
- 실생활에서의 다양한 소리를 체험하고 피아노 건반을 활용한 반주를 통한 소근육 발달
- '동요따라부르기'를 통한 음악치료 효과, 정서안정 및 언어훈련에 많은 도움 가능
- 창의력학습을 통한 보호자와의 상호교감 및 언어훈련 가능

✓ 사용가능대상

- 장애로 인하여 의사소통이 어려운 장애인
- 언어치료, 훈련이 필요한 장애인

✓ 사용방법

- 바탕화면에 탑재된 사용설명서와 활용동영상을 먼저 살펴봅니다
- 패드를 켜면 자동으로 모모패드 화면이 열리는데 메뉴를 찾아 실행하면 됨
- 학습이 끝난후 학습결과를 저장하기 버튼을 터치하여 저장할 수 있음

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 터치패널이 손상될 수 있으므로 손가락이나 지정된 펜으로 만 화면을 터치하여야 함
- 액정이 손상될 수 있으므로 외부 충격이나 던지는 등의 행위 불가

✓ 최초출시일 : 2015년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월

소리사람(for Pad) [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 장애아동의 잠재된 능력을 발현시키고 낮은 수행능력을 보완하기 위한 음운인식부터 어휘 및 문장에 이르기까지 언어의 전 단계를 체계적으로 관리할 수 있는 훈련 프로그램

개 인 부 담 금 일반 188,000원 / 기초수급대상·차상위계층 94,000원

제 조 원 (주)샤크로 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 우편

납 품 기 간 5일

납 품 자 (주)샤크로 / 담당자 : 김종호(010-5448-1171)

(08389)서울특별시 구로구 디지털로26길5, 711호 (구로동, 에이스하이엔드타워1차)
Tel : 070-7410-6594 / FAX : 02-6280-6581 / www.sharkro.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 012245-01-015655 예금주명 : (주)샤크로

✓ 제품사양

화면 해상도	크기	278.2mm	프로세스	cpu속도	2GHz, 1.8GHz	
	해상도	1920x1200 (WUXGA+)		cpu종류	Octa-Core	
메모리	RAM size (GB)	4GB	운영체제	Android		
	ROM size (GB)	64GB		외관사양	크기	168.7x257.1x6.9 단위:mm
	외장저원메모리	MicroSD(최대1TB)			무게(g)	480
연결	Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz	배터리	배터리용량 7040(mAh)		
	Bluetooth	Bluetooth v5.1				
오디오/비디오	동영상지원 포맷	MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM				
	오디오지원 포맷	MP3,M4A,3GA,AAC,OGG등				

✓ 구성품목

- 태블릿 구성: 소리사람 학습용 태블릿 1대, 북커버1대, 충전 케이블 1개
- 교재 구성: 음운편 1권, 어휘편 1, 2 2권, 문장편 1권, 붙임딱지 1권

✓ 주요기능

- 언어교육 방법의 하위 구성 영역 반영
 - 읽기: 발성훈련, 읽기 → 녹음 → 듣기, 문장: 읽기 → 녹음
 - 쓰기: 음소 → 쓰는 순서 확인, 어휘 → 음소 OR 음절 조합하기, 문장 → 어휘 조합하기, 문장쓰기
 - 듣기: 음소, 어휘, 문장 → 듣고 선택하기
 - 말하기: 음소, 어휘, 문장 → 읽기와 연동, 문장 → 녹음, 자신이 말한 내용을 확인
 - 화용론: 맥락(상황)을 고려한 문장 연습 훈련과 대화 훈련 실시, 문장 따라 읽기, 질문에 대한 대담 선택(쓰기), 적절한 질문이나 대담 선택(말하기/듣기)

✓ 제품특징

- 읽기, 쓰기, 듣기, 말하기를 모두 활용하는 언어훈련 방식
- 구체적 예와 실천적인 활용 연습
- 반복훈련 및 확장 훈련
- 애니메이션을 적용 사용하고자하는 요구 및 동기 유발
- 각 영역별 평가

✓ 활용방안(기대효과)

- 총체적 언어훈련을 통한 장애아동의 언어기능 향상
- 직접교수방법을 활용한 명시적이고 체계적인 언어훈련
- 애니메이션과 게임을 활용한 어휘 기억력 향상 및 활용능력 배양
- 기능 중심 훈련 과 훈련별 평가

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련을 필요로 하는 정신지체(지적장애) 및 자폐성장애 아동 1~3급
- 어휘에 대한 발생발화 훈련을 필요로 하는 청각장애 아동 1~3급
- 의사소통에 어려움이 있는 언어장애 아동 1~3급
- 언어 훈련을 필요로 하는 지체장애(뇌성마비) 아동 1~3급
- 학습장애 아동 중 언어 영역에 있어 어려움을 겪고 있는 아동 1~3급

✓ 사용방법

- 사용설명서 참조

✓ 최소PC요구사항

- 전용 태블릿PC 제품 (해당없음)

✓ 사용 시 유의사항

- 제품의 프로그램이 삭제되거나 동작이상 시 기기 초기화를 통해 복구가 가능함
- 태블릿 제품의 특성상 던지거나 떨어뜨리지 않게 사용 시 주의가 필요함
- 사용자 과실에 의한 액정 등의 파손은 무상A/S가 되지 않으니 주의가 필요함

✓ 최초출시일 : 2012년 10월 8일

소리자람(for Windows) [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 장애아동의 잠재된 능력을 발현시키고 낮은 수행능력을 보완하기 위한 음운인식부터 어휘 및 문장에 이르기까지 언어의 전 단계를 체계적으로 관리할 수 있는 훈련 프로그램

개 인 부 담 금 일반 286,000원 / 기초수급대상·차상위계층 143,000원

제 조 원 (주)샤크로 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 우편

납 품 기 간 5일

납 품 자 (주)샤크로 / 담당자 : 김종호(010-5448-1171)

(08389)서울특별시구로구 디지털로26길5, 711호 (구로동, 에이스하이엔드타워1차)

Tel : 070-7410-6594 / FAX : 02-6280-6581 / www.sharkro.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 012245-01-015655 예금주명 : (주)샤크로

✓ 제품사양

디스플레이	35.6 cm FHD LED Display	프로세서 / 칩셋	Intel Core 칩셋
	약 14.0인치(1920 x 1080)	운영체제	Windows 11 Home
그래픽	Qualcomm® Adreno	크기	323.9 x 224.8 x 15.5 mm
메모리	8 GB LPDDR4x Memory	네트워크	Bluetooth v5.1
저장장치	256 GB	무게	1.43 kg
멀티미디어	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	전원	42.3 Wh (Typical)
	내장 디지털마이크, 720p HD 카메라		45 W USB Type-C 어댑터
포트	2 USB Type-C, 1 USB2.0		
	MicroSD Card Reader		

✓ 활용방안(기대효과)

- 총체적 언어훈련을 통한 장애아동의 언어기능 향상
- 직접교수방법을 활용한 명시적이고 체계적인 언어훈련
- 애니메이션과 게임을 활용한 어휘 기억력 향상 및 활용능력 배양
- 기능 중심 훈련 과 훈련별 평가

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련을 필요로 하는 정신지체(지적장애) 및 자폐성장애 아동 1~3급
- 어휘에 대한 발생발화 훈련을 필요로 하는 청각장애 아동 1~3급
- 의사소통에 어려움이 있는 언어장애 아동 1~3급
- 언어 훈련을 필요로 하는 지적장애(뇌성마비) 아동 1~3급
- 학습장애 아동 중 언어 영역에 있어 어려움을 겪고 있는 아동 1~3급

✓ 구성품목

- 제품 구성: 소리자람 학습용 Windows 컴퓨터 1대, 어댑터 및 충전 케이블 1EA
- 교재 구성: 음운편 1권, 어휘편 1, 2권, 문장편 1권, 붙임딱지 1권

✓ 사용방법

- 사용설명서 참조

✓ 주요기능

- 언어교육 방법의 하위 구성 영역 반영
 - 읽기: 발성훈련, 읽기 → 녹음 → 듣기, 문장 : 읽기 → 녹음
 - 쓰기: 음소 → 쓰는 순서 확인, 어휘 → 음소 OR 음절 조합하기, 문장 → 어휘 조합하기, 문장쓰기
 - 듣기: 음소, 어휘, 문장 → 듣고 선택하기
 - 말하기: 음소, 어휘, 문장 → 읽기와 연동, 문장 → 녹음, 자신이 말한 내용을 확인
 - 화용론: 맥락(상황)을 고려한 문장 연습 훈련과 대화 훈련 실시, 문장 따라 읽기, 질문에 대한 대답 선택(쓰기), 적절한 질문이나 대답 선택(말하기/듣기)

✓ 최소PC요구사항

- 전용 Windows 컴퓨터 제품

✓ 사용 시 유의사항

- 제품의 프로그램이 삭제되거나 동작이상 시 기기 초기화를 통해 복구가 가능함
- 태블릿 제품의 특성상 던지거나 떨어뜨리지 않게 사용 시 주의가 필요함
- 사용자 과실에 의한 액정 등의 파손은 무상A/S가 되지 않으니 주의가 필요함

✓ 제품특징

- 읽기, 쓰기, 듣기, 말하기를 모두 활용하는 언어훈련 방식
- 구체적 예와 실천적인 활용 연습
- 반복훈련 및 확장 훈련
- 애니메이션을 적용 사용하고자하는 요구 및 동기 유발
- 각 영역별 평가

✓ 최초출시일 : 2012년 10월 8일

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 3월 7일

스마트언어향상프로그램 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 스마트 언어향상 프로그램은 필수 생활단어 기반의 언어인지 훈련 콘텐츠 설계, 스마트기기 터치

인터랙션 학습 기능 구현, 기억력·시지각 등 통합인지 훈련 프로그램 탑재를 포함하며, 장애인의 의사소통 능력 증진 및 사회 참여 확대를 최종 목표로 함.

개 인 부 담 금 일반 198,000원 / 기초수급대상·차상위계층 99,000원

제 조 원 (주)창의와놀이 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배·우편 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)창의와놀이 / 담당자 : 최수현
(12925) 경기도 안성시 양성면 칠곡길 35
Tel : 070-4481-4872 / FAX : 031-674-0891

개인부담금계좌번호 (우체국) 110-0145-03214 예금주명 : (주)창의와놀이

✓ 제품사양

- 규격: 27.9 cm (11인치), 508g
- OS: Android
- CPU: 1.8GHz
- RAM: 4 GB
- 내장메모리: 64GB (외장 1TB지원)
- 해상도 : 1920×1200
- 무선통신 : 802.11 b/g/n Wifi
- 배터리 : 7040 mAh
- 카메라 : 5M Pixel 전면 카메라
- 8M Pixel 후면 카메라

✓ 구성품목

- 태블릿 1대, 사용설명서, 커버, 분리핀, USB-C 데이터 케이블

✓ 주요기능

- 스마트 언어향상 프로그램은 의사소통 능력을 증진시키고, 스마트 기기 터치 인터랙션 학습을 통해 정보통신 접근성을 지원함.
- ① 단어 확산 가이드 기반 따라 쓰기 기능
- ② 통글자 학습 기능
- ③ 단어 청취·녹음(따라 말하기)·재생(녹음 듣기) 기능
- ④ 나만의 카드(이미지·글자·음성) 생성 및 저장 기능
- ⑤ TTS(Text to Speech) 기능
- ⑥ 손글씨 및 음성 입력 기능

✓ 제품특징

- ① 언어-인지 통합발달 프로그램 탑재
- ② 일상생활 필수단어 400개를 의미망(*Semantic Network) 기반으로 체계적인 어휘 학습 기능
* 의미망(semantic network)은 개념과 개념 간의 의미 관계를 연결해 표현하는 지식표현 방식
- ③ 사용자의 개별 특성과 수준에 맞춘 주제·수량·활동 단계별 학습
- ④ 활동별 충분한 반복 학습 설계
- ⑤ 과제 수행 실패 최소화를 위한 인지 단계별 과제 제공
- ⑥ 과제 실패 반복의 경우 과제 난이도 조절 가능
- ⑦ 새로운 단어장 생성 기능, TTS(Text to Speech) 기능 포함
- ⑧ 편의성·심미성·명확성을 갖춘 UI/UX 디자인, 직관적 이해와 조작
- ⑨ 터치펜 활용도로잉 필카·메모·손글씨 자동 보정·계산 모드 등

✓ 활용방안(기대효과)

- 본 제품은 필수 생활단어(생활언어)의 체계적 학습을 통해 의사소통

능력·일상생활 기술·사회 기술 형성에 직접적으로 기여하며, 편의시설 및 정보에 대한 접근성을 높여 장애인의 자립 및 사회 참여를 실질적으로 지원함. 이에 따라 장애인 교육·재활 훈련 분야에서의 보급 수요 및 활용 효과가 높을 것으로 기대됨.

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련이 필요한 지적장애, 뇌병변장애, 언어장애 아동 및 성인

✓ 사용방법

- 생활주제 메뉴 활동
 - 1단계 [단어 듣기] 위·아래 화살표 버튼을 눌러 카드를 이동하며 단어의 소리를 청취
 - 2단계 [단어 읽기] 마이크 버튼 및 헤드폰 버튼을 활용하여 소리를 녹음·재생하고, 단어의 원음과 본인이 녹음한 소리를 즉시 비교·교정
 - 3단계 [따라 쓰기] 연필 버튼을 누른 후 확산 안내에 따라 한 획씩 글자를 따라 씀으로써 쓰기훈련 및 통글자 학습을 수행
 - 4단계 [같은그림 학습] 손가락 또는 펜으로 점과 점을 연결하여 선을 긋는 방식으로 정답을 입력
 - 5단계 [숨은그림 찾기] 돋보기 아이콘을 이동하여 숨은 그림 관찰, 손가락 또는 펜으로 정답입력
 - 6단계 [그림짜꿍 찾기] 사물에 해당하는 글자를 선택하여 탭함으로써 정답을 입력
 - 7단계 [단어짜꿍 찾기] 글자에 해당하는 사물을 선택하여 탭함으로써 정답을 입력
 - 8단계 [메모리게임] 메모리 카드 개수(4개·6개·8개)를 선택하여 난이도를 설정 후, 사물과 글자의 위치를 기억하고 시작하기 버튼을 눌러 카드를 뒤집어 사물과 글자를 짝짓기
- 나만의 카드 메뉴 활동
 - ① [카드 생성하기] 버튼을 탭하여 카드 생성 화면으로 진입
 - ② 사진·글자·소리 버튼을 각각 눌러 해당 정보를 입력한 후 저장

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 단지거나 충격 금지

✓ 최초출시일 : 2026년 3월 30일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 30일

스마트언어향상프로그램-플러스펜 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 스마트 언어향상 프로그램은 필수 생활단어 기반의 언어인지 훈련 콘텐츠 설계, 스마트기기 터치 인터랙션 학습 기능 구현, 기억력·시각각 등 통합인지 훈련 프로그램 탑재를 포함하며, 장애인의 의사소통 능력 증진 및 사회 참여 확대를 최종 목표로 함.

개 인 부 담 금 일반 286,000원 / 기초수급대상·차상위계층 143,000원

제 조 원 (주)창의와놀이 / 대한민국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배·우편 배송 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 (주)창의와놀이 / 담당자 : 최수현
(12925) 경기도 안성시 양성면 칠목길 35
Tel : 070-4481-4872 / FAX : 031-674-0891

개인부담금계좌번호 (우체국) 110-0145-03214 예금주명 : (주)창의와놀이

✓ 제품사양

- 규격: 12.4인치, 523g
- OS: Android 13
- CPU: Octa-core
- RAM: 6GB
- 내장메모리: 128GB (외장 1TB지원)
- 해상도: 1920×1200
- 무선통신: 802.11 b/g/n Wifi
- 배터리: 8000 mAh
- 카메라: 5M Pixel 전면 카메라
- 8M Pixel 후면 카메라

✓ 구성품목

- 태블릿 1대, 사용설명서, 키보드, 커버, 분리핀, USB-C 데이터 케이블, 멀티터치펜, SD CARD 64GB

✓ 주요기능

- 스마트 언어향상 프로그램은 의사소통 능력을 증진시키고, 스마트 기기 터치 인터랙션 학습을 통해 정보통신 접근성을 지원함.
- ① 단어 학습 가이드 기반 따라 쓰기 기능
- ② 통글자 학습 기능
- ③ 단어 청취·녹음(따라 말하기)·재생(녹음 듣기) 기능
- ④ 나만의 카드(이미지·글자·음성) 생성 및 저장 기능
- ⑤ TTS(Text to Speech) 기능
- ⑥ 손글씨 및 음성 입력 기능

✓ 제품특징

- ① 언어-인지 통합발달 프로그램 탑재
 - ② 일상생활 필수단어 400개를 의미망(*Semantic Network) 기반으로 체계적인 어휘 학습 가능
- * 의미망(semantic network)은 개념과 개념 간의 의미 관계를 연결해 표현하는 지식표현 방식
- ③ 사용자의 개별 특성과 수준에 맞춘 주제·수량·활동 단계별 학습
 - ④ 활동별 충분한 반복 학습 설계
 - ⑤ 과제 수행 실패 최소화를 위한 인지 단계별 과제 제공
 - ⑥ 과제 실패 반복의 경우 과제 난이도 조절 가능
 - ⑦ 새로운 단어장 생성 가능, TTS(Text to Speech) 기능 포함
 - ⑧ 편작성·심미성·명확성을 갖춘 UI/UX 디자인, 직관적 이해와 조작
 - ⑨ 터치펜 활용 - 드로잉·필기·메모·손글씨 자동 보정·계산 모드 등

✓ 활용방안(기대효과)

- 본 제품은 필수 생활단어(생활언어)의 체계적 학습을 통해 의사소통 능력·일상생활 기술·사회 기술 형성에 직접적으로 기여하며, 편의시설 및 정보에 대한 접근성을 높여 장애인의 자립 및 사회 참여를 실질적으로 지원함. 이에 따라 장애인 교육·재활 훈련 분야에서의 보급 수요 및 활용 효과가 높을 것으로 기대됨.

✓ 사용가능대상

- 언어 훈련이 필요한 지적장애, 뇌병변장애, 언어장애 아동 및 성인

✓ 사용방법

- 생활주제 메뉴 활동
 - 1단계 [단어 듣기] 위·아래 화살표 버튼을 눌러 카드를 이동하며 단어의 소리를 청취
 - 2단계 [단어 읽기] 마이크 버튼 및 헤드폰 버튼을 활용하여 소리를 녹음·재생하고, 단어의 원음과 본인이 녹음한 소리를 즉시 비교·교정
 - 3단계 [따라 쓰기] 연필 버튼을 누른 후 학습 안내에 따라 한 획씩 글자를 따라 씌으로써 쓰기 훈련 및 통글자 학습을 수행
 - 4단계 [같은그림 학습] 손가락 또는 펜으로 점과 점을 연결하여 선을 긋는 방식으로 정답을 입력
 - 5단계 [숨은그림 찾기] 돋보기 아이콘을 이동하여 숨은 그림 관찰, 손가락 또는 펜으로 정답입력
 - 6단계 [그림짜꿍 찾기] 사물에 해당하는 글자를 선택하여 탭함으로써 정답을 입력
 - 7단계 [단어짜꿍 찾기] 글자에 해당하는 사물을 선택하여 탭함으로써 정답을 입력
 - 8단계 [메모리게임] 메모리 카드 개수(4개·6개·8개)를 선택하여 난이도를 설정 후, 사물과 글자의 위치를 기억하고 시작하기 버튼을 눌러 카드를 뒤집어 사물과 글자를 짝짓기
- 나만의 카드 메뉴 활동
 - ① [카드 생성하기] 버튼을 탭하여 카드 생성 화면으로 진입
 - ② 사진·글자·소리 버튼을 각각 눌러 해당 정보를 입력한 후 저장

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 단지거나 충격 금지

✓ 최초출시일 : 2026년 3월 30일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 30일

스피치미러(SM1.01.0029) [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 청각·언어 장애인 조음훈련·리듬감훈련을 지원하는 S/W로서, 말 할 때 입술, 혀, 목젢 등 변화를 발음기관 애니메이션과 공기흐름으로 8천여개 콘텐츠를와 함께 제공. 사용자 발성에 대해서도 발음기관 애니메이션을 생성할 수 있고, 1.2천여 실용문장으로 리듬감 훈련 지원

개 인 부 담 금 일반 196,000원 / 기초수급대상·차상위계층 98,000원

제 조 원 (주)하이클론 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 15일

납 품 자 (주)하이클론 / 담당자 : 박봉래(010-5201-6899)
(05022) 서울시 광진구 광나루로 474, 키움관 501
Tel : 02-702-7567 / FAX : 02-6937-1881 / www.speechmirror.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0002-47309 예금주명 : 주식회사 하이클론

✓ 제품사양

- S/W 제품으로서 아래 '최소 PC 요구사항'에 기재된 사양의 컴퓨터에 설치

- Motor Theory, McGurk Effect 등 과학적 근거를 토대로 교수, 전문의, 언어치료사 등 전문가들과 함께 제작

✓ 구성품목

- 설치CD: 본 제품 설치 파일, 사용법 동영상 파일 및 매뉴얼 파일이 저장됨
- 제품케이스: 설치CD 포장
- 복제방지카드: 본 제품의 불법복제 방지용으로 실행시 USB에 장착
- 사용 및 설명서: 본 제품 설치 및 사용 방법 가이드 및 활용 방법 소개

✓ 활용방안(기대효과)

- 주기적 언어치료실 방문이 어렵거나 언어치료를 도중에 중단한 청각·언어 장애인의 자가훈련환경 제공
- 언어치료실의 방문과 병행하여 가정에서도 훈련을 겸함으로써 보다 빠른 언어재활 효과 확보

✓ 주요기능

- <발음기관 및 공기흐름 애니메이션>
 - 목소리에 따른 얼굴 정면 및 측면 입술, 혀, 이, 비강 등 발음기관들의 변화과정 애니메이션
 - 기본음은 물론 연속되는 음성 속에서 음절, 단어, 문장 대상 발음기관 애니메이션
 - 자음 발성시 음성의 특징에 따른 공기의 양 및 흐름 방식을 발음기관 애니메이션과 함께 제시
- <강세리듬 훈련지원>
 - 생활속 상용문장들에 대해 실제 상황처럼 녹음한 성우음성에 대해 강세리듬 곡선 제시
 - 사용자의 발성에 대해서도 강세리듬 곡선을 제시하여 표준과 대조하며 훈련 가능
- <풍부한 훈련 콘텐츠>
 - 7천여 발음유형별 및 오류유형별 콘텐츠가 제공되어 체계적으로 훈련할 수 있음
 - 1.2천여 대화 상황 및 장소별 상용문장 및 삽화 콘텐츠가 제공되어 훈련효과 일반화에 유용
 - 5천여 의미어에 대해서는 삽화가 제공되어 소리와 함께 어휘력·문장력 훈련을 겸할 수 있음
 - 영어 발음원리도 발음기관 애니메이션을 통해 습득할 수 있도록 지원
- <사용자 발성 피드백>
 - 음절이나 단어에 대한 사용자의 발성을 발음기관 애니메이션으로 제시하여 표준발성과 대조해 볼 수 있어 자기 발성의 문제점을 직감적으로 이해하며 훈련 가능 (단, 부모 등 도우미 필요)
 - 부모 등 도우미의 가이드 하에 훈련효과를 평가할 수 있고 체계적으로 관리할 수 있음

✓ 사용가능대상

- 청각장애: 조음장애로 발음훈련이 필요한 청각장애인, 약청 및 부분청능으로 청능 개선이 필요한 청각장애인
- 언어장애: 지적장애, 뇌병변장애, 다운증후군, 뇌신경장애, 난독증 등으로 조음장애, 음성장애 또는 유창성장애(말더듬장애) 등을 겪고 있는 언어장애인, 조음장애로 인해 발음이 어려운 언어장애인

✓ 사용방법

- (1) 사용전에 훈련하고 싶은 목표 음소 또는 세부장애유형 선정 후 상단 메뉴중 '조음훈련' 선택
- (2) 음소훈련을 하려면 '음소별훈련', 특정 오류에 대한 훈련을 하려면 '유형별훈련' 선택
- (3) 목표음소나 오류유형을 지정하고 상단 '훈련요령'을 참조하면서 훈련 용례를 선택하여 어휘바구니에 추가
- (4) 하단 '조음훈련시작' 버튼 클릭 후 나타나는 실행버튼을 클릭하여 해당 발음기관 애니메이션 재생 및 관찰. 실행버튼 주변 각종 버튼을 클릭해보며 기능 확인. 음성파형과 음소·음절도 마우스로 부분 선택 실행 가능
- (5) 녹음버튼을 눌러서 발성 및 녹음 해보고 발음기관 애니메이션 생성 (사용설명서 참조하여 세부기능 확인)

✓ 최소PC요구사항

- OS: Windows XP 서비스팩3(SP3) 이상
- 메모리: 256MB 이상
- 해상도: 1024 x 768 해상도 이상의 모니터
- CPU: 1GHz 이상
- 그래픽: 다이렉트 3D를 지원하는 그래픽 카드
- HDD: 4GB 이상

✓ 제품특징

- 말소리가 만들어지는 과정을 3차원 발음기관 애니메이션과 공기흐름을 통해 귀는 물론 눈으로도 확인 가능
- 말소리의 높고 낮음의 변화를 강세리듬 곡선으로 제시하여 쉽게 습득되지 않는 언어의 리듬감 훈련 지원
- 교육 및 치료 현장의 실질적 언어자원으로 언어 체계별 및 오류 유형별 콘텐츠 제공
- 내 목소리에 대한 발음기관 애니메이션을 만들고 성우의 표준 발성과 대조 가능
- 목표음소 및 오류유형별로 훈련효과에 대한 평가를 지원하는 평가툴 및 퀴즈형 콘텐츠 제공

✓ 사용 시 유의사항

- 훈련 중 녹음하여 애니메이션을 생성하는 과정에는 부모나 지인 등 도우미가 함께 해야 함. 음성인식기가 완벽할 수 없기 때문에 음성인식 시스템에 도우미가 들은 대로 텍스트 힌트를 입력해야 할 경우가 있기 때문
- 음소별 및 오류유형별 훈련효과 평가기능도 도우미 필요. 부모 등 비장애인과 함께 진척정도를 효과적으로 평가하고 관리할 수 있는 환경 제공이 목적이기 때문

✓ 최초출시일: 2011년 12월

✓ 최근 업그레이드: 2017년 2월

스피치미러탭(SMT1.01.0029) [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제품개요 청각·언어 장애인 조음훈련·리듬감훈련을 지원하는 S/W가 탑재된 탭으로서,
 - 말 할 때 입술, 혀, 목젓 등 변화를 발음기관 애니메이션과 공기흐름으로 8천여 콘텐츠와 함께 제공
 - 사용자 발성에 대해서도 발음기관 애니메이션을 생성할 수 있고
 - 1.2천여 실용문장으로 리듬감 훈련 지원

개인부담금 일반 360,000원 / 기초수급대상·차상위계층 140,000원

제 조 원 (주)하이클론 / 한국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 15일

납 품 자 (주)하이클론 / 담당자 : 박철우(010-5201-6899)

(05022) 서울시 광진구 광나루로 474, 키움관 501

Tel : 02-702-7567 / FAX : 02-6937-1881 / www.speechmirror.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0002-47309 예금주명 : 주식회사 하이클론

✓ 제품사양

- 규격: 257(가로) x 168(세로) x 10(높이)
- 11인치 터치스크린
- OS: Windows 11 Pro
- CPU: 3.4GHz
- 메모리: 12GB
- 해상도: 1920 x 1200
- HDD: 256GB 이상
- 카메라: 전면, 후면 카메라 탑재
- 그래픽: Intel UHD Graphics
- 기타 USB 포트, 블루투스

✓ 구성품목

- 탭 본체 1기 / 충전기 1기 / 키보드 1기 / 사용 및 활용 설명서

✓ 주요기능

- <발음기관 및 공기흐름 애니메이션>
 - 말소리에 따른 얼굴 정면 및 측면 입술, 혀, 이, 비강 등 발음기관 변화과정 애니메이션
 - 기본음은 물론 연속되는 음성 속에서 음절, 단어, 문장 대상 발음기관 애니메이션
 - 자음 발성시 음성 특징에 따른 공기양 및 흐름 방식을 발음기관 애니메이션과 함께 제시
- <강세리듬 훈련지원>
 - 생활속 상용문장들에 대해 실제 상황처럼 녹음한 남녀 성우 발성에 대해 강세리듬 곡선 제시
 - 사용자 발성에 대해서도 강세리듬 곡선 제시하여 성우 발성과 대조하며 훈련할 수 있게 지원
- <풍부한 훈련 콘텐츠>
 - 7천여 발음유형별 및 오류유형별 콘텐츠가 제공되어 체계적으로 훈련할 수 있음
 - 1.2천여 대화 상황 및 장소별 상용문장 및 삽화 콘텐츠가 제공되어 훈련효과 일반화에 유용
 - 5천여 의미어에 대해서는 삽화가 제공되어 소리와 함께 어휘력·문장력 훈련을 결합할 수 있음
- <사용자 발성 피드백>
 - 음절이나 단어에 대한 사용자 발성을 발음기관 애니메이션으로 제시하여 표준발성과 대조 가능
 - 자기발성 문제점 직감적으로 이해하며 훈련 가능 (단, 이 기능은 지인 등 건청인 도우미 필요)

✓ 제품특징

- 말소리가 만들어지는 과정을 3차원 발음기관 애니메이션과 공기흐름을 통해 귀는 물론 눈으로도 확인 가능
- 말소리 높고 낮음 변화를 강세리듬 곡선으로 제시하여 쉽게 습득되지 않는 문장별 리듬감 훈련 지원
- 교육 및 치료 현장 실질적 언어자원으로 언어 체계별 및 오류 유형별 콘텐츠 제공
- 내 목소리에 대한 발음기관 애니메이션을 만들고 성우 표준 발성과 대조 가능
- Motor Theory, McGurk Effect 등 과학적 근거를 토대로 교수, 전문의, 언어치료사 등 전문가들과 함께 제작

✓ 활용방안(기대효과)

- 주기적 언어치료실 방문이 어렵거나 언어치료 도중 중단한 청각·언어 장애인의 수시 훈련 환경 제공
- 언어치료실 방문과 병행하여 언제 어디서나 훈련을 결합함으로써 보다 빠른 언어재활 효과 확보

✓ 사용가능대상

- 청각장애 : 조음장애로 발음훈련이 필요한 청각장애인, 약청 및 부분청능으로 청능 개선이 필요한 청각장애인
- 언어장애 : 발달장애, 뇌병변장애, 다운증후군, 뇌신경장애, 난독증 등으로 조음장애, 음성장애 또는 유창성장애(말더듬장애) 등을 겪고 있는 언어장애인

✓ 사용방법

- (1) 사용전에 훈련하고 싶은 목표 음성 또는 세부장애유형 선정 후 상단 메뉴 중 '조음훈련' 선택
- (2) 음소훈련 하려면 '음소별훈련', 특정 오류에 대해 훈련 하려면 '유형별훈련' 선택
- (3) 목표음소나 오류유형을 지정하고 상단 '훈련요령'을 참조하면서 훈련 용례 선택하여 어휘바구니에 추가
- (4) 하단 '조음훈련시작' 버튼 클릭하면 나타나는 실행버튼으로 발음기관 애니메이션 재생 및 관찰, 실행버튼 주변 버튼들 클릭해보며 기능 확인. 음성파형과 음소·음절도 마우스로 선택하여 부분적으로 실행 가능
- (5) 녹음버튼을 눌러서 발성 및 녹음 해보고 발음기관 애니메이션 생성 (사용설명서 참조하여 세부기능 확인)

✓ 사용 시 유의사항

- 내 목소리 녹음하여 애니메이션 생성하는 과정은 부모나 지인 등 건청인 도우미 필요. 음성인식기가 완벽할 수 없으므로 음성인식 시스템에 건청인이 들은 대로 텍스트 힌트를 입력할 필요가 있기 때문
- 언제 어디서나 훈련할 수 있는 편리성이 제공되나 충동에 취약한 기기이므로 파손에 주의해야 함

✓ 최초출시일 : 2019년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2019년 2월

애니메이션으로 배우는 스마트 한글 단어사전 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 청각·언어장애 아동의 인지발달, 어휘학습, 발음훈련 및 상위언어 훈련을 위해 7,500여 장의 어휘 자료(흑백·컬러 사진, 선화 및 그림)와 1,600여개의 스토리가 있는 애니메이션 동영상 콘텐츠와 음소별 발음 동영상상을 활용하여 청각 및 언어 훈련을 지원하는 태블릿형 학습 제품

개 인 부 담 금 일반 198,000원 / 기초수급대상·차상위계층 99,000원

제 조 원 (주)여우 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배, 우편 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)여우 / 담당자 : 조준성

대구광역시 달서구 진천로 120, 3층 302호 (주)여우

Tel : 053-721-7858 / FAX : 053-721-7859 / www.yeooo.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 703710-01-003186 예금주명 : 주식회사 여우

✓ 제품사양

- 삼성 갤럭시탭A11+(단, 동급 또는 상급사양으로 변경될 수 있음) 태블릿PC / 안드로이드 11 / 11인치 / WUXGA 1920×1200(216ppi) / 16:10 / 멀티터치 / UNISOC Tiger T618 SoC / 램 4GB 내장 64GB / microSD 최대 1TB / WiFi 듀얼밴드 / GPS / 블루투스 v5.0 / 후면 800만 화소 / 전면 500만 화소 / 동영상 촬영 / 스피커 4개 / USB C타입 / 얼굴인식 / 마이크
- 입력 방식: 터치 방식
- OS : 안드로이드 OS
- 용량 : 29MB

✓ 구성품목

- 삼성 갤럭시탭A11+(전용 앱 + 그림, 사진 기본 탑재)
※ 전용 앱 기능과 그림(사진 포함)은 주기적 업데이트
- 사용설명서 및 매뉴얼(동영상과 튜토리얼 방식)으로 기기에 탑재
- 파손방지용 탭 케이스 1개

✓ 주요기능

- ※ 각 음소별 조음 동영상 제공, 각 단어별 애니메이션 스토리 동영상 제공(총 1,600여개)
- 어휘 학습 및 조음·음운 치료를 위해 보고, 듣고, 따라하기를 한 화면에서 바로 수행 가능
- 사진·그림 전환, 카드명 표시 여부 설정, 다양한 보기 모드(8단계) 제공
- 터치 시 단어 및 문장 음성 출력, 애니메이션, 사용자 음성 녹음·재생 기능 지원
- 음소 위치, 음절수 기반의 정교한 조음검색 및 범주키워드 검색 기능 제공
- 목적에 맞는 단어 목록을 저장·불러오기 하여 훈련 계획 및 평가에 활용 가능
- 다양한 단어카드를 선택하여 즉시 인쇄 가능(A4 분할, 카드명 포함/제외 설정)

✓ 제품특징

1. 8단계 탭 보기 기능(다양한 형태로 어휘학습 가능)
2. 프린트 기능(바로 인쇄)
3. 저장하기/불러오기 기능 (언어훈련 사전 계획 및 평가 가능)
4. 단어검색 기능(범주검색, 조음검색, 음성검색, 음소검색)
5. 음성출력 기능(단어, 2어문, 3어문 단위 음성 출력), 사진/녹음 기능
6. 컬러 사진, 흑백사진, 그림, 선화의 4가지 이미지 표현 방식
7. 음소별 조음 위치 및 방법 동영상 보기 기능
8. 각 단어별로 스토리가 있는 애니메이션 동영상 보기 기능으로 재미와 언어훈련 효과 극대화

9. 각 음소별로 조음할 때의 공기 기류와 혀의 위치를 애니메이션 영상으로 표현
10. 목표 단어 테스트 기능(문제풀이)

✓ 활용방안(기대효과)

- 지적장애(인지발달, 어휘학습 및 조음장애 치료가 필요한 아동)
- 발달장애(인지발달, 어휘학습 및 AAC 훈련이 필요한 아동)
- 뇌병변장애(조음장애 치료 또는 AAC 훈련이 필요한 아동, 뇌졸중 환자의 언어재활)
- 언어장애(인지발달, 어휘학습 및 조음장애 치료가 필요한 아동) 기존의 후대가 어렵고 학습에 필요한 단어를 찾거나 분류하는 데 시간이 많이 소요되는 단어 카드의 한계를 보완하여, 단어 검색, 음성 출력, 녹음 기능은 물론 음소별 조음 위치 및 방법 동영상, 문장 및 애니메이션 기반 학습 기능을 통해 보다 직관적이고 효율적인 언어훈련 가능

✓ 사용가능대상

- 언어발달, 조음·음운 발달이 지체된 장애아동, 지적장애, 발달장애, 뇌병변장애, 청각·언어장애

✓ 사용방법

- 1) 초기화면에서 '시작하기' 버튼을 누른 후 검색모드 또는 '불러오기'를 선택
- 2) 단어검색, 범주검색, 조음검색, 조음 위치와 방법, 추천목록 중 원하는 과정을 수행하여 원하는 단어(또는 단어목록) 선택
- 3) 단어(또는 단어목록)를 선택한 후, "GO" 버튼을 눌러 담기 창으로 이동
- 4) 순서 바꾸기, 추가하기, 새로 담기를 통해 선택된 단어목록을 편집하고 "PLAY" 버튼을 눌러 '보기모드'를 이용하여 직접 언어훈련 실시
- 5) 필요에 따라 '인쇄'하거나 '저장'할 수 있음

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 인터넷(Wi-fi) 연결 필수
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 최초출시일 : 2026년 2월 22일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 20일

언어, 인지, 수리력 터치 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제품개요 언어, 지적, 발달장애인을 위한 1언어 2.인지력 3.수리력 향상 프로그램이 화면터치가 가능한 노트북에 설치되어 보급되고 있어 보호자와 치료사 선생님과 같이 학습을 할 수 있음

개인부담금 일반 280,000원 / 기초수급대상·차상위계층 140,000원

제 조 원 (주)핑키밍키/대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배·우편 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)핑키밍키 / 담당자 : 김승철
(153-803) 서울시 금천구 가산디지털 1로 142, 414호 (가산동, 더스카이밸리1차)
Tel : 070-4481-4877 / FAX : 02-814-4840 / www.goodedu.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 014530-02-026091 예금주명 : (주)핑키밍키

✓ 제품사양

- 규격:279.4mmx201.7mmx14.6mm 1.140g
- OS: window 11 PRO(복원솔루션)
- 프로세서: intel N5100, 클럭 최대 2.8hz
- RAM: ddr4 4 GB
- 내장메모리: 256 GB (TF 128G지원)
- 디스플레이 : 11.6인치 IPS패널 / 1920x1080 터치스크린
- 무선통신: 802.11 ac기가무선랜
- 배터리 : 38 WH (리튬이온)
- 카메라 : 2.0M Pixel 전면 카메라
- 스타일러스 펜, 블루투스 5.0 지원

✓ 구성품목

- 노트북, 스타일러스펜, 무선마우스, 노트북 파우치, 매뉴얼 학습서 3종 2권

✓ 주요기능

- 언어치료프로그램은 문장완성하기 활동과 알맞은 설명찾기, 범주어 이해 학습 활동등을 통해 낱말 및 문장의 이해 및 표현 능력을 향상 시킬수 있습니다.
- 언어프로그램은 (명사편) (용언편) (알맞은 설명찾기) (낱말범주화편) (꾸미는말) 등 문장의 길이 및 의미적 난이도에 따라 총 3단계로 구성되어 있고 각단계별 100문항씩 총 1320문항의 학습이 가능합니다
- 인지력 프로그램은 6개의 패키지로 구성되어 있으며 각 패키지는 4-5가지의 인지 재활 및 치료용 게임들로 구성되어 있습니다. 각각의 인지력 향상 게임과 과제들은 사용자가 변경하거나 조정할 수 있는 옵션들이 있어 학습자 또는 피훈련자가 어떤 요구 수준에 있든지 그에 맞춰 훈련 프로그램의 구성을 바꿔 줄 수 있습니다.
- 6개의 영역은 감각 운동 반응 영역, 지각 변별 영역, 선택적 주의집중 영역 주의력 지속영역, 기억영역, 사고력 및 문제해결 기술영역으로 인지 심리학과 신경심리학의 인지과정에 대한 정보처리 이론을 근간으로 구성 되어있으며, 영역별 하위 과제들은 이러한 관점에서 연구 개발된 미국과 유럽의 인지재활 시스템과 인지 게임 등을 참고하여 한국적 문화와 언어에 맞춰 개발 되었습니다.
- 수리력 프로그램은 3단계로 수세기 익히기 기초부터 시작하여 화폐단위 익히기 등 일상생활에 필요한 수와 관련된 기본적인 개념을 학습할수 있는 프로그램으로 구성되어 있습니다.

✓ 제품특징

- 프로그램 3종으로 구성되어 있으면 1종은 인지능력 향상과 재활, 발달장애인을 위한 인지력 향상 프로그램으로 6가지 영역의 인지기능을 습득하거나 증진 시킬수 있도록 개발된 프로그램으로 구성되어 있고, 1종은 언어 발달 지체, 장애아동 및 실어증 환자를 위한 언어 치료 프로그램, 1종은수세기 익히기 기초부터 시작하여 화폐단위 익히기 등 일상생활에 필요한 수와 관련된 기본적인 개념을 학습할수 있는 프로그램으로 구성되어 있음

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어발달 지체·장애 아동 및 실어증 환자를 위한 언어치료프로그램으로 주의집중 장애, 발달장애, 학습장애, 정신지체등 지적기능이 열악한 아동과 노화나 치매등으로 인지 기능에 장애가 있는 사람을 대상으로 인지재활과 교육 및 치료를 가능하도록 효과적이고 편리하게 사용할 수 있는 멀티미디어 기반의 언어치료 및 인지교육의 재활 솔루션과 일상생활에 필요한 수와 관련된 기본개념을 익힐 수 있는 장애인에게 꼭 필요한 제품임

✓ 사용가능대상

- 지적,언어, 발달 장애인의 언어 인지 수리 분야에 학습하고자 하는 장애인

✓ 사용방법

- 기기의 전원을 켜다
- 최초 사용자 사용자의 이름을 등록한다
- 학습 활동주제를 선택한다
- 대상자의 수준에 맞춰 설정 주제활동을 한다
- 활동종료
- 블루투스 마우스, 스위치, 키보드를 이용 터치 인식 가능

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 단지거나 총격 금지

✓ **최초출시일 : 2018년 2월**

✓ **최근 업그레이드 : 2024년 3월**

언어-인지 재활프로그램 랭콕-HS(Home Special) [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 인지 및 언어발달에 필수적인 뇌기능(기억력, 주의집중력, 반응속도, 수리력, 언어력 등)을 효과적으로 증진시킬 수 있는 활동(뇌활성화, 인지)에 일반화 기능(언어)을 결합하여, 삼성 태블릿에 탑재한 가정지도용 언어-인지 통합 중재 프로그램

개 인 부 담 금 일반 264,000원 / 기초수급대상·차상위계층 132,000원

제 조 원 (주)여우 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배, 우편 배송

납 품 기 간 14일

납 품 자 (주)여우 / 담당자 : 조준성

대구광역시 달서구 진천로 120, 3층 302호 (주)여우

Tel : 053-721-7858 / FAX : 053-721-7859 / www.yeooo.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 703710-01-003186 예금주명 : 주식회사 여우

✓ 제품사양

- 삼성 갤럭시탭A11+(단, 동급 또는 상급사양으로 변경될 수 있음)태블릿PC / 안드로이드 11 / 11인치 / WUXGA 1920×1200(216 ppi) / 16:10 / 멀티터치 / UNISOC Tiger T618 SoC / 램 4GB 내장 64GB / microSD 최대 1TB / WiFi 듀얼밴드 / GPS / 블루투스 v5.0 / 후면 800만 화소 / 전면 500만 화소 / 동영상 촬영 / 스피커 4개 / USB C타입 / 얼굴인식 / 마이크
- 입력 방식:터치 방식
- OS : 안드로이드 OS
- 용량 : 417MB

✓ 구성품목

- 삼성 갤럭시탭 A11+(전용 앱 포함)
※ 전용 앱은 업데이트 가능
- 사용설명서 및 매뉴얼(동영상과 튜토리얼 방식으로 기기에 탑재)
- 파손방지용 탭 케이스 1EA

✓ 주요기능

- 장애 아동들이 쉽게 재미있게 접근할 수 있도록 게임 방식으로 고안된 140여 개의 활동 포함
- 140여 개의 활동은 뇌활성화(반응속도, 시각변별, 대상재인, 안구운동, 눈-손 협응, 시각향등성), 인지(기억력, 지남력, 지각력, 주의집중력), 언어(언어력, 문제해결력, 수리력, 감정코칭, 확산적 사고) 영역으로 구성되어 전반적인 뇌기능 증진 가능
- 활동마다 영상을 통한 튜토리얼을 제공하여 대상자가 훈련을 쉽게 이해하고 수행할 수 있음

✓ 제품특징

- 단순한 인지치료 위주의 프로그램이 아닌 언어와 인지 체계가 결합되고 일반화 과정이 포함된 언어-인지 재활치료 프로그램
- 대상자 수준에 따른 단계별 훈련 기능 제공
- 게임 또는 문제풀이 방식으로 설계하여 재미있고 집중력 있는 훈련 가능
- 반응속도, 시각변별, 대상재인, 안구운동, 눈손협응, 시각향등성, 기억력, 지남력, 지각력, 주의집중력, 언어력, 문제해결력, 수리력, 감정코칭, 확산적 사고 등 다양한 영역의 훈련 제공

- 각 활동별 튜토리얼을 통해 대상자의 접근성 향상 및 훈련 방법 안내 제공
- 훈련 결과를 비교·분석할 수 있는 데이터 및 그래프 기반 통계 화면을 제공하여 수행 결과를 객관적이고 체계적으로 관리 가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 지적장애, 발달장애, 뇌병변장애, 언어장애 등 인지 및 언어능력에 어려움이 있는 성장기, 학령기 아동, 청소년 및 성인에게 활용 가능하며, 가정 내 인지-언어 학습 효과 증진 가능
- 발달재활서비스 제공기관에서 사용 중인 랭콕 Pro 버전과 연계하여 가정과 기관 간의 연속적인 훈련이 가능하며, 대상자의 발달 증진 효과를 극대화할 수 있음

✓ 사용가능대상

- 지적장애, 발달장애, 뇌병변장애, 청각-언어장애 아동 및 성인

✓ 사용방법

- 1) 초기화면에서 화면을 터치하여 활동 선택 화면으로 이동
- 2) 네비게이션 기능을 사용하여 뇌활성화, 인지, 언어인지 중 원하는 훈련영역을 선택하고, 세부 영역(3범주 15개 뇌발달 영역)에서 원하는 활동 선택
- 3) 선택한 활동의 미리보기 화면에서 활동 안내 및 기대 효과를 확인한 후, 원하는 난이도를 선택하여 활동으로 이동
- 4) 선택한 활동이 시작되면 안내에 따라 활동을 수행
- 5) 활동 종료 후 통계 화면을 통해 수행 결과 확인

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 인터넷(Wi-fi) 연결 필수
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ **최초출시일 : 2024년 2월 26일**

✓ **최근 업그레이드 : 2026년 1월 13일**

에이드 프로 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 • 언어·청각·발달·뇌병변 장애인을 위한 새로운 언어훈련기기
 • 보호자(선생님)이 없이도 스스로 언어재활훈련이 가능한 DAF (Delayed Auditory Feedback) 기능
 • 장애정도에 따라서 기존의 AAC보다 더 간단하고 체계적인 AAC훈련 가능

개 인 부 담 금 일반 294,000원 / 기초수급대상·차상위계층 147,000원

제 조 원 주식회사 허브티 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 주식회사 허브티 / 담당자 : 조성하
 대전광역시 유성구 문지로 272-16, 107호 (문지동)
 Tel : 1660-1676 / FAX : 0503-8379-2812 / www.hubt.co.kr

개인부담금계좌번호 (하나은행) 661-910013-19104 예금주명 : 주식회사 허브티

✓ 제품사양

- 모델명 : 2026 갤럭시탭 A11 플러스
- 규격 : 168.7 X 257.1 X 6.9mm
- 무게 : 약 480g
- OS : 안드로이드 12.0 이상
- 디스플레이 : 11인치
- 블루투스 헤드셋 규격 : BLUETOOTH V5.0
- 주파수응답율 : 20-20khz
- 에이드프로 어플리케이션 탑재

✓ 구성품목

- 에이드 프로 어플리케이션이 탑재된 태블릿PC 본체, DAF 훈련전용 블루투스 헤드셋, 아답터, 충전선

✓ 주요기능

- 더 업그레이드된 기능으로 DAF (Delayed Auditory Feedback) 언어훈련기능을 통하여 본인의 목소리를 실시간으로 피드백하며 언어훈련 가능
- 디테일한 훈련통계를 제공함으로써 훈련량을 피드백 할 수 있음
- 사용자의 장애유형, 장애정도에 맞춰 최적화된 AAC 사용훈련 가능
- 직관적인 색상과 직접촬영한 이미지까지 편집가능하여 장애인에 맞춤훈련 가능

✓ 제품특징

- 기존 언어훈련S/W 또는 기기와는 다른방식의 언어훈련기기로서 다양한 장애유형과 개인의 장애정도에 맞춘 언어훈련가능
- DAF전용 헤드셋을 제공하여 장애인 스스로 언어훈련가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어·청각·발달·뇌병변 장애인의 장애정도에 따른 최적화된 훈련프로그램과 기기로서 언어 및 의사소통능력의 향상

✓ 사용가능대상

- 언어장애인(중증, 경증), 청각·언어 중복지체인, 발달·뇌병변 장애인, 청각장애인(중증, 경증), 농아인

✓ 사용방법

- ① 에이드프로 어플리케이션이 탑재된 태블릿PC의 전원을 켜다
- ② DAF훈련시 블루투스 헤드셋을 연결하고 DAF모드를 실행하여 개인의 장애정도에 맞춰 레벨을 조절하여 훈련한다
- ③ AAC훈련시 개인의 장애정도에 맞춰 색상이나 이미지, 녹음시간 등을 조절하여 훈련한다

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ **최초출시일 : 2023년 1월 1일**

✓ **최근 업그레이드 : 2026년 3월 1일**

에이드 프로 대화면 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



- 제품개요**
- 언어·청각·발달·뇌병변 장애인을 위한 새로운 언어훈련기기
 - 보호자(선생님)이 없이도 스스로 언어재활훈련이 가능한 DAF (Delayed Auditory Feedback) 기능
 - 장애정도에 따라서 기존의 AAC보다 더 간단하고 체계적인 AAC훈련 가능

개인부담금 일반 296,000원 / 기초수급대상·차상위계층 148,000원

제 조 원 주식회사 허브티 / 대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배

납 품 기 간 14일

납 품 자 주식회사 허브티 / 담당자 : 조성하
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 107호 (문지동)
Tel : 1660-1676 / FAX : 0503-8379-2812 / www.hubt.co.kr

개인부담금계좌번호 (하나은행) 661-910013-19104 예금주명 : 주식회사 허브티

✓ 제품사양

- 디바이스 : 32인치 스탠드일체형 태블릿PC
- 규격 : 1,144 x 734 x 430mm
- 무게 : 약 22kg
- OS : 안드로이드 12.0 이상
- 디스플레이 : 32인치
- 블루투스 헤드셋 규격 : BLUETOOTH V5.0
- 주파수응답율 : 20~20khz
- 에이드프로 어플리케이션 탑재

✓ 구성품목

- 에이드 프로 어플리케이션이 탑재된 스탠드 일체형 태블릿PC 본체, DAF 훈련전용 블루투스 헤드셋, 아답터, 충전선

✓ 주요기능

- 32인치 대화면 디바이스로 시안성, 사용편리성 강화
- 더 업그레이드된 기능으로 DAF (Delayed Auditory Feedback) 언어훈련기능을 통하여 본인의 목소리를 실시간으로 피드백하며 언어훈련 가능
- 디테일한 훈련통계를 제공함으로써 훈련량을 피드백 할 수 있음
- 사용자의 장애유형, 장애정도에 맞춰 최적화된 AAC 사용훈련 가능

✓ 제품특징

- 32인치 대화면 디바이스와 스탠드 및 배터리 일체형으로 사용 편리성 강화
- 기존 언어훈련S/W 또는 기기와는 다른방식의 언어훈련기기로서 다양한 장애유형과 개인의 장애정도에 맞춘 언어훈련가능
- DAF전용 헤드셋을 제공하여 장애인 스스로 언어훈련가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어·청각·발달·뇌병변 장애인의 장애정도에 따른 최적화된 훈련프로그램과 기기로서 언어 및 의사소통능력의 향상

✓ 사용가능대상

- 언어장애인(중증, 경증), 청각·언어 중복장애인, 발달·뇌병변 장애인, 청각장애인(중증, 경증), 농아인

✓ 사용방법

- ① 에이드프로 어플리케이션이 탑재된 태블릿PC의 전원을 켜다
- ② DAF훈련시 블루투스 헤드셋을 연결하고 DAF모드를 실행하여 개인의 장애정도에 맞춰 레벨을 조절하여 훈련한다
- ③ AAC훈련시 개인의 장애정도에 맞춰 색상이나 이미지, 녹음시간 등을 조절하여 훈련한다

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ **최초출시일** : 2026년 1월 1일

✓ **최근 업그레이드** : 2026년 3월 1일

에이드 플러스 AI [청각/언어장애 유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요

- 언어·청각·발달·뇌병변 장애인을 위한 새로운 언어훈련기기와 온라인 문자통역 보조기기의 결합
- 보호자(선생님)이 없이도 스스로 언어재활훈련이 가능한 DAF (Delayed Auditory Feedback) 기능
- 장애정도에 따라서 기존의 AAC보다 더 간단하고 체계적인 AAC훈련 가능

개 인 부 담 금 일반 600,000원 / 기초수급대상·차상위계층 200,000원

제 조 원 주식회사 허브티 / 대한민국 **품질보증기간** 24개월

납 품 방 법 택배 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 주식회사 허브티 / 담당자 : 조성하
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 107호 (문지동)
Tel : 1660-1676 / FAX : 0503-8379-2812 / www.hubt.co.kr

개인부담금계좌번호 (하나은행) 661-910013-19104 예금주명 : 주식회사 허브티

✓ 제품사양

- 노트북모델명 : 2026 갤럭시북
- 규격 : 356.6 X 229.1 X 15.4mm
- 무게 : 약 1.5Kg
- 자막처리규격 : 94 x 52 x 22 (mm)
- 자막처리무게 : 약 100g
- OS : Windows 11
- 디스플레이 : 15.6인치
- 블루투스 헤드셋 규격 : BLUETOOTH V5.0
- 주파수응답율 : 20-20khz
- 에이드 플러스 AI 어플리케이션 탑재

✓ 구성품목

- 에이드 플러스 AI 어플리케이션이 탑재된 노트북 본체
- DAF 훈련전용 블루투스 헤드셋
- 인공지능 실시간 자막처리기 본체
- 아답터, 충전선, 전용파우치

✓ 주요기능

- DAF (Delayed Auditory Feedback) 언어훈련기능을 통하여 본인의 목소리를 실시간으로 피드백하며 언어훈련 가능
- 사용자의 장애유형, 장애정도에 맞춰 최적화된 AAC 사용훈련 가능
- 직관적인 색상과 직접촬영한 이미지까지 편집가능하여 장애인에 맞춤형 훈련 가능
- 비대면·온라인상황에서 인공지능 실시간 자막 서비스 제공하여 멀티미디어, 온라인 정보접근성도 해결가능

✓ 제품특징

- 기존 언어훈련S/W 또는 기기와는 다른방식의 언어훈련기기로써 다양한 장애유형과 개인의 장애정도에 맞춘 언어훈련가능
- DAF전용 헤드셋을 제공하며, 인공지능 실시간 자막처리기를 통하여 멀티미디어, 온라인 정보접근성도 해결가능

✓ 활용방안(기대효과)

- 언어·청각·발달·뇌병변 장애인의 장애정도에 따른 최적화된 훈련프로그램과 기기로서 언어 및 의사소통능력의 향상

✓ 사용가능대상

- 언어장애인(중증, 경증), 청각·언어 중복장애인, 발달·뇌병변 장애인, 청각장애인(중증, 경증), 농아인

✓ 사용방법

- ① 에이드 플러스 AI 어플리케이션이 탑재된 노트북의 전원을 켜다
- ② DAF훈련시 블루투스 헤드셋을 연결하고 DAF모드를 실행하여 개인의 장애정도에 맞춰 레벨을 조절하여 훈련한다
- ③ AAC훈련시 개인의 장애정도에 맞춰 색상이나 이미지, 녹음시간 등을 조절하여 훈련한다
- ④ 비대면상황에서 사용시에는 인공지능 실시간 자막처리기를 USB로 연결한다
- ⑤ 온라인으로 서비스 받을 어플 (유튜브, 줌, 등)과 전용 어플리케이션을 실행하여 실시간 문자통역서비스를 제공받는다

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2023년 1월 1일

✓ 최근 업그레이드 : 2026년 3월 1일

한글바르미 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 한글을 알지 못하는 장애인이 자음, 모음부터 낱말 활용까지 익힐수 있도록 해주고 발음에 어려움이 있는 장애인에게 연습 및 훈련할 수 있도록 도움을 주는 프로그램

개 인 부 담 금 일반 272,000원 / 기초수급대상·차상위계층 136,000원

제 조 원 (주)다함께하는/대한민국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편 배송

납 품 기 간 7일

납 품 자 (주)다함께하는 / 담당자 : 이승안

(10545) 경기도 고양시 덕양구 향동로 218 현대 테라타워 DMC 씨동 1501호
Tel : 02-334-3303 / FAX : 02-710-5595

개인부담금계좌번호 (우리은행) 1005-804-691838 예금주명 : (주)다함께하는

✓ 제품사양

- 규격: 279.43(가로) x 201.7(세로) x 14.6(두께)
- 11.6인치 터치스크린 / 무게 1.4Kg
- OS: Window 11
- CPU: 셀로론 N5100 4core 2.8GHZ
- 메모리: 4GB DDR4 / 해상도: 1920 x 1200
- HDD: 256 GB / 카메라: 1MP / 5.1MP

토대로 언어이해나 표현 문자 학습까지 가능한 응용도가 높은 프로그램입니다

✓ 구성품목

- 한글바르미SW, 터치노트북, 마우스, 케이스, 스타일러스펜, C to usb허브, 사용설명서

✓ 활용방안(기대효과)

- 한글을 알지 못하는 장애인, 언어발달이 늦은 장애인의 한글 학습 및 발음 연습을 통해 언어능력, 인지능력을 향상시키는데 도움을 주고자 한다
- 게임 형식과 애니메이션을 활용해 지루하지 않게 자모음부터 낱말을 익힐수 있게 해주고 상황에 맞는 말을 활용할 수 있게 해주는 프로그램입니다
- 한글농장을 통하여 습득한 한글을 발음훈련 프로그램을 이용하여 단어의 실물사진과 녹음된 발음을 통해 단어들의 개념이해와 읽기 학습에도 활용할 수 있음

✓ 주요기능

- 자음과 모음의 형태와 이름을 학습하고 자음과 모음이 결합하여 글자가 만들어 지는 원리를 학습할 수 있는 S/W입니다. 글자의 세부적인 모양과 구별하기 힘든 장애인에게 자음기나 모음과 같이 추상적인 기호를 쉽게 이해하도록 돕기 위해 여러가지 낱말을 그림과 글자를 포함한 다양한 상호작용 활동을 통해 효과적으로 제시하여 글자의 조합원리를 익힐 수 있도록 구성하였습니다
- 학습자별로 학습할 발음에 해당하는 단어의 목록을 추가, 수정, 삭제하는 기능이 있어 개인별 맞춤 교육이 가능한 제품입니다. 기본 500개의 단어에 해당하는 그림과 실물사진을 수록하였고 추가할 수 있는 기능이 있어 언어 이해나 표현, 문자학습까지 가능한 프로그램입니다. 목표음에 따른 문장어 244개를 추가하여 발음 훈련 시 사용할 수 있도록 구성하였습니다. 본제품은 한국 언어병리학회와 음운 발달 단계를 근거로 발음할 단어를 분류하고 체계화하여 정리하였으므로 장애인의 발달 수준에 맞추어 목표음을 습득 시키는데 활용하기 편리합니다

✓ 사용가능대상

- 한글을 알지 못하는 장애인 및 언어발달이 늦고 조음장애가 있는 장애인
- 의사소통이 원활치 않아서 언어훈련이 필요한 장애인

✓ 사용방법

- 기기의 전원을 켜다
- 최초 사용자 사용자의 프로파일을 등록한다
- 활동주제를 선택한다
- 대상자의 수준에 맞춰 설정
- 주제활동
- 활동종료
- 터치 인식 가능

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 제품특징

- 프로그램 3종으로 구성되어 있으며,
1종은 한글 자,모음 학습을 여러 가지 게임형식으로 읽고 쓰고 익히며,
1종은 전 단계에서 익힌 것을 토대로 기본적인 낱말을 여러 형식으로 익히게하고 있습니다,
1종은 한글 익힘을 토대로 발음 연습과 상황에 맞는 사진을

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지

✓ 최초출시일 : 2024년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2024년 2월

한글잼잼 [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 한글잼잼은 기존 정형화된 언어학습 방식에서 탈피하여, 읽기, 쓰기에 어려움이 있는 장애인에게 범용적으로 적용가능 지적, 자폐, 청각, 난독증이 있는 장애인이 흥미를 유발할수 있도록 게이미피케이션(Gamification) 방식을 적용하였습니다. 한글잼잼은 게이미피케이션(Gamification)방식을 통해 장애 아동이 더욱 체계적으로 읽고 쓰는 기술을 습득하여 학교 및 사회 적응에 필요한 필수적인 읽기 능력을 향상시키는데 도움이 되는 제품입니다

개 인 부 담 금 일반 192,000원 / 기초수급대상·차상위계층 96,000원

제 조 원 (주)리드스피커코리아 / 대한한국 **품질보증기간** 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배/우편 **납 품 기 간** 14일

납 품 자 (주)리드스피커코리아 / 담당자 : 윤여훈 책임연구원(010-6796-1232)
서울특별시 성동구 아차산로 153 9층 (성수동2가 예림출판문화센터)
Tel : 02-3016-8520 / FAX : 02-3016-8501 / www.mytalkie.co.kr

개인부담금계좌번호 (우체국) 011973-02-235479 **예금주명** : (주)리드스피커코리아

✓ 제품사양

- 삼성 갤럭시탭A 11인치
- 크기(HxWxD) : 168.7X257.1X6.9 (mm)
- 무게 : 477g
- 디스플레이 : 278.2mm(1920X1200)
- OS : 안드로이드 16 baclava
- 저장공간 : 128GB
- 배터리 7,040mAh
- 카메라 : 8MP/5MP
- Main Memory : 6GB
- CPU : 미디어텍 Dimensity 7300
- 사운드 : 내장 스테리오피커, 내장마이크
- 전원 : DC 5.0V 1.2A
- 한글잼잼 소프트웨어 버전 : 1.0

- 게이미피케이션(Gamification)을 적용한 읽기, 쓰기 훈련 어플리케이션.
- AAC 심벌을 이용한 컨텐트 개발로, AAC와의 연계성 상승.
- TTS(Text to speech) 성우 음성을 사용하여, 향후 컨텐트 확장이 용이.

✓ 활용방안(기대효과)

- 읽기와 쓰기 능력은 학령기부터 성인기에 이르기까지 필수적인 기술이므로, 이를 단계적이고 체계적으로 학습하는 것은 매우 중요함. 특히, 기존의 교육자료가 장애인의 흥미를 유발하고 학습을 지속하게 하는데 제한적이었기 때문에, 앱 기반 읽기 학습은 장애 아동의 읽기 능력 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 생각됨. 이를 통해서, 장애 아동의 학교 및 지역사회에서 타인과의 의사소통 및 다양한 활동의 참여를 증진시키는 기회를 제공하여 삶의 질이 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨.

✓ 구성품목

- 본체 1대(한글잼잼, 소프트웨어 설치됨)
- 충전 케이블 1개
- 온라인 사용 설명서
- 케이스1개, 전면 보호 필름1장, 터치펜1개

✓ 사용가능대상

- 읽기와 쓰기에 어려움을 지닌 장애인에게 범용적으로 적용이 가능하며, 전형적으로 지적장애, 자폐스펙트럼장애, 청각장애, 난독증 등을 지닌 장애인에게 적용이 가능함.
- 지적장애, 자폐스펙트럼장애 : 느린 학습 속도로 읽기 및 쓰기 학습에 무력감을 느낄 수 있으므로, 게임적 요소가 반영된 앱을 통해서 지속적인 학습 참여가 가능함.
- 청각장애, 난독증 : 개발된 앱을 통해서 철자와 소리 간의 관련성을 익히게 함으로써 단어 및 문장을 유창하게 읽거나 정확하게 쓰도록 할 수 있음.

✓ 주요기능

- 신청 대상 장애유형 : 지적, 뇌병변, 청각, 언어, 자폐성
- 언어병리학 전문가들이 인정한 읽기 7단계, 쓰기 5단계의 체계적인 학습 단계 설정
- 총 12단계의 게임으로 구현되어 있으며, 단계에 따라 사용자가 아동의 성취감을 복돋기 위하여 쉬운 모드와 어려운 모드로 자유롭게 전환 가능.
- 교육 효과의 극대화를 위한, 각 단계별 어휘 Pool 구축
- 어휘 Pool 628개가 추가되어 총 1466개의 학습 단계별 어휘 Pool을 선별 개발하여 학습효과를 증대
- 게이미피케이션 기법 활용으로 지루하지 않고 재미있게 학습 가능.
- 개발된 교육 콘텐츠에 게임 요소가 결합된 교육 효과가 읽기부진 아동을 대상으로 한 연구(장예영, 2018)를 통해서 검증

✓ 사용방법

- ① 제공된 단말기를 켜다.
- ② 설치된 한글잼잼 프로그램을 터치하여 선택한다.
- ③ 소프트웨어 상세 실행 내용은 사용자 매뉴얼에 기술됨

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 해당 없음

✓ 최초출시일 : 2020년 3월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 7월

✓ 제품특징

- 언어병리학 전문가들이 읽기와 쓰기 발달 단계를 고려하여 콘텐츠 구성.
- 게이미피케이션 기반의 교육 프로그램을 실현하여, 가정과 교육 현장에서 임상 실험으로 효과를 검증함.

한글짱뱀(SMT2.01.190) [청각/언어장애유형 | 언어훈련S/W]



제 품 개 요 청각·언어 장애인의 한글, 어휘, 문장 습득을 지원하는 어플이 탑재된 탭으로서,
 - 조음장애, 음성장애 등 다양한 언어장애 유형에 맞춘 맞춤형 발음 훈련 지원
 - 청각장애 아동은 발음, 리듬감, 단어 및 문장 습득을 위한 소리 연계 훈련 지원
 - 삽화, 사진, 애니메이션을 활용한 시청각 콘텐츠로 단어·문장 의미 이해 지원

개 인 부 담 금 일반 298,000원 / 기초수급대상·차상위계층 149,000원

제 조 원 (주)하이클론 / 한국

품질보증기간 24개월

납 품 방 법 택배/우편

납 품 기 간 15일

납 품 자 (주)하이클론 / 담당자 : 박봉래(010-5201-6899)

(05022) 서울시 광진구 광나루로 474, 키움관 501

Tel : 02-702-7567 / FAX : 02-6937-1881 / www.speechmirror.com

개인부담금계좌번호 (우체국) 100-0002-47309 예금주명 : 주식회사 하이클론

✓ 제품사양

- 규격: 257(가로) x 168(세로) x 7(높이)
- 11인치 터치스크린
- OS: 안드로이드 13 / CPU: 2.2 GHz, 1.8GHz Octa-Core
- 메모리: 4GB / 해상도: 1920 x 1200
- HDD: 64GB 이상 / 카메라: 5MP / 8MP

✓ 구성품목

- 탭 본체 1기 (충전기 1기) / 키보드 1기

✓ 주요기능

- 글자 습득: 소리 글자인 한글 자소 및 음절을 발음기관 애니메이션을 통해 글자의 소리원리와 함께 습득. 또한 직접 쓰면서 및 키보드로 입력하면서 체험적으로 습득
- 어휘력 증진: 어휘들을 삽화와 더불어 사진을 통해 의미를 명확히 이해하며 발음기관 애니메이션과 함께 습득. 또한 빈칸 채우기 등을 통해 정확한 철자와 함께 습득
- 문장력 증진: 문장들을 삽화와 더불어 상황 애니메이션을 통해 명확히 이해하며 습득. 또한 공란 채우기 문제풀이 등을 통해 효과적으로 문법과 함께 문장 원리 습득
- 조음능력개선: 입안에서 조음이 이뤄지는 과정을 3차원 발음기관 애니메이션을 통해 직감적으로 이해하고 효과적으로 훈련할 수 있음
- 청능개선: 언어중추 동일영역에서 조음과 청취를 관할함에 따라 청취력 훈련을 조음원리와 연동하여 훈련하면 효과적으로 청취력을 증진시킬 수 있음
- 음성장애극복: 성우의 표준발성 특히 느려진 발성을 기준으로 천천히 조음발성 훈련을 할 수 있어 극단적 발성오류를 효과적으로 극복할 수 있음
- 유창성장애극복: 유창성 장애 극복의 핵심은 천천히 조음을 시작하는 것임으로 성우의 느려진 발성을 기준으로 대조해보며 효과적으로 훈련 가능
- 경제적 부담 등으로 언어치료실 치료를 도중에 또는 일반화 전(몸에 배기 전에 중단하였을 때 훈련효과가 몸에 밸 수 있도록 가정에서 지속 훈련 지원

✓ 제품특징

- 말소리 과정을 3차원 얼굴 측면면 입술, 혀 등 발음기관 애니메이션과 공기흐름으로 제시
- 글자와 소리를 직감적으로 연관지어 훈련할 수 있도록 자소를 필기하면 발음애니 제시. 낱글자부터 단어까지 단계별로 훈련할 수 있도록 지원. 단어의 경우 연상 이미지도 함께 제공
- 그림 단어 퀴즈 형태로 풀어가며 어휘 훈련. 정답시 해당 단어의 다른 이미지 또는 발음기관 애니메이션 제시하여 실용적 어휘능력 지원. 163분류, 9백여 어휘로 약 8천여 어휘 퀴즈 제공

- 그림 문장 퀴즈 형태로 풀어가며 어휘 훈련. 정답일 경우 해당 문장을 표현하는 상황 애니메이션을 제시하여 재미와 체감적 훈련 지원. 108분류, 6백여 문장으로 약 3천여 문장 퀴즈 제공
- 제시된 소리 또는 그림에 대응되는 단어/문장의 부분 또는 전체를 입력하며 훈련. 선행단계에서 훈련된 내용으로 다음 단계에서 다시 훈련함으로써 유기적 및 반복적 훈련 지원
- Motor Theory, McGurk Effect 등 인지/뇌공학 근거. 교수, 전문가, 치료사 등 전문가 함께 제작
- 언어장애에도 입술처럼 입안 혀를 볼 수 있으면 자음 발성 개선에 효과적이며, 구강 내 시각정보 확대는 청능 개선에도 효과적

✓ 활용방안(기대효과)

- 주기적 언어치료실 방문이 어렵거나 언어치료 도중 중단한 청각·언어 장애인의 수시 훈련 환경 제공
- 언어치료실 방문과 병행하여 언제 어디서나 훈련을 겸함으로써 보다 빠른 언어재활 효과 확보

✓ 사용가능대상

- 청각장애: 조음장애로 발음훈련이 필요한 청각장애인, 약청 및 부분청능으로 청능 개선이 필요한 청각장애인
- 언어장애: 발달, 뇌병변, 다언중후군, 뇌신경, 난독증 장애 등으로 조음, 음성 또는 말더듬 장애인

✓ 사용방법

- (1) 메인 메뉴에서 제시되는 글자소리, 어휘소리, 문장소리 훈련
- (2) 글자소리에서 직접 글자를 쓰면서 발음과 함께 글자도 훈련
- (3) 어휘소리에서 제시되는 그림에 맞는 단어 찾기, 단어에 맞는 그림 찾기, 그림과 단어 짝짓기 등 훈련
- (4) 문장소리에서 제시되는 그림에 맞는 문장 찾기, 문장에 맞는 그림 찾기 등 훈련

✓ 최소PC요구사항

- 해당사항없음

✓ 사용 시 유의사항

- 언제 어디서나 훈련할 수 있는 편리성이 제공되나 충동에 취약한 기기이므로 파손에 주의해야 함

✓ 최초출시일 : 2025년 2월

✓ 최근 업그레이드 : 2025년 2월

액자형 스마트 히어링루프 [청각/언어장애유형 | 기타]



제 품 개 요 공간의 이동이 자유로운 액자형의 스마트 히어링루프. 자기장 + 블루투스(LE Audio Broadcasting) 동시 송출 기능의 하이브리드 청각 보조 시스템. 가정에서 조용하게 액자형의 히어링루프를 통해 TV시청이나 컴퓨터등의 오디오를 청취할 수 있고, 학교에서 수업시에도 선생님의 목소리를 무선으로 청취 할 수 있음. 기존의 T-mode 보청기기 이외에도 신기술의 LE Audio 기능이 있는 보청기나 인공와우와도 호환되는 미래 차세대 기술 적용.

개 인 부 담 금 일반 600,000원 / 기초수급대상·차상위계층 200,000원

제 조 원 (주)건용아이비씨 / 한국

품질보증기간 2027년 12월 31일

납 품 방 법 택배 / 방문 설치

납 품 기 간 21일

납 품 자 (주)건용아이비씨 / 담당자 : 양태용(010-5470-5860)
서울 금천구 범안로 1130. 디지털엠파이어 1210호
Tel : 02-563-5260 / FAX : 02-561-5928

개인부담금계좌번호 (우체국) 014530-02-021579 예금주명 : (주)건용아이비씨

✓ 제품사양

- 크기: 450 X 350 X 45mm
- 무게: 3kg(스탠드형 브라켓 제외 Net 무게)
- 재질: PP & 아크릴 & 알미늄 plate
- 버전: 2026년 최신 Firmware 탑재, Auracast 지원
- 이동형 스탠드 브라켓

- 액자형 스마트 히어링루프는 주변 반경 약 2미터 면적의 히어링루프 Zone을 형성하므로 Zone 안에서는 여러사람이 동시에 자기장 무선 청취 기능을 함께 사용할 수 있다.
- 새로운 LE Audio 블루투스 기능을 가진 오라캐스트 기능의 모든 보청기나 인공와우는 제품과 연동하여 제품에서 송출하는 블루투스 오디오 Broadcasting을 최대 30미터 범위내에서 사용자 수 관계없이 동시에 청취가 가능하다.
- 제품의 전면 투명아크릴판은 개폐가 가능하여 사용자가 좋아하는 그림등 교체가 가능하다.

✓ 구성품목

- 액자형 스마트 히어링루프 본체 1대
- 스탠드형 거치대 1대
- 전원 케이블 및 오디오 연결 케이블 1개
- 사용설명서, 보증서 1부

✓ 사용가능대상

- 모든 청각 장애인

✓ 주요기능

- 오디오 자기장 송출 기능
- LE Audio Broadcasting 기능
- 액자형의 거치형 구조
- 외부 음원 연결 기능
- 볼륨조절기능
- Auracast 기능의 보청기, 인공와우 호환
- 이동형 스탠드 적용

✓ 사용방법

- ① 제품의 전원을 연결한 후 제품의 전원 스위치를 켜다.
- ② 오디오 소스를 연결한다.
- 유선 연결시 오디오케이블을 오디오장치와 연결한다.
- 무선 송/수신기 사용시에는 무선송수신기를 오디오 장치에 연결하거나 선생님등 말하는 사람이 착용한다. 그리고 수신기를 본체의 Audio in 단자에 연결한다.
- ③ 본체를 사용자 주변 12미터 이내에 위치시킨다.
- ④ 제품의 볼륨 조절 스위치를 조절하여 원하는 음량으로 청취한다.
- ⑤ 사용 후 제품의 전원과 무선 송수신기 전원을 끈다.

✓ 제품특징

- 기존의 루프케이블 매립형을 루프케이블 내장 일체형의 액자형으로 설치가 쉽고 이동이 자유로와 짐.
- 자기장 오디오 송출 히어링루프 기능에 차세대 기술인 LE Audio Bluetooth Audio Broadcasting 기능으로 차세대 보청기기 기술진보에 대응
- 오디오 유/무선 연결이 가능하여 장소에 구애받지 않는 사용성
- 이동형 스탠드 거치대를 통한 이동의 자유로움

✓ 최소PC요구사항

- 해당 없음

✓ 사용 시 유의사항

- 던지거나 충격 금지
- 전용 전원 케이블 사용
- 임의 개조, 분리, 수리 금지

✓ 활용방안(기대효과)

- 가정에서 TV 시청, 라디오 청취, 컴퓨터 사용시 오디오 청취시 소리를 크게하지 않고 조용하게 사용자만 무선 청취할 수 있음.
- 학교, 직장, 교육장등에서 주변의 소음 및 음원과의 거리등과 관계없이 소리정보를 명료하게 청취할 수 있다.

✓ **최초출시일 : 2026년 3월 13일**

✓ **최근 업그레이드 : 2026년 3월 13일**



107

107 손말이음센터
https://107.relaycah.or.kr

NIA 한국지능정보사회진흥원

청각·언어 장애인 전화 통역 서비스

손말이음센터 통신중계서비스

통신중계서비스는 전화이용이 어려운 청각·언어장애인이 전화, 인터넷을 통해 비장애인 또는 다른 장애인과 의사소통할 수 있도록 지원하는 실시간 영상(수어)/문자 중계서비스입니다.

손말이음센터를 통해 긴급신고, 구직, 회사업무, 가족·친구, 쇼핑, 병원, 관공서, 주문, 배달 등 일상생활에 필요한 서비스를 365일 24시간 이용할 수 있습니다.



통신중계서비스 이용방법



청각·언어장애인



통신중계사



모든 국민
장애인·비장애인

107번으로 전화가 오면 꼭! 받아주세요!

홈페이지
PC·모바일

국번없이 107
영상전화·SMS 문자

카카오톡
손말이음센터 채널

손말이음센터

국번없이 107
일반전화·휴대전화

홈페이지



카카오톡 채널



손말이음센터 이용채널

- 국번없이 107 + 영상통화 / 107 + 문자(SMS)
- PC, 스마트폰 : 인터넷 주소창에 107.kr 접속 후 회원가입
- 카카오톡 손말이음센터 채널 친구추가
- 비장애인은 국번없이 107 + 음성전화

국번없이 107 홈페이지 107.kr 손말이음센터

2026 정보통신보조기기 보급 활성화 사업

정보통신보조기기가
여러분의
편안하고 스마트한
생활을 지원합니다.



NIA 한국지능정보사회진흥원 www.nia.or.kr

대 구 본 원 : 41068 대구광역시 동구 첨단로 53
서울사무소 : 04520 서울특별시 중구 청계천로 14